

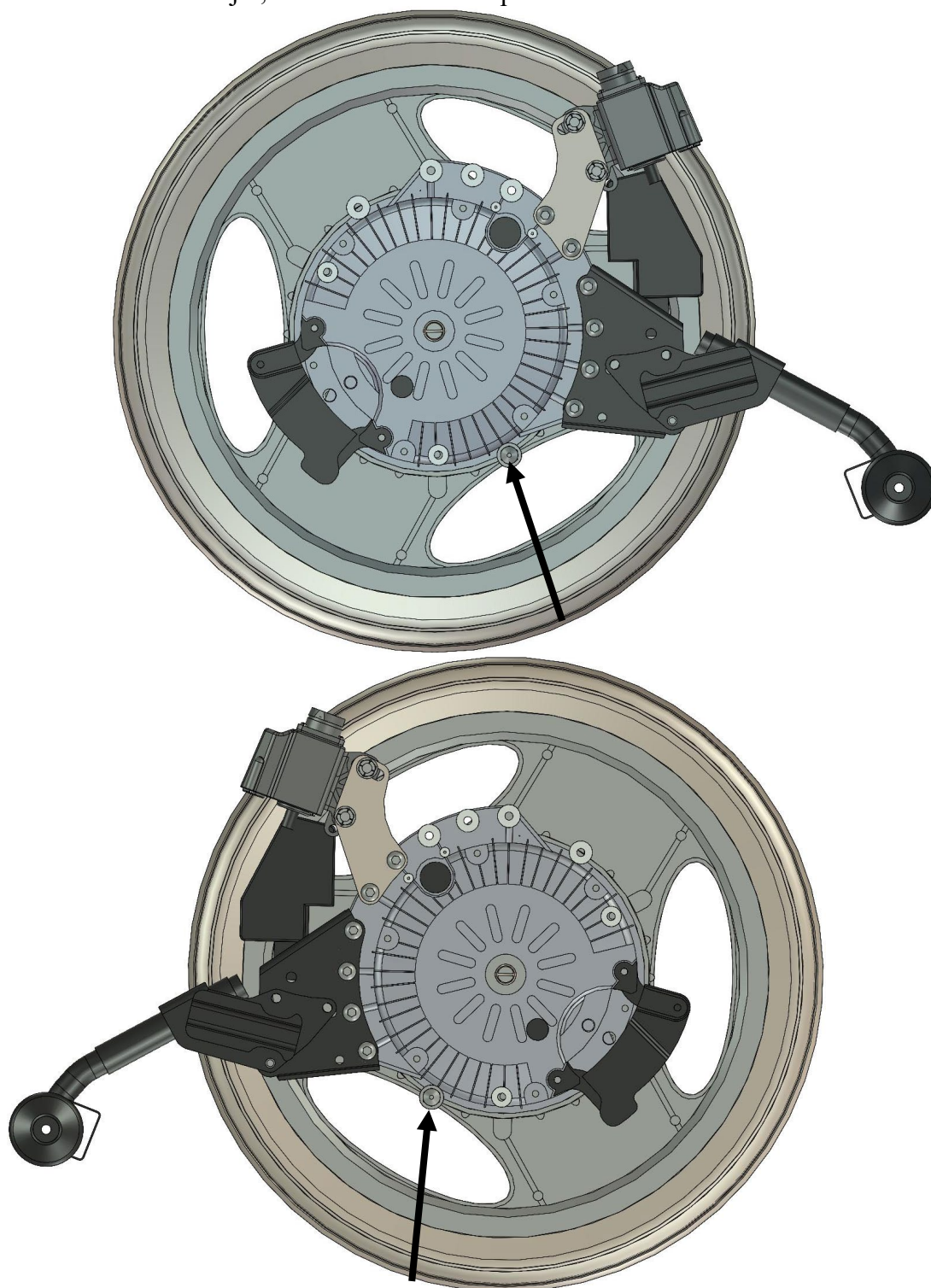


Monteringsanvisning för HD 16" Balance med e-drive 16" MED3072

1. Demontera hjul, navhus och bromsar på båda sidorna.

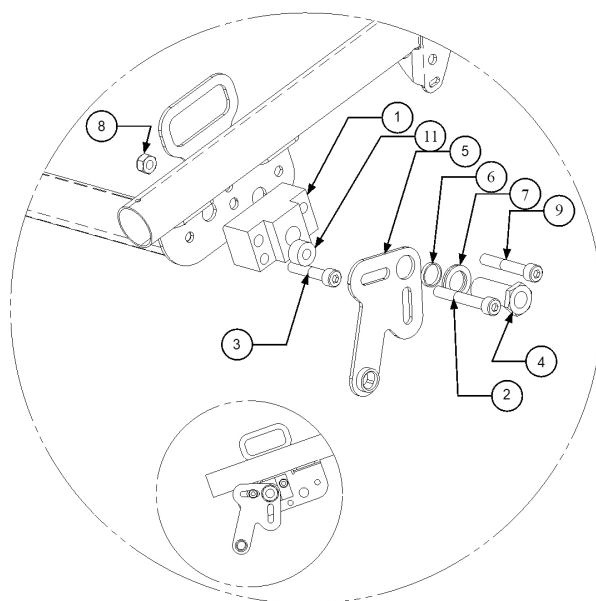

2. Kontrollera att stopp pinnen sitter enligt bilderna ovan.

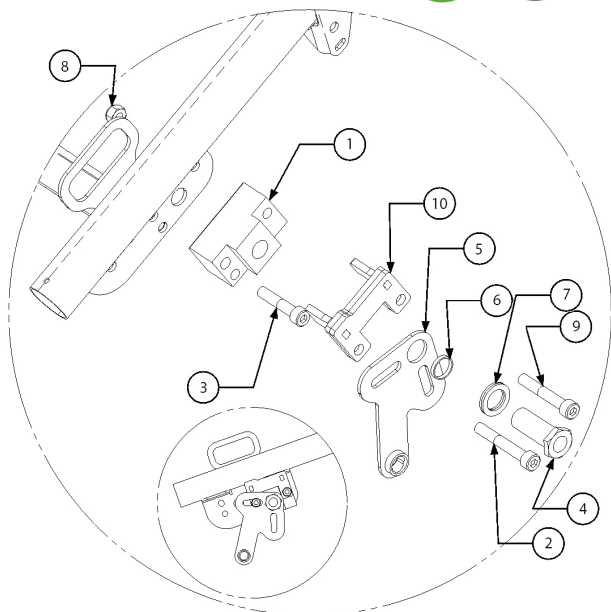

3. Montera nu fästet se bilderna ovan som visar monteringen av fästet på höger sida.

4. För monteringen så skall följande ingå.


Placering	Detalj Nummer	Antal	Beskrivning
1	MED3072-01	1	Navhylsehus Höger
2	XSM8X60	1	Skruv M8 x 60
3	XSM8X50	1	Skruv M8 x 50
4	HW069	1	Navhylsa M16x1/12,7
5	MED2000	1	Fäste
6	100 400 017	1	Distans
7	405239	1	Nordlock Bricka M16
8	XSM8ML	1	Låsmutter M8
9	XSM8X50	1	Skruv M8 x 50
10	MED3072-05	1	Höger förstärknings platta
11	100 400 027	1	Distans

OBS! För Vänstersida ingår MED3072-02 och MED3072-04


5. Montera nu den rygghängda batteriväskan på baksidan av ryggstödet.

Montering av Joystick med Swing-Away MED1419

6. Montera nu joysticken på valfri sida, se bilder nedan för montering på högersida.

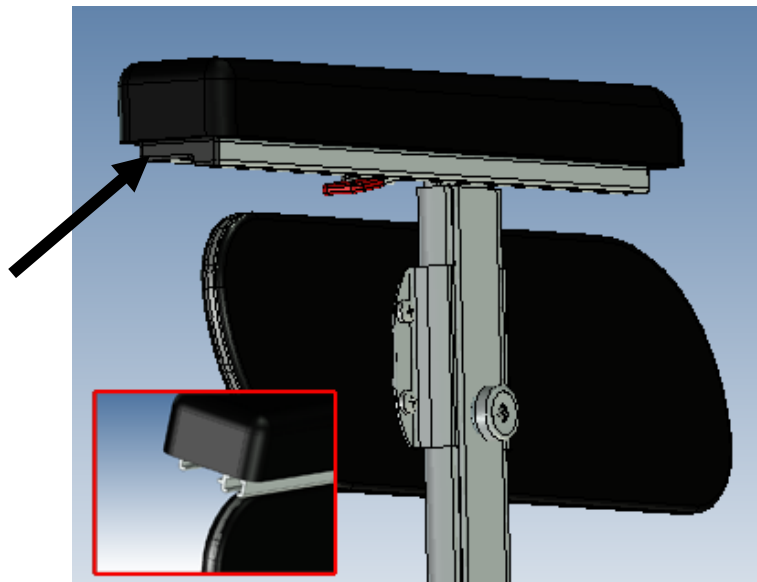


Demontera täcklocket.

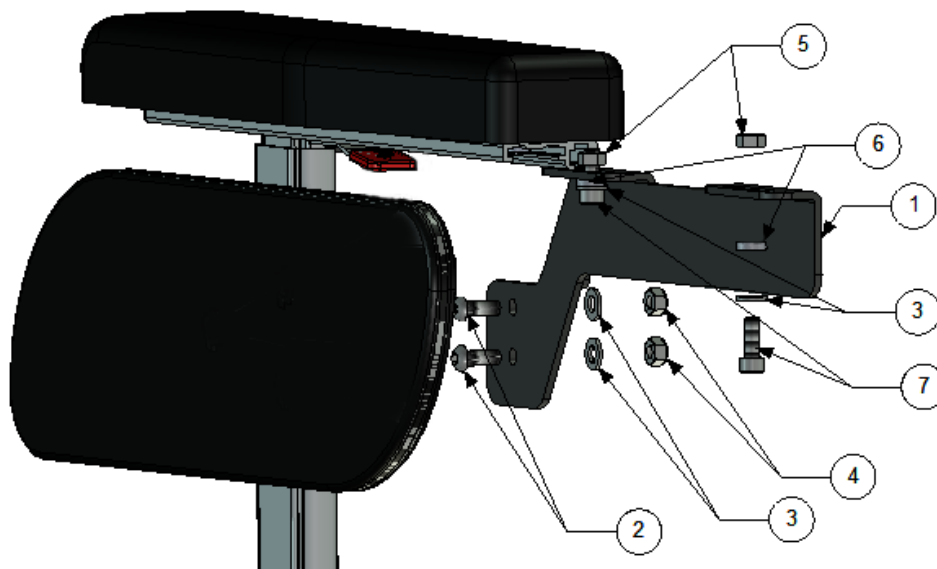

7. Montera enligt bilden ovan, drag inte åt skruvar med placering 7.

Placering	Detalj Nr.	Antal	Beskrivning
1	MED1500	1	Fäste
2	XSM6X16R	2	Skruv - Rundad - M6 x 16
3	XSM6BR	4	Plan Bricka M6
4	XSM6ML	2	Låsmutter M6
5	XSM6M	2	Mutter M6
6	100 400 025	2	Distans
7	XSM6X16	2	Skruv M6 X 16

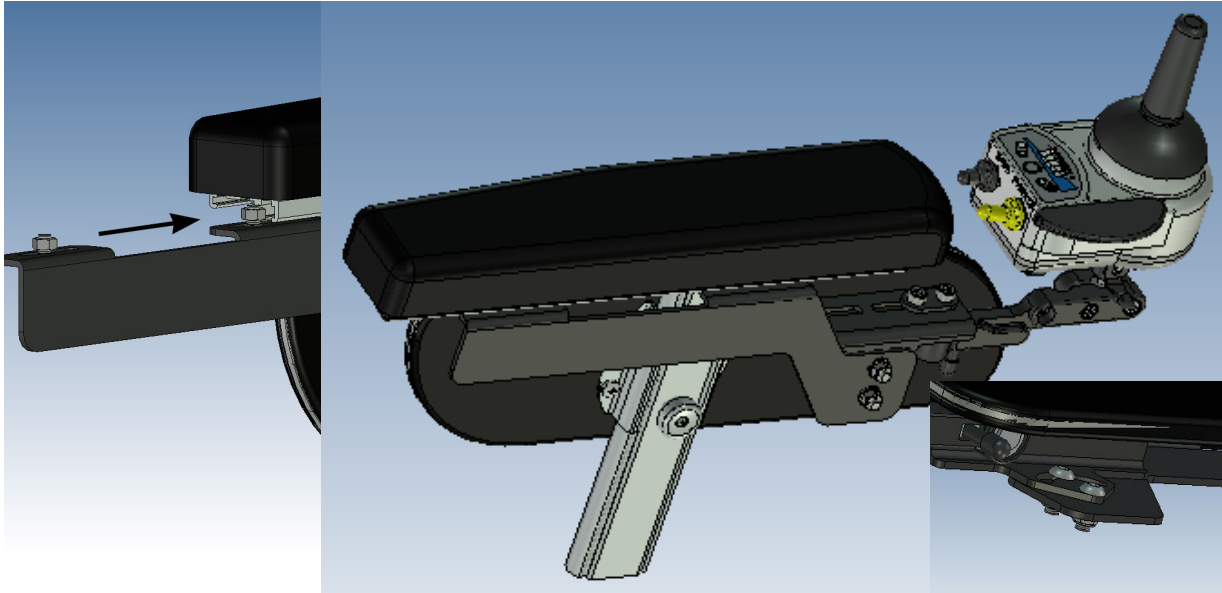

8. För fram fästet till önskad placering och drag åt skruvarna Nr.7.
9. Montera tillbaka täcklocket och montera på främre fästet med skruvarna Nr 2, brickorna Nr 3 och låsmuttrarna Nr 4.

Kom ihåg att montera parkeringsbroms på rullstolen och att stolens totala bredd ökar med 60 mm.

Monteringsset Vänster sida: MED1418


Montering av Joystick med Parallellarm MED1645

Montera nu joysticken på valfri sida, se bilder nedan för montering på högersida.

1. Börja nu med att demontera det bakre täcklocket på armstödet.
2. Montera M6 bultar, brickor och muttrar enligt bild och skjut i fästet i profilen och återmontera täcklocket.




3. Montera nu parallellarm och joystick enligt bild.
Justera joystickens placering till önskad position.
4. Dra åt alla skruvar och verifiera funktion.

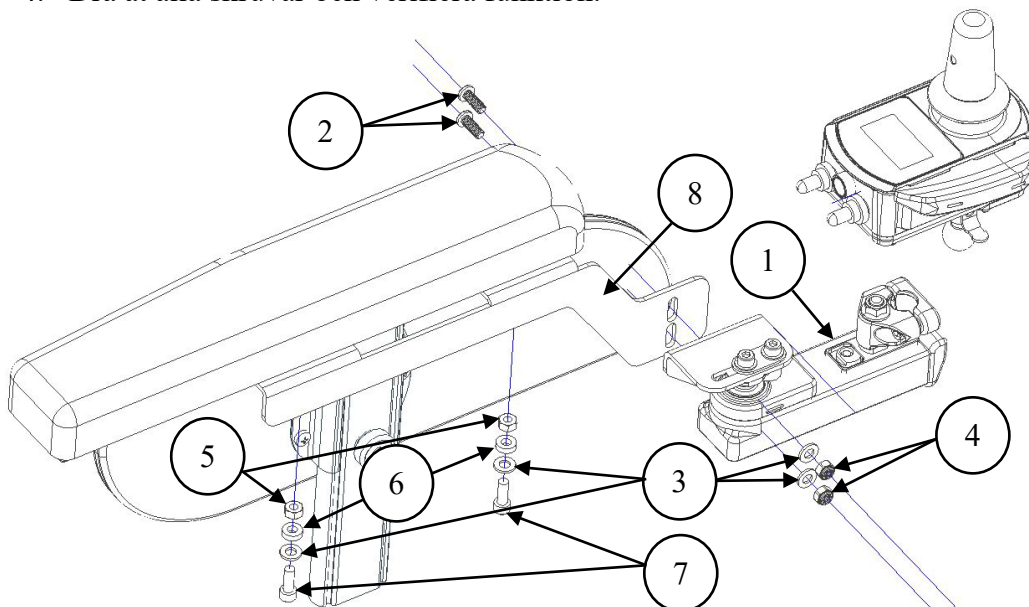

Placering	Detalj Nr.	Antal	Beskrivning
1	X0F-48160-D00	1	Övre fäste parallell
2	XSM6X16	2	Skruv rundad M6 x 16
3	XSM6BR	4	Plan Bricka M6
4	XSM6ML	2	Låsmutter M6
5	XSM6M	2	Mutter M6
6	100 400 025	2	Distans
7	MC6SM6X16	2	Skruv M6 X 16
8	MED1500	1	Fäste höger

För montering på vänster sidan skall MED1646 användas.


MED1356

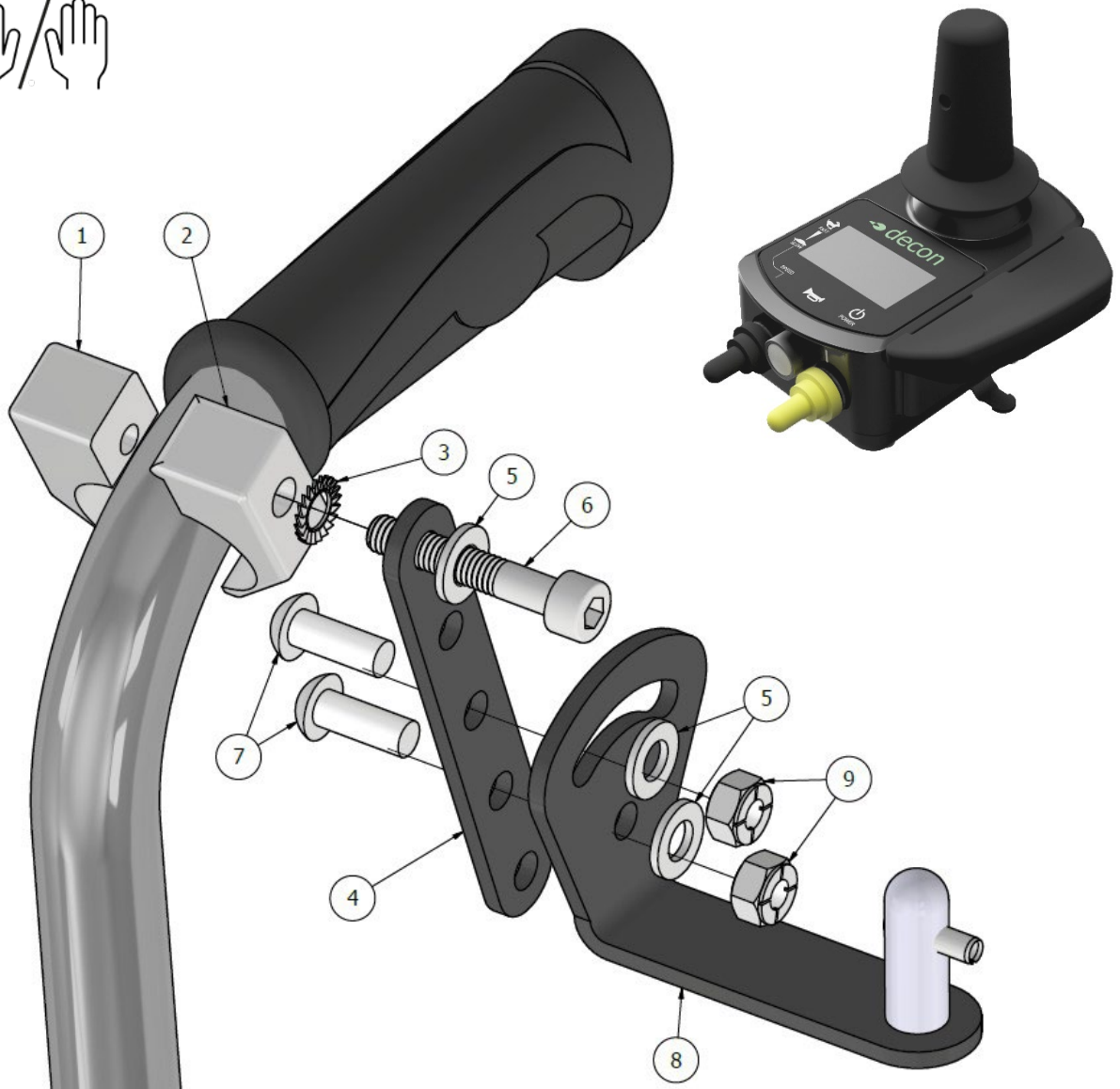

1	XA2-2612K-00	1	
2	XA2-2612E-00	1	
3	XSM6BRTG	1	
4	MED1317	1	
5	XSM6BR	3	
6	MC6SM6X35	1	
7	XSM6X16	2	
8	MED1316	1	
9	XSM6ML	2	

MED1226


Alternativ vårdar styrkontroll (Endast höger sida)

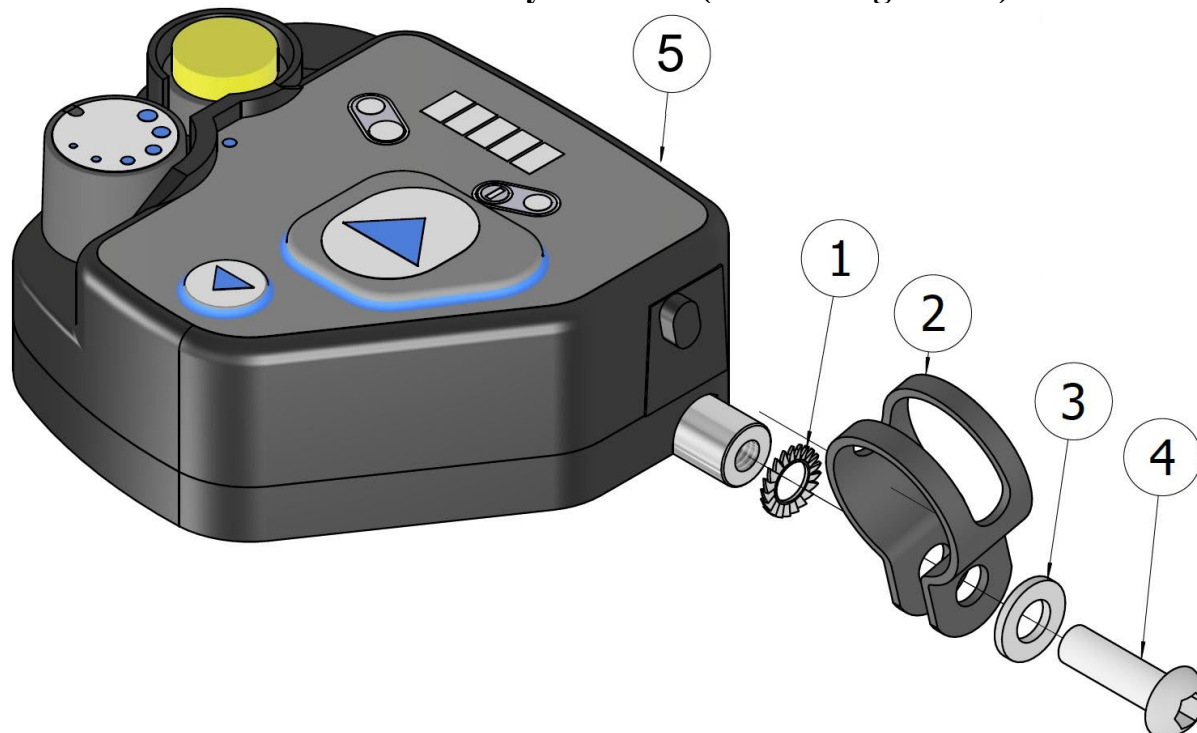

Placering.	Artikelnummer	Antal	Beskrivning
1	XSM6TG	1	Taggbricka
2	Xklamma2	1	Klamma
3	XSM6BR	1	Plan Bricka 6,4
4	XSM6X20	1	Skruv M6 x 20
5	MED1200	1	Vårdar styrkontroll

MED1643


Vårdastyrningen är även möjlig att montera på vänstersida. För detta behöver man komplettera med MED1643, vilken beställs separat.

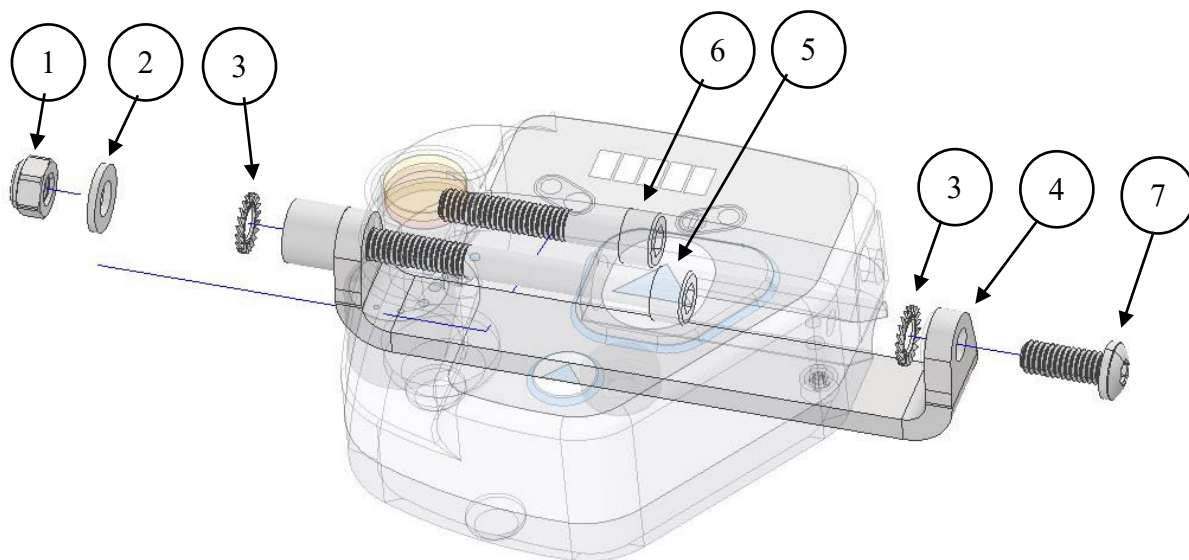

Använd antingen bult med placering 4 eller 5 beroende på vilken klämma som monterats på stolens handtagsrör. Den kortare passar plåtklämman och den gängade aluminiumklämman, den längre aluminiumklämman utan gängor.

Placering.	Artikelnummer	Antal	Beskrivning
1	XSM6M	1	Låsmutter M6
2	XSM6BR	1	Planbricka M6
3	XSM6BRTG	2	Taggbricka M6
4	MED1640	1	Fäste vårdastyrning vänster sida
5	MC6SM6X60	1	Bult M6x60
6	MC6SM6X35	1	Bult M6x35
7	MC6SM6X16	1	Bult M6x16

**Endast om parkeringsbroms är monterat på rullstolen
MED1453**

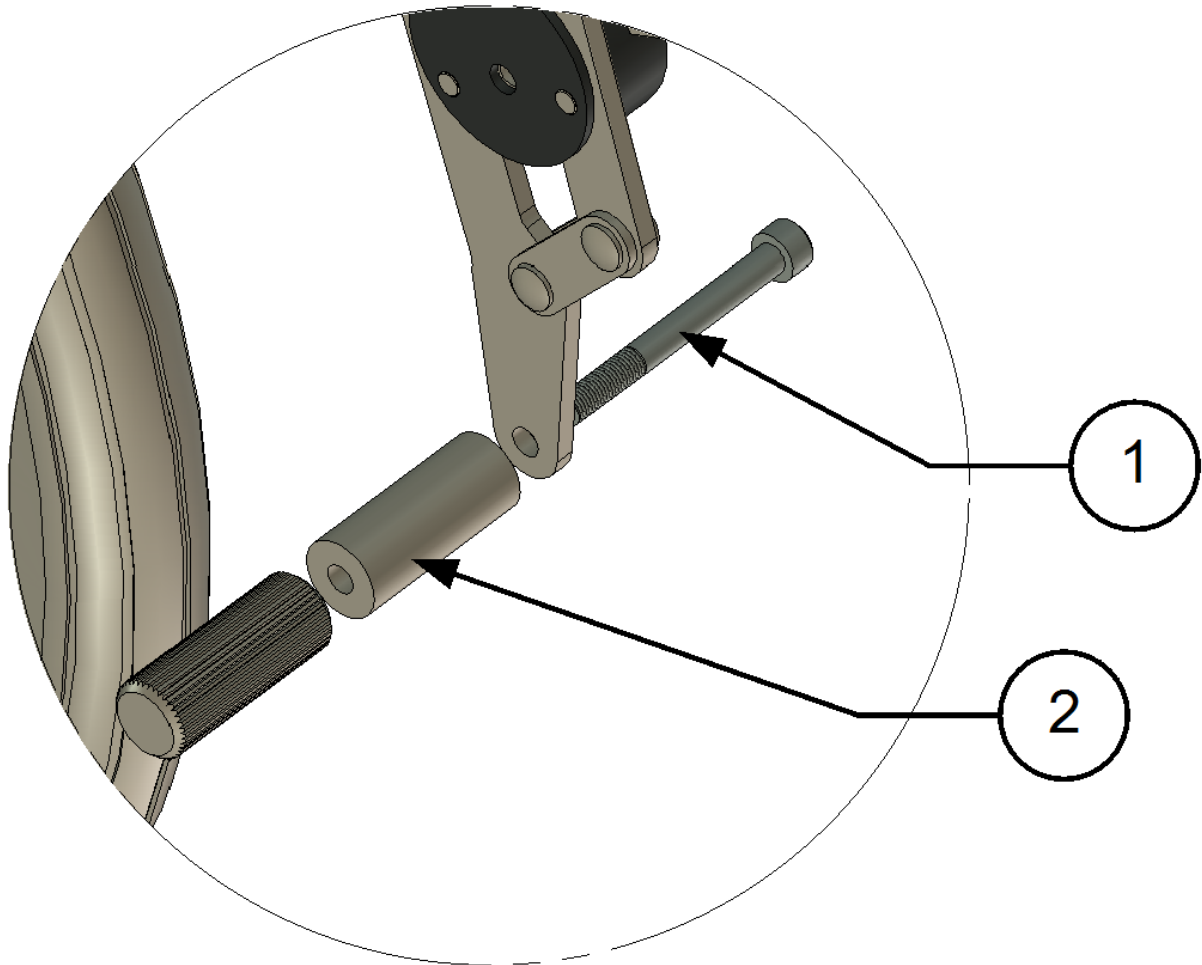

Placering	Detalj Nr.	Antal	Beskrivning
1	MC6SM6X55	1	Skruv Cylindrisk M6 x 55
2	100 400 064	1	Distans



Åtdragningsmoment / Tightening torque

Metrisk grovgängor, stål.
Metric coarse threads, steel.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

Navhylsor.
Sleeves.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M16x1	30 Nm
M18x1	40 Nm