



Monterings anvisning Emineo med Onetool block MED3153


1. Demontera hjul och nav på båda sidorna.

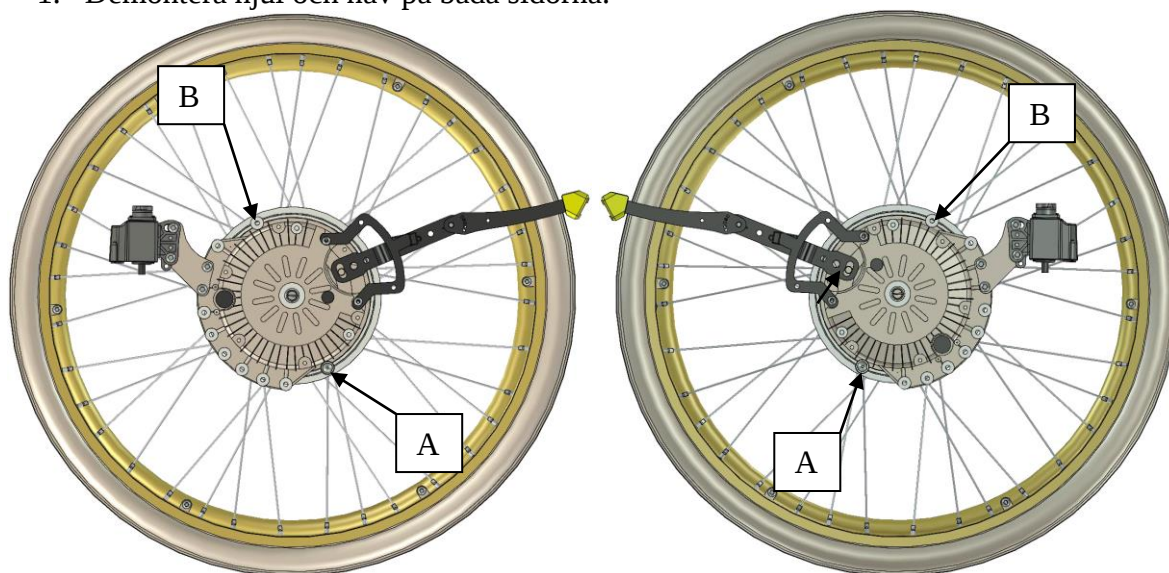

2. Kontrollera att stopp pinnen sitter enligt bilden ovan,
samt att batteri box och tippskydden är demonterade.
3. Stolens original tippskydd skall användas.

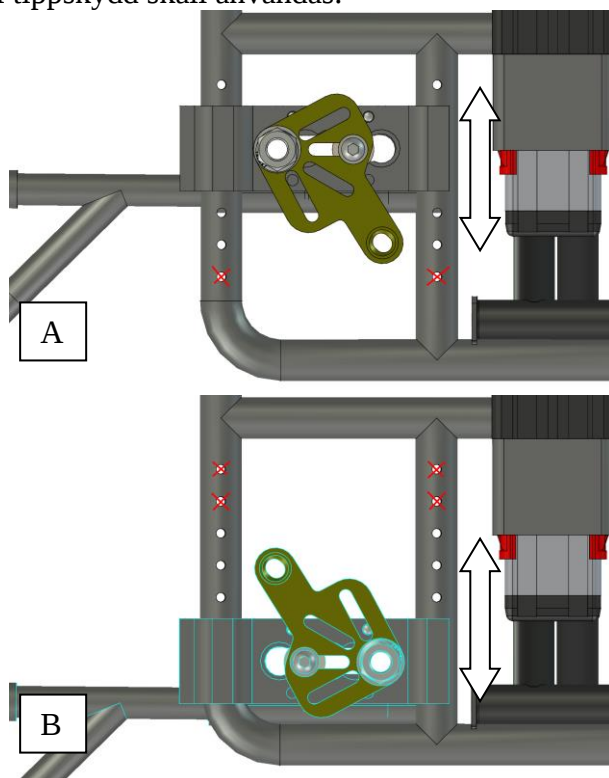

4. Placerings möjligheter för adapter plattan.

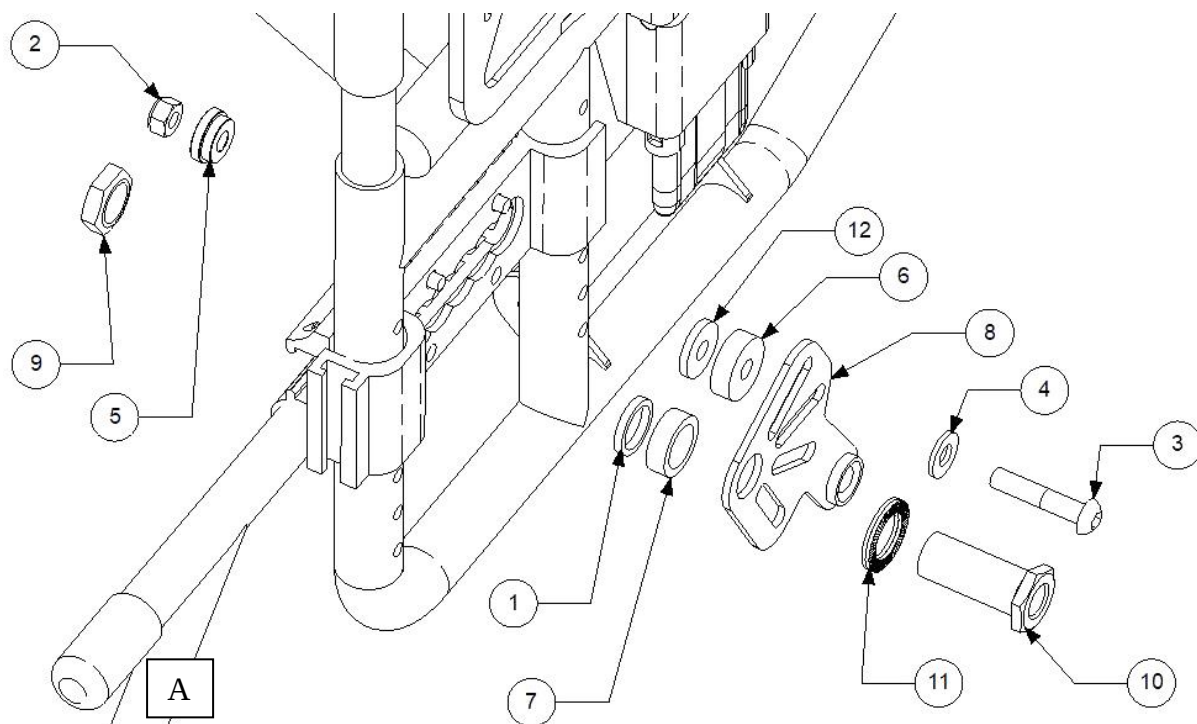


5. Montera nu fästet se bilderna ovan som visar montering av fästet på höger sida.

För montering på en sida, så skall följande ingå.

Placering	Detalj Nummer	Antal	Beskrivning
1	100 400 106	1	Distans
2	XSM8LM	1	Låsmutter M8
3	XSM8X40	1	Skruv M8 x 40
4	XSM8BR	1	Planbricka 8,4
5	100 400 008	1	Distans
6	100 400 013	1	Distans
7	100 400 016	1	Distans
8	MED2004	1	Fäste
9	XSM18M	1	Mutter M18 x1
10	HW084	1	Navhylsa M18X1
11	405241	1	Nordlock Bricka M18
12	100 400 107	1	Distans

6. Montera nu den rygghängda batteri väskan.


Emineo med Joystick

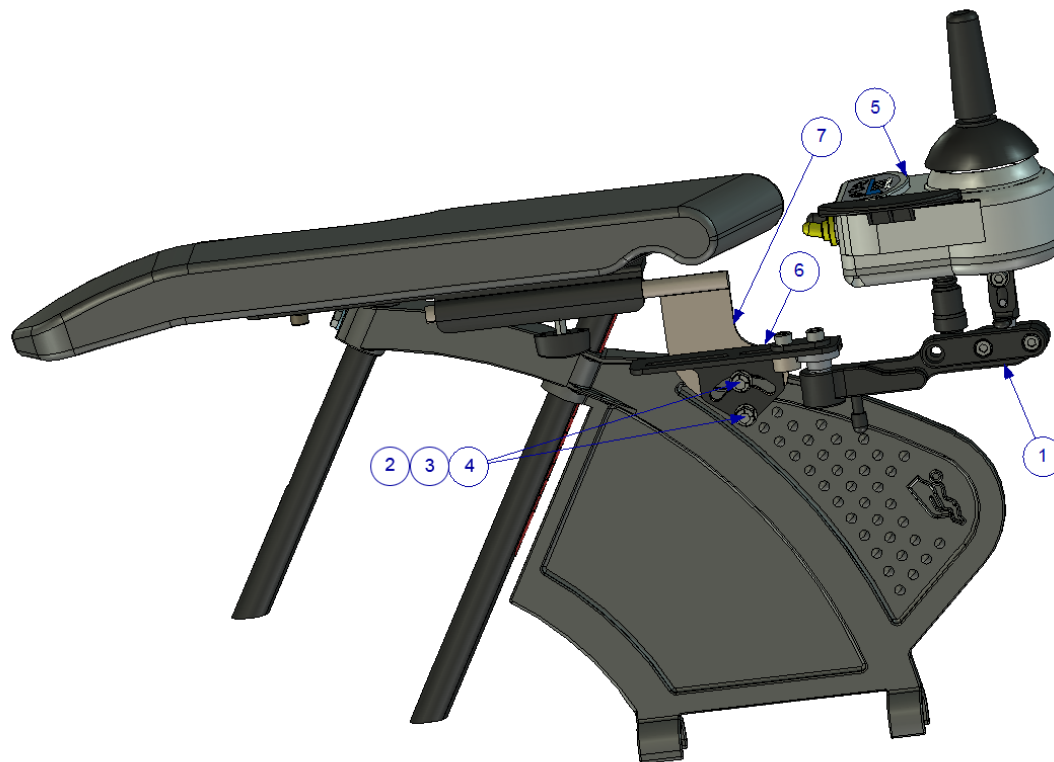

Placering.	Artikel nummer	Antal	Beskrivning
1	XOC-48160-B0	1	Övre fäste komplett
2	XSM6X16	2	Skruv Rundad M6 x 16
3	XSM6BR	2	Planbricka M6
4	XSM6ML	2	Låsmutter M6
5	XOC-48110-A0	1	Joystick
6	XOC-46295-00	1	Fäste
7	MED1328	1	Joystick Fäste

Fästet kan monteras på valfri sida.


Montering av vårdarstyrning med Joystick (båda sidor) MED1409

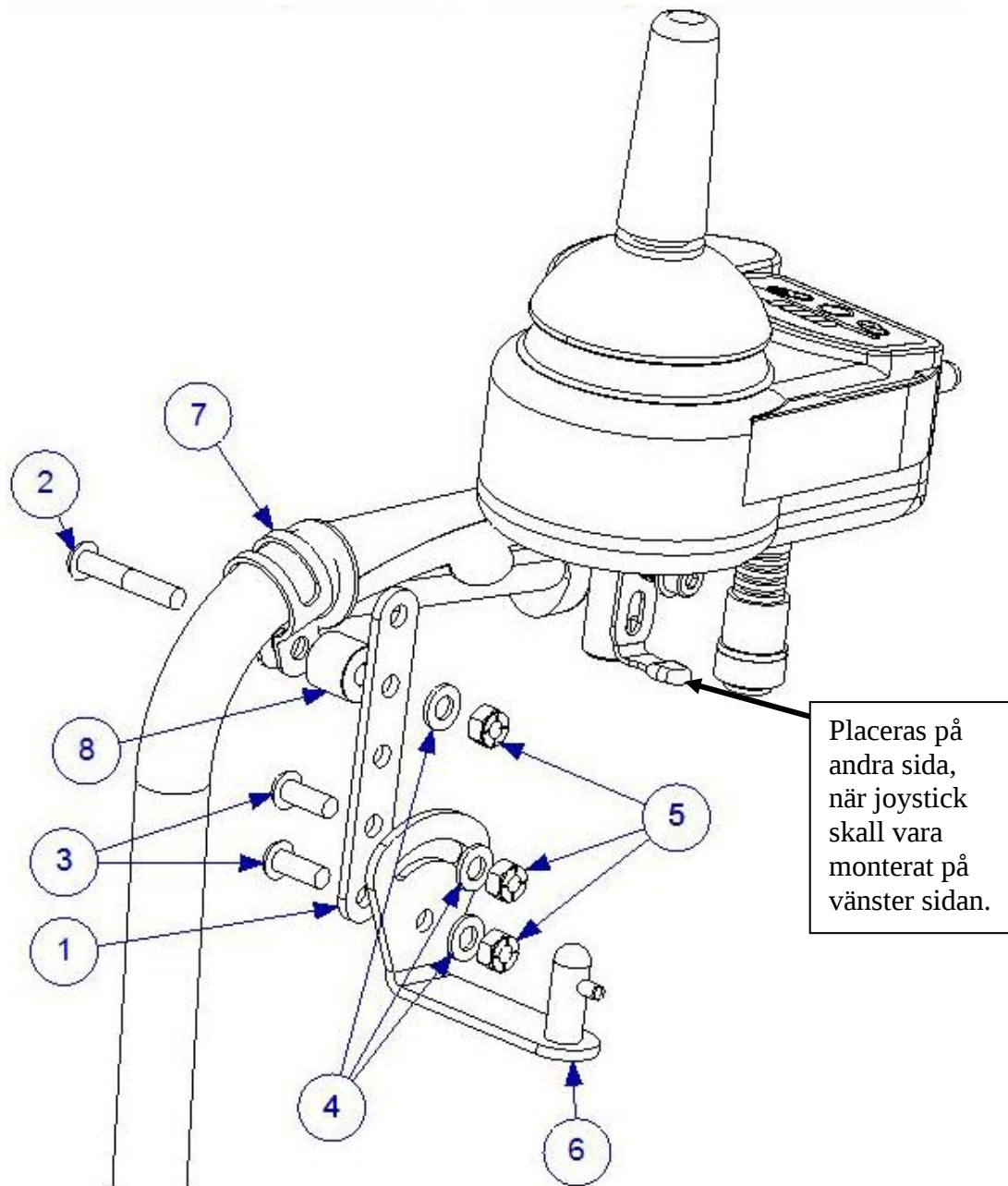

Placering	Art. Nr:	Antal	Beskrivning
1	MED1317	1	Fäste
2	XSM6X35	1	Skruv M6 x 35
3	XSM6X16	2	Skruv M6 x 16
4	XSM6BR	3	Planbricka M6
5	XSM6ML	3	Låsmutter M6
6	MED1316	1	Platta med pinne
7	Xklamma2	1	Xklamma2
8	100 400 044	1	Distans

Fästet kan monteras på valfri sida.

Alternativ vårdarstyrning (endast högersida)

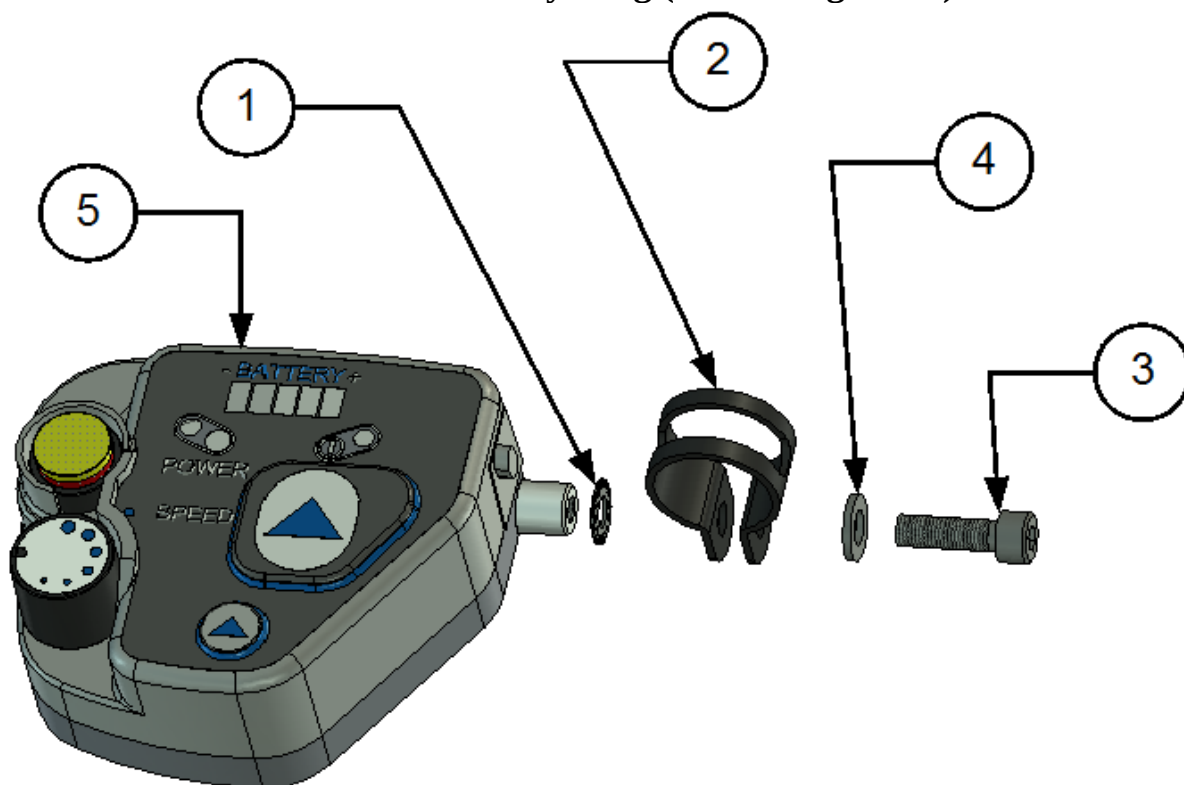

Placering	Art. Nr:	Antal	Beskrivning
1	XSM6TG	1	Taggbricka 6,4
2	Xklamma2	1	klamma
3	XSM6X20	1	Skruv M6 x 20
4	XSM6BR	1	Plan bricka 6,4
5	MED1200	1	Vårdarstyrkontroll

Åtdragningsmoment / Tightening torque

Metrisk grovgängor, stål.
Metric coarse threads, steel.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

Navhylsa
Sleeve

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M16x1	30 Nm
M18x1	40 Nm