


Monteringsanvisning E-Walk på modell Etac Transit MCG1105

1. Demontera hjulen muttrar på båda sidorna.

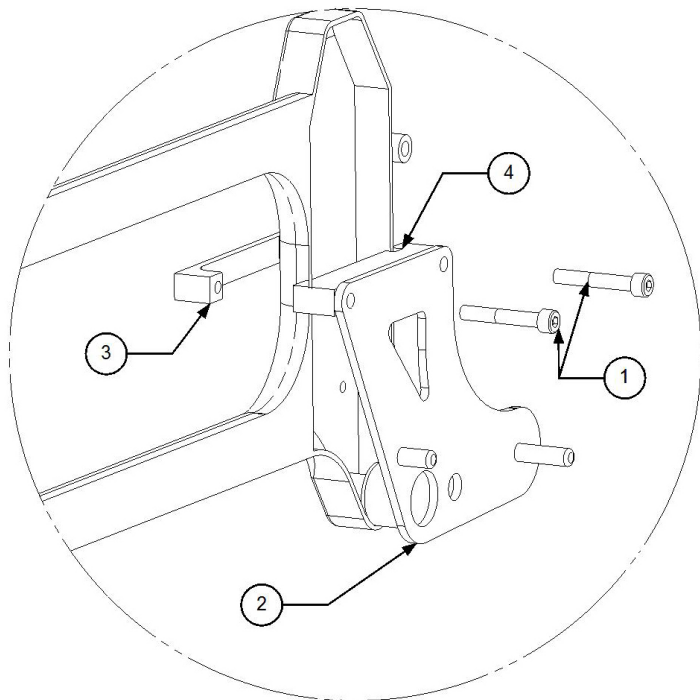

2. Montering av fästet på höger sida, se bild ovan.
För montering på en sida, så skall följande ingå.

Placering	Detalj Nummer	Antal	Beskrivning
1	XSM8X50	2	Skruv M8 x 50
2	MCG1105R	1	Höger Fäste
3	MCG1105-03	1	Transit fäste2
4	MCG1105-04	1	Transit fäste3

3. Montera tillbaka hjul muttern och upprepa monteringen på andra sidan.



**Om inget annat specificeras, använd följande åtdragningsmoment.
Unless otherwise specified, use the following tightening torque.**

Metrisk grovgängor, stål.
Metric coarse threads, steel.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

Navhylsor.
Sleeves.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M16x1	30 Nm
M18x1	40 Nm

OBS!

Special sidostycke till eWalk behövs vid SB35.
Vid beställning kontakta Decon.