

Monteringsanvisning E-Walk på Pyro Light XL


MCG1144



1. Se bild som visar montering av fästet på höger sida.
För montering skall följande ingå per sida.


Placering	Detalj nummer	Antal	Beskrivning
1	100 400 007	2	Distans
2	100 400 026	2	Distans
3	XSM8BR	2	Plan Bricka 8,4
4	XSM8X45	2	Skruv M8 x 45 Rundad skalle
5	MCG1144R	1	Höger platta

Center placerad styrkontroll



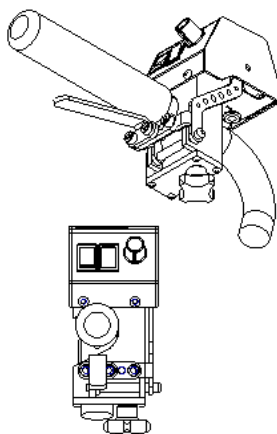


När det ej är monterat broms på körhandtaget, bör denna placering användas.

Sidoplacerad styrkontroll

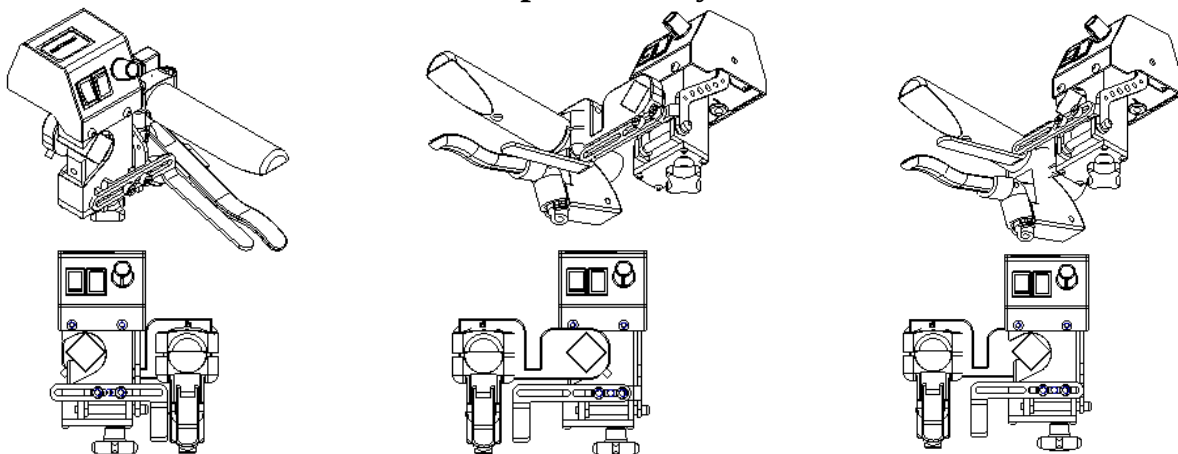

När det är monterat broms på körhandtaget användes sidoplacerad styrkontroll. Det finns olika monteringsalternativ, samt justerings möjligheter.

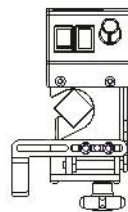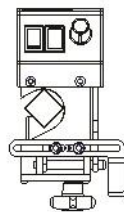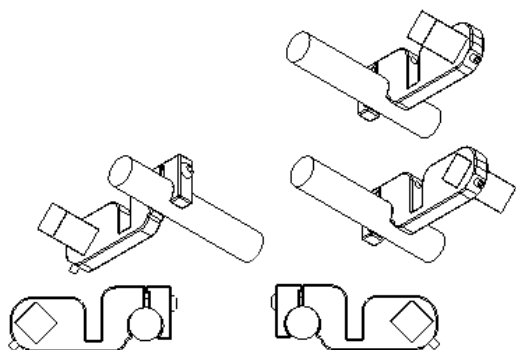

OBS! Använd Loctite på alla skruvar vid montering och justering.

Använd Loctite 2400 på alla skruvar

VARNING!

När man monterar styrkontrollen så skall man alltid kontrollera att styrkontrollens gashandtag eller dess övriga leder inte tar i eller ligger emot någonstans. Om reglage tar i eller ligger emot så kan detta leda till att gasen hänger sig och en olycka kan inträffa.

2. Montera nu Styrkontrollen på valfri plats.