



Monteringsanvisning för Azalea Tall MED3328


1. Demontera hjulen på båda sidorna.
Det finns två olika monterings alternativ.

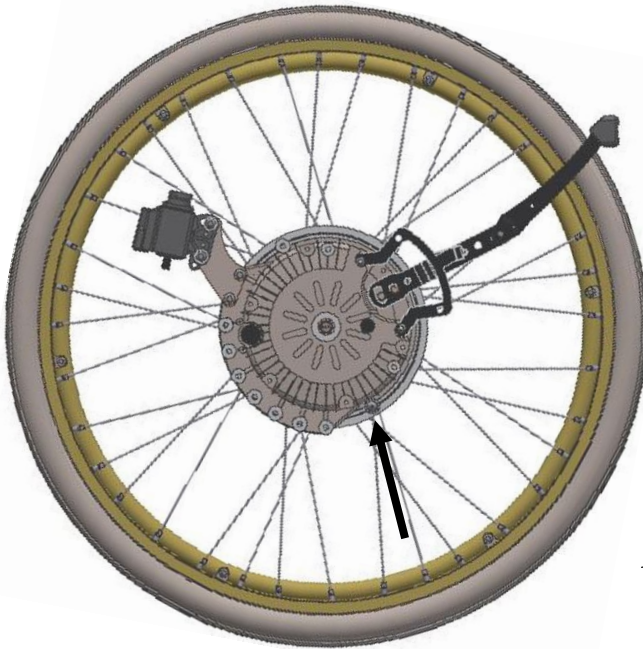

A

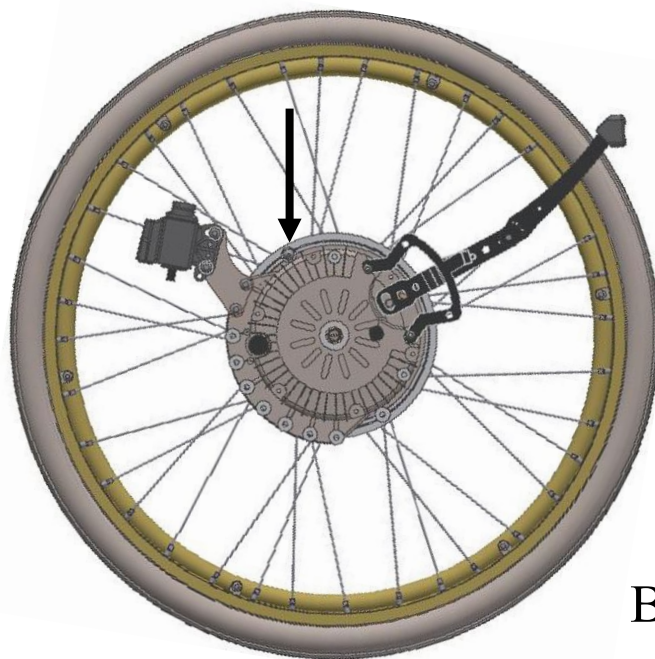


B

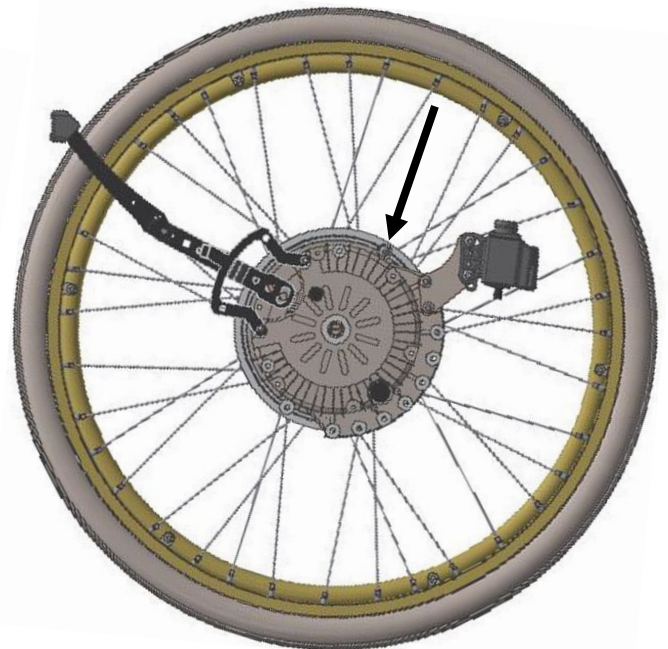


2. Kontrollera att stopp-pinnen sitter enligt bilden ovan, samt att det inte är monterat några tippskydd på E-drive enheten. Använd stolens ordinarie tippskydd.

Alternativ A

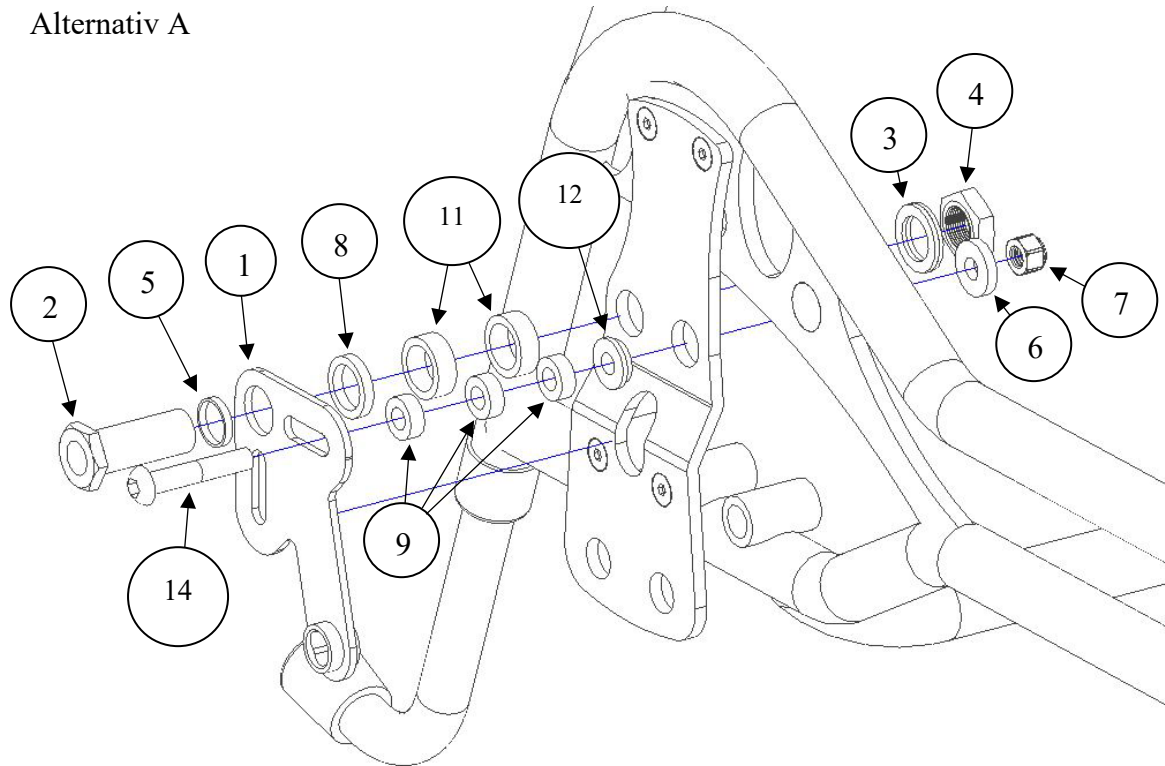

Alternativ B

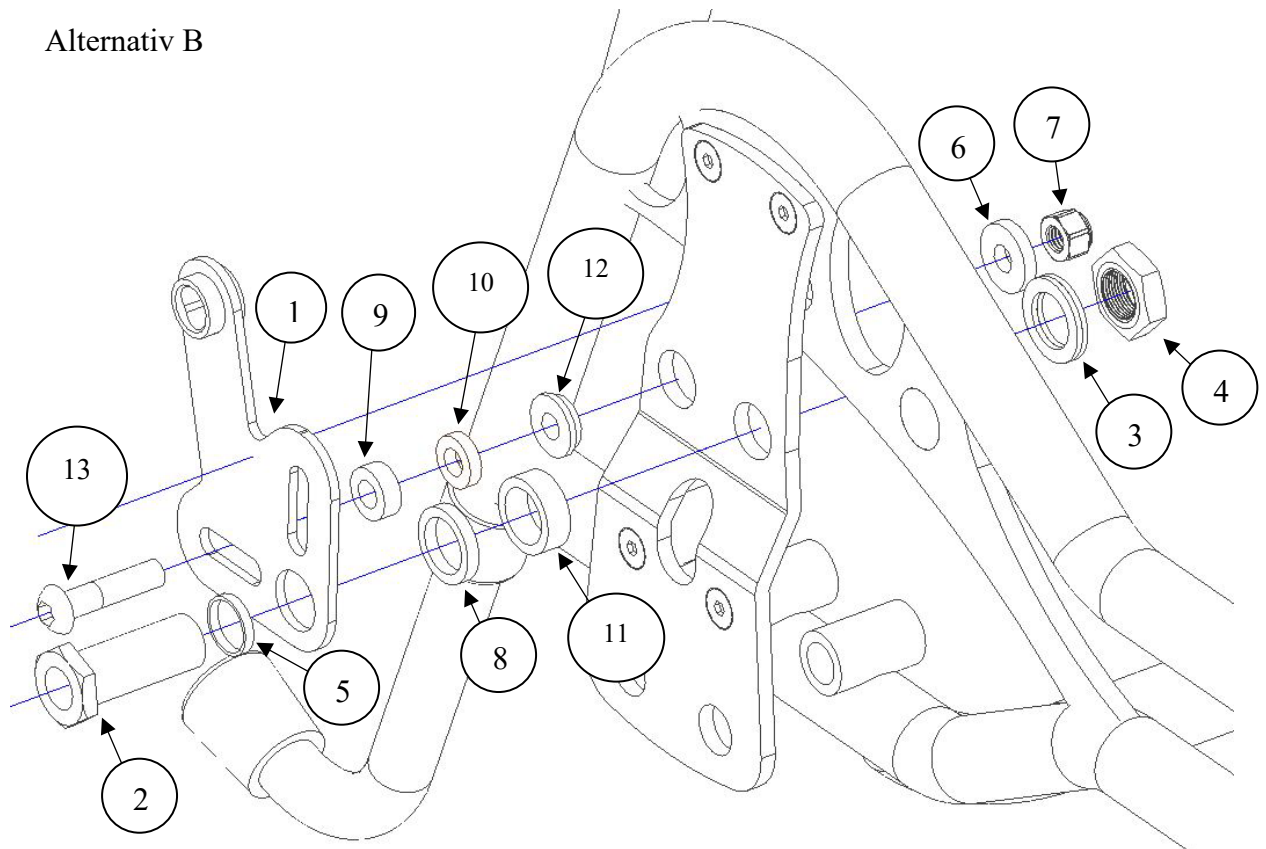


3. Montera nu fästet, se bilderna ovan som visar montering av fästet på höger sida.
För montering på en sida, så skall följande ingå.

Placering	Art. Nr:	Antal	Beskrivning
1	MED2000	1	Fäste
2	HW069	1	Navhylsa M16
3	405239	1	Nordlock Bricka
4	XSM16M	1	Mutter M16X1 Låg
5	100 400 017	1	Distans
6	XSM8BRW	1	M8 bricka stor
7	XSM8LM	1	Låsmutter M8
8	100 400 004	1	Distans
9	100 400 002	3	Distans
10	100 400 001	1	Distans
11	100 400 006	2	Distans
12	100 400 007	1	Distans
13	XSM8X35	1	Skruv M8X35
14	XSM8X45	1	Skruv M8X45


Justering av bromsar

När E-drive hjulen monteras enligt alternativ B behöver en av de två plastdistanserna demonteras och bulten bytas ut till en kortare. Detta för att hjulet inte ska ta i. Säkerställ funktion innan stolen tas i bruk.

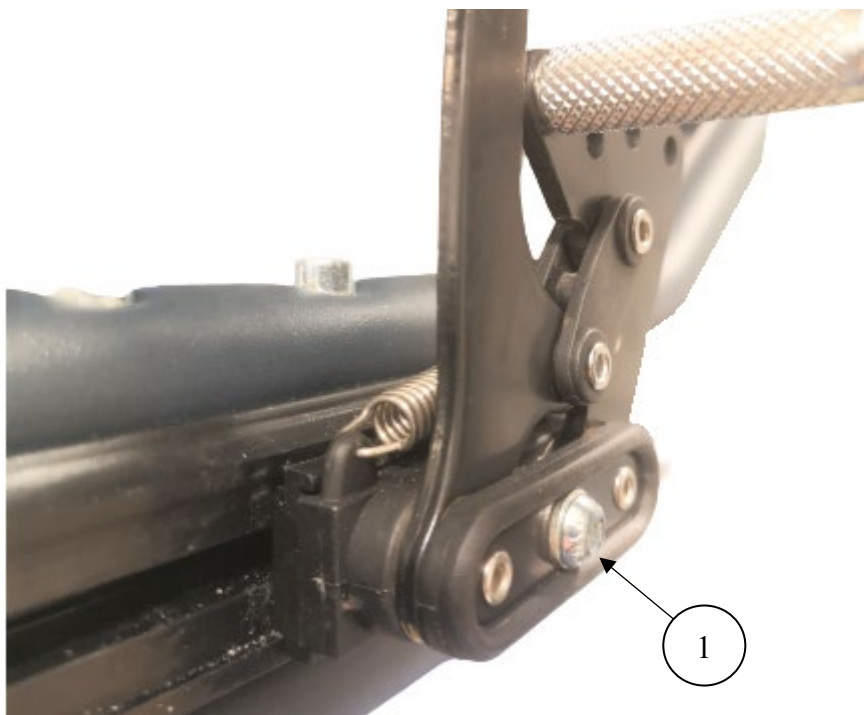

Placering	Art. Nr:	Antal	Beskrivning
1	XSM6X40	1	Skruv M6X40


MED1414L Montering av Joystick

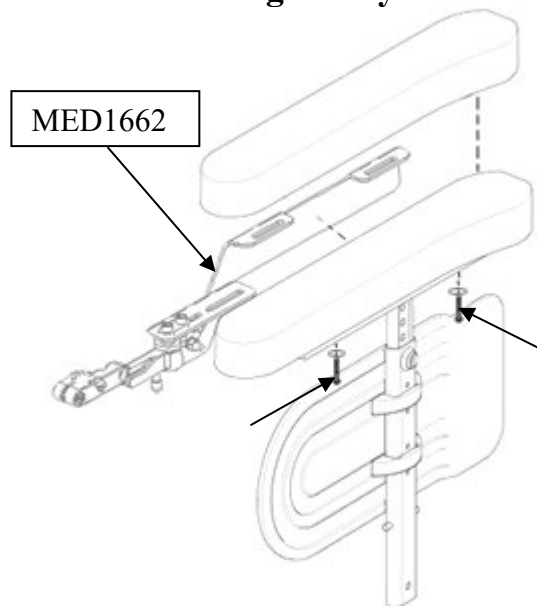

1. Montering av Joystick. Lossa nu skruvarna. Montera fästet så att det kläms i mellan, dra åt med dom nya skruv genom spåret i plåtarna.

Placering	Art. Nr:	Antal	Beskrivning
1	MED1662	1	Fäste Azalea vänster
2	XOC-48160-B0	1	SwingAway fästet
3	XSM6X16	2	Skruv Rundad M6 x 16
4	XSM6ML	2	Låsmutter M6
5	XSM6BR	2	Planbricka M6
6	XSM4X20	2	Skruv Rundad M4 x 20
7	XSM4BR	2	Planbricka M4


MED1414R Montering av Joystick

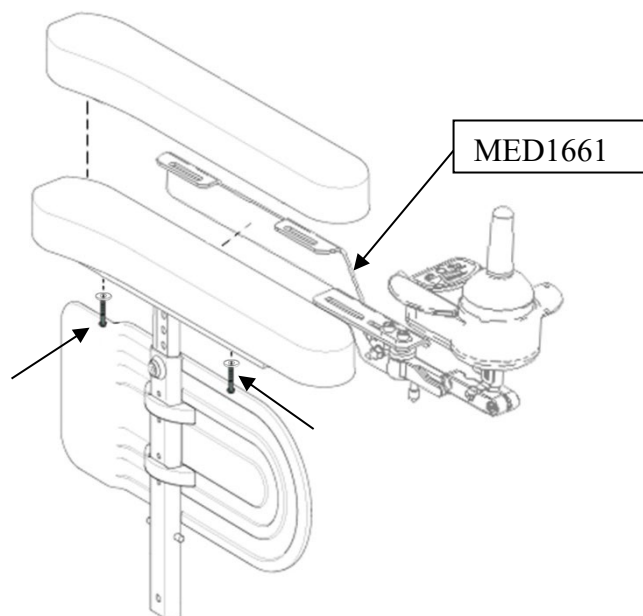

1. Montering av Joystick. Lossa nu skruvarna. Montera fästet så att det kläms i mellan, dra åt med dom nya skruv genom spåret i plåtarna.

Placering	Art. Nr:	Antal	Beskrivning
1	MED1661	1	Fäste Azalea höger
2	XOC-48160-B0	1	SwingAway fästet
3	XSM6X16	2	Skruv Rundad M6 x 16
4	XSM6ML	2	Låsmutter M6
5	XSM6BR	2	Planbricka M6
6	XSM4X20	2	Skruv Rundad M4 x 20
7	XSM4BR	2	Planbricka M4


Montering av Joystick MED1647 höger. MED1648 vänster.

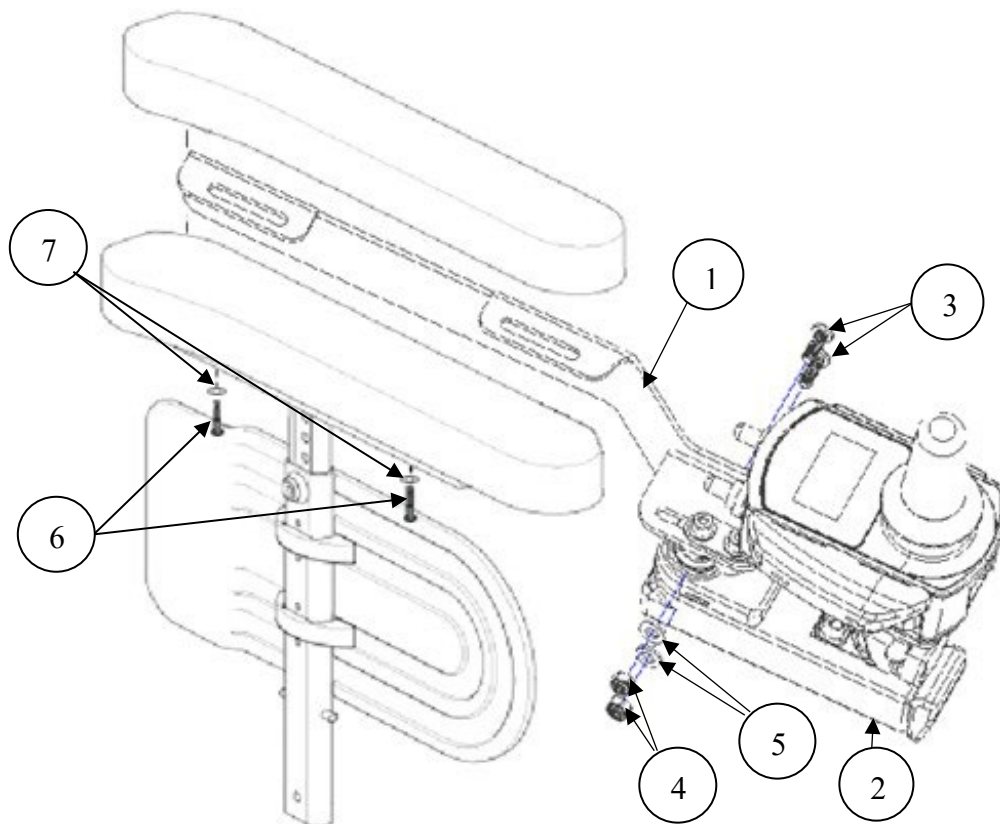

4. Montering av Joystick. Lossa nu skruvarna. Montera fästet så att det kläms i mellan, dra åt med dom nya skruv genom spåret i plåtarna.

Placering	Art. Nr:	Antal	Beskrivning
1	MED1661	1	Fäste Azalea höger
2	X0F-48160-D00	1	Övre fäste parallell
3	XSM6X16	2	Skruv Rundad M6 x 16
4	XSM6ML	2	Låsmutter M6
5	XSM6BR	2	Planbricka M6
6	XSM4X20	2	Skruv Rundad M4 x 20
7	XSM4BR	2	Planbricka M4


MED1356

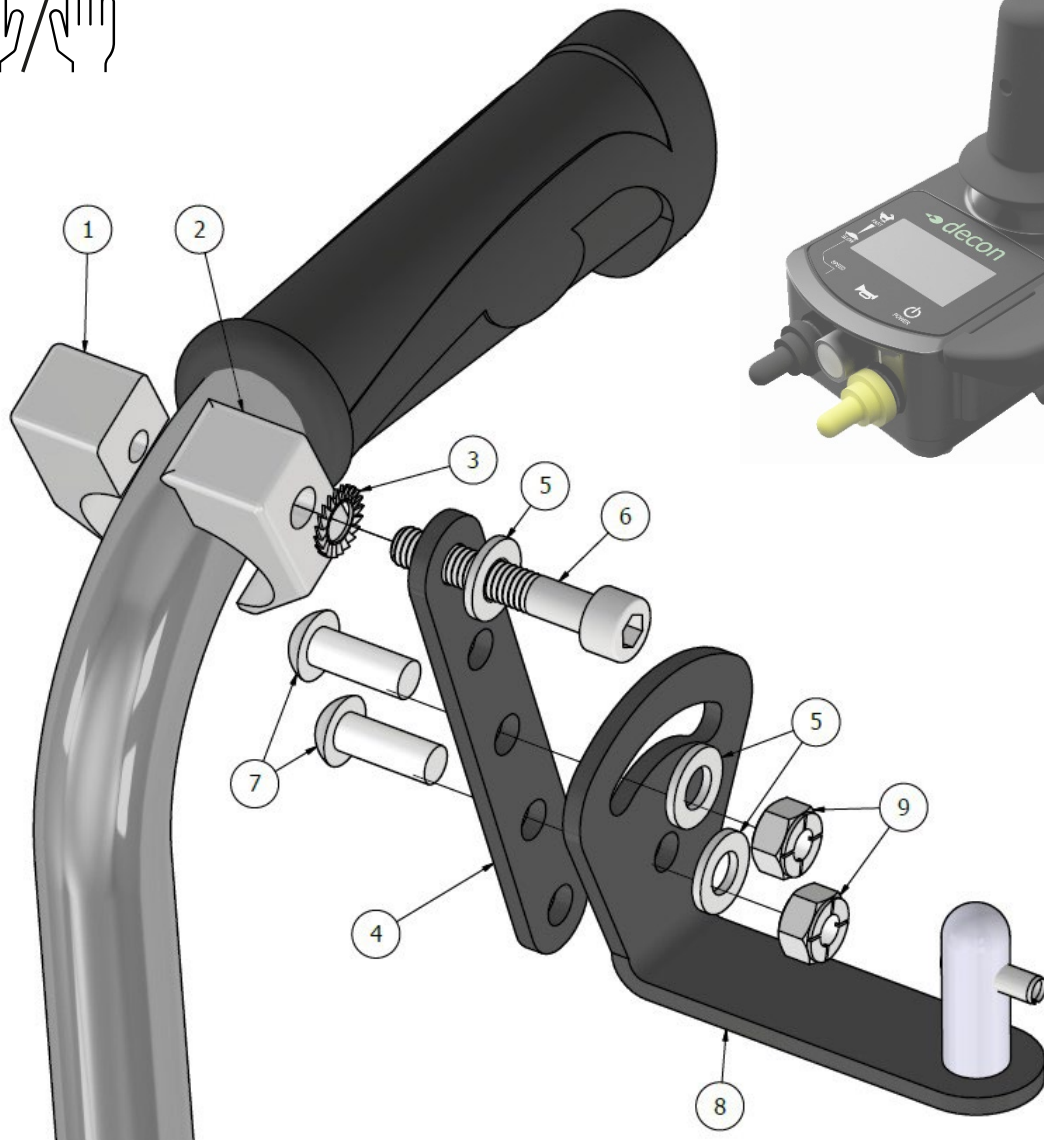

1	XA2-2612K-00	1	
2	XA2-2612E-00	1	
3	XSM6BRTG	1	
4	MED1317	1	
5	XSM6BR	3	
6	MC6SM6X35	1	
7	XSM6X16	2	
8	MED1316	1	
9	XSM6ML	2	

MED1226


Alternativ vårdar styrkontroll (Endast höger sida)

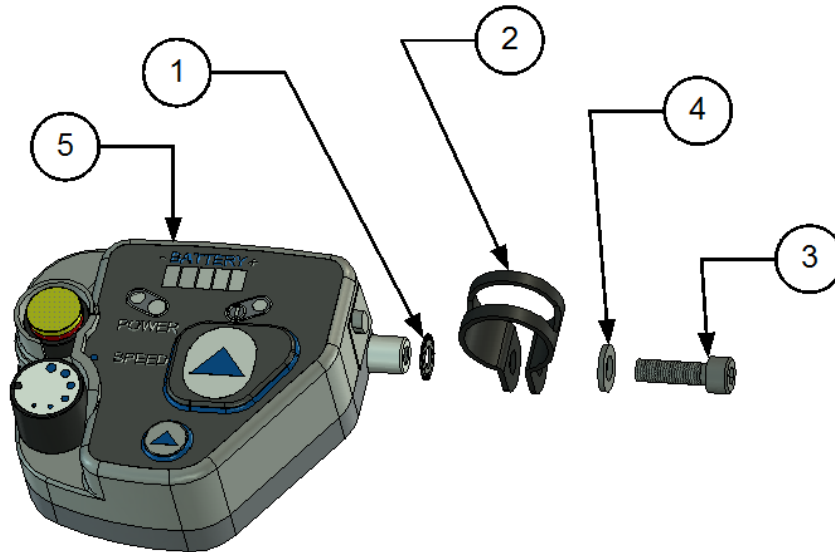

Placering.	Artikelnummer	Antal	Beskrivning
1	XSM6TG	1	Taggbricka
2	Xklamma2	1	Klamma
3	XSM6X20	1	Skruv M6 x 20
4	XSM6BR	1	Plan Bricka 6,4
5	MED1200	1	Vårdar styrkontroll

MED1643

Vårdastyrningen är även möjlig att montera på vänstersida. För detta behöver man komplettera med MED1643, vilken beställs separat.

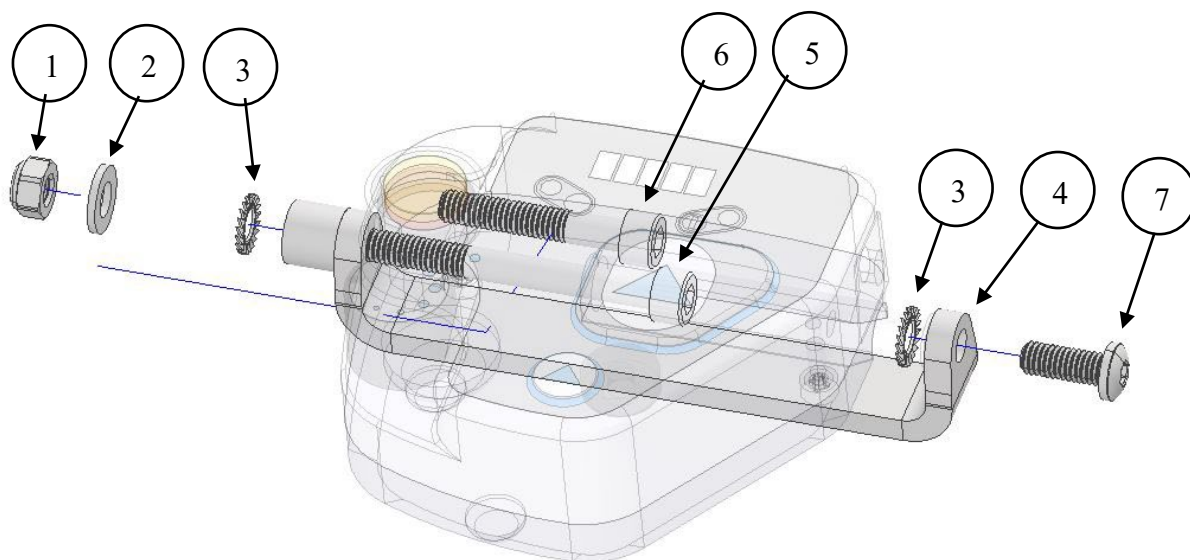

Använd antingen bult med placering 4 eller 5 beroende på vilken klämma som monterats på stolens handtagsrör. Den kortare passar plåtklämman och den gängade aluminiumklämman, den längre aluminiumklämman utan gängor.

Placering.	Artikelnummer	Antal	Beskrivning
1	XSM6M	1	Låsmutter M6
2	XSM6BR	1	Planbricka M6
3	XSM6BRTG	2	Taggbricka M6
4	MED1640	1	Fäste vårdstyrning vänster sida
5	MC6SM6X60	1	Bult M6x60
6	MC6SM6X35	1	Bult M6x35
7	MC6SM6X16	1	Bult M6x16

5. För montering utav vårdstyrning, så skall följande ingå.

6. Montera rygghängd batteriväska.



**Om inget annat specificeras, använd följande åtdragningsmoment.
Unless otherwise specified, use the following tightening torque.**

Metrisk grovgängor, stål.
Metric coarse threads, steel.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

Navhylsor.
Sleeve.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M16x1	30 Nm
M18x1	40 Nm