

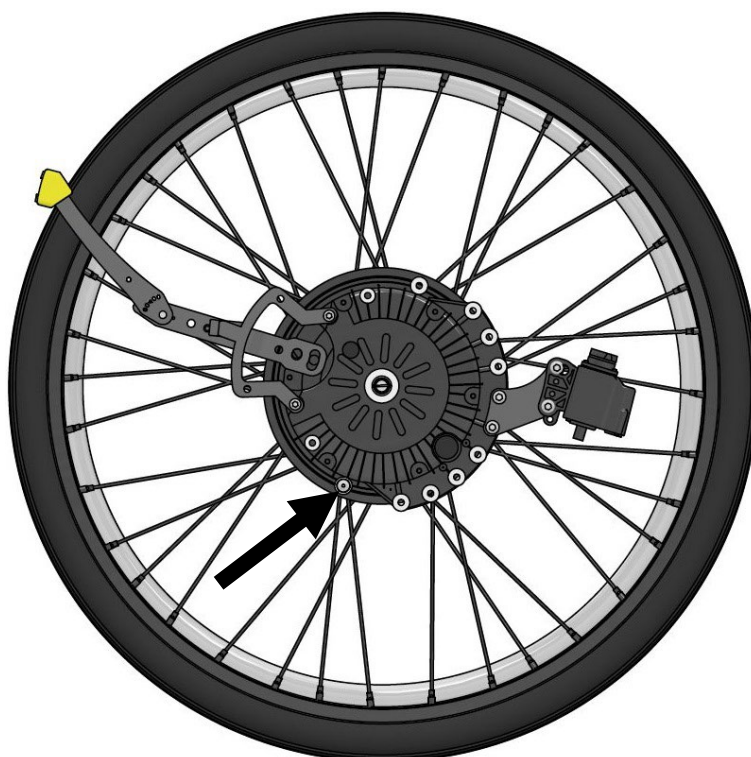


Monteringsanvisning för HD 24" Balance med e-drive MED3073

1. Demontera hjulen på båda sidorna, samt nav huset.

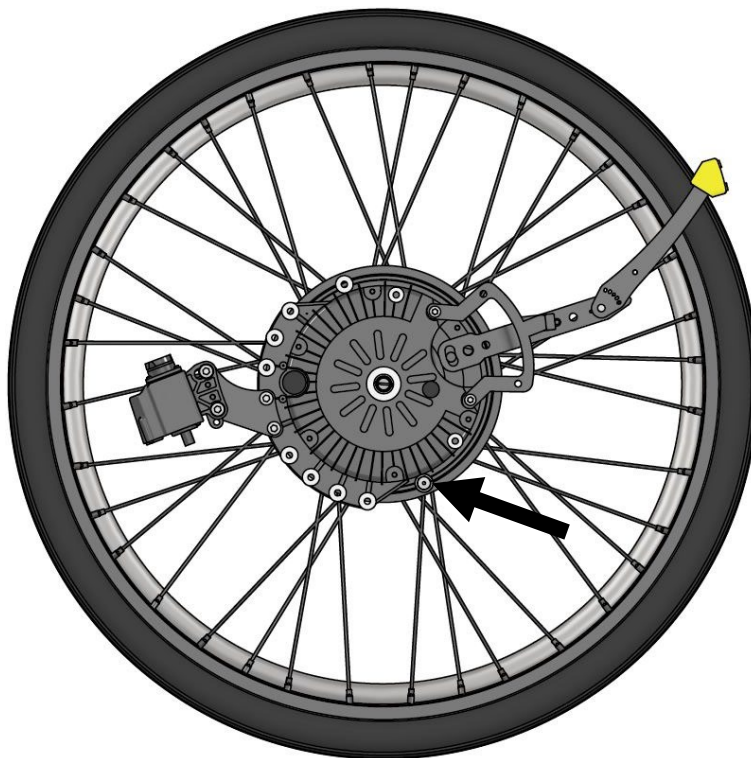

2. Kontrollera att stopp pinnen sitter enligt bilderna ovan, samt att tippskydden är demonterade. Använd rullstolens original tippskydd.

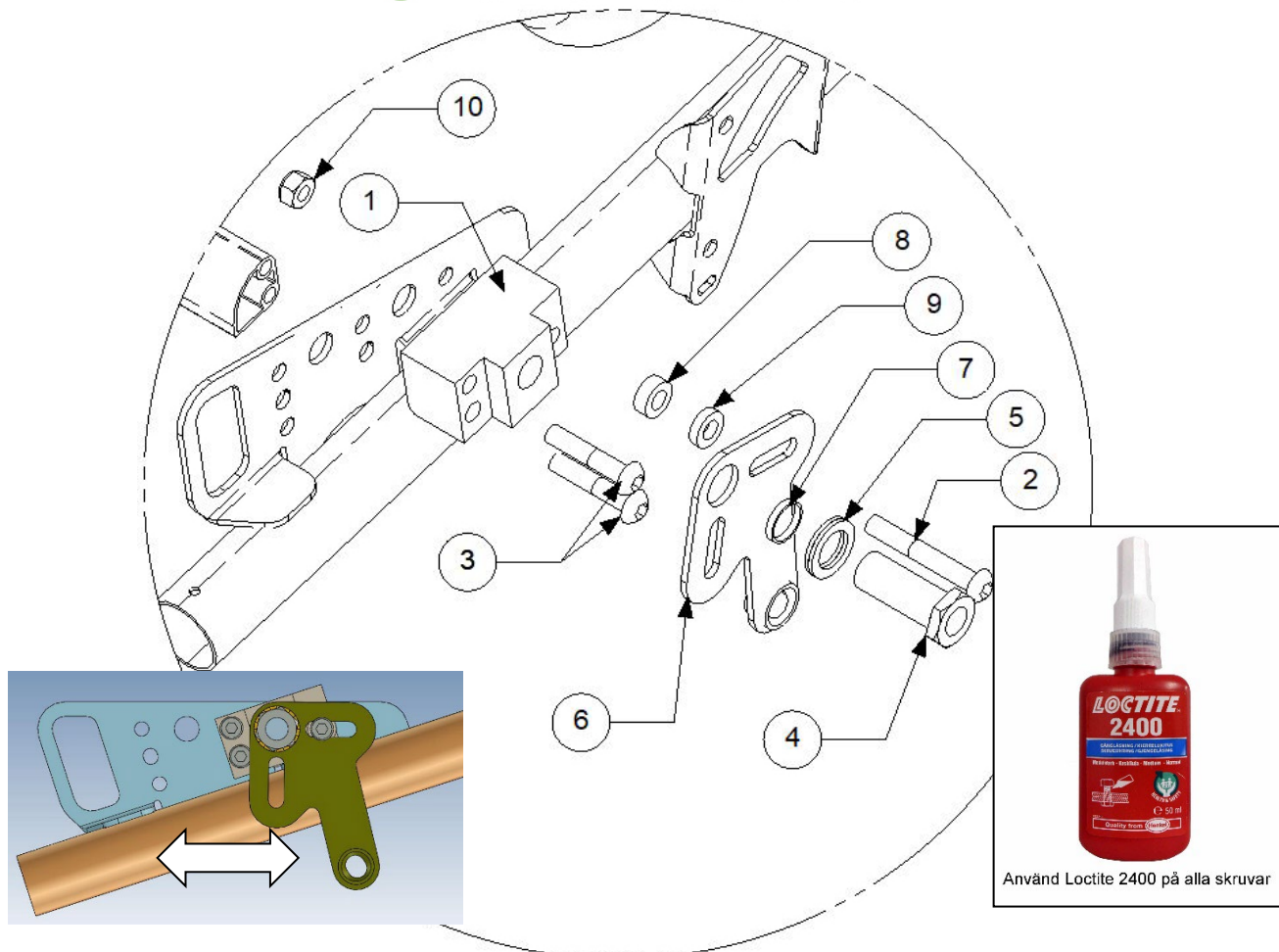

3. Montera nu fästet se bilderna ovan som visar monteringen av fästet på höger sida.

4. För monteringen så skall följande ingå.

Placering	Detalj Nummer	Antal	Beskrivning
1	MED3072-02	1	Navhus Höger
2	XSM8X55	1	Skruv M8 x 55
3	XSM8X50	2	Skruv M8 x 50
4	HW069	1	Navhylsa M16x1/12,7
5	405239	1	Nordlock bricka
6	MED2000	1	Fäste
7	100 400 017	1	Distans
8	100 400 002	1	Distans
9	100 400 001	1	Distans
10	XSM8ML	1	Låsmutter M8

MED3072-01= Navhus Vänster

5. Montera hjulen på de nya fästena.


Placeringsalternativ:

Det går att montera i både främre och bakre position.


6. Montera nu den rygghängda batteriväskan på baksidan av ryggstödet.

Montering av Joystick med Swing-Away MED1419

Montera nu joysticken på valfri sida, se bilder nedan för montering på högersida.

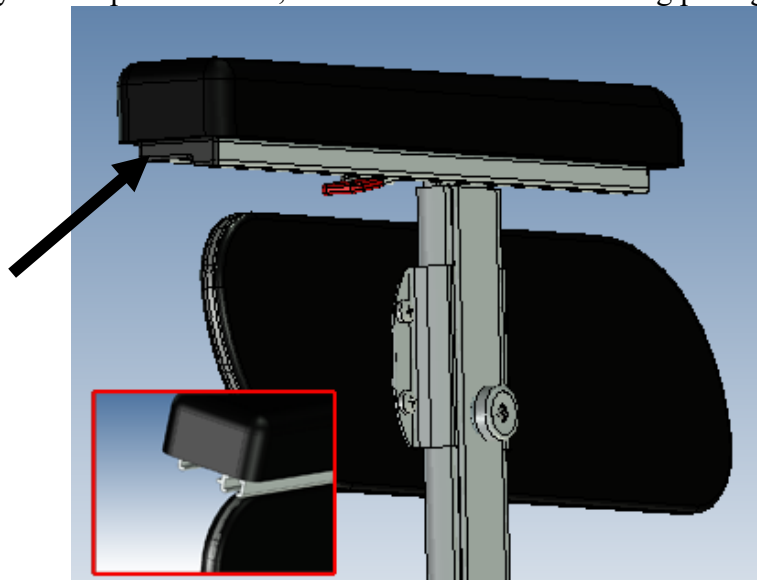


Demontera täcklocket.

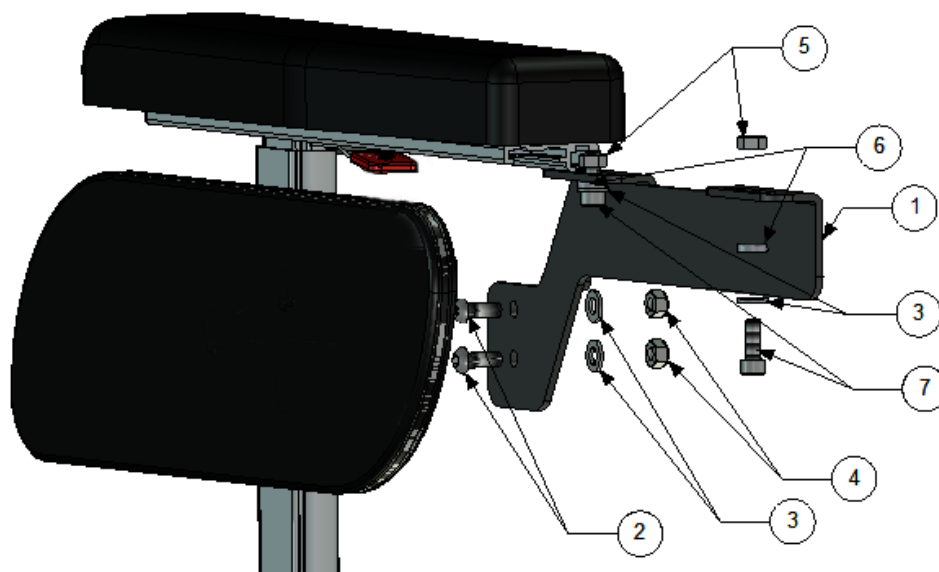

Montera enligt bilden ovan, drag inte åt skruvar med placering 7.

Placering	Detalj Nr.	Antal	Beskrivning
1	MED1500	1	Fäste
2	XSM6X16	2	Skruv - Rundad - M6 x 16
3	XSM6BR	4	Plan Bricka M6
4	XSM6ML	2	Låsmutter M6
5	XSM6M	2	Mutter M6
6	100 400 025	2	Distans
7	MC6SM6X16	2	Skruv M6 X 16

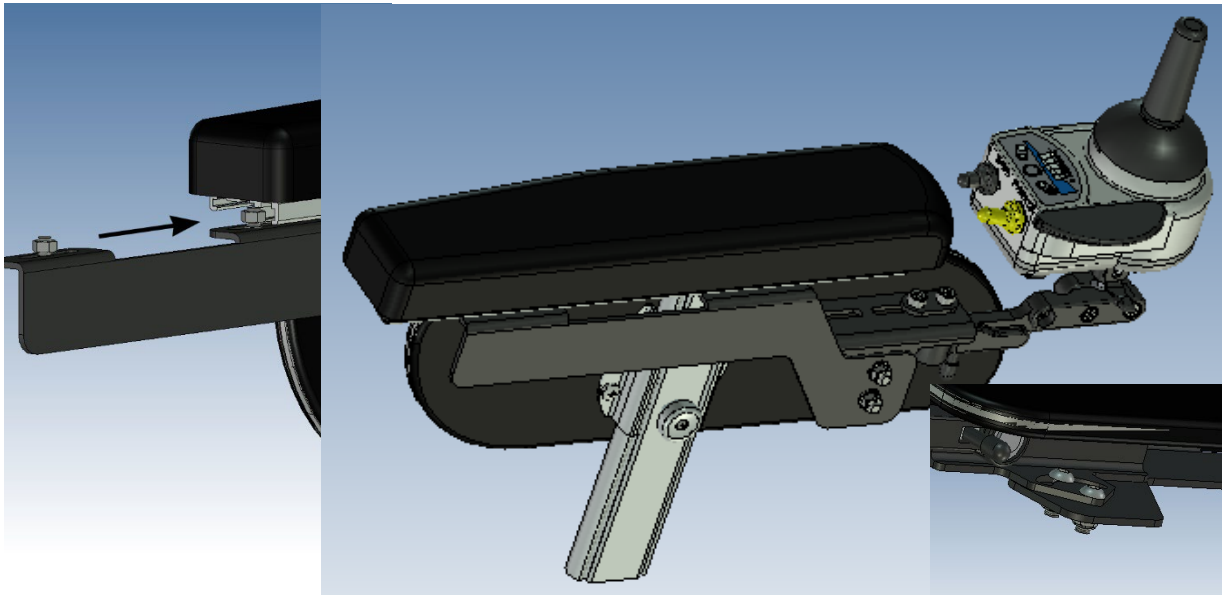

För fram fästet till önskad placering och drag åt skruvarna Nr.7.
Montera tillbaka täcklocket och montera på främre fästet med skruvarna Nr 2, brickorna Nr 3
och låsmuttrarna Nr 4.

Montering set Vänster sida: MED1418


Montering av Joystick med parallellarm MED1645

Montera nu joysticken på valfri sida, se bilder nedan för montering på högersida.

1. Börja nu med att demontera det bakre täcklocket på armstödet.
2. Montera M6 bultar, brickor och muttrar enligt bild och skjut i fästet i profilen och återmontera täcklocket.




3. Montera nu parallellarm och joystick enligt bild.
Justera joystickens placering till önskad position.
4. Dra åt alla skruvar och verifiera funktion.

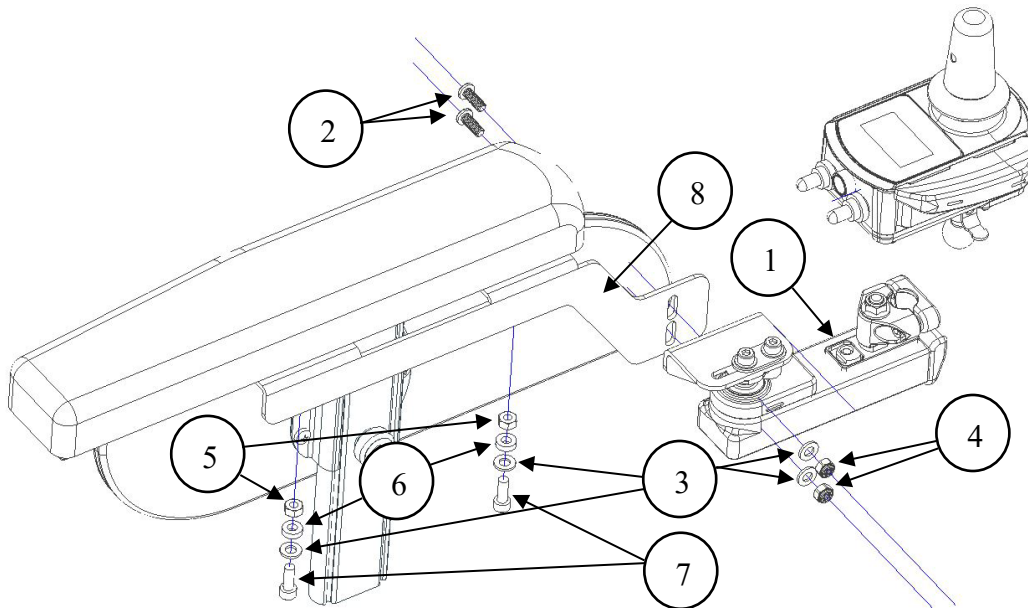

Placering	Detalj Nr.	Antal	Beskrivning
1	X0F-48160-D00	1	Övre fäste parallell
2	XSM6X16	2	Skruv rundad M6 x 16
3	XSM6BR	4	Plan Bricka M6
4	XSM6ML	2	Låsmutter M6
5	XSM6M	2	Mutter M6
6	100 400 025	2	Distans
7	MC6SM6X16	2	Skruv M6 X 16
8	MED1500	1	Fäste höger

För montering på vänster sidan skall MED1646 användas.


MED1356

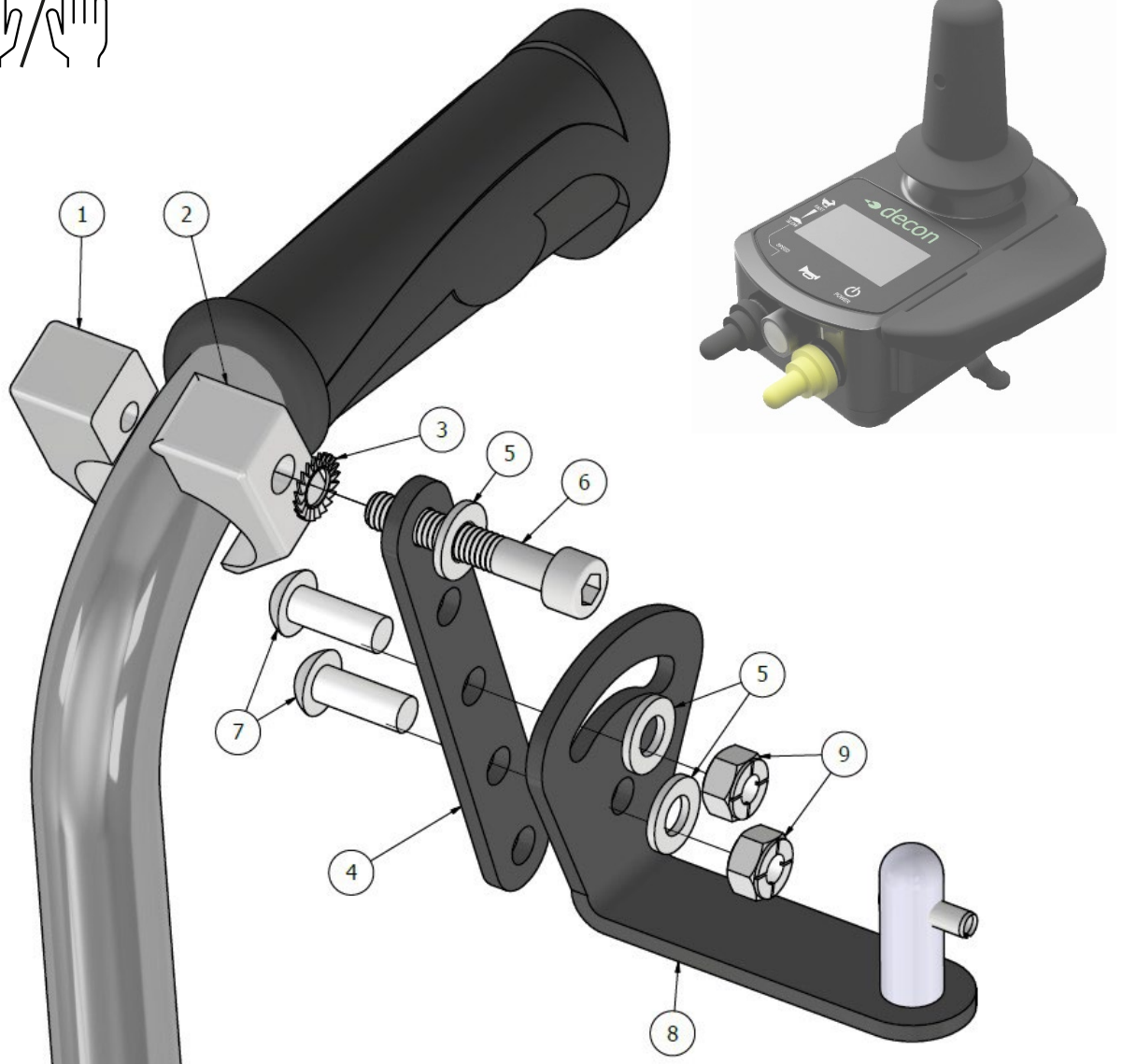

1	XA2-2612K-00	1	
2	XA2-2612E-00	1	
3	XSM6BRTG	1	
4	MED1317	1	
5	XSM6BR	3	
6	MC6SM6X35	1	
7	XSM6X16	2	
8	MED1316	1	
9	XSM6ML	2	

MED1226


Alternativ vårdar styrkontroll (Endast höger sida)

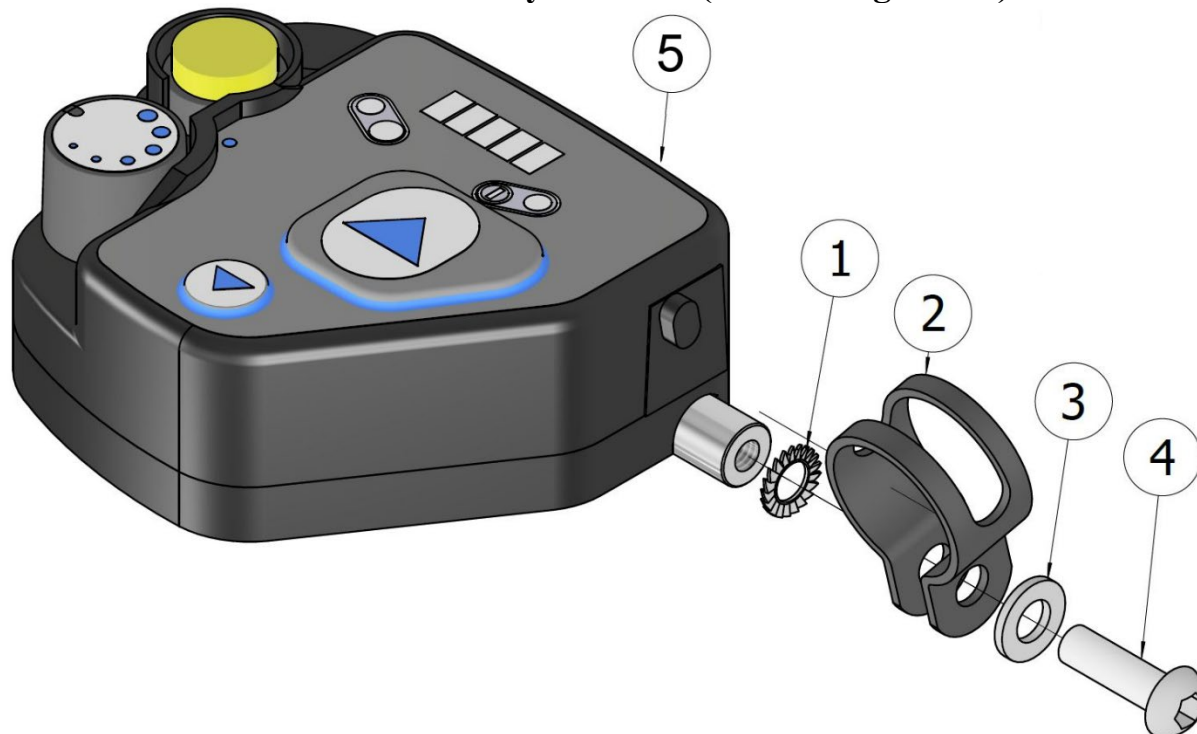

Placering.	Artikelnummer	Antal	Beskrivning
1	XSM6TG	1	Taggbricka
2	Xklamma2	1	Klamma
3	XSM6BR	1	Plan Bricka 6,4
4	XSM6X20	1	Skruv M6 x 20
5	MED1200	1	Vårdar styrkontroll

MED1643


Vårdastyrningen är även möjlig att montera på vänstersida. För detta behöver man komplettera med MED1643, vilken beställs separat.

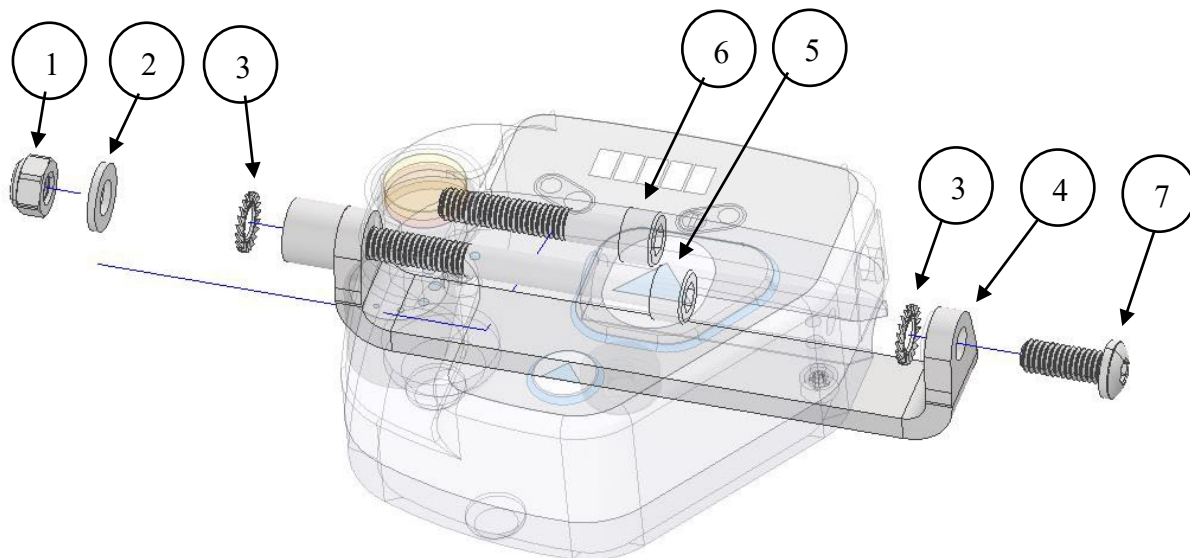

Använd antingen bult med placering 4 eller 5 beroende på vilken klämma som monterats på stolens handtagsrör. Den kortare passar plåtklämman och den gängade aluminiumklämman, den längre aluminiumklämman utan gängor.

Placering.	Artikelnummer	Antal	Beskrivning
1	XSM6M	1	Låsmutter M6
2	XSM6BR	1	Planbricka M6
3	XSM6BRTG	2	Taggbricka M6
4	MED1640	1	Fäste vårdstyrning vänster sida
5	MC6SM6X60	1	Bult M6x60
6	MC6SM6X35	1	Bult M6x35
7	MC6SM6X16	1	Bult M6x16

Broms Montering MED1452

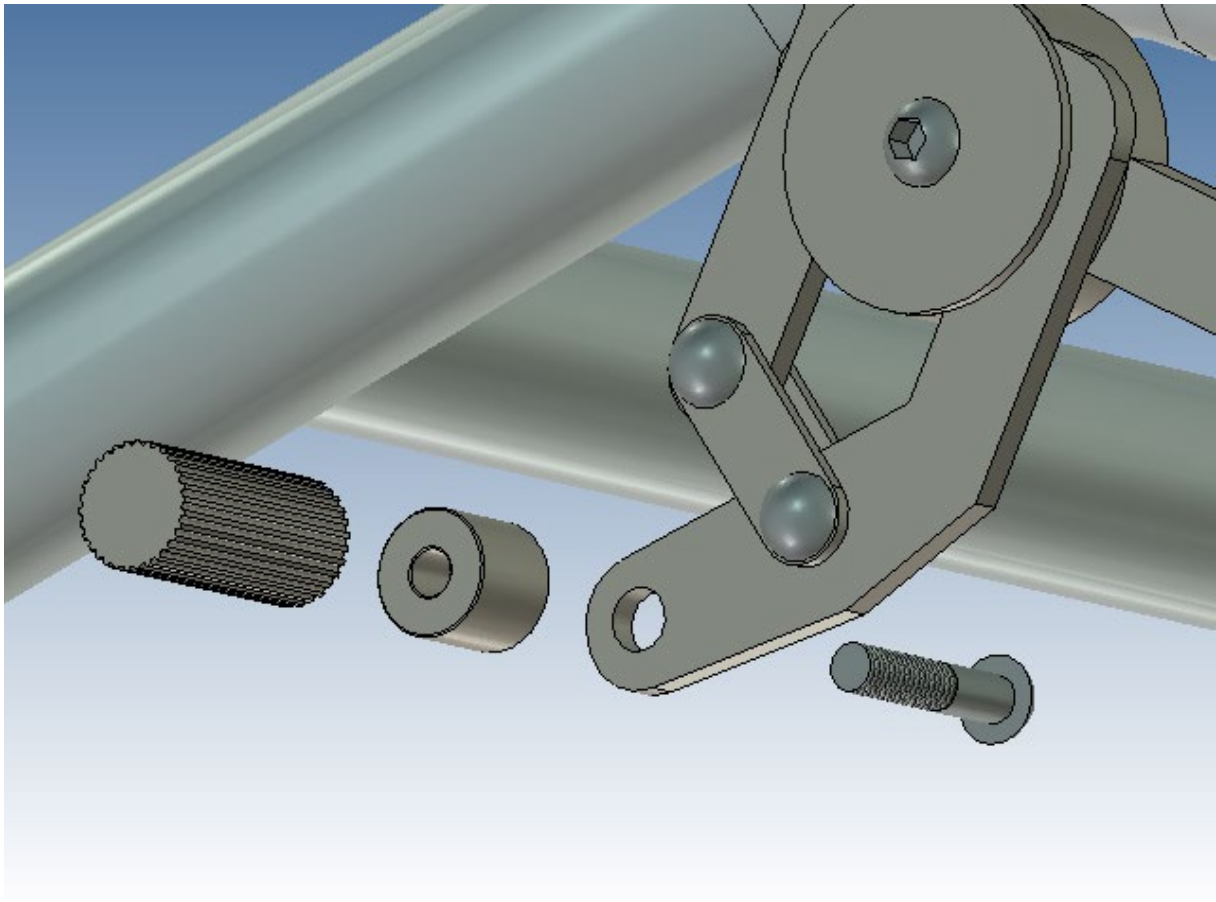

7. Detaljer för förlängning av bromsspinnen

Placering	Art.Nr.	Antal	Beskrivning
1	100 400 044	1	Distans
2	XSM6X30	1	Skruv rundad M6 x 30

Kom ihåg att stolens totala bredd ökar med 20 mm.



**Om inget annat specificeras, använd följande åtdragningsmoment.
Unless otherwise specified, use the following tightening torque.**

Metrisk grovgängor, stål.
Metric coarse threads, steel.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

Navhylsor.
Hubsleevers.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M16x1	30 Nm
M18x1	40 Nm