



Monterings anvisning Azalea, Azalea Minor, Azalea Assist MEM6059 och MEM6060

1. Demontera hjulen på båda sidorna.
Demontera nav med bromsar om detta är monterat.

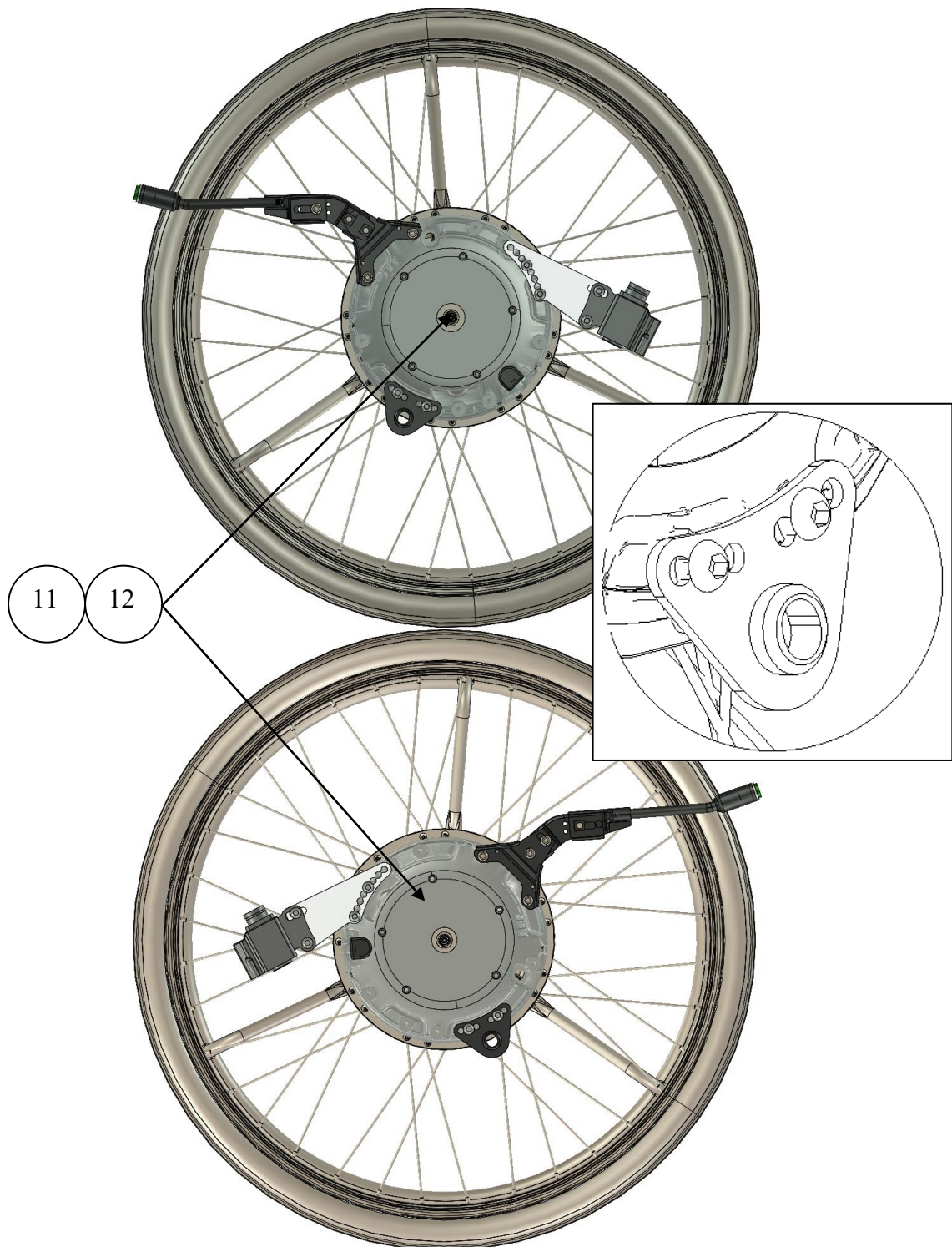

2. Förbered nu hjulet enligt bilderna ovan med följande:
 - Axel Ø12,7 x 51 med Detalj Nummer: XOE-2530E-C0
 - Distanser med Detalj Nummer: XOC-25383-00.

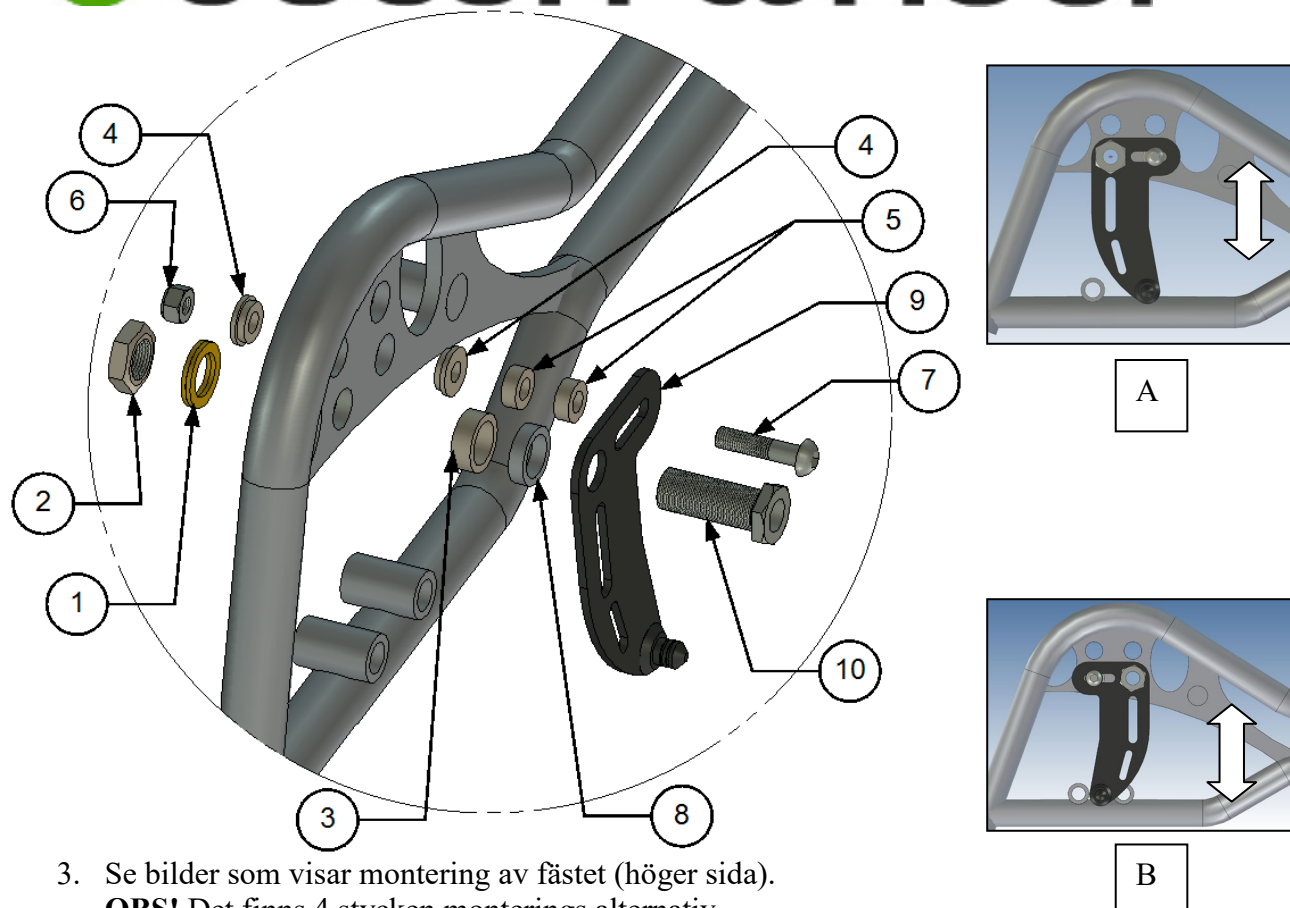

3. Se bilder som visar montering av fästet (höger sida).

OBS! Det finns 4 stycken monterings alternativ.

4. Detaljer som ingår för montering av fästet på en sida.

Placering	Art.Nr.	Antal	Beskrivning
1	405239	1	Nordlock Bricka
2	XSM16M	1	Mutter M16X1 Låg
3	100 400 006	1	Distans
4	100 400 007	2	Distans
5	100 400 002	2	Distans
6	XSM8ML	1	Låsmutter - M8,0
7	XSM8X35	1	Skruv M8 x 35
8	100 400 005	1	Distans
9	XOE-22294-BO	1	Höger Fäste
10	HW069	1	Navhylsa M16x1/12,7
11	XOC-25383-00	1	Distans 12,7
12	93440-120520	1	Spårring

OBS! Vid separat köp av monteringsatts medföljer ej axel, axel distans eller spårring, för byte se servicebok.

5. Montera nu den rygghängda batteri väskan.