



**Monteringsanvisning Panthera
Bambino, S3/U3
MEM6003-30 och MEM6004-30
Typ 30**

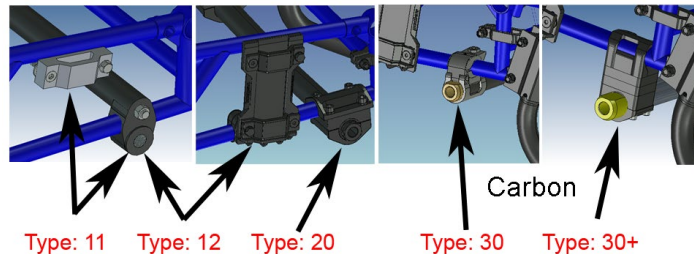

1. Kontrollera att det är modell.
2. Demontera hjulen på båda sidorna.

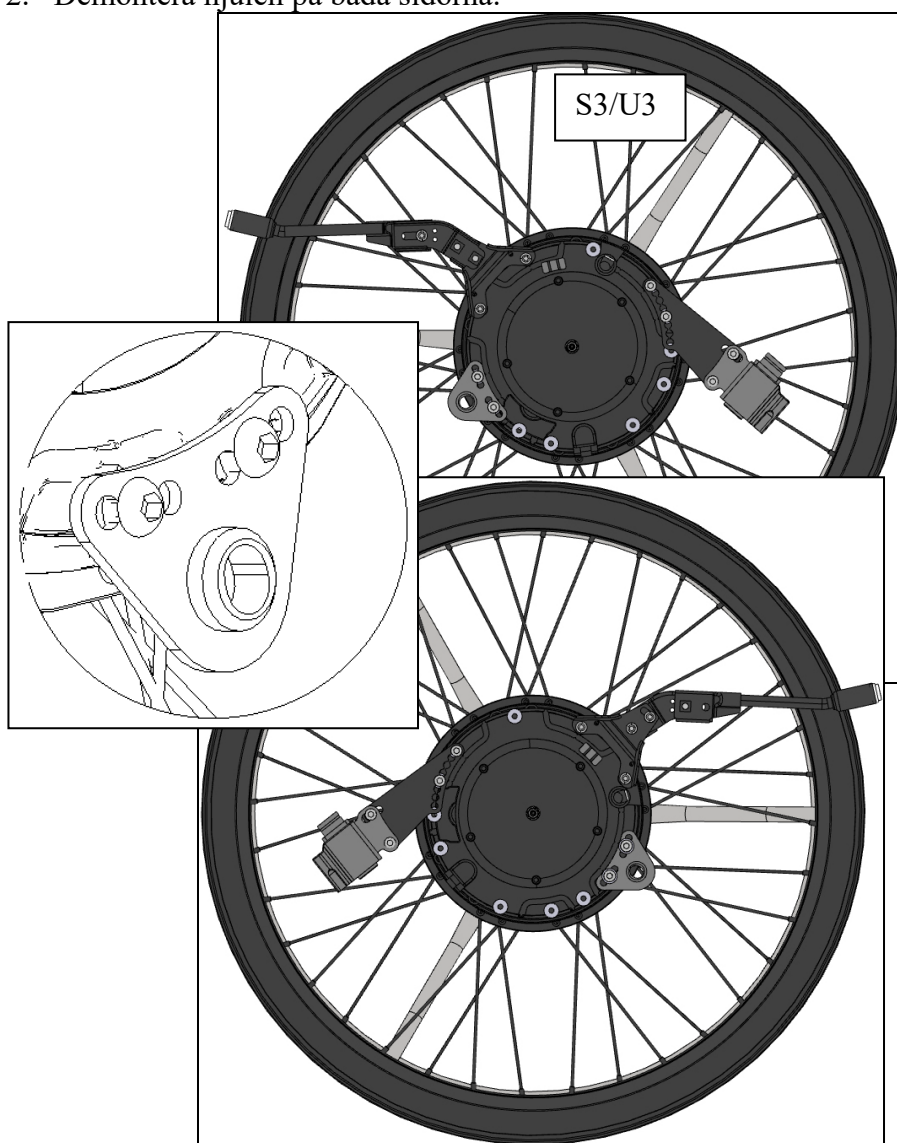

3. Förbered eMove enligt bilder ovan, samt att det är axel Ø12,7 x 46 Detalj Nummer: XOE-2530E-00.

För montering på en sida, så skall följande ingå.


*Vid tveksamheter vilken bakaxel ni har, så kan ni se länken nedan.

Vid separat köp av monteringssats medföljer ej axel, för byte se servicebok.

5. Montera den underhängda batteriväskan eller om du har beställt Litiumbatteri så monterar du batteri hållaren. Se bild som följer för rätt modell.


OBS!

Tänk på att den under hängda batteriväskan och batteriboxen är i vägen för tippskydden när dessa skall fällas in. Detta går att komma ifrån genom att beställa en rygghängd batteriväska istället för standardväskan eller så används den medföljande plastklämma till att fästa ihop tippskydden med varandra, se bilden nedan. Monteringen av klämman kan behöva anpassas till aktuell stolsbredd. Nedan följer två monteringsexempel.

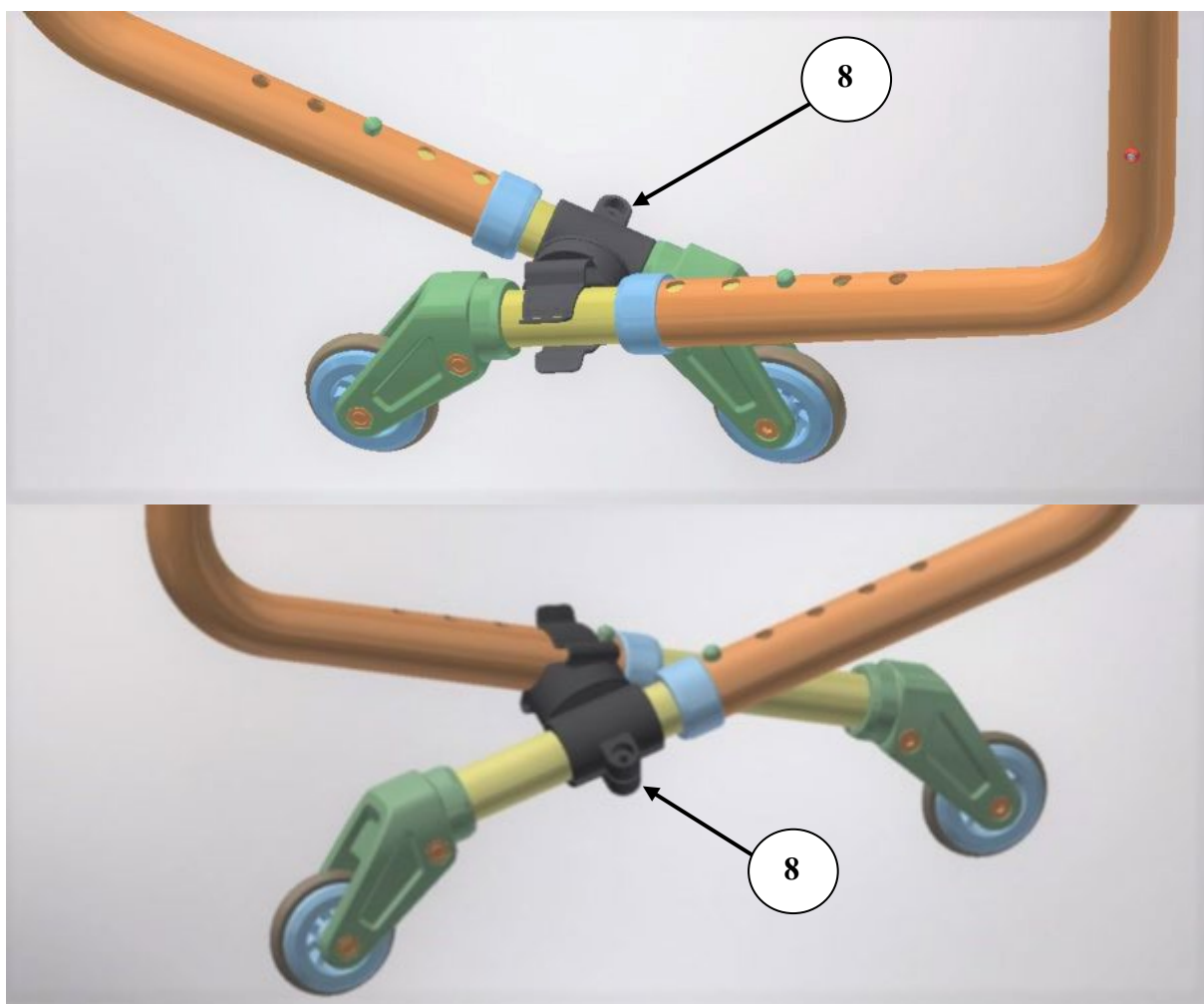

8	350070	1	Klämma tippskydd S3/U3
---	--------	---	------------------------



MEM5014

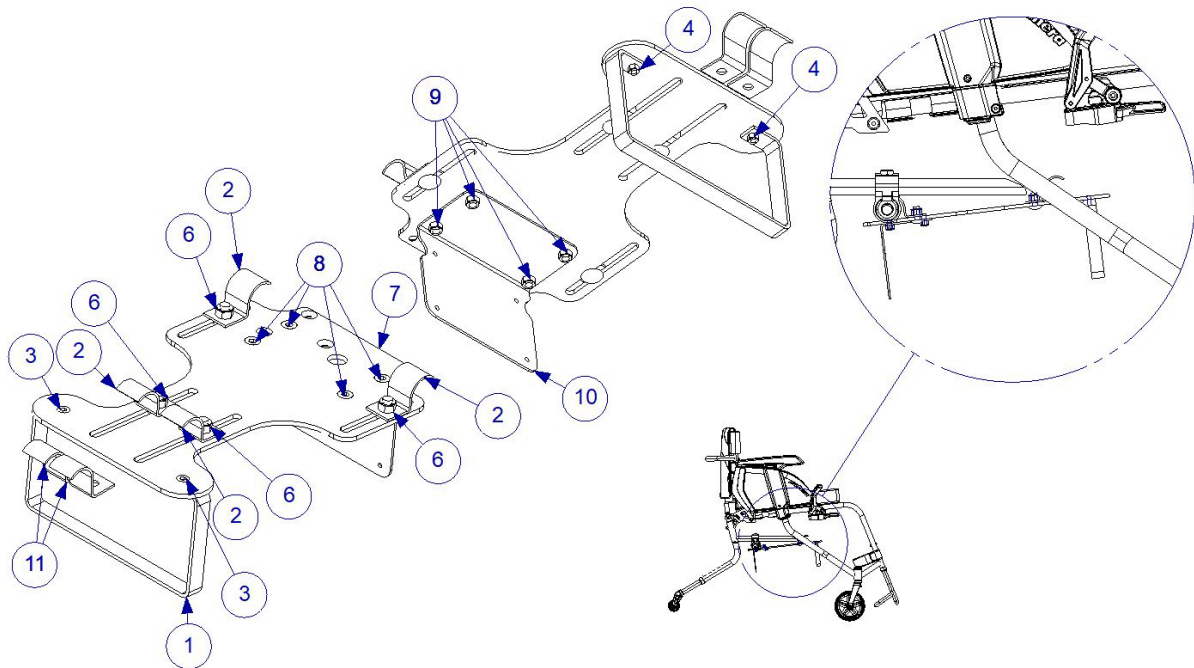

1	MEM5002	1	
2	MEM5003	4	
3	XSFM5X12	2	
4	XSM5ML	2	
5	XSSM8X16	4	
6	XSM8ML	4	
7	MED5001	1	
8	XSFM6X12	4	
9	XSM6ML	4	
10	MEM5011	1	
11	MEM5004	2	

OBS! Bambino inkluderas inte.


300201

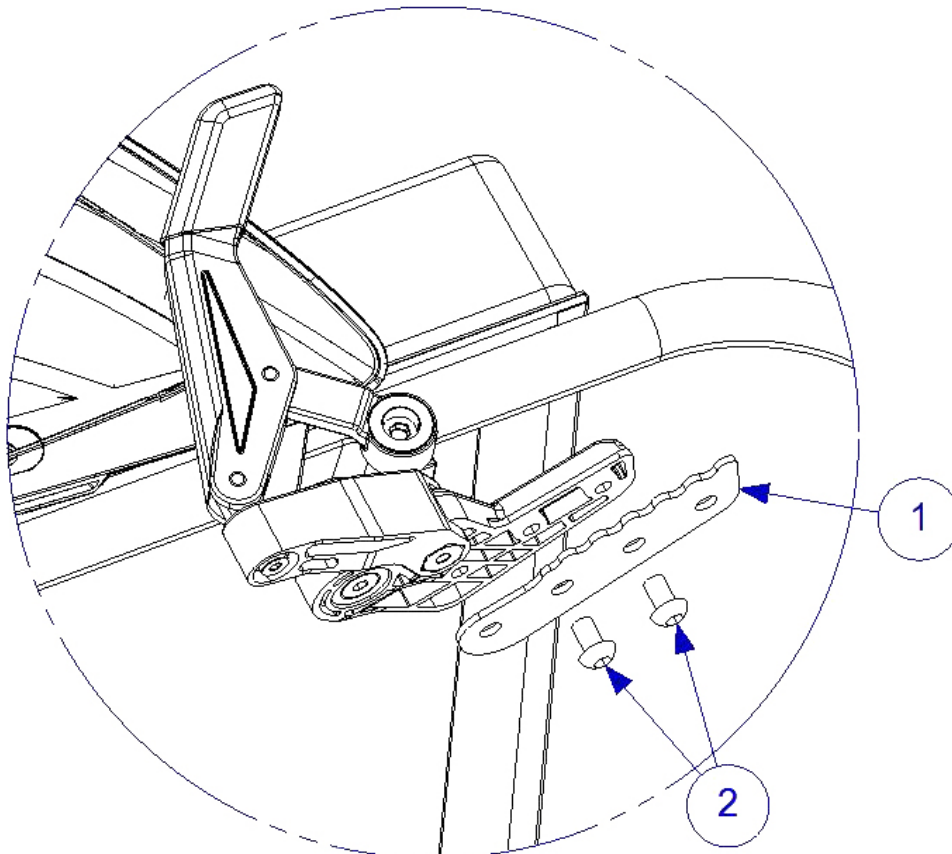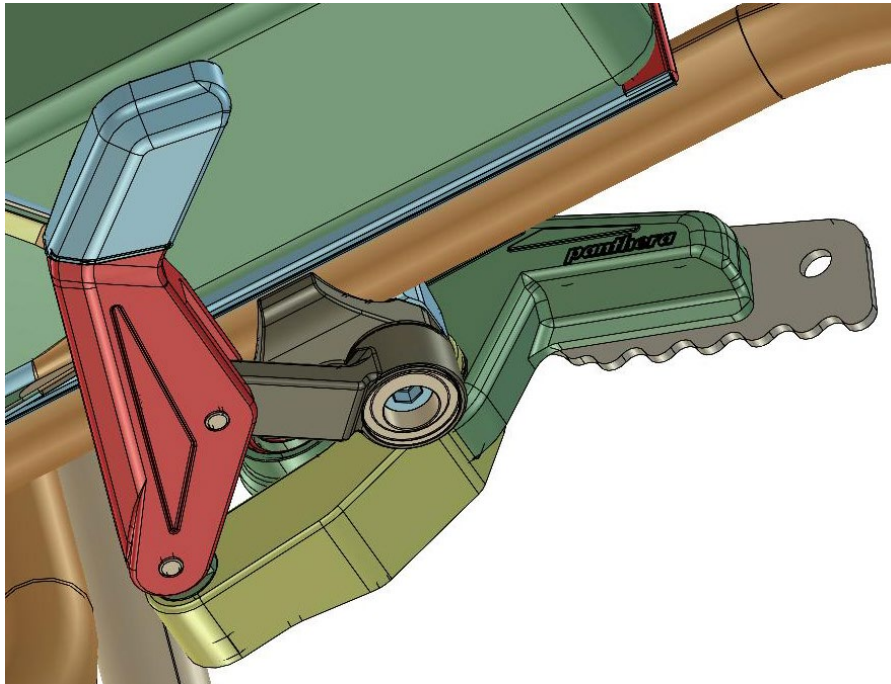

1	300200	1	
2	XSM6X10	2	



M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

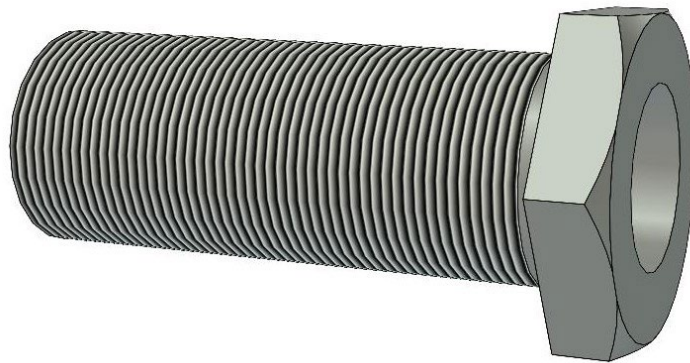

M16x1	30 Nm
M18x1	40 Nm