

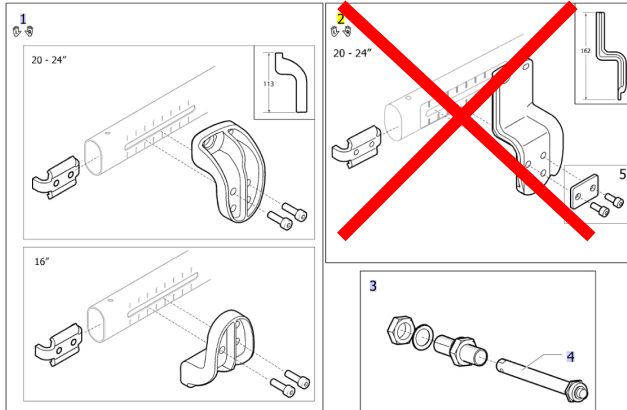


Monteringsanvisning för Rea Dahlia MED3126


1. Kontrollera att ni har rätt modell.

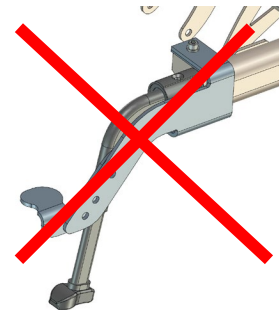


2. Montera rygghängd batteriväska. Om det ej är möjligt på grund av annan medicinteknisk utrustning, måste ni ha följande Tillbehörskorg med Artikel Nummer: 1574433 från Invacare. Denna detalj måste användas för montering av batteriboxen. Tänk på att det inte går att använda en tilt-pedal om detta monteras.

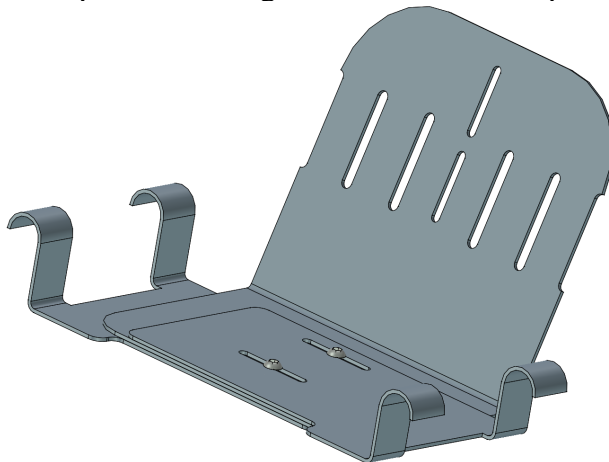

3. Demontering av hjul, broms, adapterfäste samt bromshandtag på båda sidor.

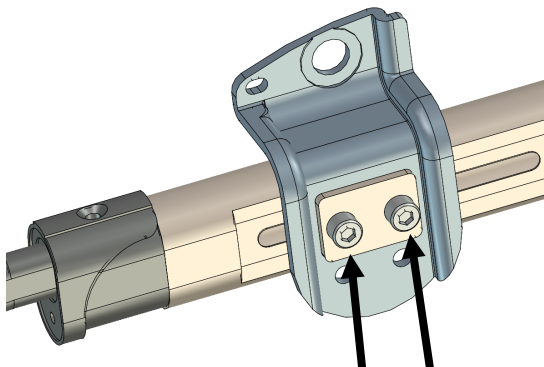


4. Det lättaste sättet att demontera dessa detaljer är genom att lossa skruvarna för adapterfästet på båda sidorna, därefter lyftes hela rullstolen rakt upp. Lossa därefter bromshantagen. Kom ihåg att ta vara på skruvarna och (plattan) som kommer att återanvändas för montering av dem nya fästena.

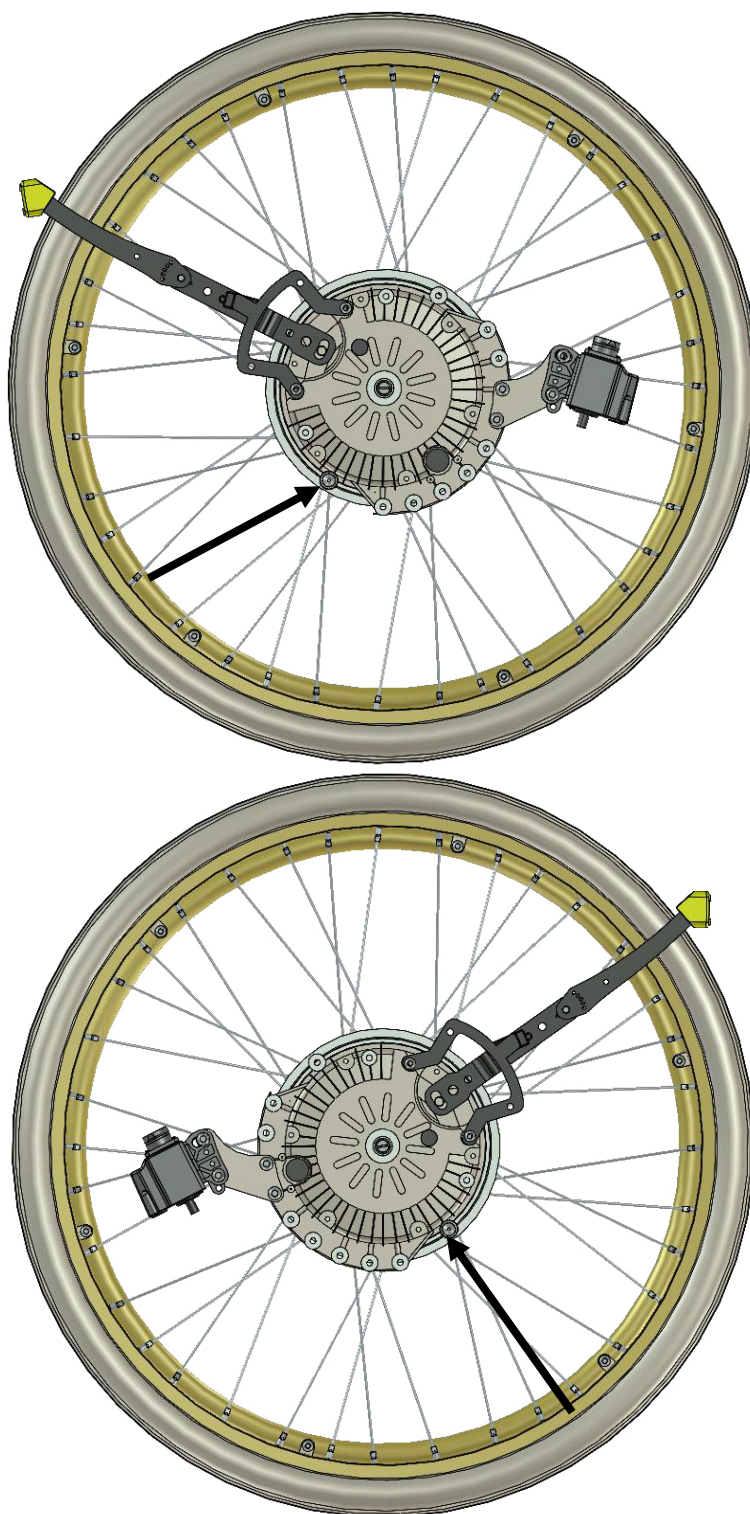


5. Kontrollera att stopp pinnen sitter enligt bilderna ovan.

Montering av Tillbehörskorgen för Batteribox

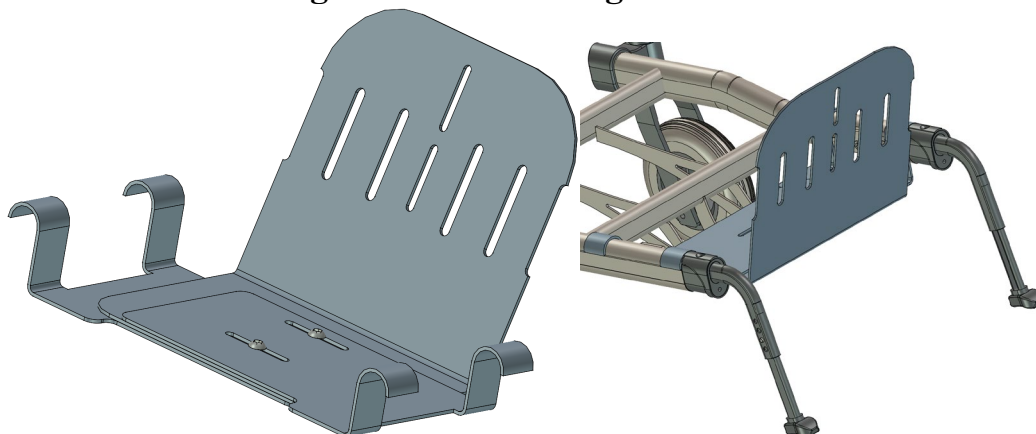


6. Följ monterings instruktion av Tillbehörs Korgen från Invacare.

MED4053

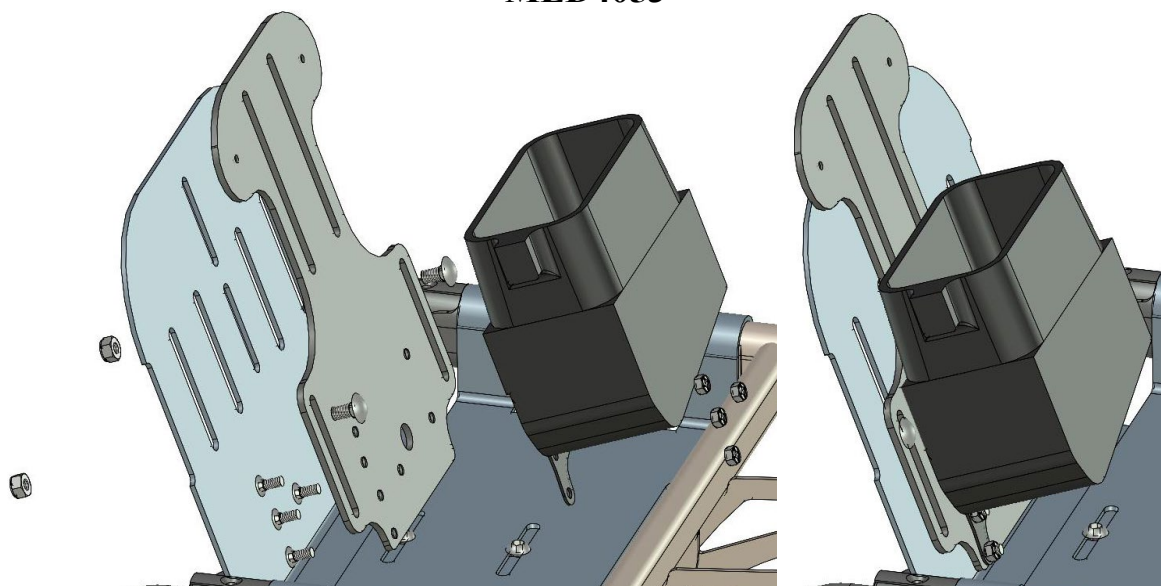


1	XSM6ML	4	
2	XSFM6X16	4	
3	XSM8ML	2	
4	XSSM8X16	2	
5	MED5001	1	

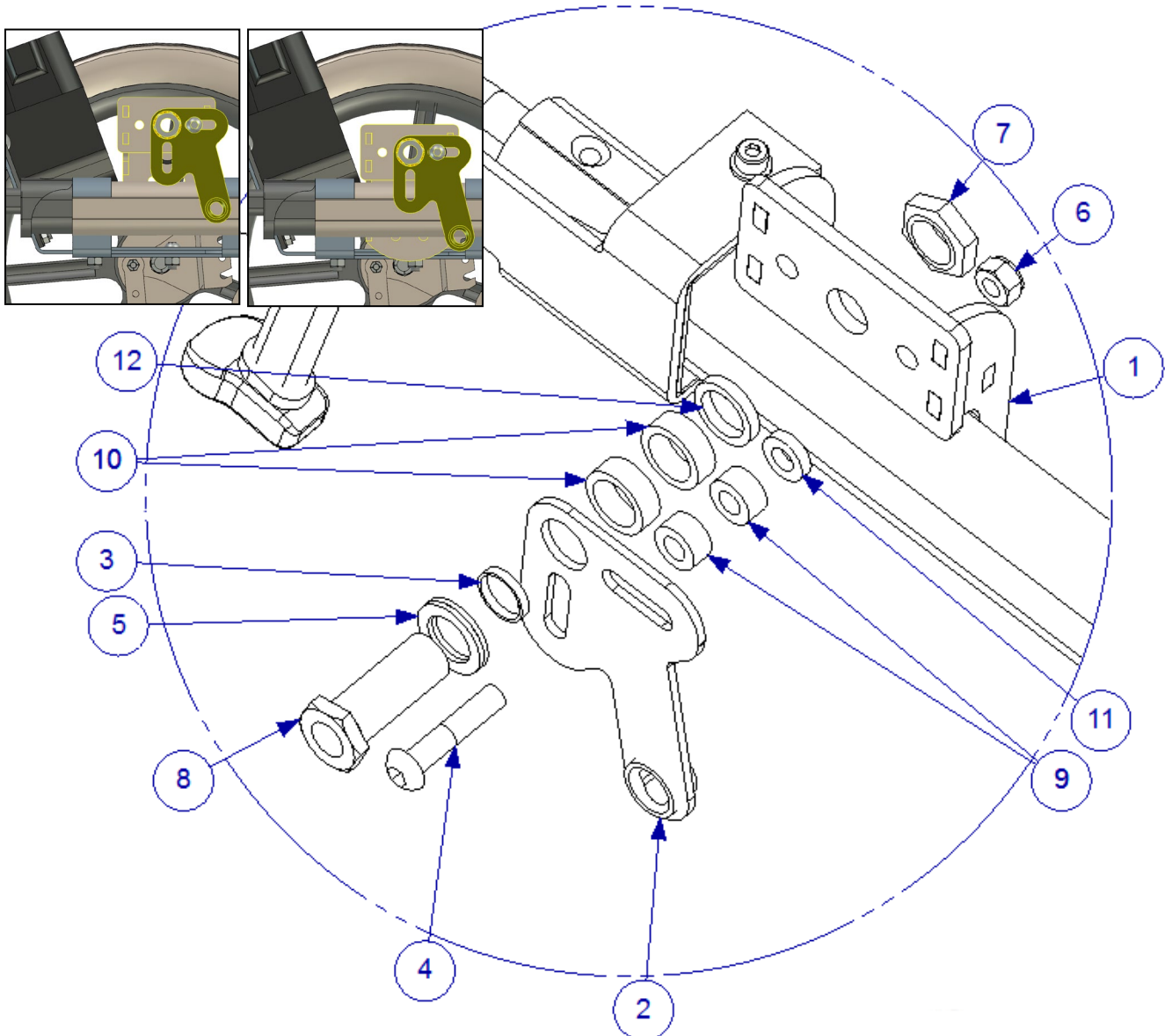


1	MED3123-01	1	
2	MED2000	1	
3	100 400 017	1	
4	XSM8X35	1	
5	405239	1	
6	XSM8ML	1	
7	XSM16M	1	
8	HW069	1	
9	100 400 003	2	
10	100 400 006	2	
11	100 400 001	1	
12	100 400 004	1	

Montering av Joystick MED4025

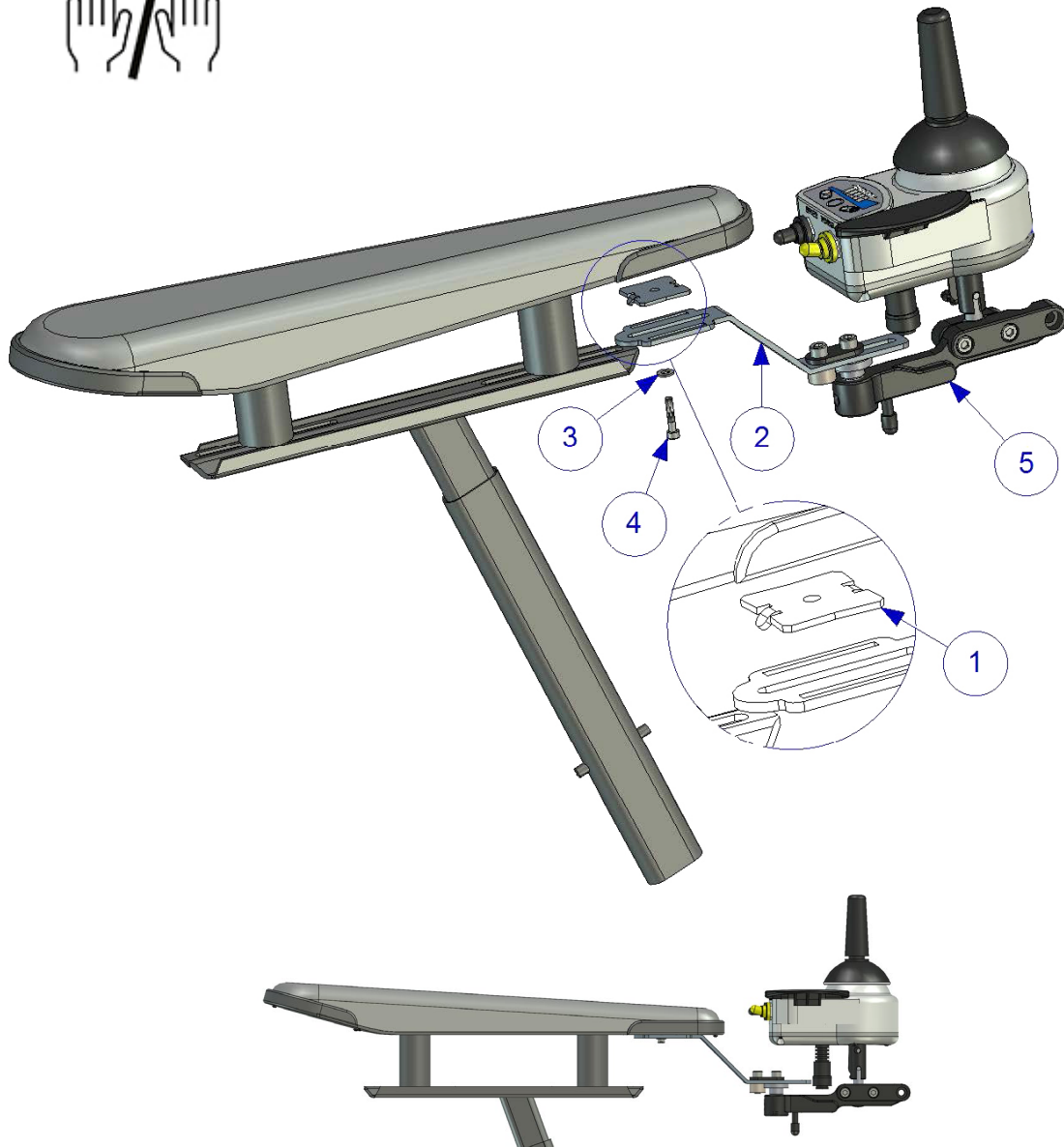


1	MED3123-05	1	
2	MED1505	1	
3	XSM4BR	1	
4	MC6SM4X20	1	
5	XOC-48160-B0	1	

Montering av vårdarstyrning med Joystick (båda sidor) MED1356

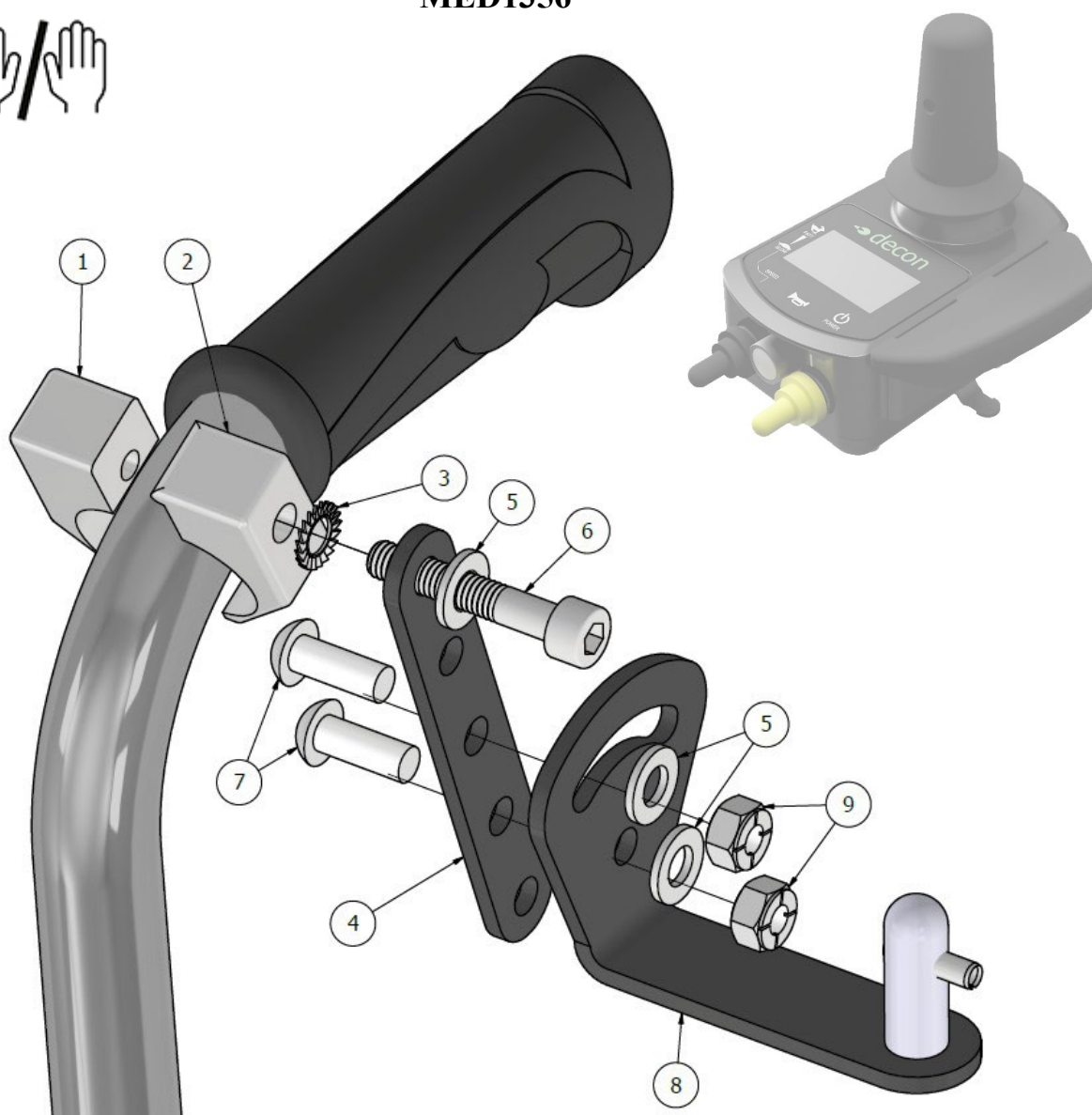

1	XA2-2612K-00	1	
2	XA2-2612E-00	1	
3	XSM6BRTG	1	
4	MED1317	1	
5	XSM6BR	3	
6	MC6SM6X35	1	
7	XSM6X16	2	
8	MED1316	1	
9	XSM6ML	2	

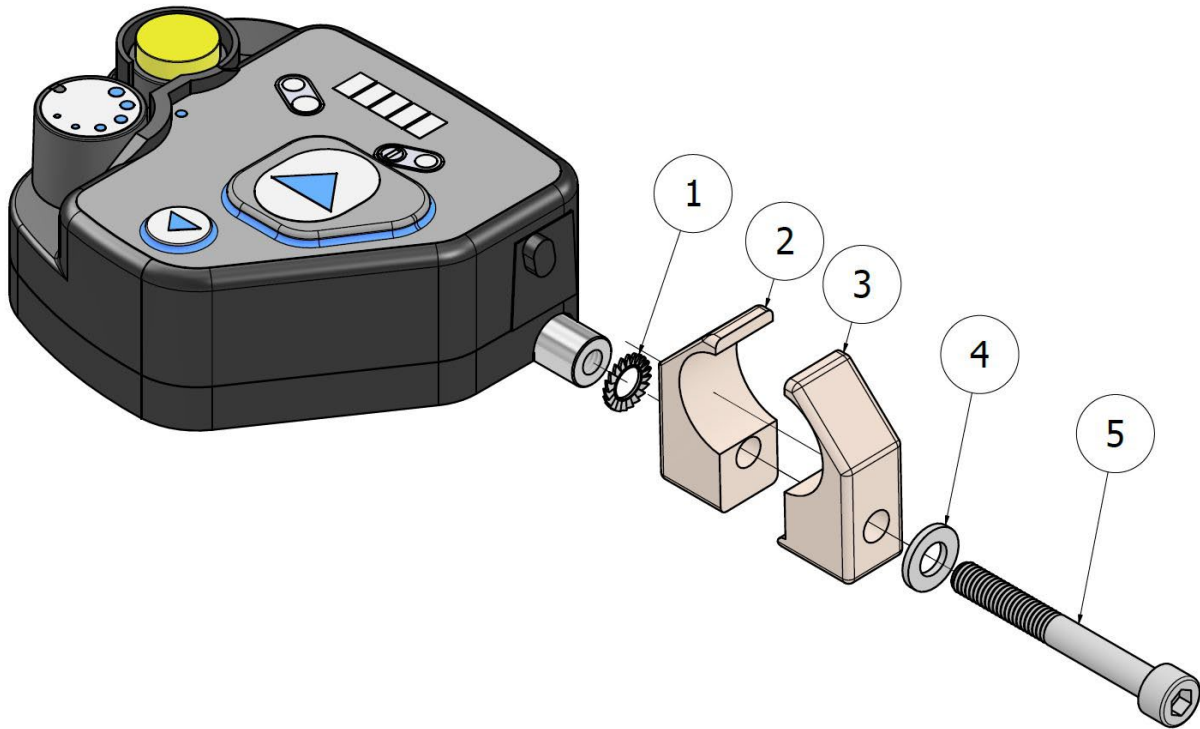


1	XSM6BRTG	1	
2	XOD-2612K-00	1	
3	XA2-2612E-00	1	
4	XSM6BR	1	
5	MC6SM6X50	1	



MED1218 + MED1643



M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

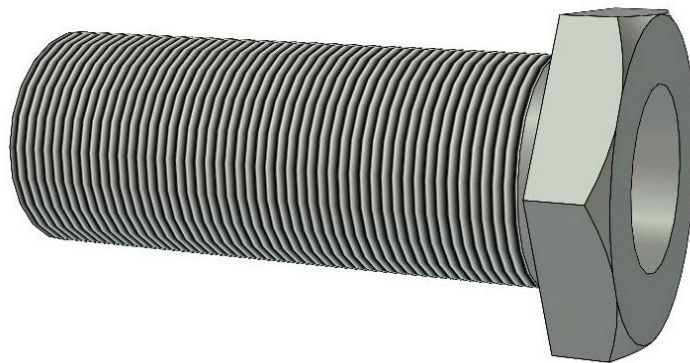

M16x1	30 Nm
M18x1	40 Nm