

Monteringsanvisning E-Walk på modell Etac Transit SB35




MCG1105_SB35

1. Demontera hjulen muttrar på båda sidorna.

OBS!

eWalk måste ha sidostycke 391155 och 391160 monterat.

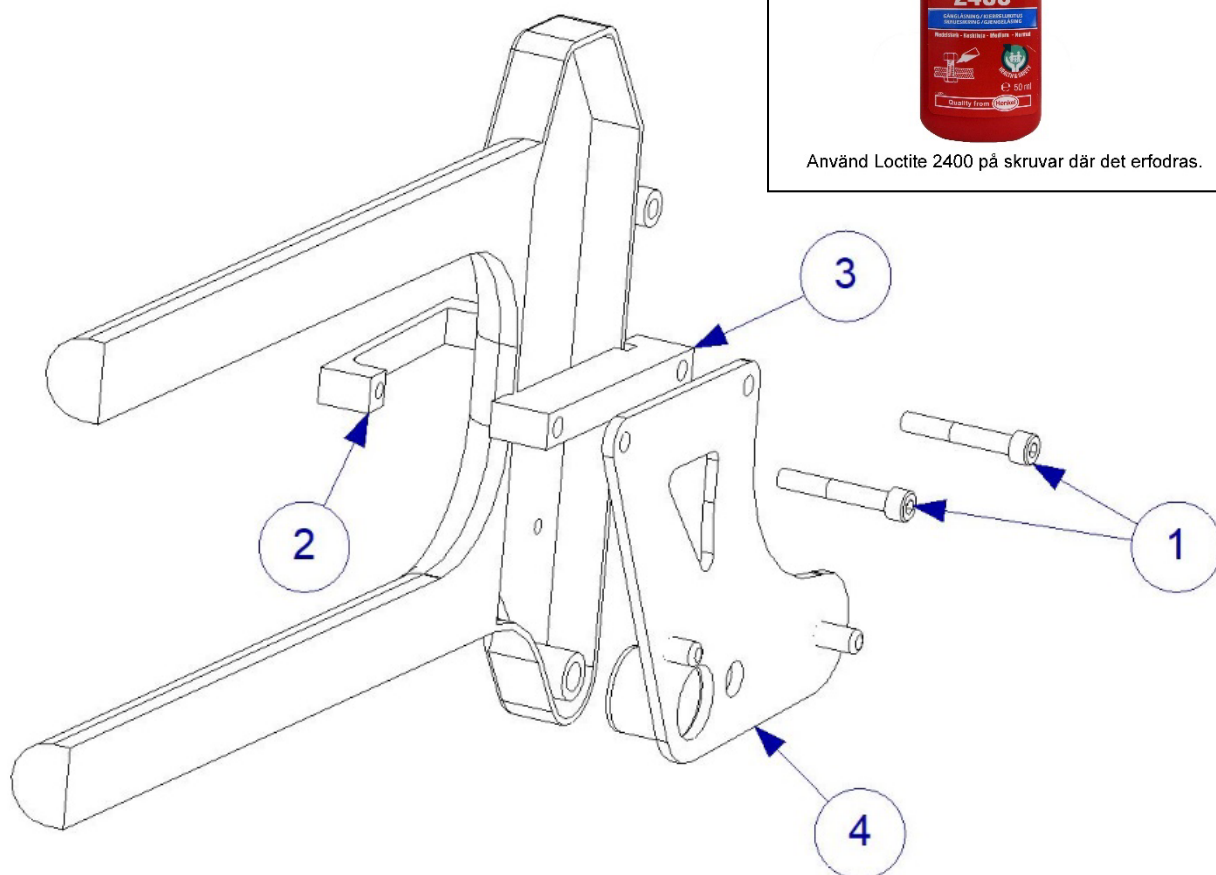

2. Montering av fästet på höger sida, se bild ovan.
För montering på en sida, så skall följande ingå.

Placering	Detalj Nummer	Antal	Beskrivning
1	XSM8X50	2	Skruv M8 x 50
2	MCG1105-03	1	Transit fäste2
3	MCG1105-04	1	Transit fäste3
4	MCG1105_SB35R	1	Höger Fäste

3. Montera tillbaka hjulmuttern och upprepa monteringen på andra sidan.

Om inget annat specificeras, använd följande åtdragningsmoment.
Unless otherwise specified, use the following tightening torque.

Metriska grovgängor, stål.
Metric coarse threads, steel.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm