

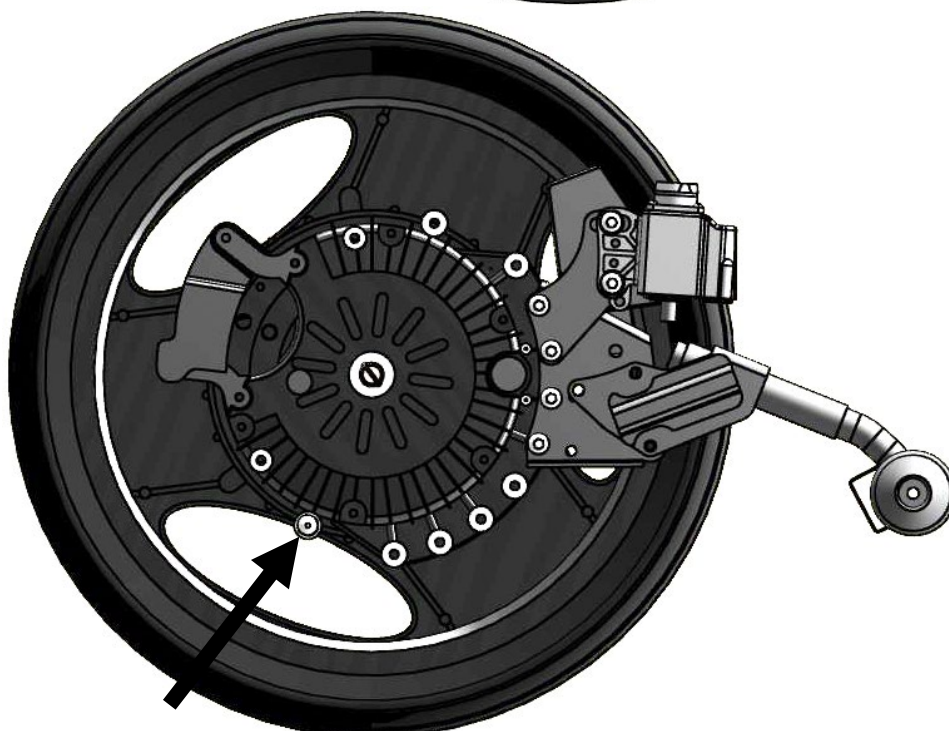


Monteringsanvisning för Transit med e-drive 16"
MED3039

1. Demontera hjul samt tippskydd på båda sidorna av rullstolen.

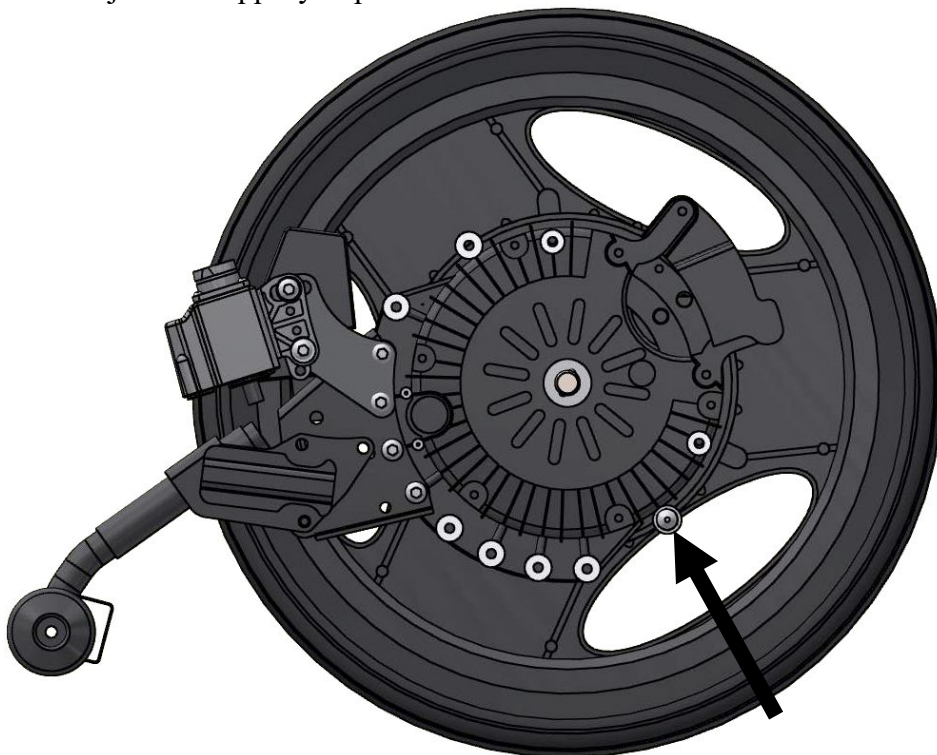

2. Kontrollera att stopp pinnen sitter enligt bilderna ovan.

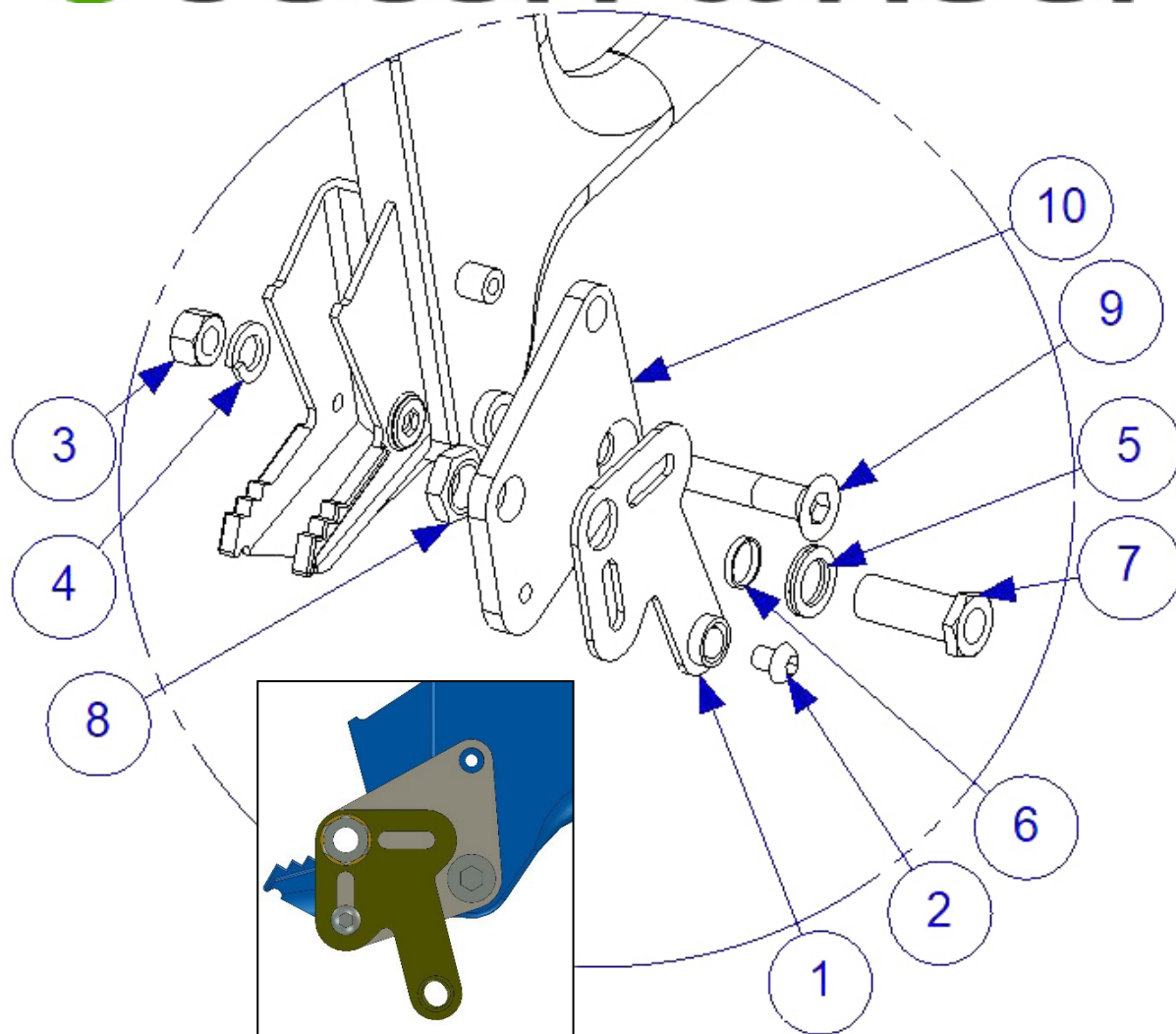


3. Montera fästet enligt bilderna ovan, visar montering på höger sida.

Följande ingår i ett monteringsset.

Placering	Art. Nr:	Antal	Beskrivning
1	MED2000	1	Fäste
2	XSM8X10	1	Skruv M8 x 10
3	XSM12ML	1	Låsmutter M12
4	XSM12FJ	1	Fjäderbricka M12
5	405239	1	Nordlock Bricka M16
6	100 400 017	1	Distans
7	HW069	1	Navhylsa M16x1/12,7
8	XSM16M	1	Mutter M16X1 Låg
9	XSFM12X50	1	Försänkt skruv M12 x 50
10	MED3039R	1	Fäste Transit Höger


4. Montera nu den rygghängda batteriväskan.


MED1348, MED1348L

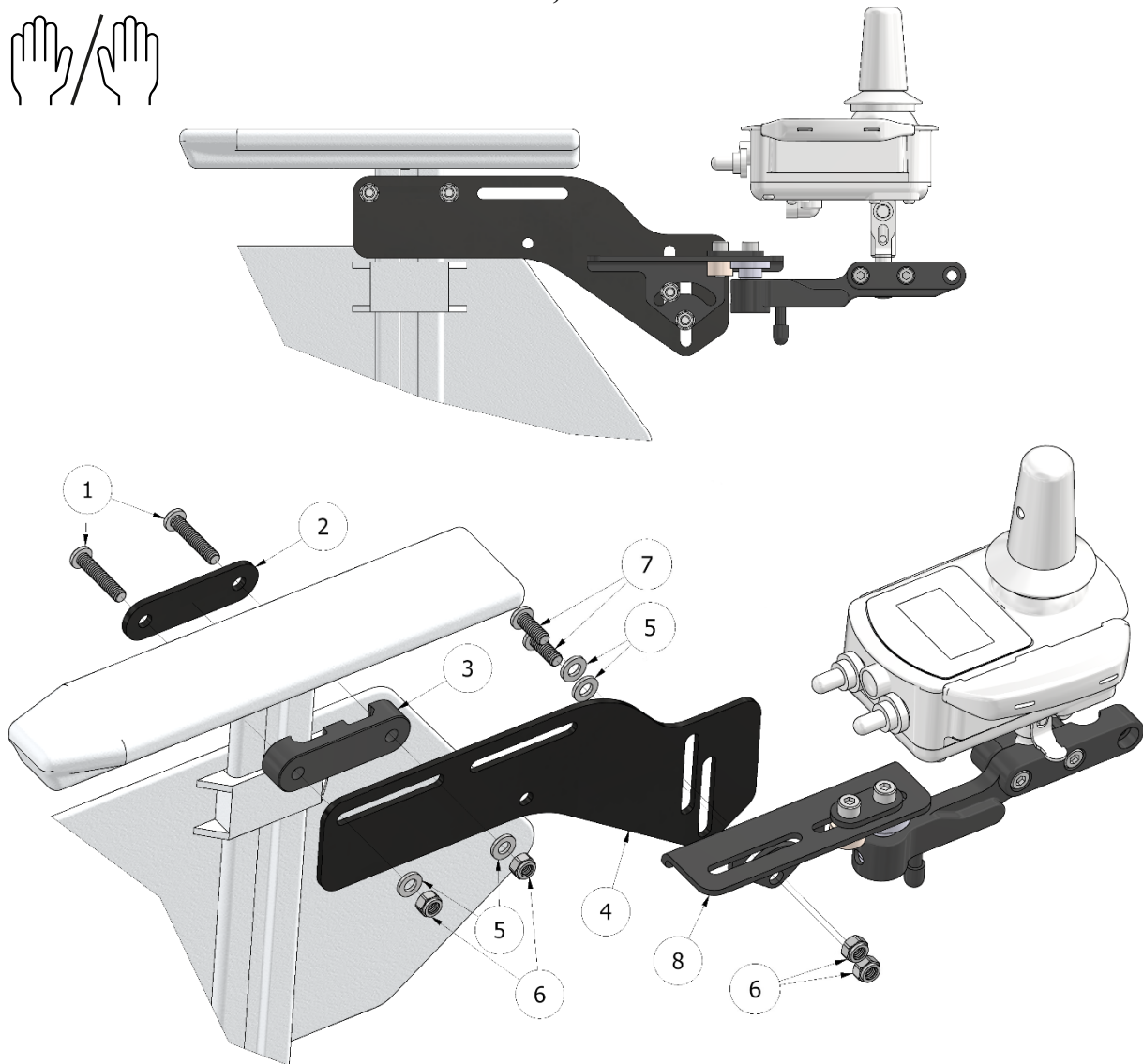


1	XSM6X30	2	
2	MED1547	1	
3	MED4078	1	
4	MED1501	1	 (MED1348)
4	MED1482	1	 (MED1348L)
5	XSM6BR	4	
6	XSM6ML	4	
7	XSM6X16	2	
8	XOC-48160-B0	1	

MED1644, MED1644L

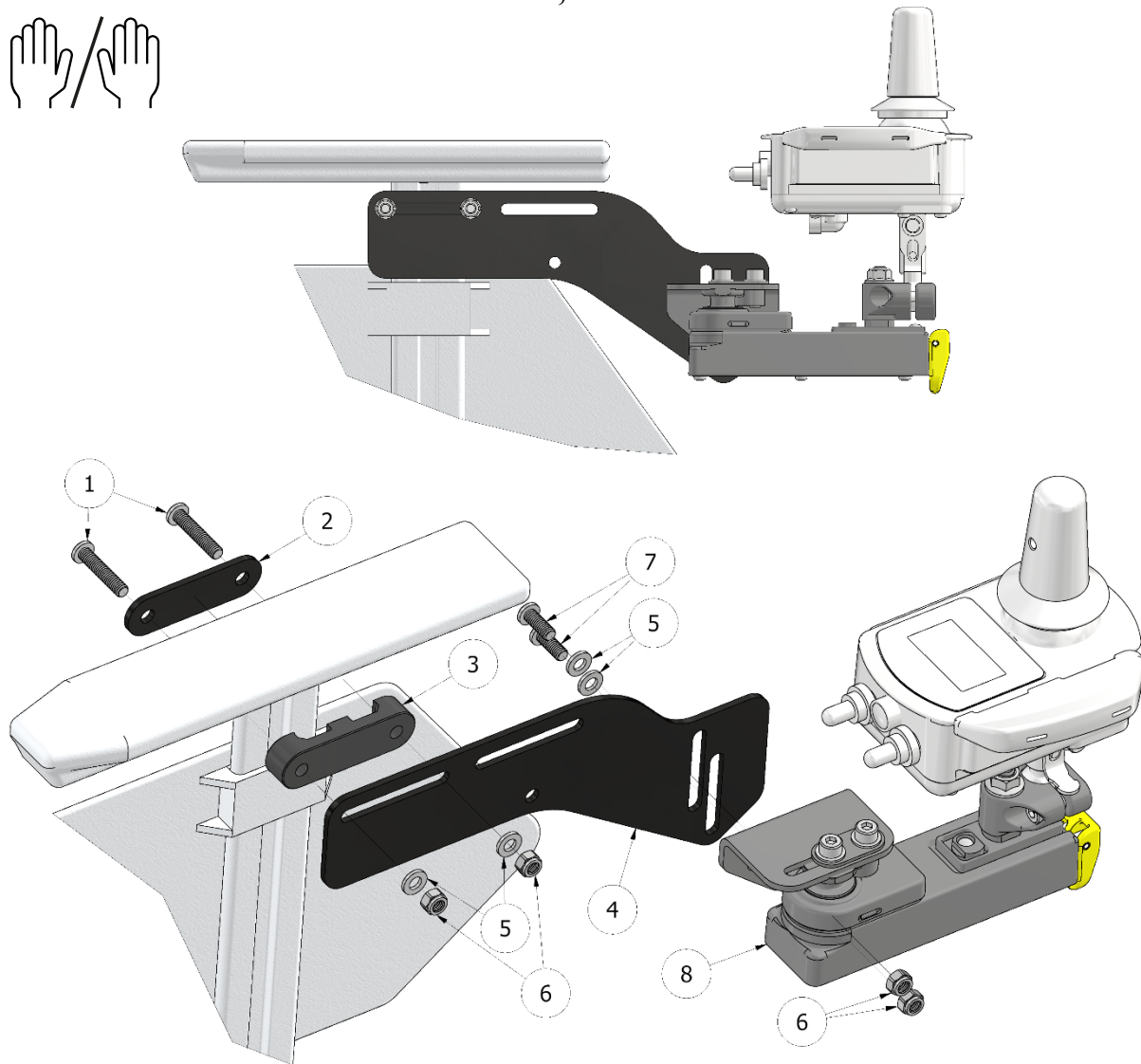

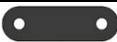
1	XSM6X30	2		
2	MED1547	1		
3	MED4078	1		
4	MED1501	1		(MED1644)
4	MED1482	1		(MED1644L)
5	XSM6BR	4		
6	XSM6ML	4		
7	XSM6X16	2		
8	X0F-48160-D00	1		

MED1356

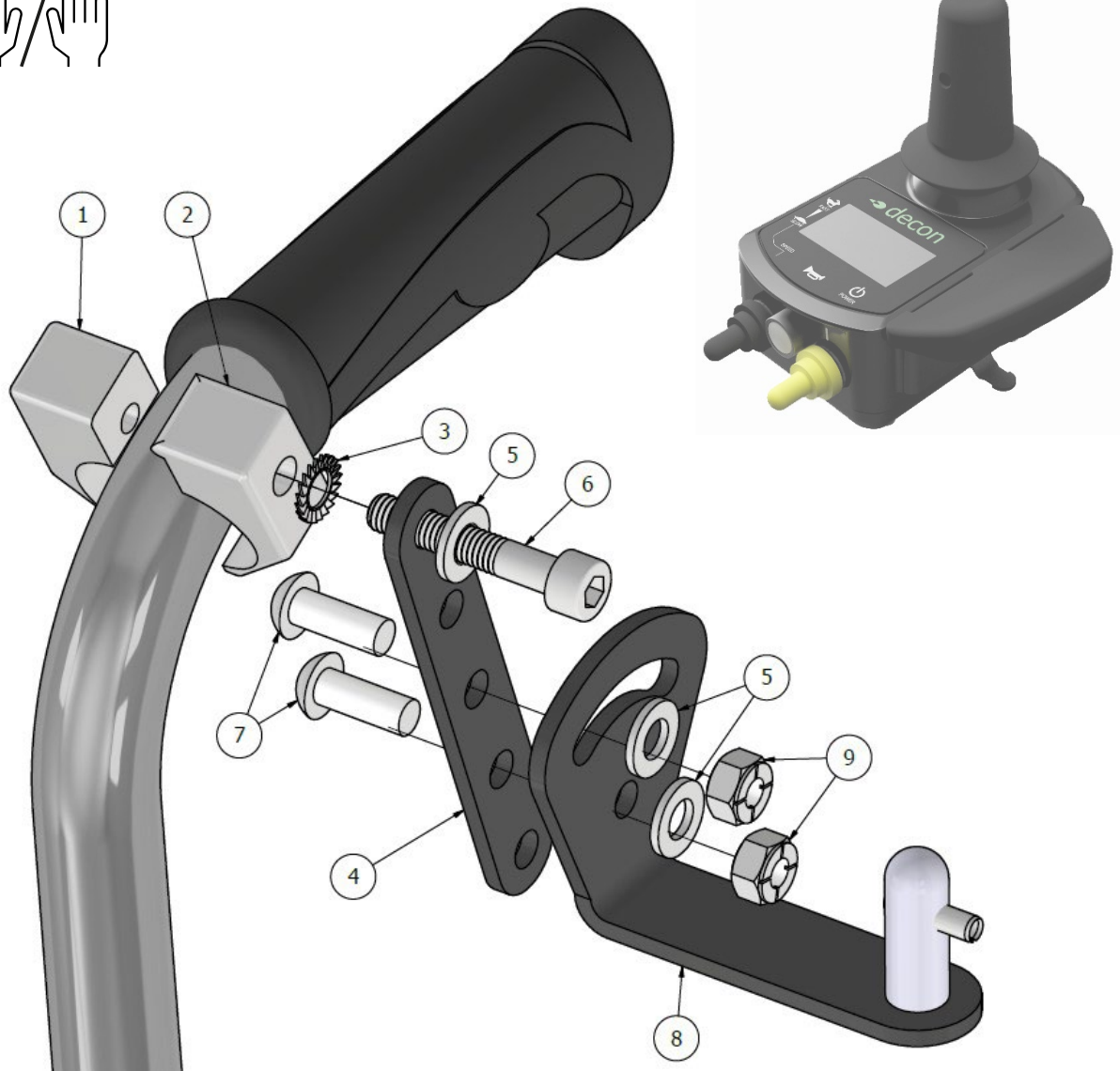

1	XA2-2612K-00	1	
2	XA2-2612E-00	1	
3	XSM6BRTG	1	
4	MED1317	1	
5	XSM6BR	3	
6	MC6SM6X35	1	
7	XSM6X16	2	
8	MED1316	1	
9	XSM6ML	2	

MED1252

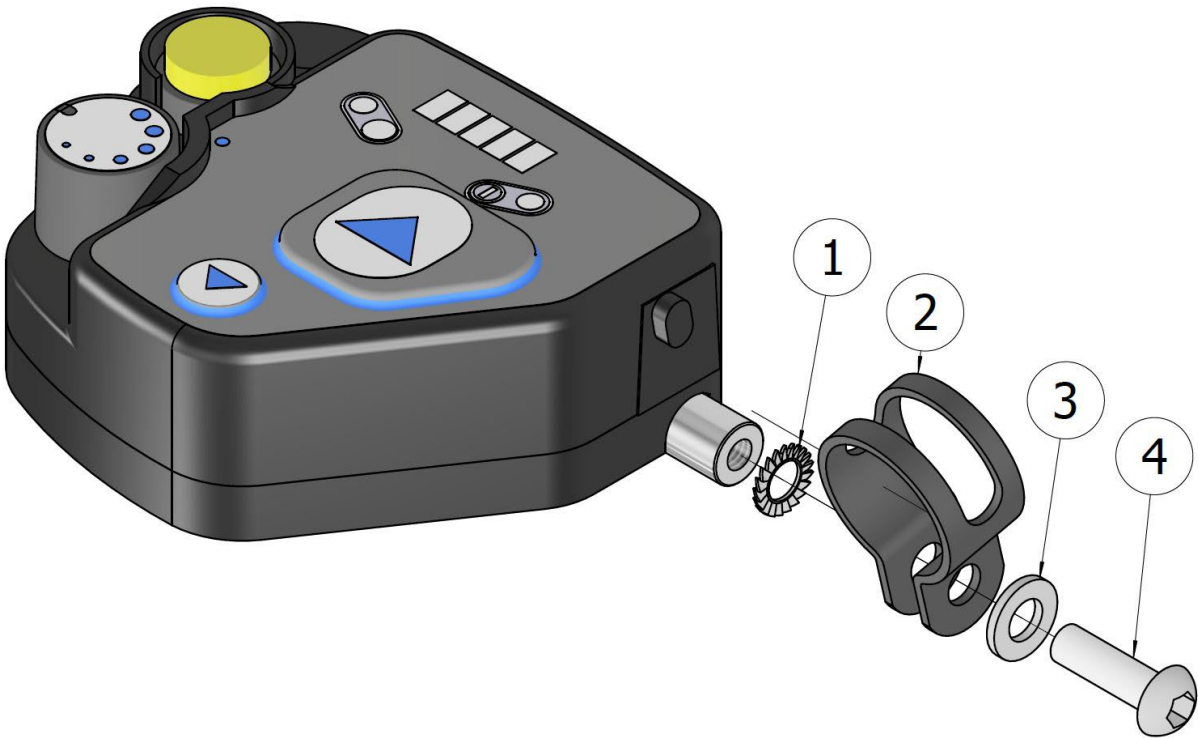


1	XSM6BRTG	1	
2	Xklamma2	1	
3	XSM6BR	1	
4	XSM6X20	1	



MED1252 + MED1643

MED1643

Vårdastyrningen är även möjlig att montera på vänstersida. För detta behöver man komplettera med MED1643, vilken beställs separat.

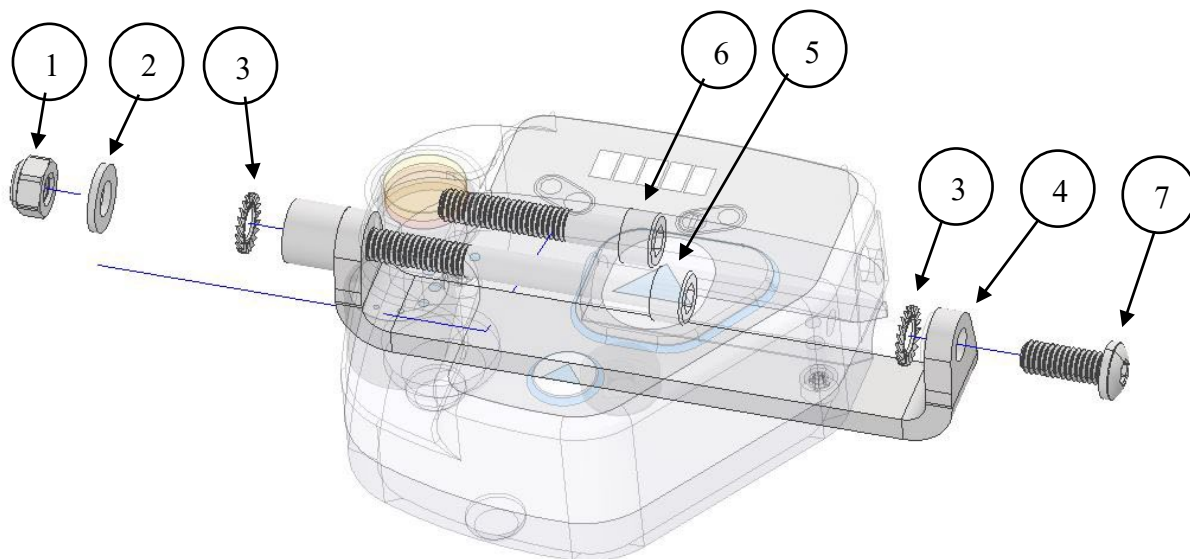


Använd antingen bult med placering 4 eller 5 beroende på vilken klämma som monterats på stolens handtagsrör. Den kortare passar plåtklämman och den gängade aluminiumklämman, den längre aluminiumklämman utan gängor.

Placering.	Artikelnummer	Antal	Beskrivning
1	XSM6M	1	Låsmutter M6
2	XSM6BR	1	Planbricka M6
3	XSM6BRTG	2	Taggbricka M6
4	MED1640	1	Fäste vårdstyrning vänster sida
5	MC6SM6X60	1	Bult M6x60
6	MC6SM6X35	1	Bult M6x35
7	MC6SM6X16	1	Bult M6x16



M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

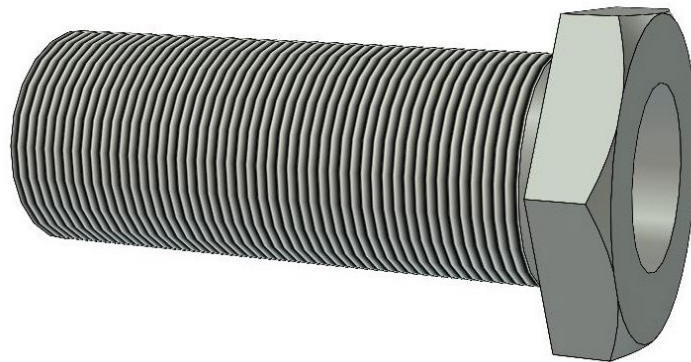

M16x1	30 Nm
M18x1	40 Nm