



Monteringsanvisning INFM7013, INFM7113, INFM7213

Infinity Adaptersats Etac Cross 6 / Cross 6 Lång

1. Säkerhet och föreskrifter

Symboler



WARNING!

Risk för allvarliga personskador eller dödsfall.

En operation som, om den inte utförs korrekt, kan leda till skador på operatören eller andra personer.



FÖRSIKTIGHET!

Risk för materiella skador.

En operation som, om den inte utförs korrekt, kan leda till materiella skador.



INFO

Extra viktig eller förklarande information.

Allmänna föreskrifter

Denna monteringsanvisning skall alltid följas vid montering av adaptersats INFM7013, INFM7113, INFM7213. För att sedan kunna koppla Infinity på rullstolen krävs att Infinity ställs in enligt separat monteringsanvisning.


Varningar



WARNING!

Monteringsarbeten och ändringsarbeten som beskrivs i detta dokument får endast utföras av utbildad servicetekniker, återförsäljare eller annan av Decon Wheel utsedd representant.

2. Översikt

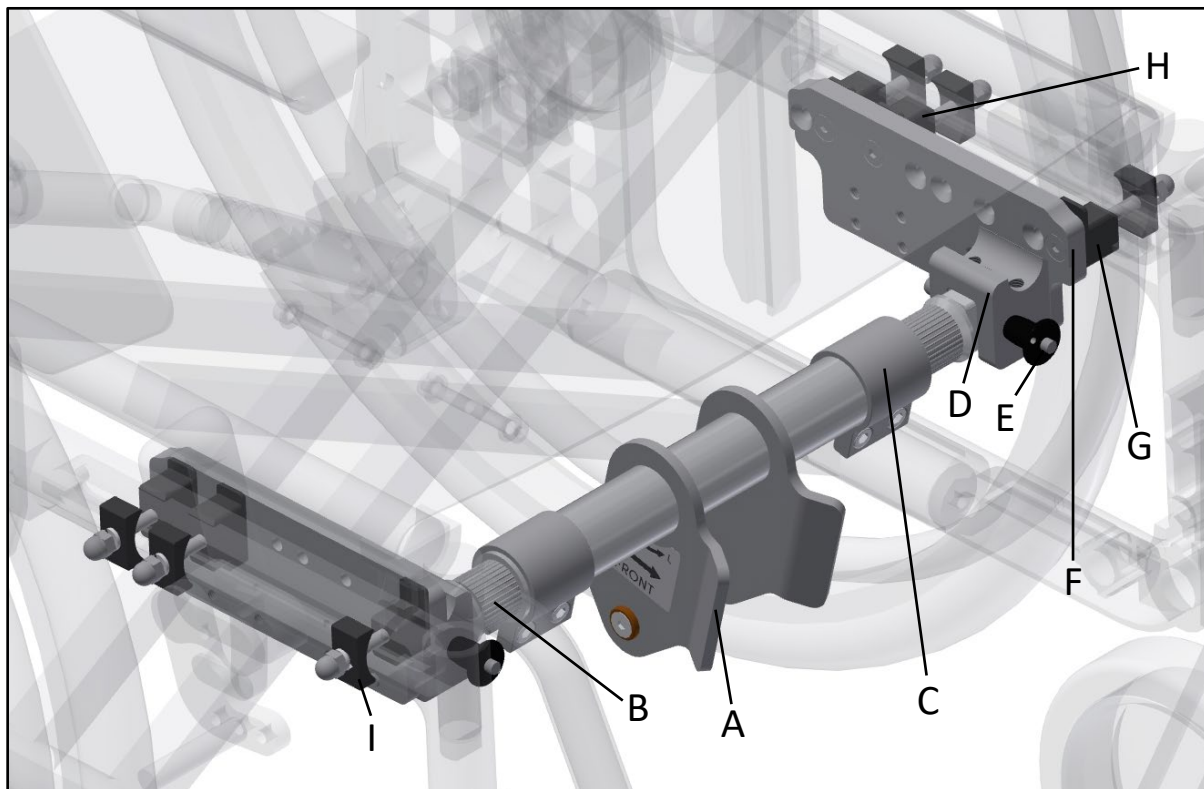

- A Centrumrör adapterbalk
- B Ytterrör adapterbalk
- C Klämma
- D Fäste adapterbalk
- E QR-Pinne
- F Adapterplatta
- G Distans adapterplatta främre
- H Distans adapterplatta bakre
- I Bricka adapterplatta

3. Montering och inställning

Montera först adapterplattan (F), distans adapterplatta (G & H) samt bricka adapterplatta (I). Det ingår 2st av respektive typ av distans adapterplattor/sida, främre och bakre typ för att möjliggöra korrekt placering av adapterplatta (F). Montera skruvarna (J) som låses på utsidan av ramen med fjäderbricka (K) och kupolmutter (L).

Dra i detta läge åt kupolmutter (L) löst så att adapterplattan (F) fortfarande kan flyttas i längdled längs rullstolens ram.

Montera nu fäste adapterbalk (D) i adapterplattan (F) med hjälp av skruvarna (M).

Montera båda sidor



WARNING!

Vid montering måste alltid en infästningspunkt hamna framför rullstolens broms.



WARNING!





Skruvarna (M) som håller fästet för adapterbalken skall dras åt med ett moment om 7-9Nm samt att Loctite 243 el. likvärdigt skall appliceras.



INFO


Måttet, **X**, mellan fästet för adapterbalken (D) och kanten på sitsklädseln bör vara **ca 20mm**

Positionen för bakre hjulen på rullstolen är monterade i kan påverka placeringen av skruvarna (I) samt placeringen av fäste adapterbalk (D). Det som visas på bilden ovan kan skilja mellan olika rullstolar beroende av vilket läge rullstolens bakre hjul är monterade.

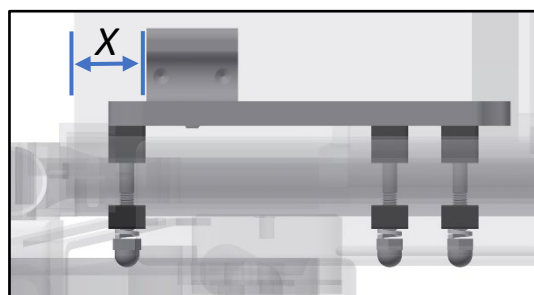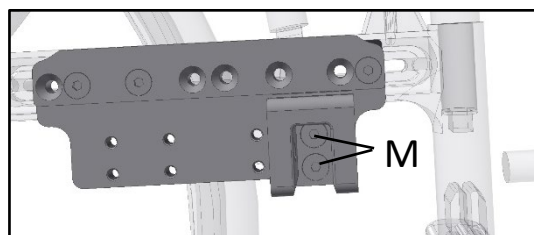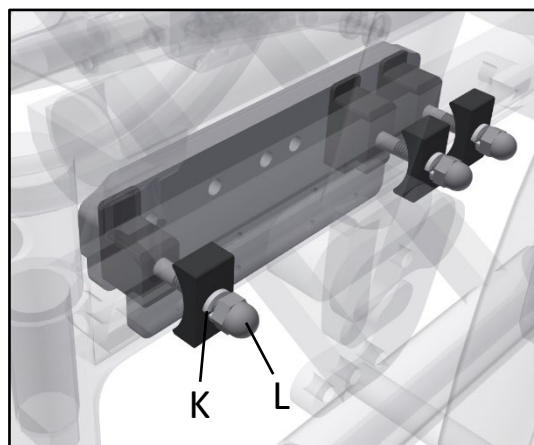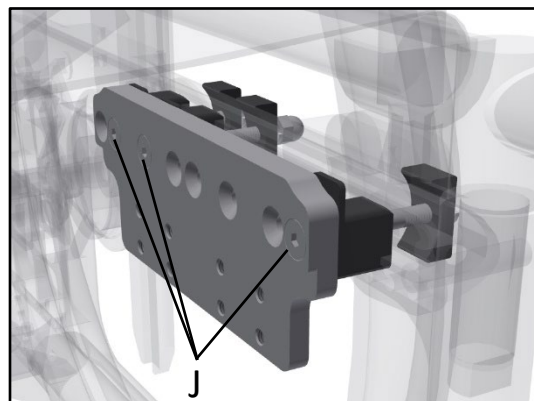

Montera den kompletta adapterbalken bestående av centrumrör (A), ytterrör (B) och klamma (C). Denna fästs in i fäste adapterbalk (D) med hjälp av QR-Pinnarna (E).

Se till att ändarna på dem yttre rören (B) är parallella så att adapterbalken passar in i sina hållare. Centrumröret (A) skall kunna flyttas i sidled samt roteras.

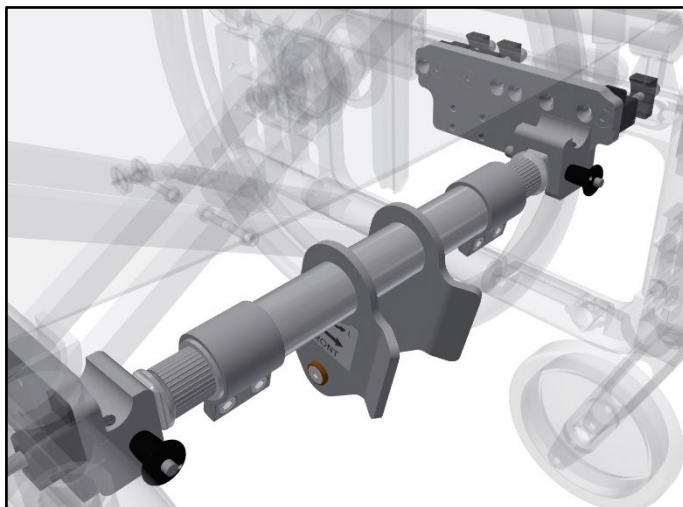

Dra ut åt alla skruvar (J) som håller adapterplattan på plats.



Kontrollera så att pilen på klistermärket monterat på centrumröret (A) pekar framåt i körriktningen. Om detta är vänt fel kommer det ej gå att koppla Infinity mot adapterbalken.

Kontrollera att rullstolens broms inte kolliderar med adapterfästet.



WARNING!

Skruvarna (I) skall dras åt med ett moment om 7-9Nm.



INFO

Adapterbalken har splines med fasta lägen inuti sig. Därför kommer vattenpasset troligen ej att hamna exakt i våg utan man får välja det hack som är närmst. Nivåverktyget har markeringar "H" och "L". Om bubblan i vattenpasset hamnar åt det håll som är markerat "H" kommer länkhjulen lyfta högre från marken än om bubblan hamnar åt det håll som är markerat "L".

Inställning av rätt vinkel för centrumröret kan ske på två sätt beroende på hur långt dem yttre rören är instuckna i centrumröret. Båda sätten beskrivs nedan. **Nivåvekryget följer ej med leveransen av adapterset utan detta levereras tillsammans med Infinity.**

Alt1.

Med hjälp av det nivåverktyg som följer med leveransen av Infinity (inte adapter set) ställ in rätt vinkel på centrumröret genom att vrida detta tills det hamnar i våg. Röret har splines innuti sig, det kommer kännas ett litet klick för varje steg som röret roteras. När rätt vinkel har uppnåtts, kontrollera att centrumröret är centrerat i rullstolen. Dra nu åt skruvarna i samtliga klammor (C).

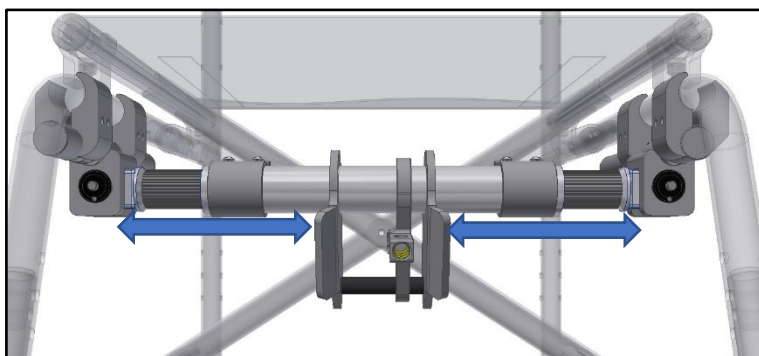
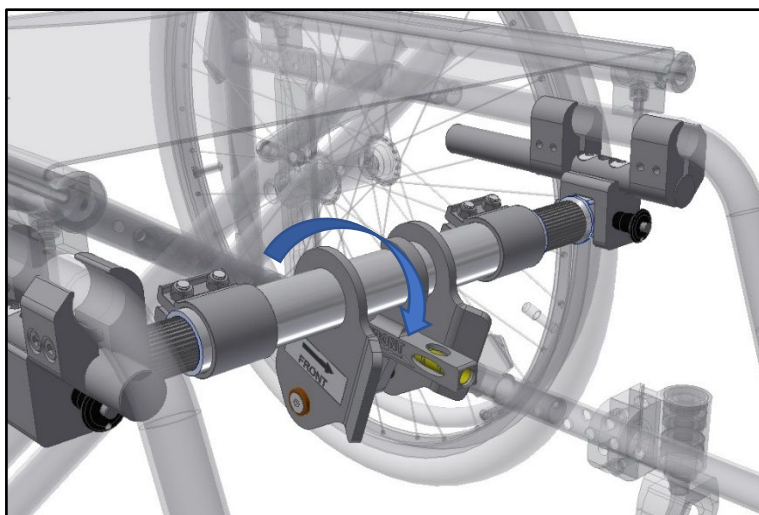


WARNING!

Skruvorna i klammorna (C) skall dras åt med ett moment om 7-9Nm.

Alt.2

Med hjälp av det nivåverktyg som följer med leveransen av Infinity (inte adapter set) ställ in rätt vinkel på centrumröret. Montera endast ett innerrör i centrumröret och vrida detta tills det hamnar i våg. När rätt vinkel har uppnåtts, montera den andra innerröret i samma position/vinkel som det första. Kontrollera att centrumröret är centrerat i rullstolen. Dra nu åt skruvarna i samtliga klammor (C).

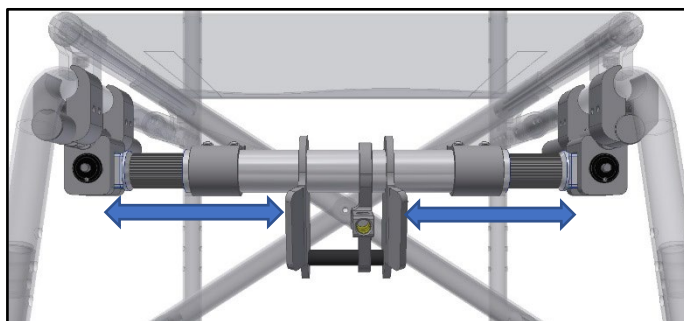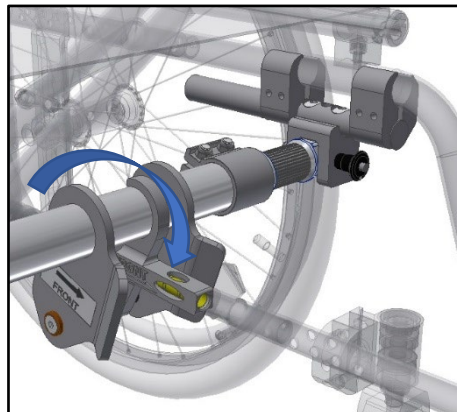

VARNING!

Skruvarna i klammorna (C) skall dras åt med ett moment om 7-9Nm.

Läs nu igenom monteringsanvisningen för Infinity som följde med leveransen av denna. Montera och ställ in Infinity enligt de anvisningar som anges i denna.



INFO

I det fall rullstolens bromsar monterats bort vid montage av adapterbalken glöm ej att återmontera dessa. Om sittklädseln har lossats glöm ej heller att återmontera denna.

Decon Wheel AB
Södra Ekeryd 119, SE-314 93 Hyltebruk, Sweden
Tel: +46 (0)345 40880
Fax: +46 (0)345 40895
E-mail: info@decon.se

