



Monteringsanvisning

ADV5314, ADV5014

Adventus Kryssraminfästning
R82 Kudu

1. Säkerhet och föreskrifter

Symboler



WARNING!

Risk för allvarliga personskador eller dödsfall.

En operation som, om den inte utförs korrekt, kan leda till skador på operatören eller andra personer.



FÖRSIKTIGHET!

Risk för materiella skador.

En operation som, om den inte utförs korrekt, kan leda till materiella skador.



INFO

Extra viktig eller förklarande information.

Allmänna föreskrifter

Denna monteringsanvisning skall alltid följas vid montering av adaptersats ADV5314 och ADV5014.

Inställning av Adventus hjulet tillsammans med den kompletta kryssramsfästningen visas i brukarmanualen för Adventus hjulet.


Varningar



WARNING!

Monteringsarbeten och ändringsarbeten som beskrivs i detta dokument får endast utföras av utbildad servicetekniker, återförsäljare eller annan av Decon Wheel utsedd representant.

2. Översikt

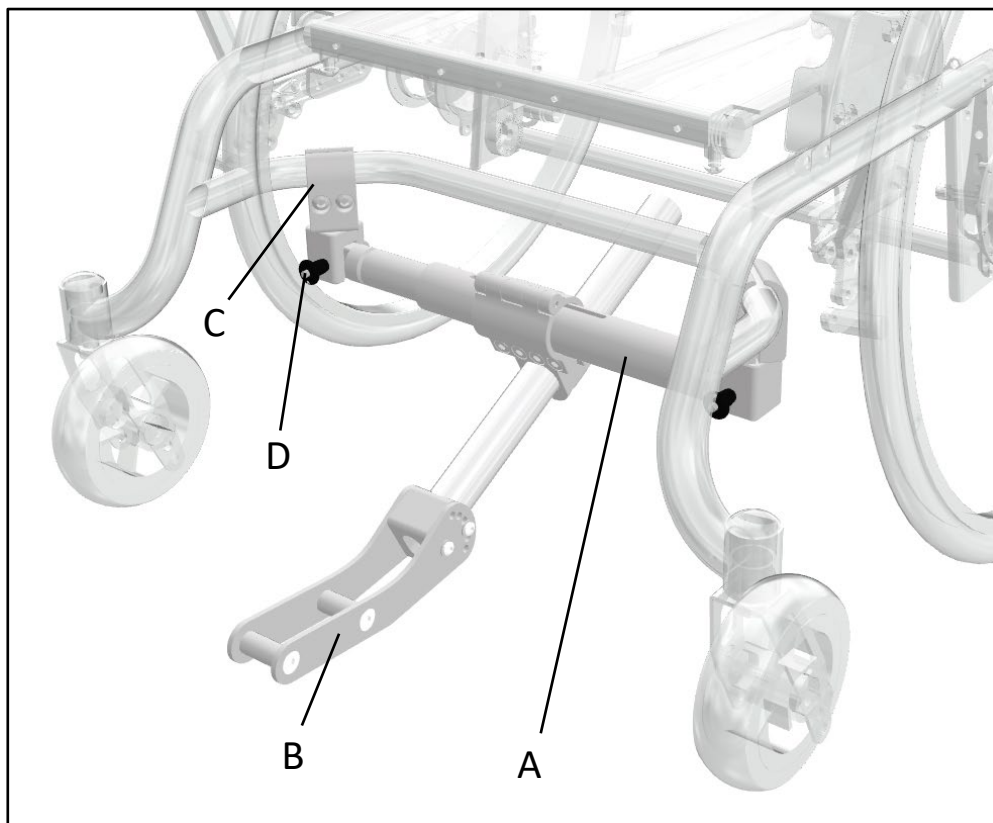




- A Adapterbalk
- B Gaffel adapterbalk
- C Adapterkit
- D QR Axel



Bilden ovan visar montering på en R82 Kudu Size4 med 22" hjul

3. Montering adapterkit

Börja med att montera adapterkit (C) löst så att klammorna dessa fortfarande kan flyttas något utmed röret. Montera båda sidor.

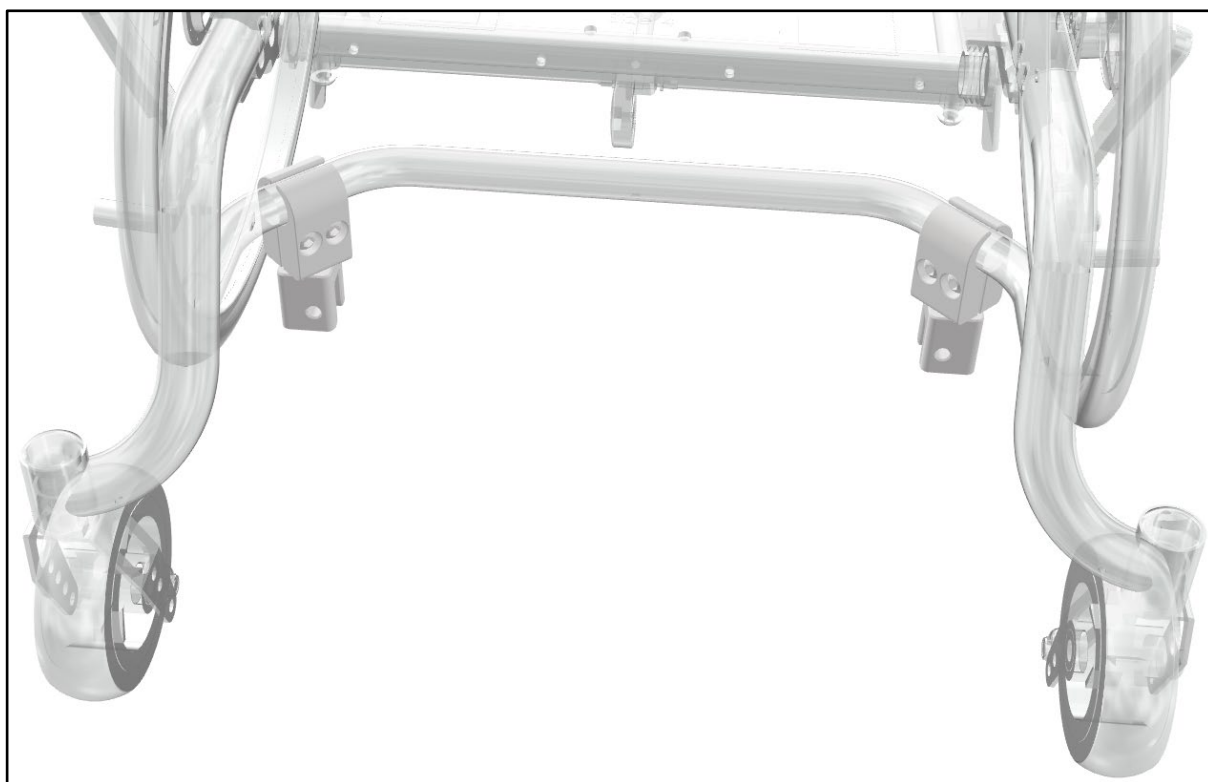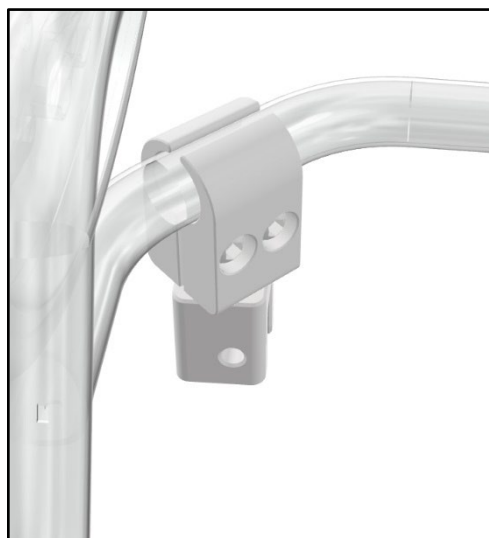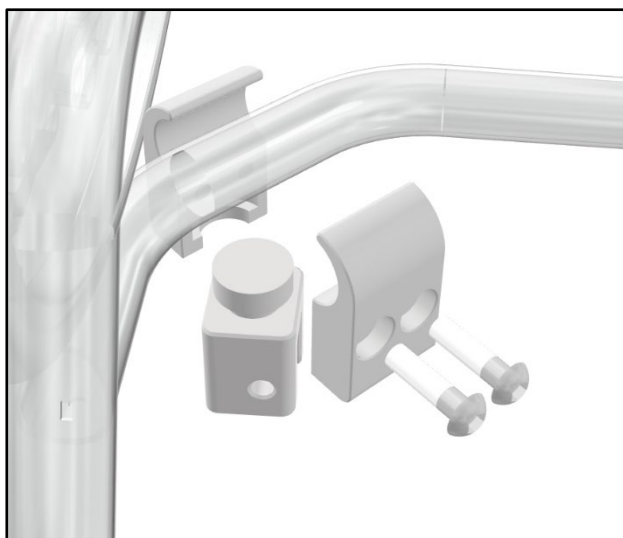

Montera sedan i adapterbalken (A) och lås den i hållarna med hjälp av QR axlarna (D). Dra nu åt skruvarna till adapterkitet (C).

 **INFO**


Efter att skruvarna dragits åt kontrollera att det fortfarande går att ta loss adapterbalken ur sin hållare och att QR axlarna går att dra ut. Om det går trögt lossa skruvarna till hållaren på ena sidan och finjustera.

 WARNING!


Skruvarna skall dras åt med ett moment om 20-24Nm. Loctite 243 eller likvärdigt skall appliceras på skruven innan den monteras.

4. Inställning av kryssramsinfästningen


Montera gaffel adapterbalk (B) på adapterbalken (A)

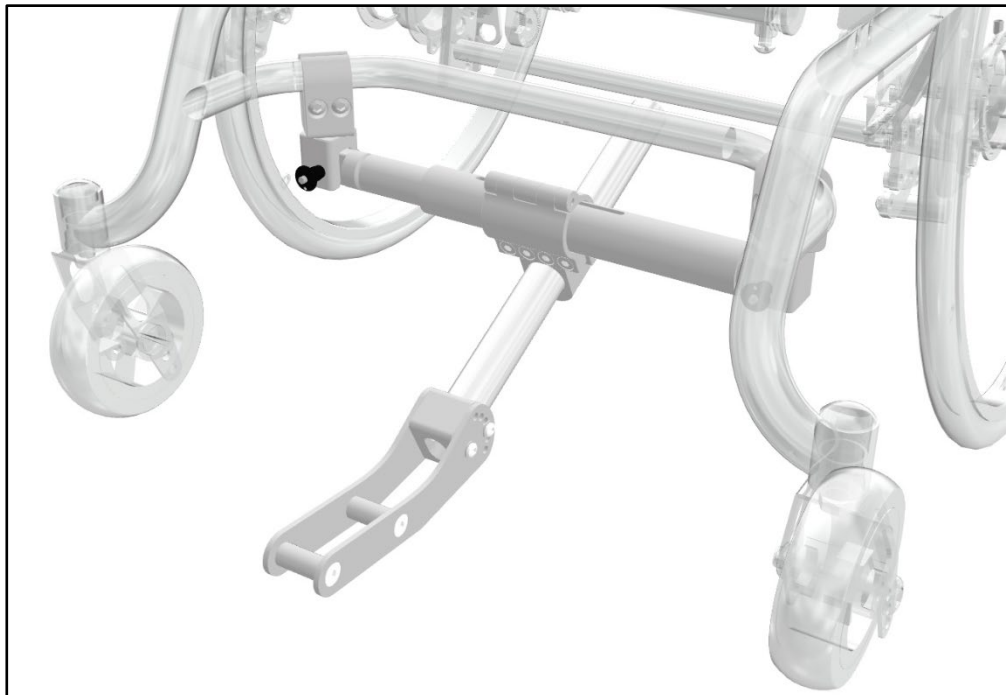

Kontrollera att gaffel adapterbalk (B) är centrerad. Montera sedan bort skruven i gaffeln (F) som låser rotationen (se bild nedan).

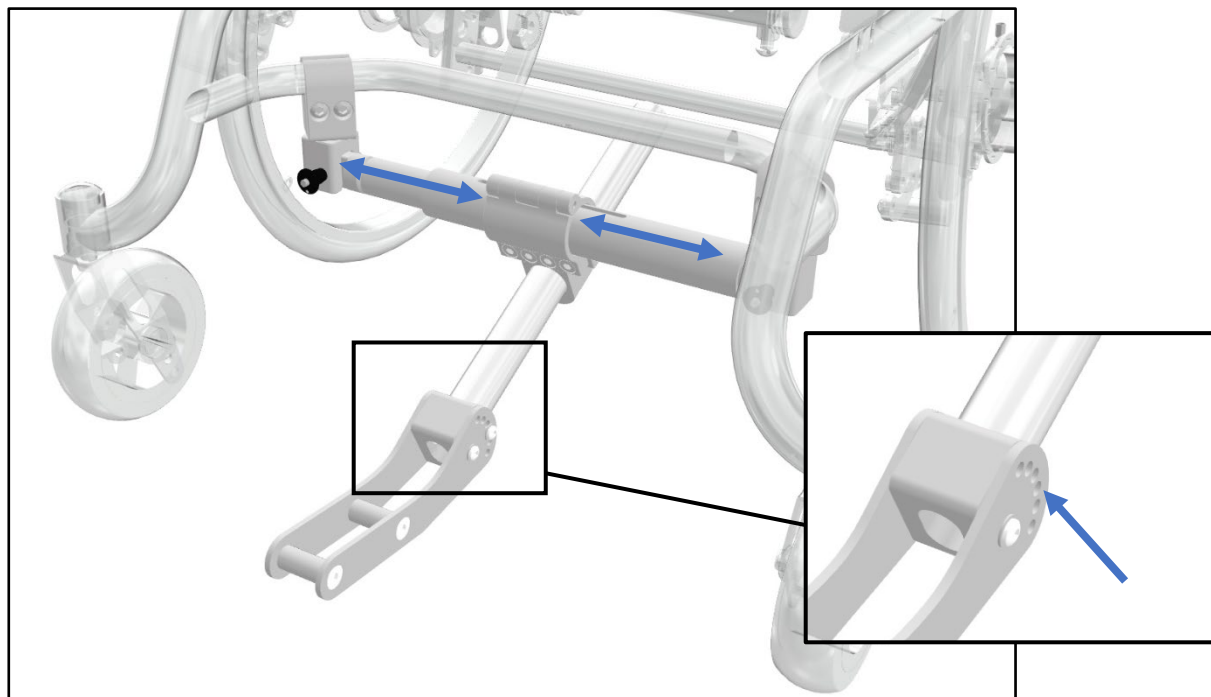


Montera nu det medföljande nivåverktyget på adapterbalkens gaffel (B). Justera nu höjden och vinkeln på gaffel och rör. Gaffel adapterbalk (B) skall monteras under fotplattan.

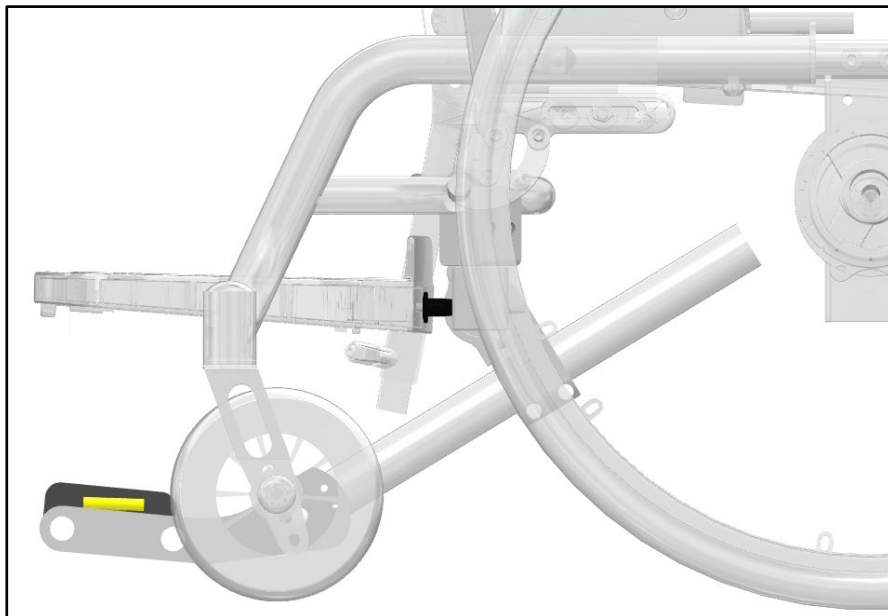 **INFO**


Kontrollera så att gaffeln och gaffelröret inte kommer i konflikt med fotplattan.

Återmontera skruven i adapterbalk gaffel (B) i det hål som passar bäst sett till gällande förhållande.

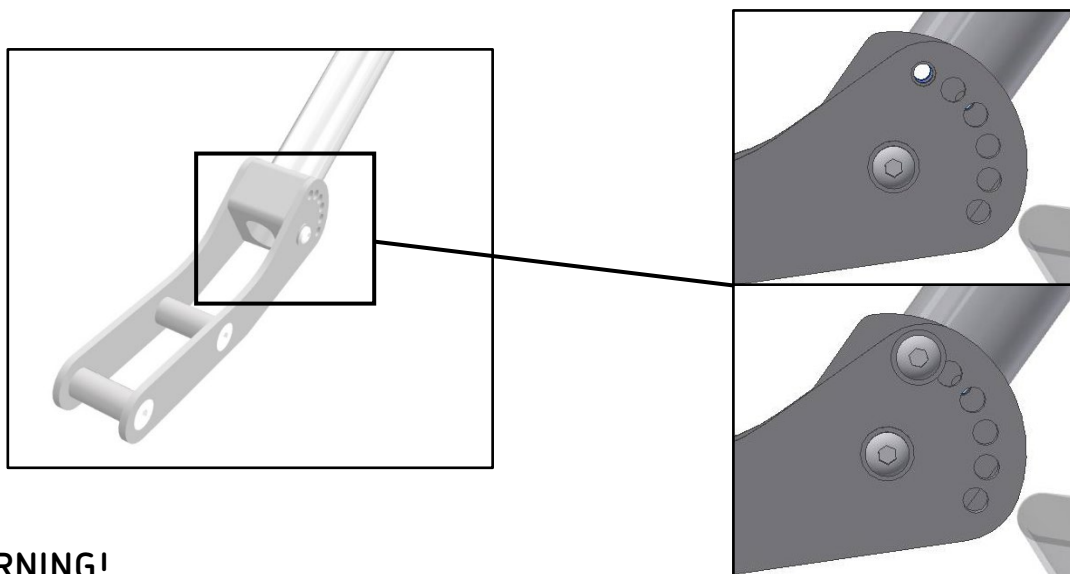 **WARNING!**

Skruvarna skall dras åt med ett moment om 8-10Nm. Loctite 243 eller likvärdigt skall appliceras på skruven innan den monteras.

Dra nu åt skruvarna som håller fast klamman mot adapterbalken (A) samt dem skruvar som håller fast adapterbalk gaffel (B). **I båda klämmorna skall skruvarna dras åt lite i taget stegvis, fortsätt spänna till dess att önskat åtdragningsmoment, 30-35Nm adapterbalk (A) samt 9-10Nm adapterbalk gaffel (B), uppnås.** Kontrollera också i detta steg att adapterbalken fortfarande är centrerad i rullstolens ram samt att vinkeln är korrekt enligt nivåverktyget.

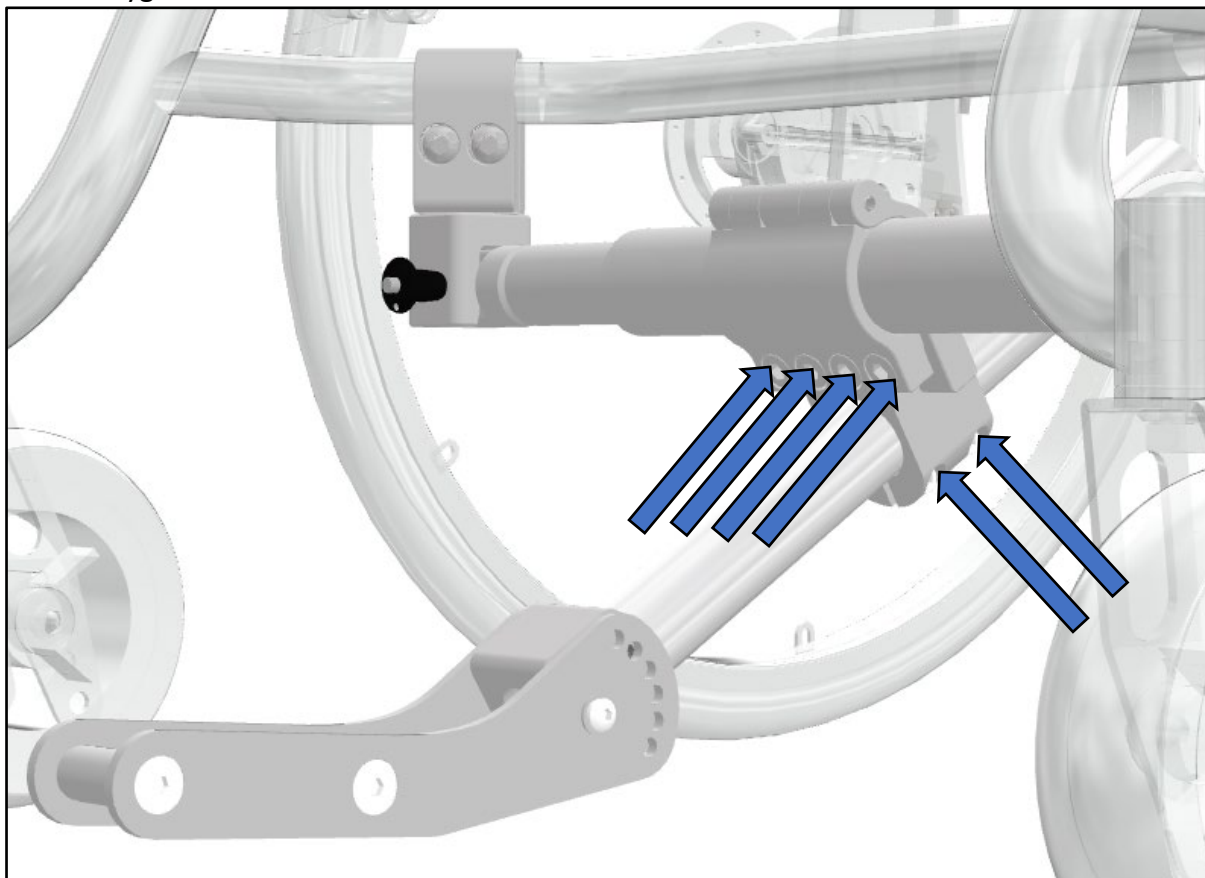

Kontrollera en sista gång att alla skruvar är åtdragna. Se nu brukarmanualen för Adventus för fortsatt installation, denna kan laddas ned från www.decon.se.

Decon Wheel AB
Södra Ekeryd 119, SE-314 93 Hyltebruk, Sweden
Tel: +46 (0)345 40880
Fax: +46 (0)345 40895
E-mail: info@decon.se

