

FLEXLIFE D9

BY DECON







 **FLEXLIFE** **D9**
BY DECON

Frihet

på fyra hjul



FLEXLIFE D9 Basic & Comfort

Känn friheten med FLEXLIFE!

VAD FÅR JAG NÄR JAG BESTÄLLER FLEXLIFE?

- Flexlife
- Val mellan Basic eller Comfort
- Hög sittkomfort
- Låg vikt, 26,5kg
- Styrka för svåra backar, 10 grader
- Vinklinsbart ryggstöd
- Smart batterisystem, godkända för flyg
- Stort urval av tillbehör
- Möjlighet för olika sittpositioneringar
- Batteri och batteriladdare
- Svensk manual
- 2 års garanti



Flexlife Basic



Flexlife Comfort

För dig som har svårt att gå eller använder rullstol/elrullstol till vardags men vill vara mer flexibel - här är ett bekvämt alternativ för dig som vill kunna ta med dig elrullstolen på dina resor och vardagsaktiviteter.

Den hopfällbara elrullstolen Flexlife erbjuder två olika utrustningsnivåer Basic och Comfort, inga användare är ju lika. De är lätta (från 26,5kg inkl. batteri), bekväma, stabila och pålitliga. De smarta batterisystemen tillåter dig att enkelt göra ditt resande flexibelt.

Ett antal smarta tillbehör innebär att du kan få en personlig Flexlife. Utrusta din Flexlife med till exempel mobilhållare, vadvstöd, nackstöd och mycket mer.



FLEXLIFE

ARTIKELNUMMER

Flexlife D9 Basic

FLD09B

Flexlife Basic: Bima standard sittdyna, fodrad rygg i vattenavvisande tyg, vinklinsbart ryggstöd i 5 lägen, justerbar och hopfällbar fotplatta, 8" länkhjul, 12" massiva bakhjul, snabb-lås för batterier, tippskydd, låsning för stolen i hopfälld läge, liten shoppingväska

Flexlife D9 Comfort

FLD09C

Flexlife Comfort har samma standardutrustning som Flexlife Basic med uppgradering till: Bima Kombi sittdyna (tryckavlastande), belysningskit, swing-away-fäste för joystick, vadvstöd, armstödsvadddering

FLEXLIFE D9 Basic



1 Lås stolen i hopfäld läge. Spärren förvaras under fotplattan.

2 Fem ryggband för justering
Vadderad rygg i vattenavvisande tyg från Bima
Ryggstöd ställbart i fem lägen

3 Tippskydd med snabb-lås, enkla att montera

4 Massiva däck, behöver ej pumpas och ingen risk för punktering

5 Fästen för förankring i bil vid transport

6 Fotplattan är justerbar i höjd och går att fälla in under stolen

7 Dubbla batterier med snabb-lås och batteriindikator, kan laddas separata

8 Bima sittdyna standard

9 Joystick med höger- eller vänstermontering och ladduttag för batterierna

FLEXLIFE D9 Comfort



Flexlife Comfort innehåller allt som ingår i Flexlife Basic med följande förändringar/tillägg:

1 Vadderade armstöd

2 LED-belysning bak

3 Vadstöd, enkelt avtagbart

4 LED-belysning fram

5 Bima sittdyna Kombi, tryckavlastande

6 Swing-away-fäste för joystick

FLEXLIFE D9 Basic & Comfort

TEKNISKA FAKTA

Vikt inklusive batterier	26,5 kg (23,5 kg exkl. batteri)
Hastighet	6 km/h
Räckvidd*	25 km
Motor	2x250W borstlös
Joystick	Höger, vänster eller bakmonterad
Batteri	2 litium batterier à 6 Ah, 24V
Batterieffekt**	288 Wh (flyggodkänt)
Batterivikt	1,5 kg per batteri
Laddningstid	6-8 timmar (100% laddning)
Vändradie	83 cm
Hjul bak	12" (32 x 5,7 cm) massiva bakdäck
Hjul fram	8" massiva framhjul
Sitthöjd utan dyna	48 cm
Sittbredd	47 cm (med breddningskit 54cm, tillval)
Sittdjup	43-48 cm
Brukarvikt max.	150 kg
Klädsel	Bima, vattenavvisande rygglädsel
Vinklingsbart ryggstöd	5 lägen, upp till 115 grader
Justerbar fotplatta	Höjd justerbar i två lägen och hopfällbar
Mått uppfälld i cm	93L x 59B x 98H
Mått hopfälld i cm	58L x 35B x 78H
Garanti	2 år

*kan variera beroende på underlag, brukarvikt och väder

** Flyggodkända batterier, max. 300 Wh är godkänt för flygtransport



FLEXLIFE D9 Basic & Comfort

Batterier & Laddare

Batteri	Artikelnummer
---------	---------------

Standard batteri D9 24V x 6 Ah	FLD09-2005
--------------------------------	------------

Batteriladdare	Artikelnummer
----------------	---------------

Standard batteriladdare	FLD09-2006
-------------------------	------------

Adapter till batteriladdare

Tillbehör

Tillbehör

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 1. Vadstöd | 6. Vårdarstyrning |
| 2. Kombi Dyna Bima | 7. Swing away fäste |
| 3. Mobilhållare | 8. Breddningskit till 54cm |
| 4. Nackstöd | 9. Flaskhållare |
| 5. Transportväska | 10. Armstödsförhöjning |



1



2



3



4



5




6



7



10

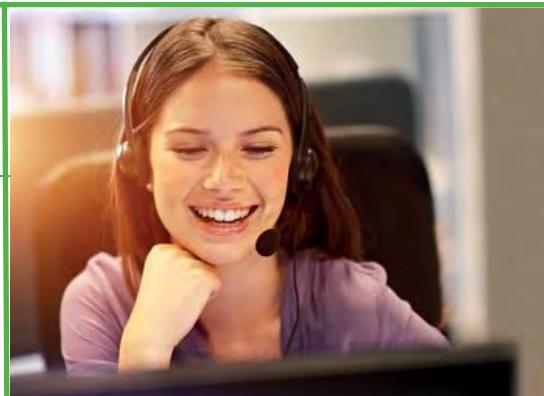

**HAR DU FRÅGOR ELLER VILL
BESTÄLLA?**

0345-40880


info@decon.se

Vi hjälper dig gärna!

Checklista för att beställa

- För standardutrustning se "Vad får jag när jag beställer en Flexlife"
- Undersök om det finns något tillbehör som önskas
- Kontakta oss om du inte hittar det du söker
- Kontrollera din orderbekräftelse, om något är fel eller oklart kontakta omedelbart din hjälpmedelsbutik eller Decon

FLEXLIFE Snabb Start Guide

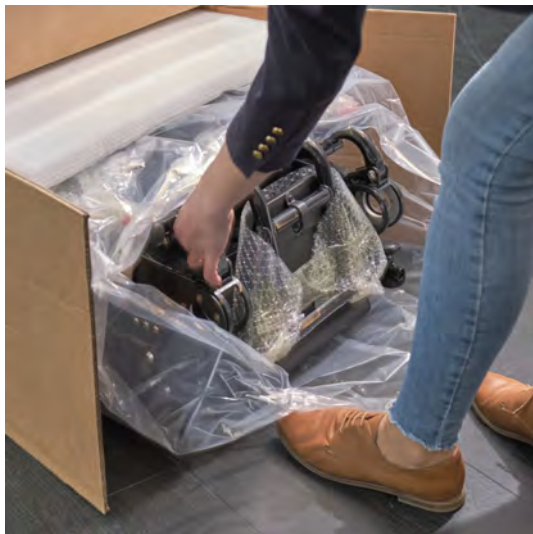

1. Öppna kartongen försiktigt med hjälp av en kniv, lägg ner kartongen och tag ur frigoliten.



2. Avlägsna plastpåsen och transportskydden.



3. Tänk på miljön och återvinn plast och frigolit i återvinningen.



4. Fäll enkelt upp din Flexlife genom att ta tag i ryggen och dra den uppåt och bakåt.



5. Låshaken fäster automatisk vid uppfällning.
Innan första användningen rekommenderar vi att du kollar att låshaken hakar i.




6. Montera på tippskydden. Dra i snabb-låset och placera tippskydden i det befintliga hålet, släpp snabb-låset. Du kan enkelt ta bort tippskydden vid behov .


FLEXLIFE Snabb Start Guide



7. Ta fram batterierna och sätt dem i ramen på stolen. Du kan enkelt ta loss batterierna med hjälp av snabb-låset. Vill du ladda batterierna separat kan du använda dig av den medföljande adapterkabeln i batterilådan.

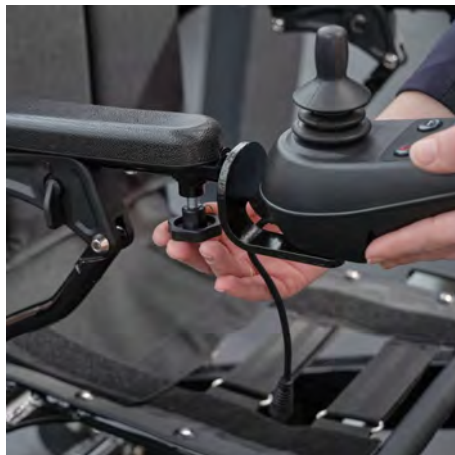


8. Montera joysticken. Joysticken ligger i väskan under stolen. Ta fram den och placera den i hålet vid armstödet. Dra fast skruven.

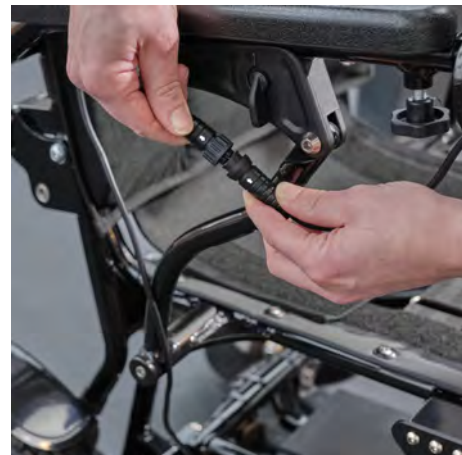

9. Sätt försiktigt ihop kontakterna på joystickkabeln.

OBS! Kolla att de vita markeringarna stämmer överens på kabeln innan du sätter ihop dom. Tvinga inte i kabeln. Skruva ihop kontaktens låsning.

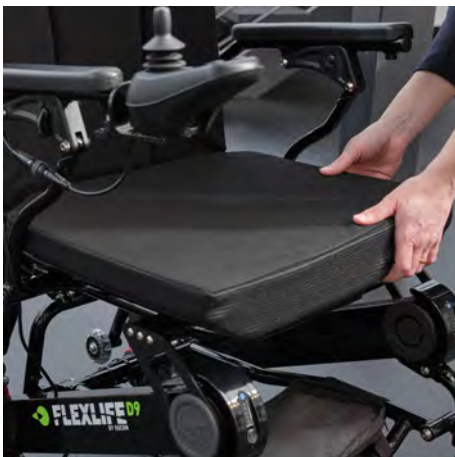

10. Lägg i den medföljande dynan.



11. Dra de röda spakarna neråt för att koppla in motorerna.

OBS! Använd endast handkraft.



12. Sätt igång joysticken på



Din Flexlife är nu klar för körning!



Stämpel återförsäljare:



Decon Wheel AB Södra Ekeryd 119 31493 Hyltebruk

Telefon: 0345 - 40880 Fax: 0345 - 40895 E-post: info@decon.se www.decon.se

Decon reserverar sig för eventuella ändringar gjorda efter tillfället för denna tryckning. Alla rättigheter är reserverade för Decon. Med förbehåll för tryck- och skrivfel samt utgångna varor och felaktiga bilder.