
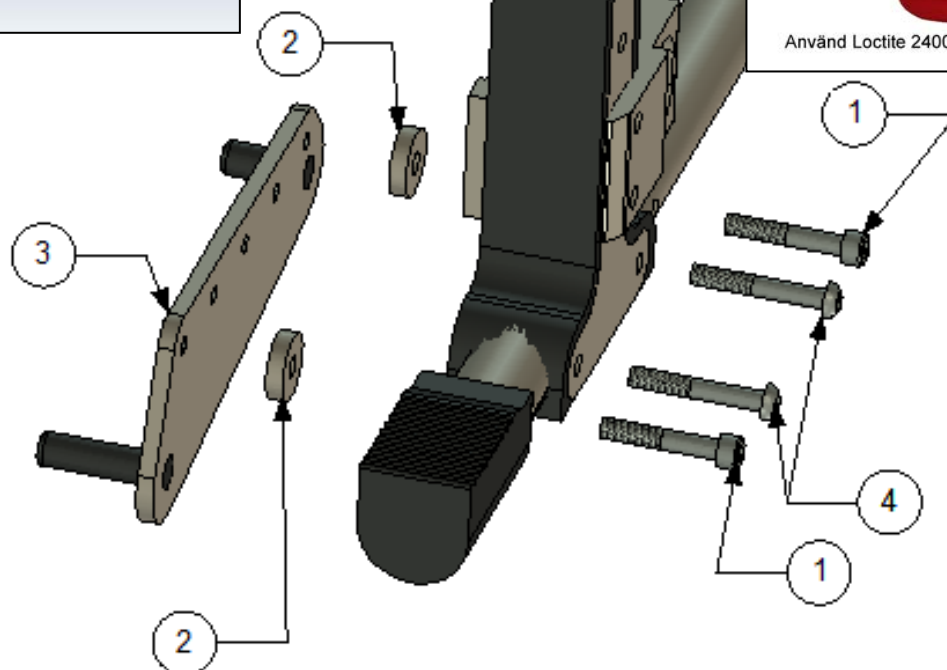


Monteringsanvisning E-Walk på Start M2 Effect/ Innov'Effect

MCG1148

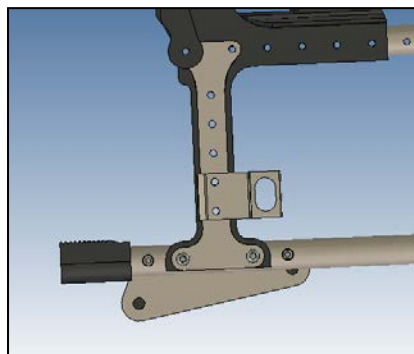


Använd Loctite 2400 på skruvar där det erfordras.

1. Se bild som visar montering av fästet på höger sida.
2. Tå bort original mutter och skruvar position ④

För montering skall följande ingå per sida.


Placering	Detalj nummer	Antal	Beskrivning
1	MC6SM6X35	2	Skruv M6 x 35
2	MCG 1148-02	2	Distans
3	MCG 1148R	1	Höger platta
4	XSM6X40	2	Skruv M6 x 40

Center placerad styrkontroll



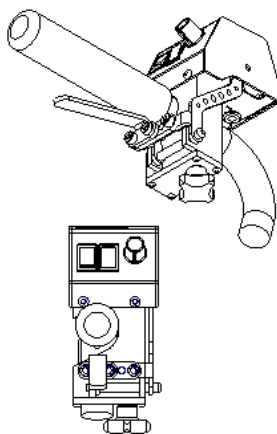


När det ej är monterat broms på körhandtaget, bör denna placering användas.

Sidoplacerad styrkontroll

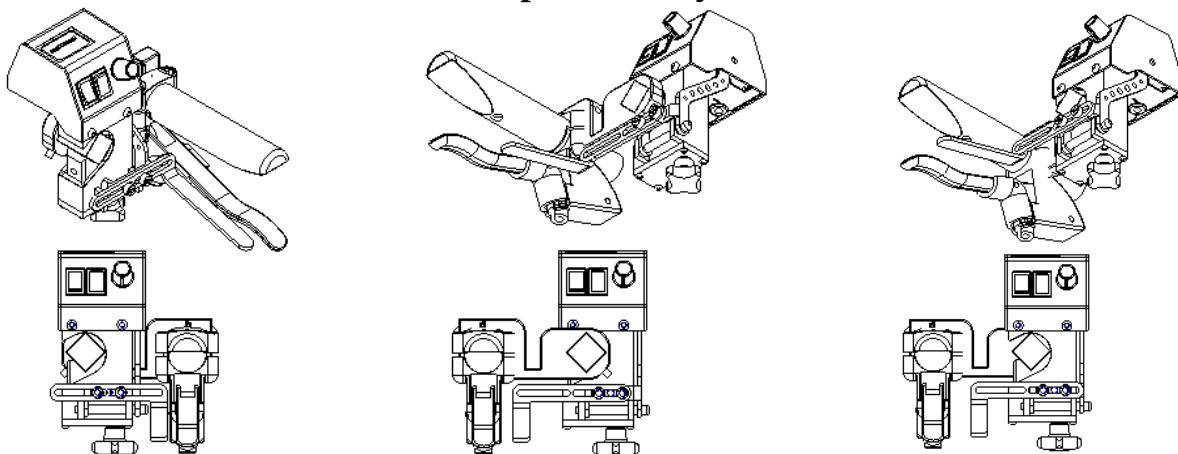

När det är monterat broms på körhandtaget användes sidoplacerad styrkontroll. Det finns olika monterings alternativ, samt justerings möjligheter.

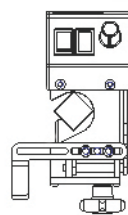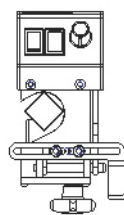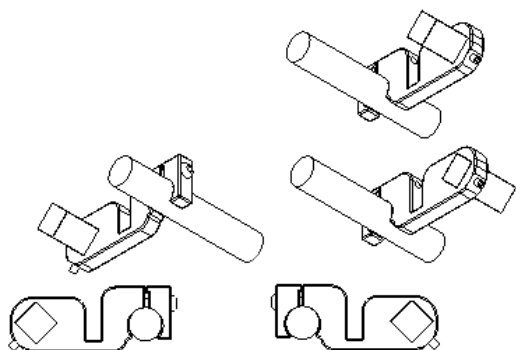

OBS! Använd Loctite på alla skruvar vid montering och justering.

Använd Loctite 2400 på alla skruvar

VARNING!

När man monterar styrkontrollen så skall man alltid kontrollera att styrkontrollens gashandtag eller dess övriga leder inte tar i eller ligger emot någonstans. Om reglage tar i eller ligger emot så kan detta leda till att gasen hänger sig och en olycka kan inträffa.

3. Montera nu Styrkontrollen på valfri plats.