

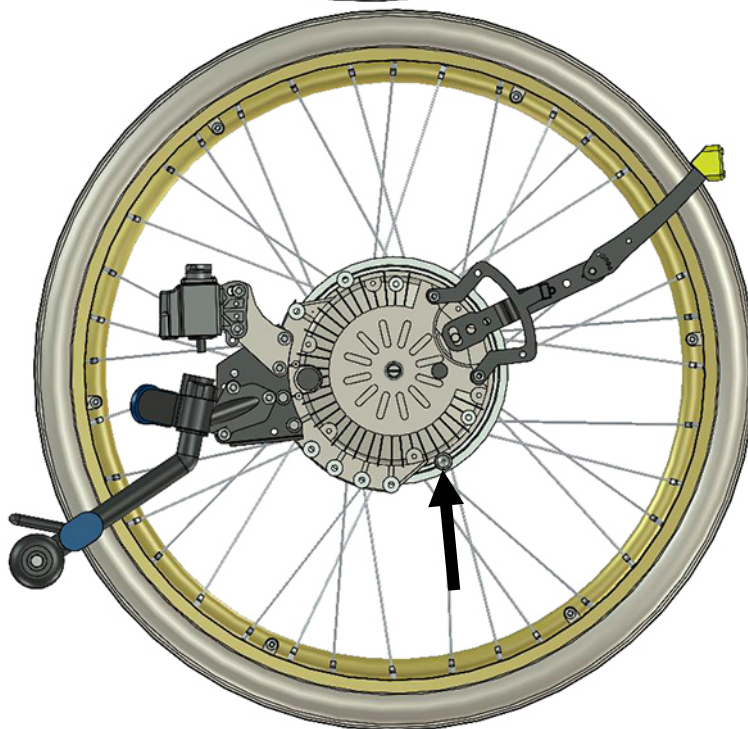


**Monterings anvisning för Levo LCEV
MED3125**

1. Demontera hjul och navhylsa på båda sidorna.

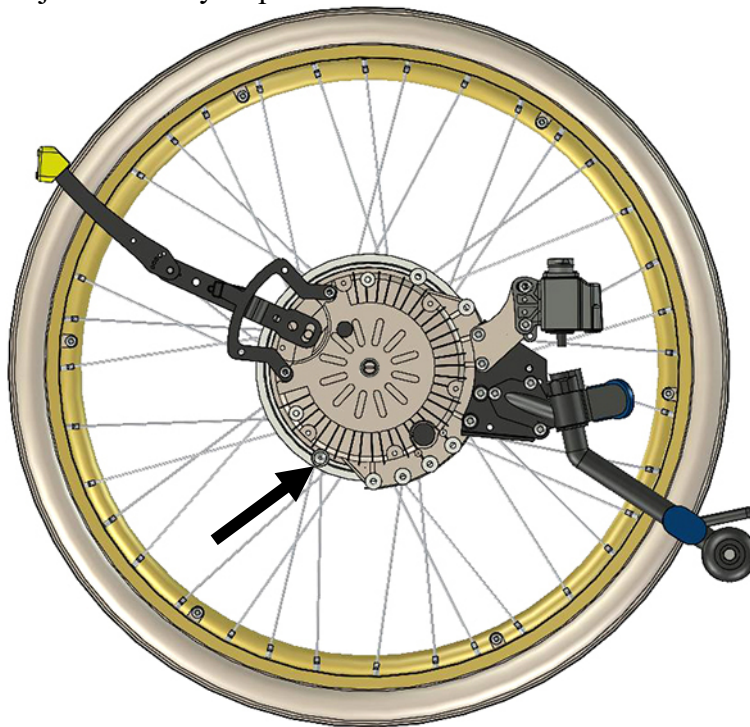

2. Kontrollera att stopp pinnen sitter enligt bilden ovan. Distanser demonteras, men montera tillbaka låsringarna på hjul axlarna. Tippskydd skall vara monterade på eDrive.

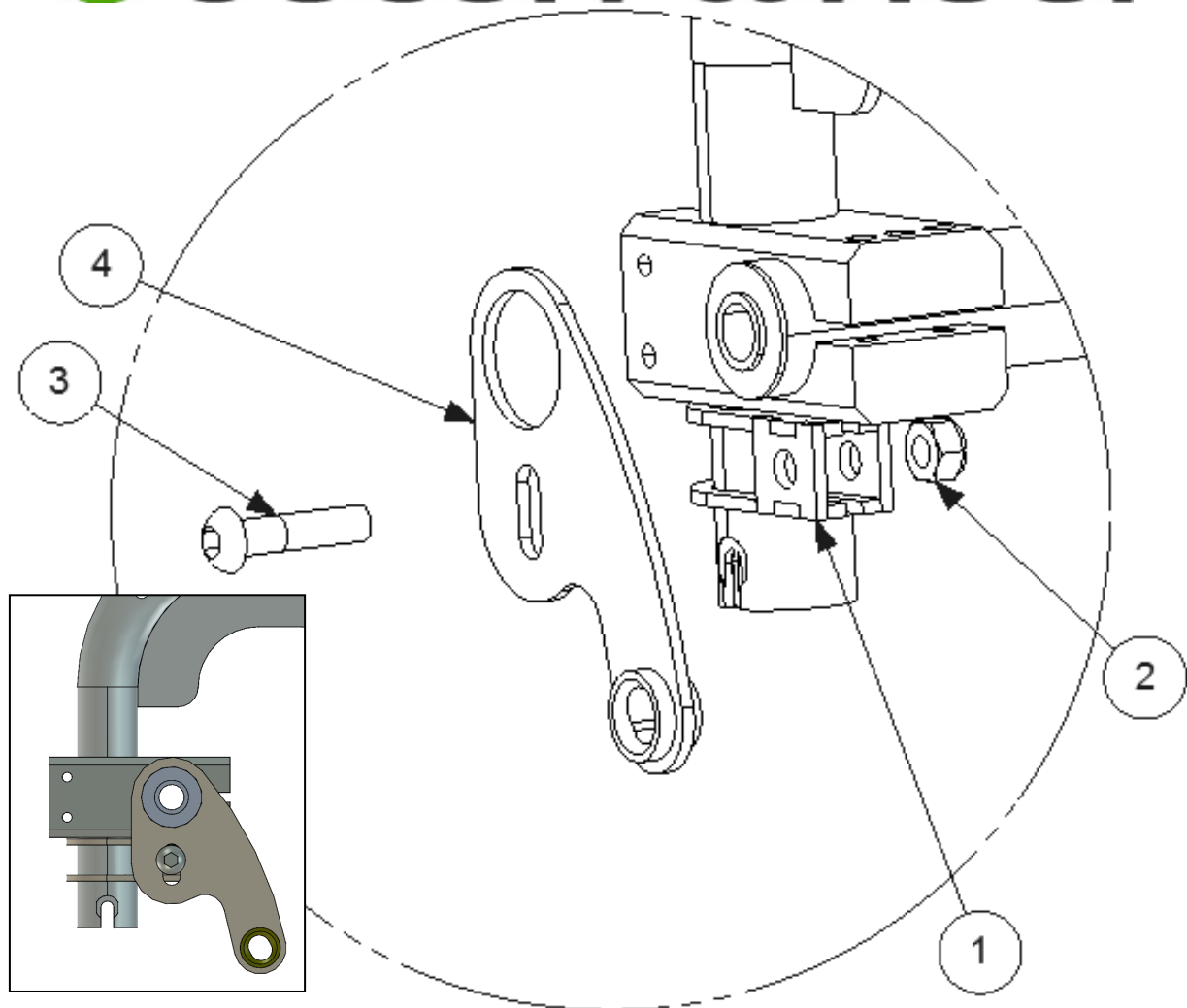


3. Montera nu fästet se bilderna ovan som visar montering av fästet på höger sida.
För montering på en sida, så skall följande ingå.

Placering.	Detaljnummer	Antal	Beskrivning
1	300065	1	Klamma Levo
2	XSM8ML	1	Låsmutter M8
3	XSM8X35	1	Skruv Rundad M8 x 35
4	MED1390	1	Fäste Levo

4. Montera nu den rygghängda batteriväskan, men den skall placeras under och långt fram på rullstolen.

Montering av Joystick

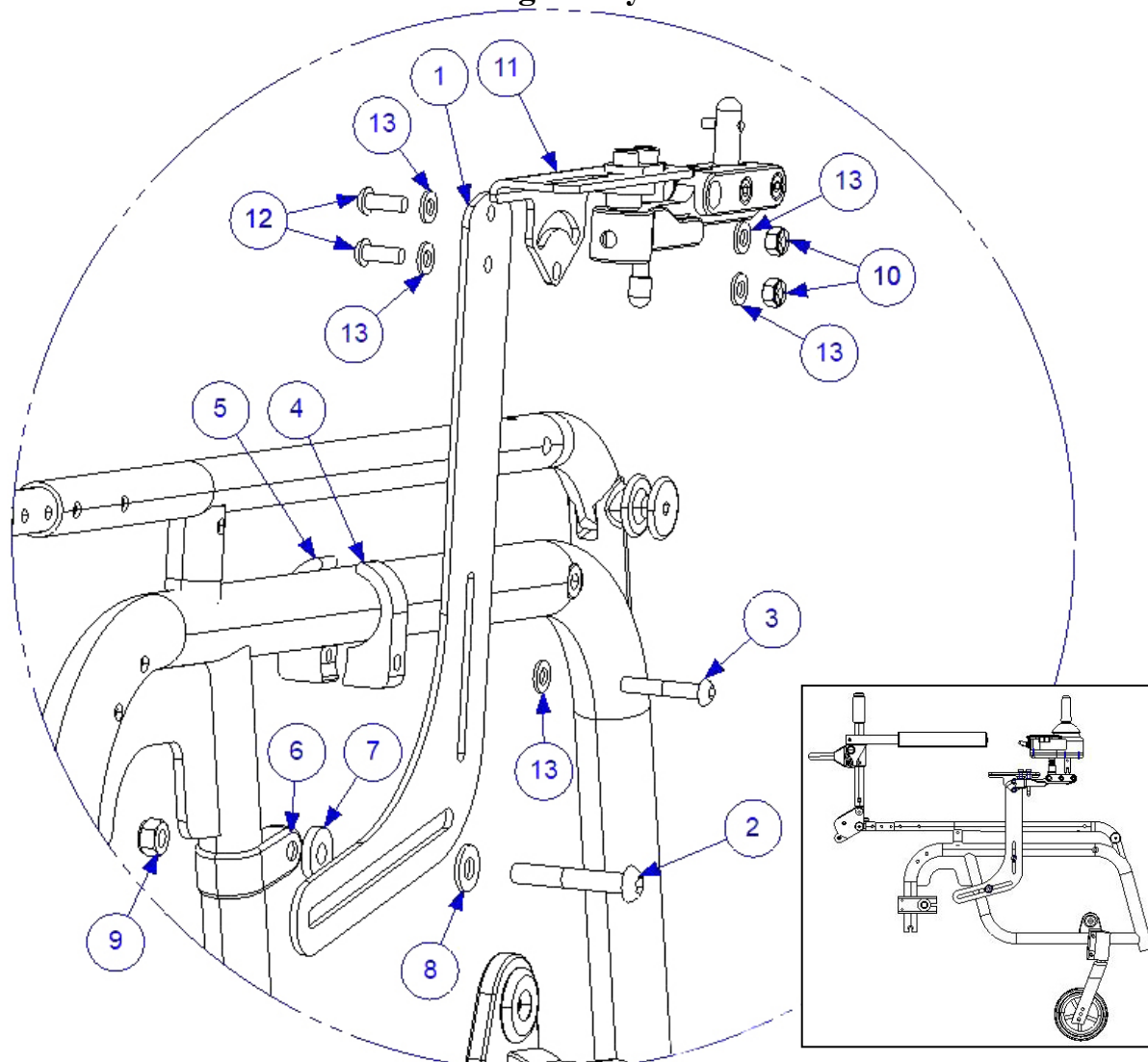

Placering	Detalj Nr.	Antal	Beskrivning
1	MED1457	1	Fäste
2	XSM8X50	1	Skruv Rundad M8 x 50
3	XSM6X35	1	Skruv Rundad M6 x 35
4	MED1421	1	Klamma med hål
5	MED1422	1	Klamma 30 med gänga
6	X-klamma1	1	Klamma
7	XSM8BRTW	1	Bricka M8 bred
8	XSM8BR	1	Planbricka M8
9	XSM8ML	1	Låsmutter M8
10	XSM6ML	2	Låsmutter M6
11	XOC-48160-B0	1	Swing Away Fästet
12	XSM6X16	2	Skruv Rundad M6 x 16
13	XSM6BR	5	Planbricka M6

Åtdragningsmoment / Tightening torque

Metrisk grovgängor, stål.
Metric coarse threads, steel.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

Navhylsor.
Sleeves.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M16x1	30 Nm
M18x1	40 Nm