

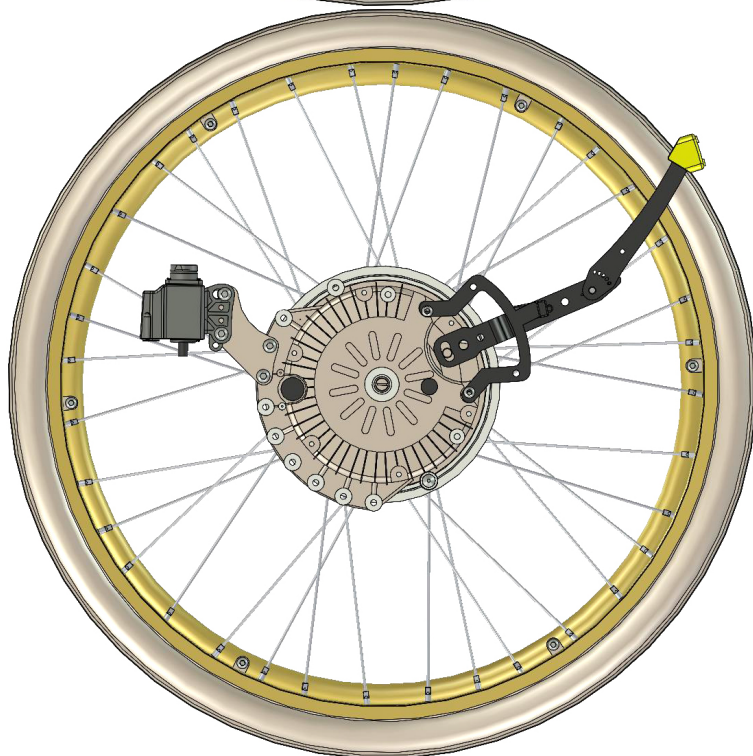


**Monteringsanvisning för Etac Panther
MED3024**

1. Demontera hjulen och bromsar på båda sidorna.

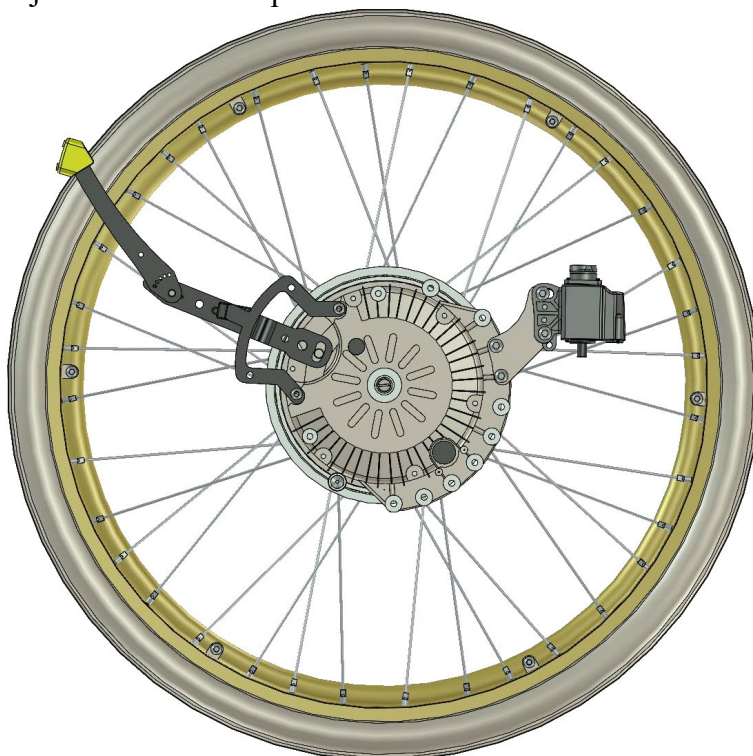


2. Kontrollera att stopp pinnen sitter enligt bilderna ovan, samt att tippskydden är demonterade.

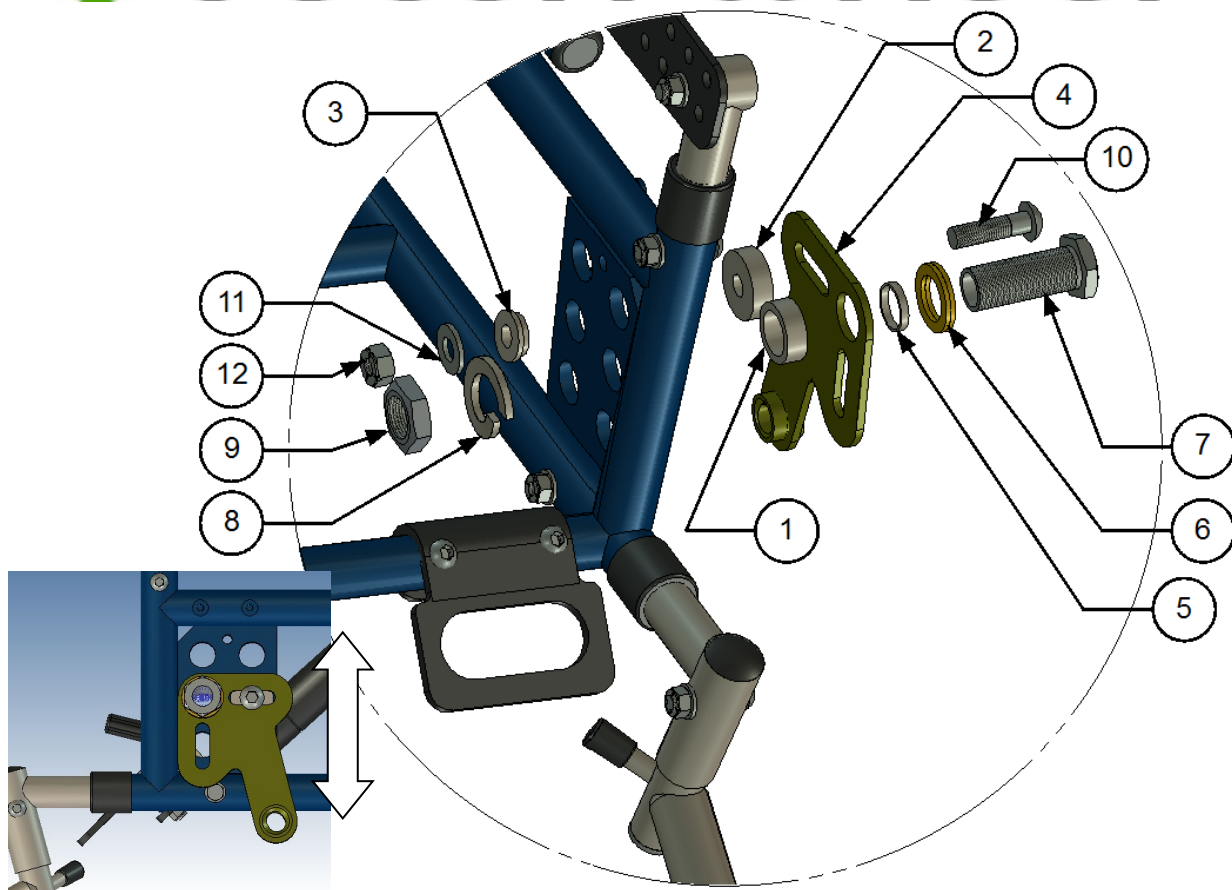


3. Montera nu fästet enligt bilderna ovan, som visar monteringsav fästet på höger sida.
Detaljer som ingår för montering på högersida:

Placering.	Artikelnummer	Antal	Beskrivning
1	100 400 006	1	Distans
2	100 400 013	1	Distans
3	100 400 007	1	Distans
4	MED2000	1	Fäste
5	100 400 017	1	Distans
6	405239	1	Nordlock Bricka M16
7	HW069	1	Navhylsa M16x1/12,7
8	XSM16FJ	1	Fjäder Bricka M16
9	XSM16M	1	Mutter M16 låg modell
10	XSM8X30	1	Skruv - M8 x 30
11	XSM8BR	1	Planbricka - M8
12	XSM8ML	1	Låsmutter - M8

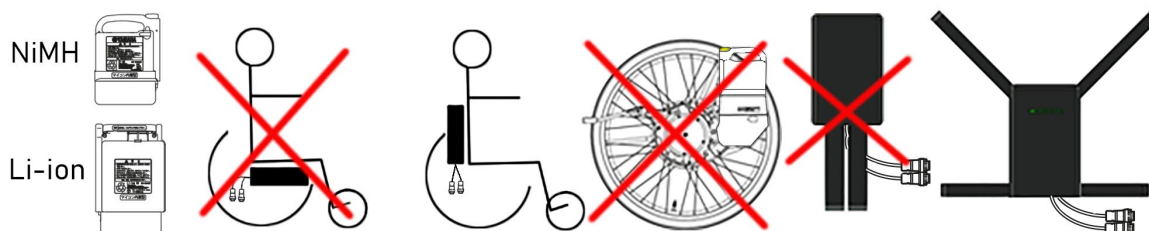


Joystick för brukare

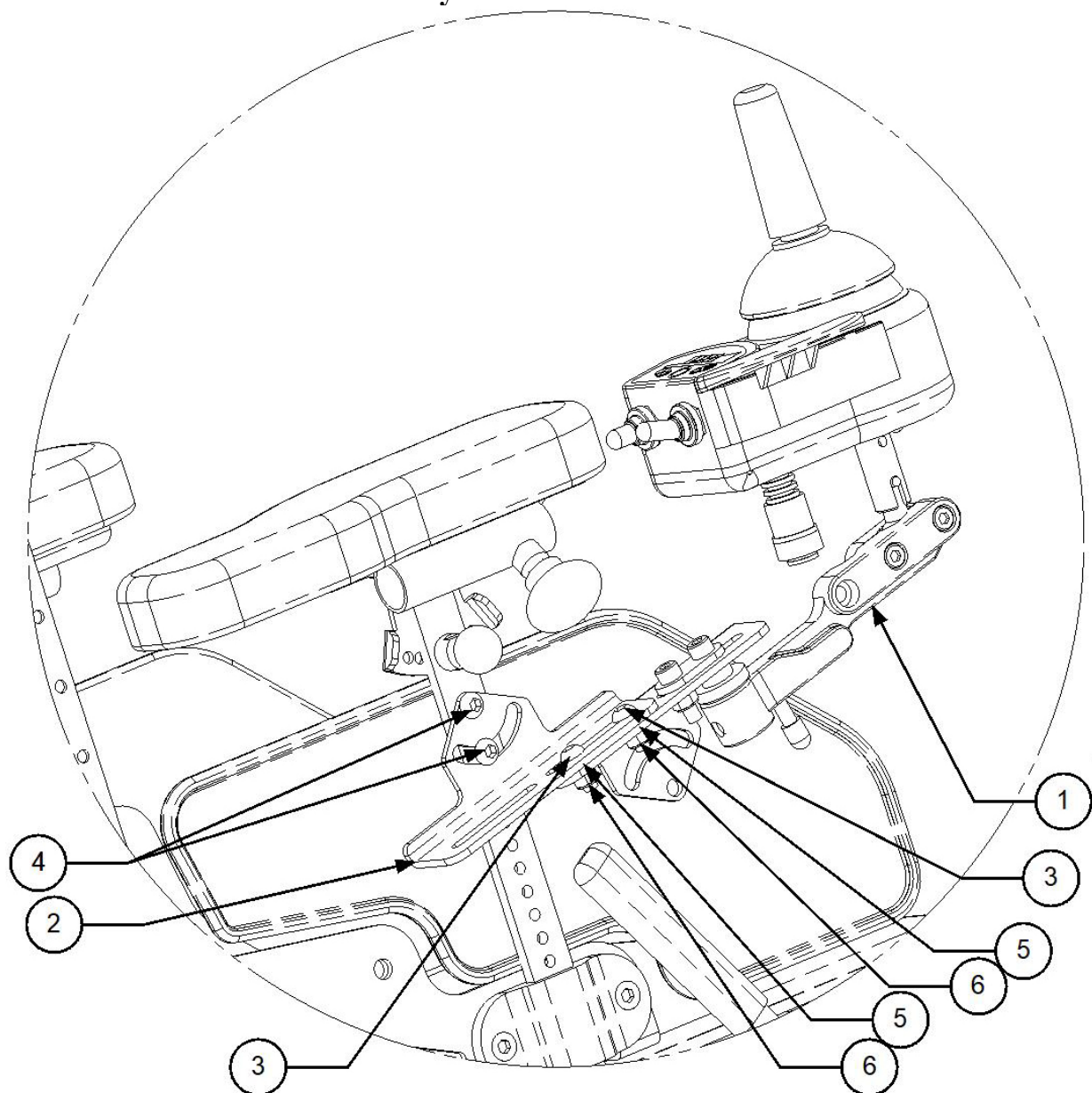

Placering.	Artikelnummer	Antal	Beskrivning
1	XOC-48160-B0	1	Övre hållare set 2
2	XOC-46295-00	1	Fäste
3	XSM6X16	2	Skruv - M6 x 16
4	XSM6X10	2	Skruv - M6 x 10
5	XSM6BR	2	Planbricka - M6
6	XSM6ML	2	Låsmutter - M6


4. Joysticks fästet kan placeras på valfri sida.

MED1356

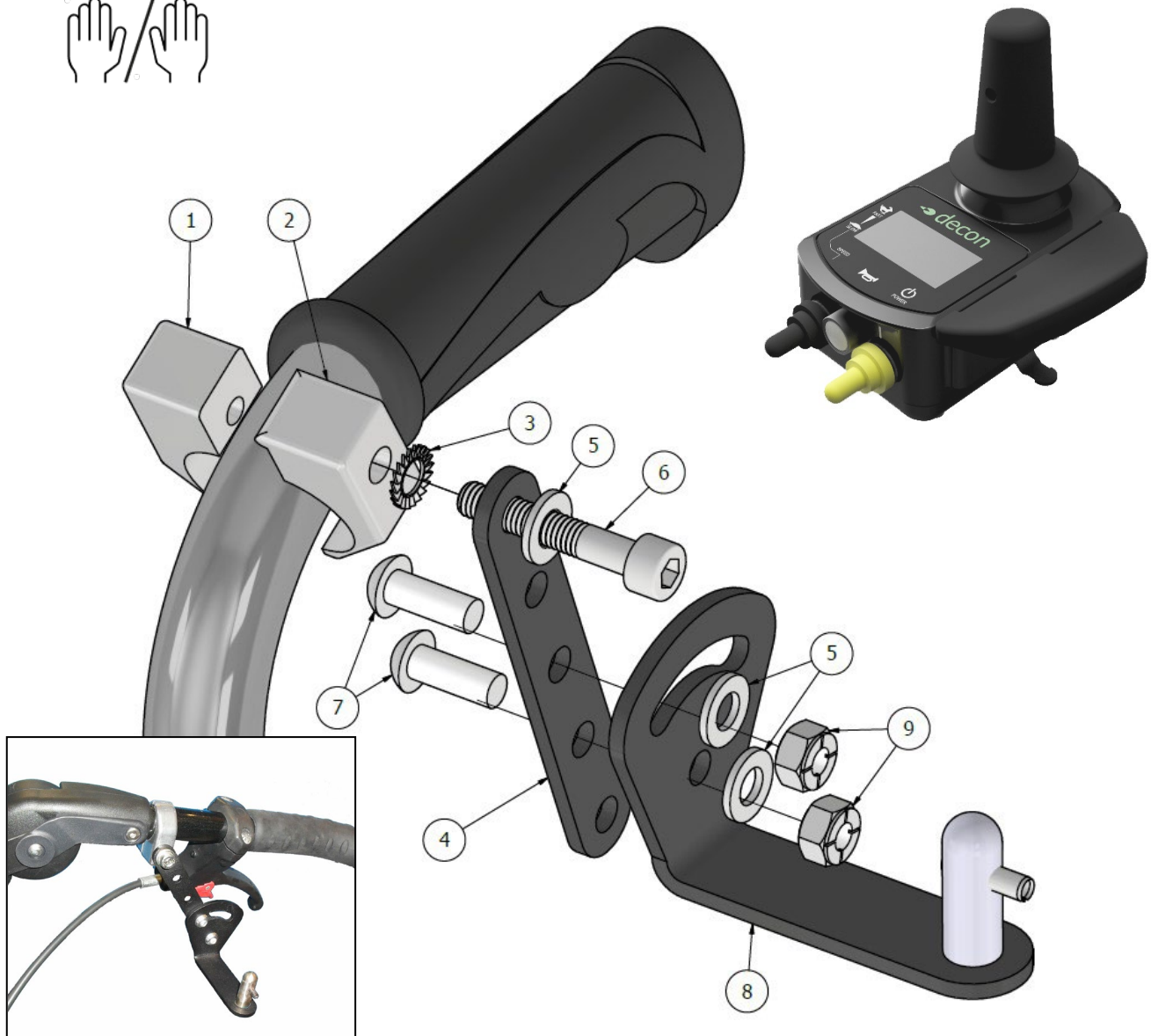

1	XA2-2612K-00	1	
2	XA2-2612E-00	1	
3	XSM6BRTG	1	
4	MED1317	1	
5	XSM6BR	3	
6	MC6SM6X35	1	
7	XSM6X16	2	
8	MED1316	1	
9	XSM6ML	2	

MED1252

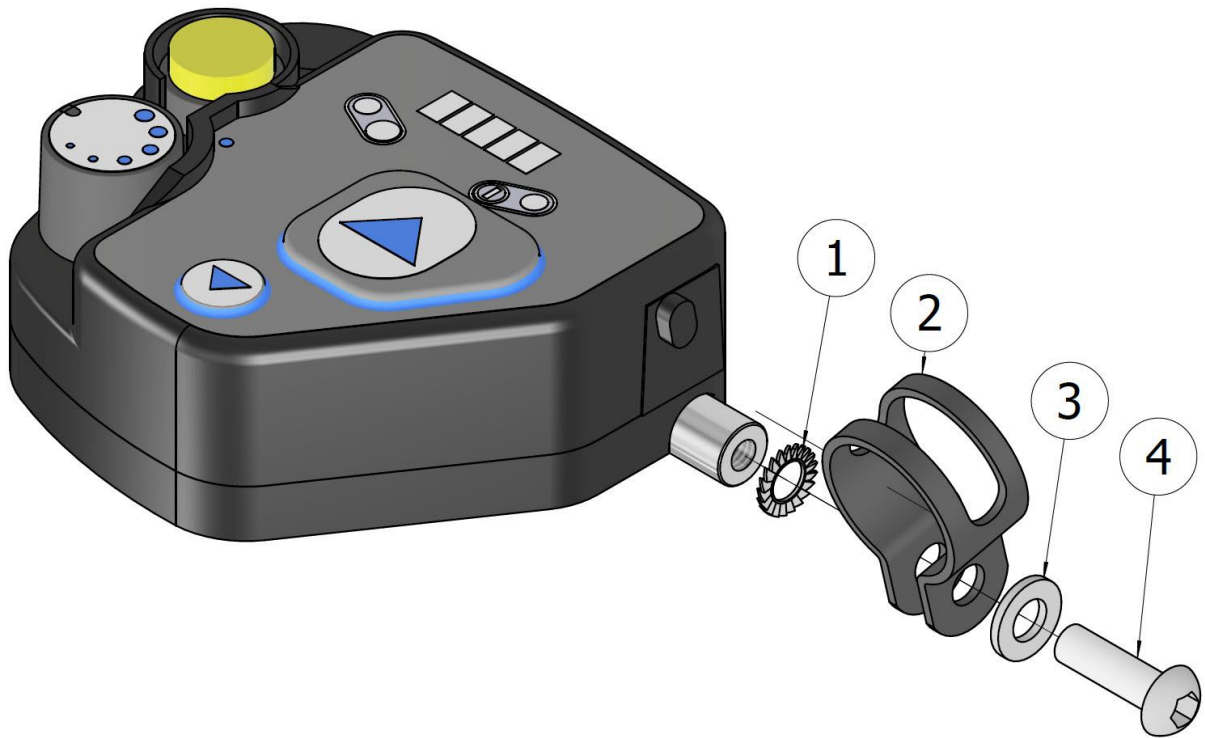


1	XSM6BRTG	1	
2	Xklamma2	1	
3	XSM6BR	1	
4	XSM6X20	1	



MED1252 + MED1643

MED1643

Vårdastyrningen är även möjlig att montera på vänstersida. För detta behöver man komplettera med MED1643, vilken beställs separat.

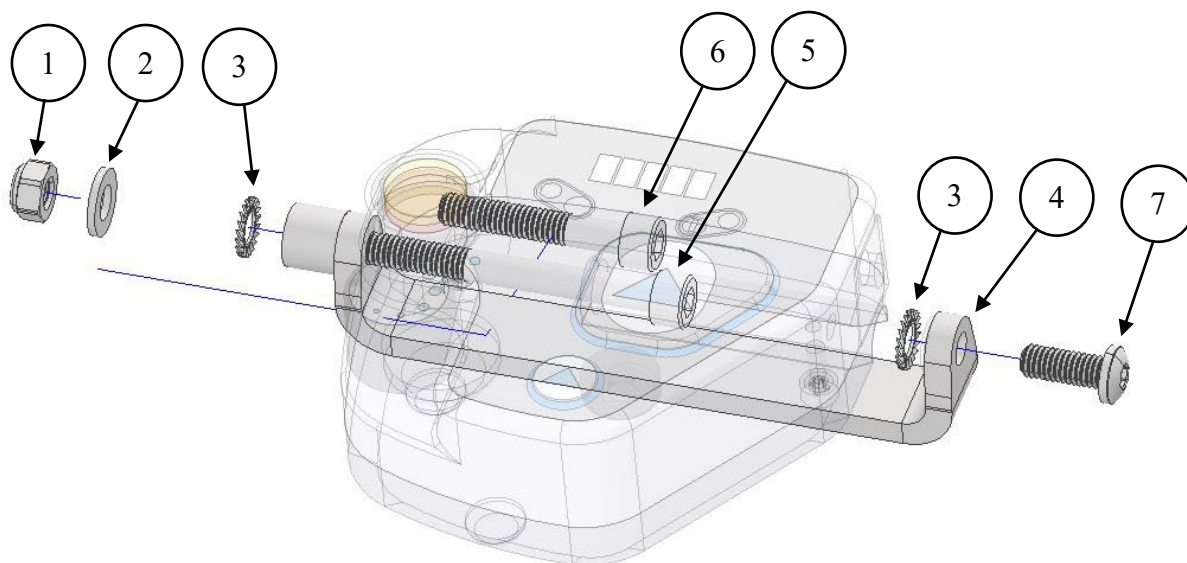


Använd antingen bult med placering 4 eller 5 beroende på vilken klämma som monterats på stolens handtagsrör. Den kortare passar plåtklämman och den gängade aluminiumklämman, den längre aluminiumklämman utan gängor.

Placering.	Artikelnummer	Antal	Beskrivning
1	XSM6M	1	Låsmutter M6
2	XSM6BR	1	Planbricka M6
3	XSM6BRTG	2	Taggbricka M6
4	MED1640	1	Fäste vårdastyrning vänster sida
5	MC6SM6X60	1	Bult M6x60
6	MC6SM6X35	1	Bult M6x35
7	MC6SM6X16	1	Bult M6x16



M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

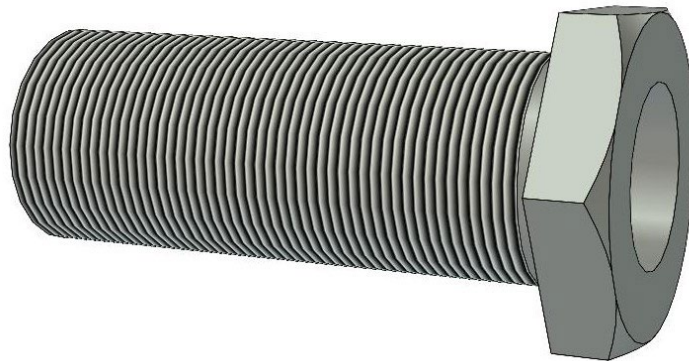

M16x1	30 Nm
M18x1	40 Nm