

decon mobility



2026-04
brugervejledning DK

e drive **NXT**
E-Drive NXT Brugervejledning



The undersigned, representing the following manufacturer

Decon Wheel AB
Org. No. 556618-9006
SRN SE-MF-000046289
Södra Ekeryd 119, 314 91 Hyltebruk
Sweden,

hereby declares that the product **E-Drive NXT**

with the basic UDI-DI 735001014MEDB3

and the following references

MEDL416		
MEDL420	MEDL420HD	
MEDL422	MEDL422HD	
MEDL424	MEDL424HD	MEDL424M
MEDL425	MEDL425HD	
MEDL426	MEDL426HD	MEDL426M

is in conformity with the Medical Device Regulation (EU) 2017/745 as a class I medical device based on Annex VIII, in accordance with Annex II and Annex III; and the Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

The product incorporates a rechargeable Li-ion battery which is CE-marked and covered by a separate EU Declaration of Conformity issued under Regulation (EU) 2023/1542 on batteries and waste batteries.

Intended purpose: E-Drive NXT is an electrically powered drive unit intended to be mounted onto compatible manual wheelchairs to provide powered assistance and braking support during propulsion of individuals who are unable to walk or who have limited walking ability.

This EU declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Hyltebruk, 2026-04-17


Mattias Lundin
CEO



Ansvar

Decon kan ikke holdes ansvarlig for produktændringer foretaget af uautoriserede personer. Som led i en løbende produktforbedringsindsats forbeholder Decon sig retten til at ændre specifikationer og design uden varsel.

Mærkatplacering

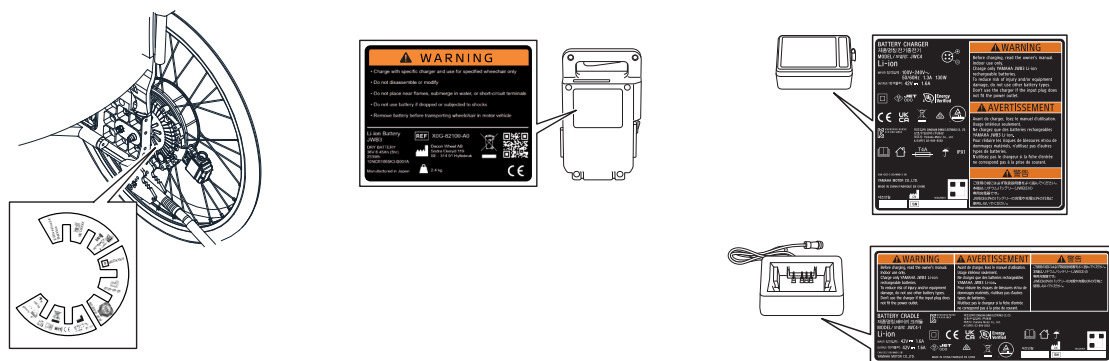

Mærkater og CE-mærker er placeret på motoren, på batteriet, på opladeren og på batteriholderen.

Symbolerne, der bruges på mærkaten på E-Drive NXT, forklares nedenfor.



Følg brugsanvisningen!



Maksimal brugervægt



Maksimal hastighed for enheden:
8,5 km/t



Angivet hældning: 6°



Medicinsk enhed



Serienummer på enheden



Produktionsdato



Navn og adresse på producenten



Katalognummer på enheden



Unik enhedsidentifikator



For information om bortskaffelse
af E-Drive NXT og dets
komponenter, se kapitel 9



ISO 7010-M002, Se
brugervejledning/brochure!

Læs venligst før brug

Forord

Tak for dit køb af E-Drive NXT.

Før brug af E-Drive NXT skal kørestolsbrugeren og/eller hjælperen gennemgå træning i korrekt håndtering af køreenheden. Under træningen skal kørestolsbrugeren og/eller hjælperen også informeres om potentielle risici forbundet med forkert eller utilsigtet brug.

Træningen skal udføres af Decons repræsentant eller distributør.

Personale eller teknikere, der er ansvarlige for montering, teknisk inspektion, vedligeholdelse eller service af E-Drive NXT, skal gennemgå teknisk træning for at sikre, at alle procedurer udføres i overensstemmelse med Decons krav og sikkerhedsretningslinjer.

Dette er en brugervejledning til den elektriske kraftenhed til kørestole "E-Drive NXT".

Forkert brug af dette produkt kan resultere i personskade eller skade på produktet.

Denne brugervejledning giver information, der hjælper dig med at bruge produktet sikkert og komfortabelt.

Før du bruger dette produkt, skal du sørge for at læse denne brugervejledning sammen med brugervejledningen til den kørestol, der er udstyret med dette produkt, for at sikre, at du fuldt ud forstår produktet før brug.

- Kørestole, hvorpå E-Drive NXT er installeret, er kørestole til fysisk handicappede personer, og deres juridiske status er som fodgængere. Sørg for at overholde færdselsregler og adfærd for fodgængere.
- For at sikre sikker brug er advarselsmærkater fastgjort på forskellige dele af dette produkt. Sørg for at overholde advarselsmærkaterne. Se "1 Brug af dette produkt, advarselsmærkat placering diagram"
- Brug ikke dette produkt til andre formål end kørestolen.
- Nogle af illustrationerne i denne brugervejledning er billeder af generelle kørestole. Det faktiske produkt kan afvige fra det viste.
- E-Drive NXT erstatter de originale hjul på din kørestol. Kontrollér venligst Deres kørestols brugervejledning ved ændring af indstillinger på kørestolen. Vær opmærksom på, at visse justeringer kan påvirke kørestolens stabilitet. Brug venligst altid anti-tip-enhederne.
- Bemærk venligst, at indholdet af denne brugervejledning kan afvige fra det faktiske produkt, du bruger, på grund af ændringer i produktspecifikationer. • Herefter henviser "dette produkt" til den elektriske kraftenhed til kørestole "E-Drive NXT". • Herefter henviser "kørestol" til den kørestol, der er udstyret med dette produkt.

Håndtering af personoplysninger

- Diagnostikkode eller enhver information relateret til produktet, som forhandler eller forhandler har indsamlet fra vedligeholdelsesapplikationen, kan deles med leverandøren med henblik på at yde reparation.



E-Drive NXT og dets tilbehør overholder de gældende afsnit af standard EN12184 for elektriske kørestole og overholder EU's forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745.

E-Drive NXT er udstyret med et Bluetooth-modul med modelnavnet FWM7BLZ20B, der overholder radioudstyrsdirektivet (2014/53/EU)



Bluetooth®-ordmærket og logoerne er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc.

Struktur af brugervejledningen

- Denne brugervejledning beskriver, hvordan du bruger produktet, såsom håndtering, styring, inspektion, opbevaring, transport, fejlfinding og specifikationer for hver del af den elektriske kraftenhed til kørestole.

For detaljer om, hvordan man bruger en kørestol udstyret med dette produkt, henvises til kørestolens brugervejledning.

Formål

Tiltænkt anvendelse

E-Drive NXT er en elektrisk drevet enhed, der er beregnet til at blive monteret på kompatible manuelle kørestole for at give assisteret kraft og bremseunderstøttelse under fremdrift af personer, der ikke kan gå eller har begrænset gangfunktion. **Indikationer for anvendelse**

E-Drive NXT er beregnet til personer, der bruger en manuelt drevet kørestol, men som ikke er i stand til at fremdrive sig selv tilstrækkeligt til at opfylde deres mobilitetsbehov og derfor har brug for assisteret fremdrift.

Tilsigtet patientgruppe

Den tiltænkte patientgruppe er personer i alle aldre, herunder børn, som bruger en manuel kørestol og har behov for elektrisk assistance på grund af begrænset eller manglende evne til selv fremdrift. Maksimal tilladt brugervægt er 125-160 kg afhængigt af konfiguration og manuel kørestol.

Tiltænkte brugere

Den tilsigtede bruger og betjener af E-Drive NXT kan være den person, der sidder i kørestolen, uanset alder, inklusiv børn, som er i stand til at betjene en elektrisk kørestol på sikker vis, har begrænset eller ingen evne til at bevæge sig frem på egen hånd og ikke overskrider den maksimalt tilladte brugervægt. Bruger og operatør af E-Drive NXT kan også være en hjælper.

Operatøren af E-Drive NXT skal være fysisk i stand til sikkert at kontrollere den manuelle kørestol med E-Drive NXT monteret. Operatøren skal også være kognitivt i stand til at forstå og udføre sikker drift, herunder manøvrering, bremsning og at reagere på nødsituationer.

Tiltænkt driftsmiljø

E-Drive NXT er beregnet til at blive brugt inden for temperaturområdet -25°C til +50°C i både indendørs og udendørs miljøer på faste, jævne og stabile overflader, der er egnede til kørestolsdrift.

Ikke egnet til

E-Drive NXT må ikke anvendes, hvis brugeren ikke har de fysiske, sensoriske eller kognitive evner, der kræves for sikkert at kunne betjene en manuel kørestol med elektrisk hjælp.

Symboler anvendt i denne brugervejledning



Angiver sikkerhedsrelaterede advarsler.



Dette angiver, at forkert brug kan medføre livsfare, alvorlig personskade eller invaliditet.

NOTICE

Angiver, at misbrug kan føre til materiel skade.

TIP

Angiver korrekte metoder og nøglepunkter ved drift af produktet.



Angiver forbudte handlinger.

OP



Denne del sælges separat.



Angiver dele, der kan justeres for position eller vinkel.

Vertikal


Angiver, at instruktionerne kan variere afhængigt af dit produkt eller udstyr.

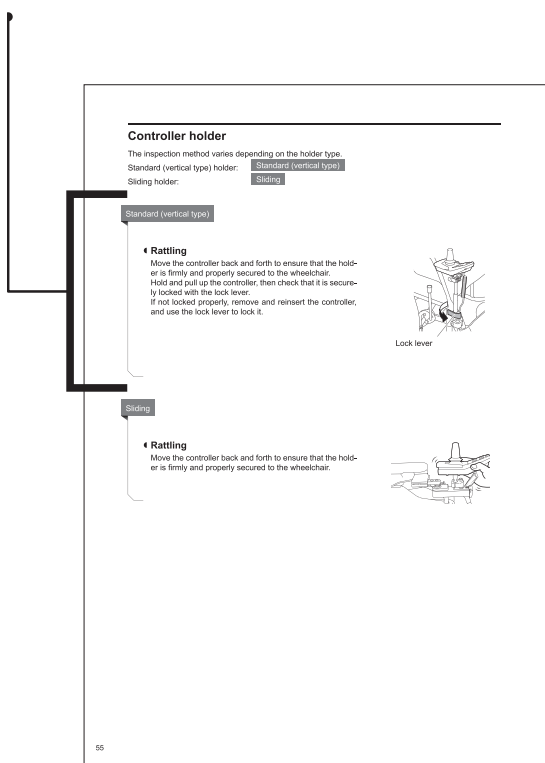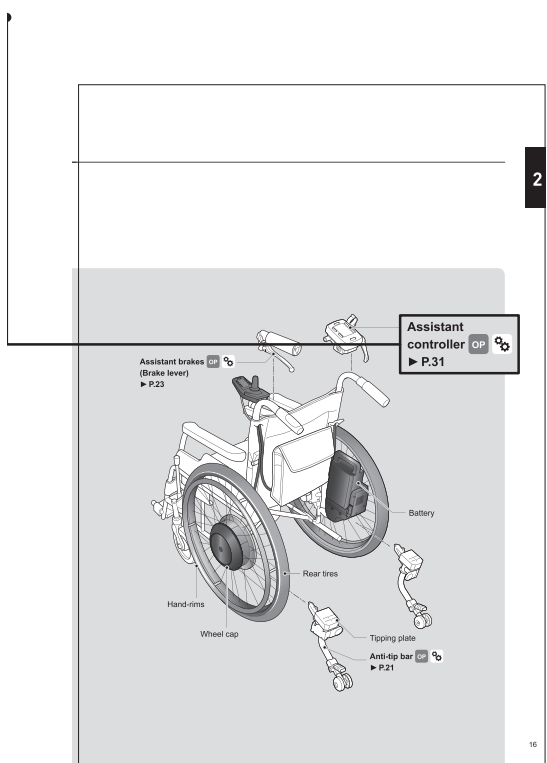

Kontrollér illustrationen nedenfor for at se, hvilket produkt du bruger.


Illustrationerne i denne brugervejledning er baseret på E-Drive NXT (20-26 tommer). Bemærk, at det faktiske produkt, du bruger, kan variere afhængigt af specifikationerne og placeringen, hvor 16-tommer dæk anvendes.

Elektrisk kraftenhed til kørestole "E-Drive NXT (20-26 tommer)"

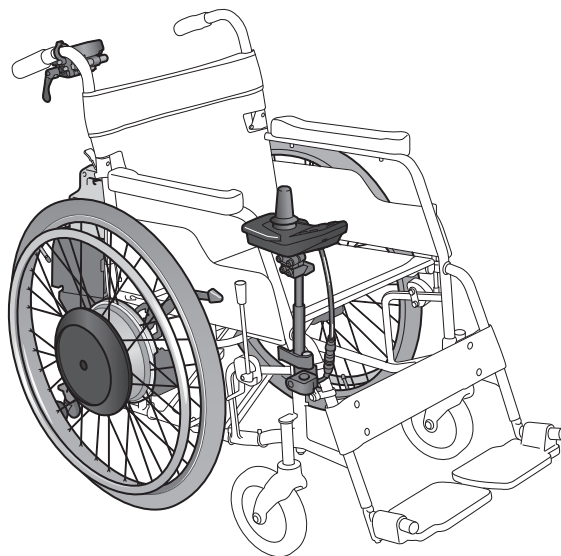

Brugervægtkapaciteten for E-Drive NXT er 160 kg.

Elektrisk motor til kørestole "E-Drive NXT (16 tommer)"

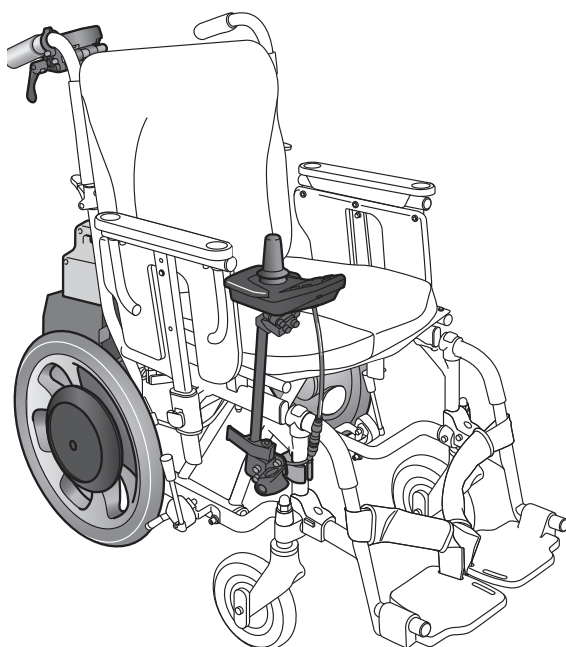


Brugervægtkapaciteten for E-Drive NXT er 160 kg.

Dette produkt består af venstre og højre drivaggregat, en styreenhed med joystick, et batteri, en valgfri batteritaske, en batterioplader samt en valgfri ekstra styreenhed. Disse komponenter, undtagen batteri og oplader, er allerede installeret på kørestolsstellet. Ved første brug behøver brugeren ikke at anvende værktøj eller lignende for at samle kørestolen. Se "2. Navne på dele" for at sikre, at disse komponenter er monteret på den kørestol, du har købt, og at batteriet og opladeren følger med. Hvis du visuelt bemærker, at nogen af disse komponenter ikke er installeret, ikke er inkluderet eller er beskadiget før brug af kørestolen, kontakt straks forhandleren uden at bruge kørestolen.

For information om betjening af kørestolsstellet og garanti for stellet, som du bruger sammen med E-Drive NXT, se stallets brugervejledning.

For information om kompatible kørestolsmodeller til montering af E-Drive NXT, besøg Decons hjemmeside (www.decon.dk). Vælg "Adaptere", find derefter "Find producent eller stol", og indtast den relevante producent eller kørestolsmodel. For at definere en specifik brugervægt, henvises til "Weight Calculator" på Decons hjemmeside, www.decon.se/en

Kontrollér for at sikre, at hjulstørrelsen er mindst 6".

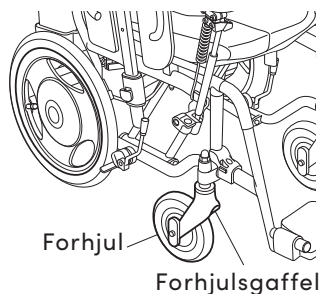

Denne brugervejledning, trykt med store bogstaver, er tilgængelig for synshandicappede. Spørg din forhandler.



ADVARSEL

- **Læs og forstå denne brugervejledning fuldstændigt, før du betjener dit E-Drive NXT-produkt. Denne brugervejledning bør betragtes som en permanent del af din enhed og bør forblive sammen med den.**

Indholdsfortegnelse

Læs venligst før brug

- Forord i
- Håndtering af personoplysninger i
- Struktur af brugervejledningen i
- Symboler brugt i denne brugervejledning iii


1

Brug af dette produkt 1

- Kontrol af driftsdiagnose 11
- Assisterende driftsdiagnostik kontrol (for kørestole udstyret med hjælperstyreenhed, sælges separat) 12
- Advarselsmærkat placering diagram 13

2

Navne på dele og hvordan de bruges 17

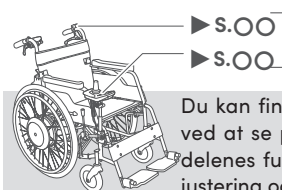

Reference sider

Du kan finde den ønskede side ved at se på illustrationerne af delenes funktioner, anvendelse, justering og kontrolmetoder.

- E-Drive NXT (20-26 tommer) 17

- E-Drive NXT (16 tommer) 19

Lithium-ion Batteri [Model: JWB3] 21

Batterioplader/holder [Model: JWC4] 22

- Styreenhed 29

- Hjælper Styreenhed 31

3

Inspektion af forskellige dele af elektriske enhed 47

- E-Drive NXT (20-26 tommer) 47

- E-Drive NXT (16 tommer) 49

4

Kørsel med kørestolen 57

- Forberedelse til at komme ind/ud af kørestolen 58
- Ind/udstigning af kørestolen 60
- Kontrollér før kørsel med kørestolen 62
- Kørsel med kørestolen 64
- Øv kørsel med kørestolen 67
- Forlade kørestolen 69

5

Kørsel med kørestolen med Hjælper 71

- Før flytning af person til kørestolen 72
- Flytning af person til kørestolen 75
- Kontrollér før kørsel med kørestolen 76
- Kørsel med kørestolen 78
- Grundlæggende om kørsel med kørestolen 81
- Forlade kørestolen 82

Produktfunktioner

Dette produkt kombinerer køreydelsen fra en elektrisk Kørestol med den nemme håndtering af en manuel kørestol, og du kan vælge de indstillinger og specifikationer, der passer til dit miljø.



Du kan tilpasse følelsen af driften efter din smag

► S.117
Køreparametre

6

Håndtering af Batterier og Opladere 83

- Indsættelse/fjernelse af Batteri 87
- Lithium-ion Batteri [Model: JWB3] 91

7

Transport, Vedligeholdelse og Opbevaring 105

- Indlæsning af kørestol i køretøj 106
- Håndtering i fly 108
- Vedligeholdelse 109
- Genbrug 110
- Opbevaring af kørestolen 111

8

Dimensioner og Specifikationer 113

- Dimensioner (i mm) 113
- Specifikationer 114

9

Hvad skal man gøre 117

- Ændring af indstillingerne 117
- Fejlfinding 119
- Ofte stillede spørgsmål 127
- Bortskaffelse af kørestole og batterier 129
- Forespørgsel og garanti 129

10

Anbefalet periodisk Inspektion 131

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Brug af dette produkt

Dette er en brugervejledning til den elektriske motor til kørestole.

Læs venligst denne brugervejledning sammen med brugervejledningen til den kørestol, hvor dette produkt skal installeres, for at sikre, at du fuldt ud forstår produktet før brug.

Dette kapitel beskriver advarselsinformation, som du skal forstå, når du bruger den elektriske motor til kørestole.

Sørg for, at både brugeren samt hjælper eller plejer har læst denne brugervejledning for at sikre fuld forståelse af advarselsinformationen.

Generelt indebærer kørsel i en elektrisk drevet kørestol en mulig risiko for personskade eller skade på kørestolen ved forkert brug. Afhængigt af typen eller graden af brugerens handicap kan det være farligt at rejse uden ledsager. Før brug af den elektrisk drevne kørestol skal du sikre, at ikke kun brugeren, men også hjælperen har læst denne brugervejledning for at sikre fuld forståelse.

Brug af dette produkt



ADVARSEL

- **Før du bruger en kørestol, skal du vurdere dine evner og afgøre, om du har brug for en hjælper. Derudover, når du vurderer nødvendigheden af en hjælper, bør du konsultere ekspertudtalelser fra fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre specialister som reference.**

Hvis din vurdering udelukkende er baseret på din egen mening, kan en forkert vurdering resultere i skade på dig selv eller andre omkring dig.

- **Øv dig i at køre kørestolen på en flad, sikker overflade sammen med en hjælper, indtil du bliver fortrolig med driften af kørestolen.**

Kørsel med kørestolen på vejen uden at være fortrolig med driften kan forårsage skade på dig selv eller andre omkring dig.

- **Hvis du støder eller gnider kørestolen mod en væg eller andre overflader, skal du sikre, at der ikke er ridser eller hakker på kørestolen.**

Ridser eller hakker på kørestolen kan forårsage skader på dig, hvis du kommer i kontakt med dem.

- **Modificér ikke denne elektriske strømenhed.**

Modifikationer kan forringe sikkerheden eller påvirke dens ydeevne.

- **Betjen aldrig kørestolen, hvis du ikke har det godt, eller efter indtagelse af alkohol eller medicin, der forårsager dødsghed.**

Dette kan resultere i skade på dig selv eller andre omkring dig.


- **Kør ikke kørestolen i tøj, der er usikkert for kørestole, som vist nedenfor.**

Betjening af kørestolen i usikkert tøj kan resultere i skade på dig selv eller andre omkring dig.

Lange tørklæder



Tøj med løse ærmer

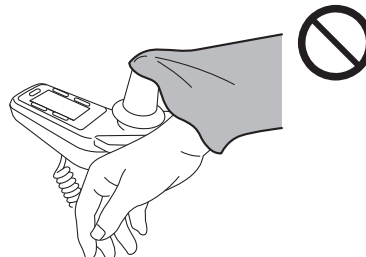

Bemærk

- Hvis du registrerer et problem, som du ikke selv kan løse (hvis du ikke kan løse fejlen ved hjælp af "fejlfinding"), skal du stoppe med at bruge kørestolen og kontakte din forhandler.

Fortsat brug af kørestolen i denne tilstand kan forårsage skade på den elektriske motorenhed eller få kørestolen til at standse under kørsel.

Farlige vejoverflader



ADVARSEL

- I tilfælde af en nødsituation skal hjælperen skifte koblingshåndtagene til manuel kørsel-position eller skubbe-position og flytte kørestolen til et sikkert sted.

- I følgende miljøer og situationer skal du have en hjælper til at ledsage dig.

At køre alene i disse situationer kan medføre skade.

- Kontrollér for eventuelle farer som vist nedenfor på de veje, du bruger dagligt.

Hvis der er farlige områder, skal du vælge en rute, der undgår de farlige områder.

- Grusveje, mudrede veje

Kørestolens forhjul og bagdæk kan synke ned og sidde fast.



- Sideafløb, kloakdæksler

Ved kørsel på overflader med huller kan forhjulene eller bagdækkene falde ned i hullet.



- Veje med sne og vandpytter

- Kørestolen kan glide og blive ukontrollerbar, eller bremsene kan blive ineffektive.
- Hvis kørestolen kører gennem en vandpyt, og der kommer vand ind i køre-enhederne, kan kørestolen standse.



- Stor fordybning i vejen

Undgå fordybninger på vejen og på fortovene, der skyldes bilramper. Hvis du kører direkte ned i fordybningen, kan kørestolen vælte. Hvis du ikke har andet valg end at fortsætte, skal du gøre det med en hjælper for at sikre sikkerheden.



Farlige miljøer




ADVARSEL

- I tilfælde af en nødsituation skal hjælperen skifte koblingshåndtagene til manuel kørsel-position eller skubbe-position og flytte kørestolen til et sikkert sted.
- I følgende miljøer og situationer skal du have en hjælper med dig eller anmode om en ledsager på stationer og busstoppesteder.
At køre alene i disse situationer kan medføre skade.
- Kontrollér for eventuelle farer som vist nedenfor på de veje, du bruger dagligt.
Hvis der er farlige områder, skal du vælge en rute, der undgår de farlige områder.
- Når du bruger offentlig transport, skal du kontrollere på forhånd, at brug af kørestol er tilladt. Følg desuden reglerne og instruktionerne, når du går ombord på køretøjet.
- Ved brug af en privat bil anbefales det at flytte til et fast sæde i køretøjet og bruge trepunkts sikkerheds-selen. Se Bilag A.
- Når du stiger ind i eller ud af et liftkøretøj, skal du altid have en hjælper med dig for at sikre sikkerhed.


● Togperroner

Der er risiko for at falde ned på sporene.

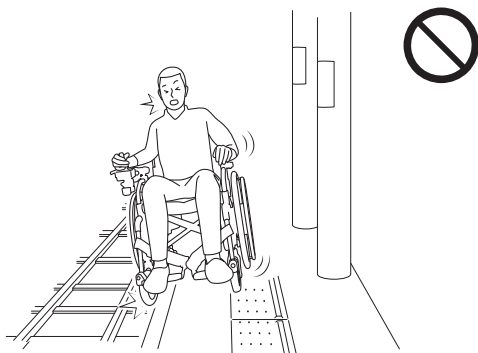


● Jernbaneoverkørsler, sporvognsspor

Der er risiko for, at hjulene sætter sig fast i hullerne i sporene.

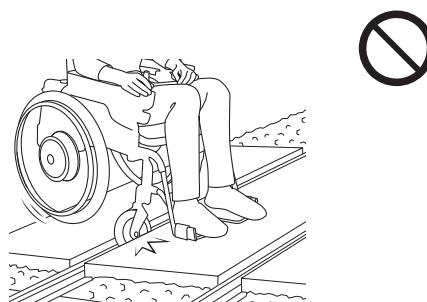


● På- og afstigning af busser eller tog

Hjulene kan falde af rampen eller ned i mellemrummet mellem perronen og toget.

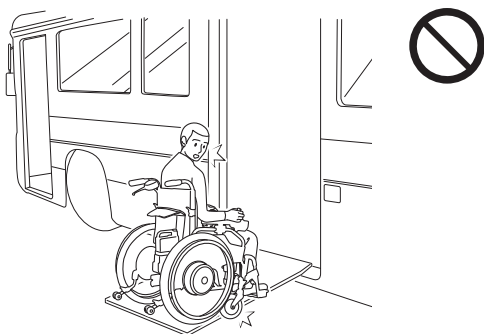

● På- og afstigning af liftkøretøjer

Der er risiko for, at kørestolen kører af rampen.

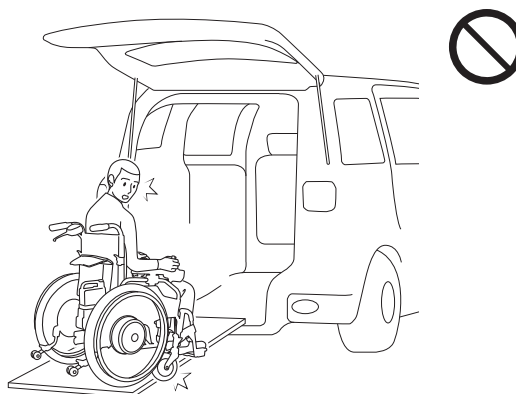

! ADVARSEL

● På- og afstigning på ukendte hældninger

Når du rejser på ukendte hældninger, skal du have en hjælper med for at sikre sikkerhed.


● Områder hvor kørestolen hælder kraftigt til venstre eller højre

Kørestolen kan vælte til siden.



● På- og afstigning ved kantsten

- Vær altid opmærksom på dine omgivelser og sørg for, at du er sikker.
- Få en hjælper til at ledsage dig, når du for første gang skal på eller af kantstenen, for at sikre sikkerhed.

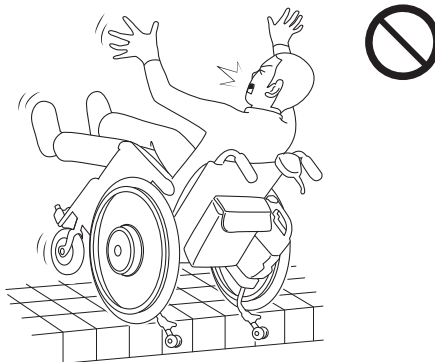

● kørsel om natten

- Hvis du ikke kan se vejforholdene, kan det resultere i tab af balance eller sammenstød med køretøjer.
- Kørestolen kan være usynlig for folk omkring dig, eller en bil kan køre ind i dig, hvis de ikke kan genkende dig.



● Fortov uden gelænder

Kørestolen kan falde ud på vejen.





ADVARSEL

● Krydsning af ukendte veje

- Når du krydser en vej uden trafiksignaler, skal du være ekstra opmærksom på trafikken.
- Selv ved brede fodgængerovergange med trafiksignaler kan signalet skifte, før du er færdig med at krydse. På sådanne steder skal du vente på næste grønne lys for at give dig selv tilstrækkelig tid til at krydse vejen.
- Det er ekstremt farligt at køre på en smal vej. Vælg en mere sikker rute, når det er muligt.
- Hvis batteriets resterende kapacitet er lav, kan kørestolen gå i stå under krydsning af en vej. Kontrollér batteriets resterende kapacitet før krydsning.

● Nær enheder der genererer stærke radiobølger

Den elektriske strømenhed kan fungere forkert eller operere unormalt.

Hvis kørestolen er tæt på en kilde til radiobølger og begynder at fungere unormalt, skal du straks slukke for strømmen og hurtigt flytte dig væk fra stedet ved hjælp af hjælperens skub eller manuel drift.

De svage elektromagnetiske bølger, der udsendes af den elektriske strømenhed, kan påvirke andre elektroniske enheder, såsom automatiske døre og butikkers tyverisikringsystemer. I dette tilfælde skal du slukke for strømmen og betjene kørestolen ved hjælp af hjælperdrift eller manuel drift.

Håndtering af koblingsgrebet



ADVARSEL

● Skift ikke koblingsgrebene til manuel kørsel eller skub-position i områder med hældning.

Kørestolen kan begynde at bevæge sig uventet og kan kollidere eller vælte.

● Betjen ikke koblingsgrebene, mens kørestolen er i bevægelse.


Der er risiko for kollision eller væltning.

● Du må ikke skifte koblingshåndtagene til manuel kørsel eller skubbe dem i skubbe-position, mens du kører i motordrevet kørsel.


Hvis du gør dette, kan motorbremsen miste sin effekt. Især på hældninger kan kørestolen komme ud af kontrol.

● Skift ikke koblingsgrebene til motordrevet kørsel, mens du kører i manuel kørsel.

Hvis dette gøres, aktiveres bremserne på baghjulene. Den pludselige opbremsning kan forårsage, at din krop kastes fremad som reaktion, hvilket kan forårsage skade på dig eller andre omkring dig, eller beskadige kørestolen.

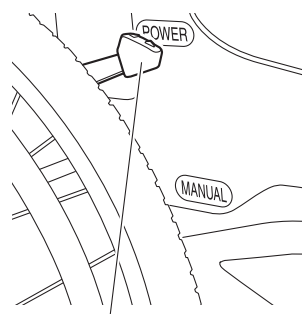

Koblingshåndtag

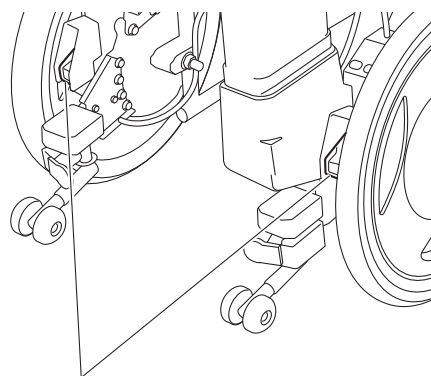

Koblingshåndtag

Husk dette under kørsel



ADVARSEL


- Hvis du vil bruge en mobiltelefon eller smartphone, skal du stoppe kørestolen et sikkert sted og slukke kørestolen.

Kørsel med kørestolen, mens du bruger en mobiltelefon eller smartphone, kan forårsage en ulykke.



- Afbryd ikke batteriet under rejse.

Hvis dette gøres, aktiveres bremserne på baghjulene. Den pludselige opbremsning kan forårsage, at din krop kastes fremad som reaktion, hvilket kan forårsage skade på dig eller andre omkring dig, eller beskadige kørestolen.

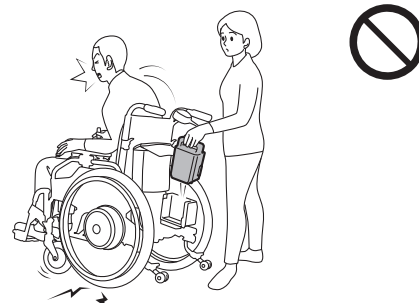

- Sluk ikke for kontakten under rejse.

Hvis dette gøres, aktiveres bremserne på baghjulene. Den pludselige opbremsning kan forårsage, at din krop kastes fremad som reaktion, hvilket kan forårsage skade på dig eller andre omkring dig, eller beskadige kørestolen.



- Kør ikke med kørestolen, mens en USB-enhed er tilsluttet USB-strømporten.

Ellers kan USB-strømticket blive udsat for stød, og styreenheden kan blive beskadiget, hvis kørestolen støder ind i et objekt.

Et kabel tilsluttet USB-enheden kan vikles sig rundt om joysticket, koblingsgrebet eller et baghjul, hvilket muligvis kan forårsage en ulykke.



- Vær forsigtig under betjening af kørestolen, så du ikke får hænderne viklet ind i hjuleger, hjulhuller osv. Du kan komme til skade.

Om bagage

ADVARSEL

- **Hæng ikke noget over armlænene eller sidebeskytterne.**

Hvis en genstand forstyrrer baghjulene, kan baghjulene låse, hvilket kan resultere i et sammenstød eller fald.

Hvis en genstand forstyrrer koblingsgrebene, kan koblingsgrebene uventet skifte til manuel kørsel eller skub-position, hvilket kan resultere i et sammenstød eller fald.



- **Hæng ikke genstande på joysticket på styreenheden.**

Vægten af genstanden kan forhindre joysticket i at vende tilbage til sin oprindelige position ved frigivelse, og kørestolen kan muligvis ikke stoppe eller kan forstyrre driften af kørestolen.




- **Sæt ikke elastikker på joysticket på styreenheden.**

Hvis elastikken sætter sig fast i styreenheden, kan det forhindre joysticket i at vende tilbage til sin oprindelige position, og kørestolen kan muligvis ikke stoppe.

- **Betjen ikke kørestolen med tung bagage hængende over ryglænet eller med tunge genstande i rummet.**

Kørestolen kan let vælte bagover på en hældning og kan forårsage, at du eller personer omkring dig kommer til skade.

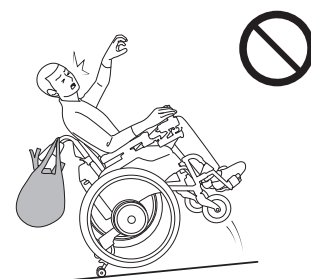

Andre forholdsregler

ADVARSEL

- **Når du kører i kørestolen i et område med mange mennesker, skal du gøre det med tilstrækkelig opmærksomhed på dine omgivelser.**

Hvis du støder ind i personer eller genstande, kan din krop kastes fremad som reaktion, hvilket kan forårsage skade på dig eller andre omkring dig, eller beskadige kørestolen.

- **Når du holder stille i et område med mange mennesker, skal du huske at slukke for strømmen.**

Hvis en person i dit nærområde rammer joysticket med sin hånd eller arm, kan kørestolen begynde at bevæge sig uventet og forårsage skade på personer omkring dig.

⚠ ADVARSEL

- **Betjen ikke kørestolen på frosne overflader.**

Kørestolen kan blive ukontrollerbar, eller bremserne kan blive ineffektive.




- **Drej ikke brat på en nedadgående hældning.**

Du kan let miste balancen og vælte.

- **På en nedadgående hældning skal du starte bremseoperationen tidligt.**

Bremselængden på en nedadgående hældning kan være væsentligt længere end ved kørsel på jævnt underlag.

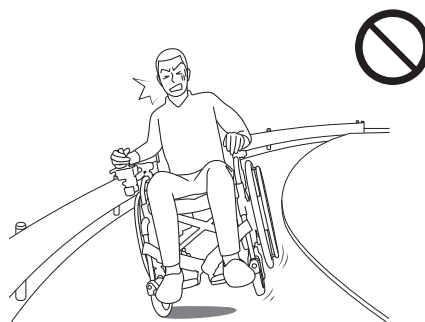

- **Kør ikke vandret eller diagonalt over en stejl hældning.**


Du kan let miste balancen og vælte.

- **Når du passerer hække og træer, skal du holde tilstrækkelig afstand for at forhindre, at baghjulene kommer i kontakt med grene eller andre fremspringende genstande.**

Hvis kviste eller andre genstande fra hække og træer sætter sig fast i baghjulene, når kørestolen kører i eldrevsposition, kan det medføre, at baghjulene låser sig, at koblingshåndtaget skifter til manuel kørsel eller skubbeposition, samt at der opstår kollisioner, eller at kørestolen udfører tipning.

- **Du må ikke modtage mikrobølgetermoterapi, mens du sidder i kørestolen.**

De elektromagnetiske bølger kan medføre funktionsfejl i strømforsyningen, utilsigtet drift samt opvarmning af metaldele, der kan forårsage forbrændinger. Sluk for strømmen til strømforsyningsenheden, og placer kørestolen i sikker afstand fra mikrobølge-termoterapiudstyret.

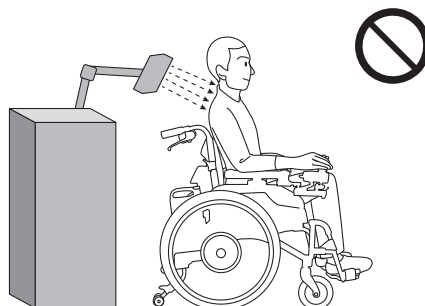

- **Langvarig brug af E-Drive som primær fremdriftsmetode uden regelmæssig manuel fremdrift eller muskelaktivitet kan føre til nedsat muskelstyrke i arme og/eller ben. Nedsat muskelbrug kan øge den langsigtede afhængighed af enheden.**

For at reducere denne risiko:

- Brug manuel fremdrift regelmæssigt, når det er muligt.
- Følg alle trænings- eller motionsanbefalinger fra sundhedsprofessionelle.
- Stol ikke på E-Drive som eneste fremdriftsmiddel, medmindre det er medicinsk anbefalet.

Bemærk

- Kontinuerlig eller langvarig UV-eksponering kan beskadige din enhed. Undgå at udsætte din enhed for kontinuerligt eller langvarigt UV-lys, da det kan forårsage, at komponentmaterialer svækkes og bliver skøre, samt forårsage, at mærkater bliver ulæselige og/eller misfarvede
- Dette produkt indeholder små dele, som under visse omstændigheder kan udgøre en kvælningssfare for små børn.

Under assisteret kørsel

⚠ ADVARSEL

- Når du skifter koblingshåndtagene til manuel kørsel eller skubbe-position, skal du parkere på en flad overflade, aktivere parkeringsbremsen og slukke for strømkontakten.
Kørestolen kan begynde at bevæge sig uventet, hvilket kan forårsage skade på dig eller andre omkring dig.

- Når du skal op eller ned over en kantsten eller andre forhindringer, skal du slukke for hjælperens styreenhed og passere ved hjælp af manuel drift.

At stige ind/ud, mens kørestolen er sat til el-kørsel, kan forårsage, at kørestolen mister balancen og vælter.



Elektrisk kørestol elektromagnetisk interferens (EMI)

Da EM-energi hurtigt bliver mere intens, jo tættere man kommer på den udsendende antenne (kilde), er EM-felter fra håndholdte radiobølgekilder (transceivere) af særlig bekymring. Det er muligt utilsigtet at bringe høje niveauer af EM-energi meget tæt på den elektriske kørestols styresystem, når du bruger disse enheder. Dette kan påvirke en elektrisk kørestols bevægelse og bremses. Derfor anbefales det at følge advarslerne nedenfor for at forhindre mulig interferens med styreenheden i den elektriske kørestol.

⚠ ADVARSEL

Elektromagnetisk interferens (EMI) fra kilder som radio- og tv-stationer, amatørradio (HAM)-sendere, tovejskommunikationsradioer og mobiltelefoner kan påvirke elektriske kørestole og motoriserede scootere. Hvis du følger advarslerne nedenfor, bør det mindske risikoen for utilsigtet frigørelse af bremses eller bevægelse af den elektriske kørestol, hvilket kan resultere i alvorlig skade

1) Betjen ikke håndholdte transceivere (sendere - modtagere), såsom CB-radioer, og tænd ikke for personlige kommunikationsenheder, såsom mobiltelefoner, mens den elektriske kørestol er tændt;

2) Vær opmærksom på nærliggende sendere, såsom radio- eller tv-stationer, og forsøg at undgå at komme tæt på dem;

3) Hvis utilsigtet bevægelse eller frigørelse af bremses opstår, skal du slukke for den elektriske kørestol, så snart det er sikkert;

4) Vær opmærksom på, at tilføjelse af tilbehør eller komponenter eller ændring af den elektriske kørestol kan gøre den mere modtagelig for EMI (Bemærk: Der er ingen nem måde at vurdere deres effekt på den samlede immunitet af den elektriske kørestol); og

5) Rapportér alle hændelser med utilsigtet bevægelse eller frigørelse af bremses til producenten eller distributøren af den elektriske kørestol, og bemærk, om der er en EMI-kilde i nærheden.

FORSIGTIGHED

DET ER MEGET VIGTIGT, AT DU LÆSER DENNE INFORMATION OM DE MULIGE VIRKNINGER AF ELEKTROMAGNETISK INTERFERENS PÅ DIN KØRESTOL.

Elektromagnetisk interferens (EMI) fra radiobølgekilder

Elektriske kørestole og motoriserede scootere (i denne tekst omtales begge som elektriske kørestole) kan være modtagelige for elektromagnetisk interferens (EMI), som er forstyrrende elektromagnetisk energi (EM) udsendt fra kilder såsom radiostationer, tv-stationer, amatørradio (HAM)-sendere, tovejskommunikationsradioer og mobiltelefoner. Interferensen (fra radiobølgekilder) kan få den elektriske kørestol til at frigøre sine bremses, bevæge sig af sig selv eller bevæge sig i utilsigtede retninger. Det kan også permanent beskadige den elektriske kørestols styresystem. Intensiteten af den forstyrrende EM-energi kan måles i volt pr. meter (V/m). Hver elektrisk kørestol kan modstå EMI op til en vis intensitet. Dette kaldes dens "immunitetsniveau". Jo højere immunitetsniveau, desto større beskyttelse. På nuværende tidspunkt er den nuværende teknologi i stand til at opnå mindst et immunitetsniveau på 20 V/m, hvilket vil give nyttig beskyttelse mod de mere almindelige kilder til udsendt EMI. Denne elektriske kørestolsmodel som leveret, uden yderligere modifikation, har et immunitetsniveau på 20 V/m.

Der er en række kilder til relativt intense elektromagnetiske felter i det daglige miljø. Nogle af disse kilder er åbenlyse og lette at undgå. Andre er ikke synlige, og eksponering er uundgåelig. Vi mener dog, at ved at følge advarslerne nedenfor vil din risiko for EMI blive minimeret.

Kilderne til udsendt EMI kan groft opdeles i tre typer:

- 1) Håndholdte bærbare transceivere (sendere-modtagere) med antennen monteret direkte på sendeenheden. Eksempler inkluderer: citizens band (CB)-radioer, "walkie talkies", sikkerheds-, brand- og polititransceivere, mobiltelefoner og andre personlige kommunikationsenheder. BEMÆRK: Nogle mobiltelefoner og lignende enheder sender signaler, mens de er TÆNDT, selv når de ikke bruges;
- 2) Mellemrækkevidde mobile transceivere, såsom dem der bruges i politibiler, brandbiler, ambulancer og taxaer. Disse har normalt antennen monteret på ydersiden af køretøjet; og
- 3) Lange rækkevidde sendere og transceivere, såsom kommercielle broadcast-sendere (radio- og tv-antenne master) og amatørradioer (HAM).

BEMÆRK: Andre typer håndholdte enheder, såsom trådløse telefoner, bærbare computere, AM/FM-radioer, tv-apparater, cd-afspillere og kassetteafspillere samt små apparater som elektriske barbermaskiner og hårtørrere, vil så vidt vi ved ikke sandsynligvis forårsage EMI-problemer for din elektriske kørestol.

Vigtig information

- 1) 20 volt pr. meter (V/m) er et generelt opnåeligt og nyttigt immunitetsniveau mod EMI (pr. maj 1994) (jo højere niveau, desto større beskyttelse).
- 2) Dette produkt har et immunitetsniveau på 20 V/m.*

*) Og det har et emissionsniveau på CISPR 11 Gruppe 1 Klasse B.

Driftsdiagnosekontrol

Afhængigt af omfanget af dine handicap og din fysiske tilstand kan det være farligt at køre uden ledsager. Brug denne diagnostiske kontrol som en vejledning til at afgøre, om du kan køre uden ledsager i en kørestol udstyret med dette produkt.



ADVARSEL

- Før du kører i kørestolen, skal du sikre dig at vurdere din kompetence og afgøre, om du har brug for en hjælper. Derudover, når du vurderer nødvendigheden af en hjælper, bør du konsultere ekspertudtalelser fra fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre specialister som reference.


Hvis din vurdering udelukkende er baseret på din egen mening, kan en forkert vurdering resultere i skade på dig selv eller andre omkring dig.

Diagnosekontrol 1

(1) Er du i stand til at betjene knapperne på styreenheden efter eget ønske?

(2) Er du i stand til at vippe joysticket frem og tilbage, til venstre og højre, for at bevæge kørestolen som du ønsker, og derefter returnere joysticket til midten, når du vil stoppe?

(3) Er du i stand til visuelt korrekt at opfatte forholdene på vejoverfladen og dine omgivelser samt undgå farlige områder?

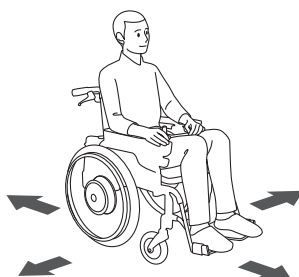

Ja til alle

Har problemer med at betjene en eller flere

Få en hjælper til at betjene kørestolen ved assisteret drift.

Diagnosekontrol 2

(1) Er du i stand til at betjene parkeringsbremserne og koblingshåndtagene?

(2) Er du i stand til at komme ind og ud af kørestolen selv?

(3) Er du i stand til at afmontere batteriet?

Ja til alle

Har problemer med at betjene en eller flere

Få en hjælper til at ledsage dig.

Du kan køre uden ledsager. For din sikkerhed, husk at køre forsigtigt.

Sørg altid for at have en hjælper med dig i områder, hvor der kræves forsigtighed, og rejs med tilstrækkelig opmærksomhed på sikkerhed.

► S. 13 "Farlige vejoverflader", ► S. 14 "Farlige miljøer"

Assisteret drift diagnostik kontrollér (for kørestole udstyret med hjælper styreenhed, der sælges separat)

Hvis kørestolen er udstyret med den separat solgte hjælper styreenhed, skal du bruge den diagnostiske kontrol som vejledning til at afgøre, om både personen, der kører kørestolen alene, og personen, der kører kørestolen med assistance, sikkert kan betjene kørestolen udstyret med dette produkt.



ADVARSEL

- Hvis en hjælper ledsager eller betjener kørestolen, skal du vurdere hjælperens kompetence. Desuden bør du, når du vurderer en hjælperes kompetence, konsultere ekspertudtalelser fra fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre specialister som reference.

Hvis din vurdering udelukkende er baseret på din egen mening, kan en forkert vurdering resultere i skade på dig selv eller andre omkring dig.

- Hvis du mangler kompetence til at yde assisterende drift, må du ikke forsøge at gøre det.

Dette kan resultere i skade på dig selv eller andre omkring dig.

Diagnosekontrol

Hvis du føler dig utilpas med nogen af følgende opgaver, skal du ikke udføre assisteret drift.

- (1) Er du i stand til visuelt korrekt at opfatte forholdene på vejoverfladen og dine omgivelser samt undgå farlige områder?
- (2) Er du i stand til at assistere brugeren med at komme ind og ud af kørestolen?
- (3) Er du i stand til at afmontere batteriet?
- (4) Er du i stand til at udføre assisteret drift via manuel kørsel?

Diagram over placering af advarselsmærkat


Hele kørestolen (20–26 tommer)

OP

Denne del sælges separat.

⚠ WARNING

- Do not work the clutch when moving.
- Do not declunch on a slope.
- Collision / rollover could result.

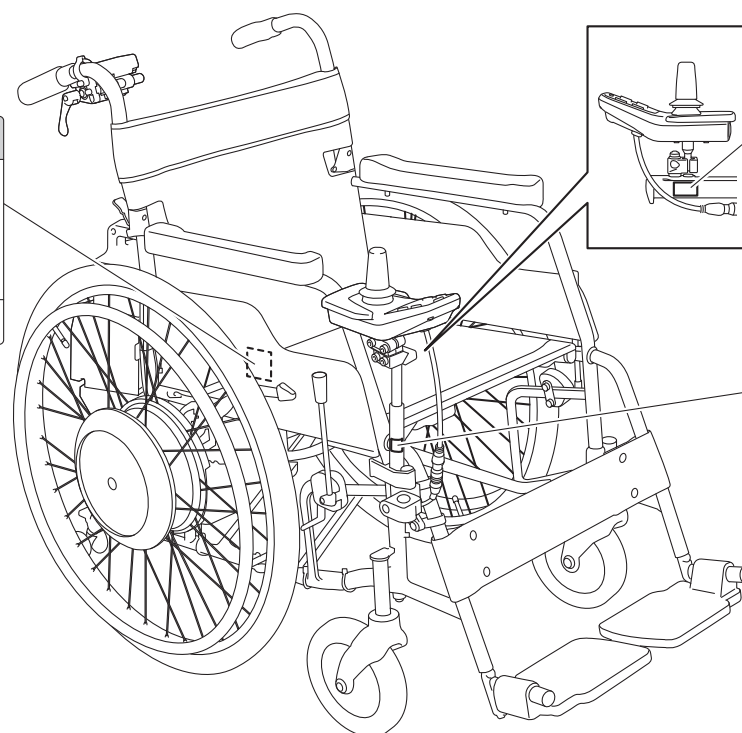


⚠ WARNING

Lock the lever before use.

⚠ WARNING

Lock the lever before use.

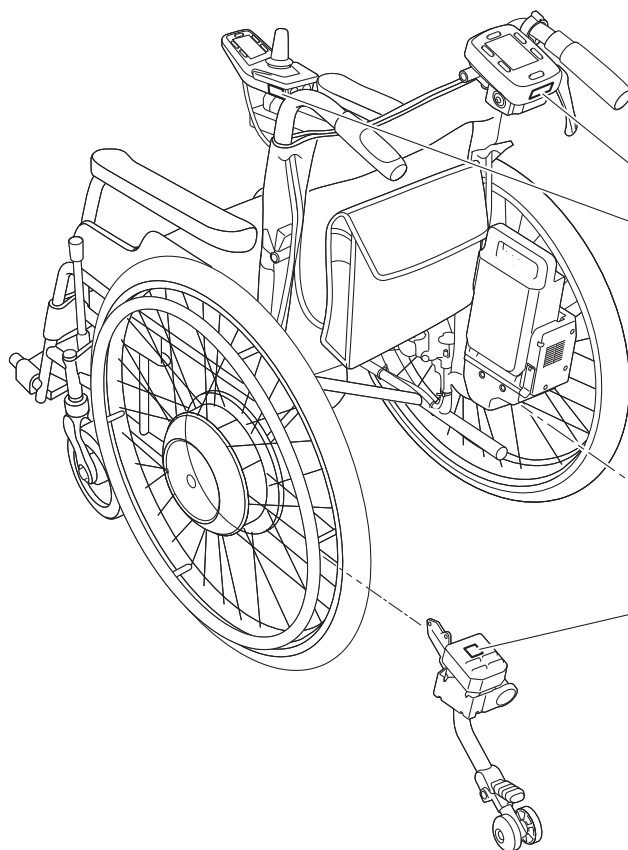

· For safety, read the owner's manual well.







· For safety, read the owner's manual well.

OP



OP

Denne del sælges separat.

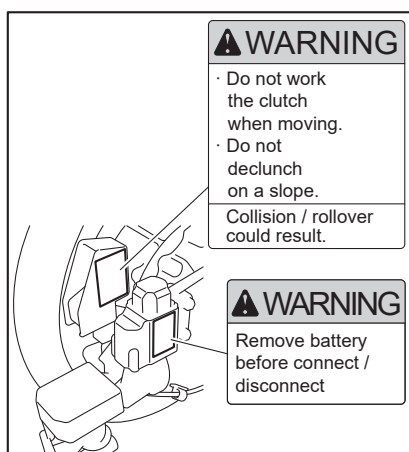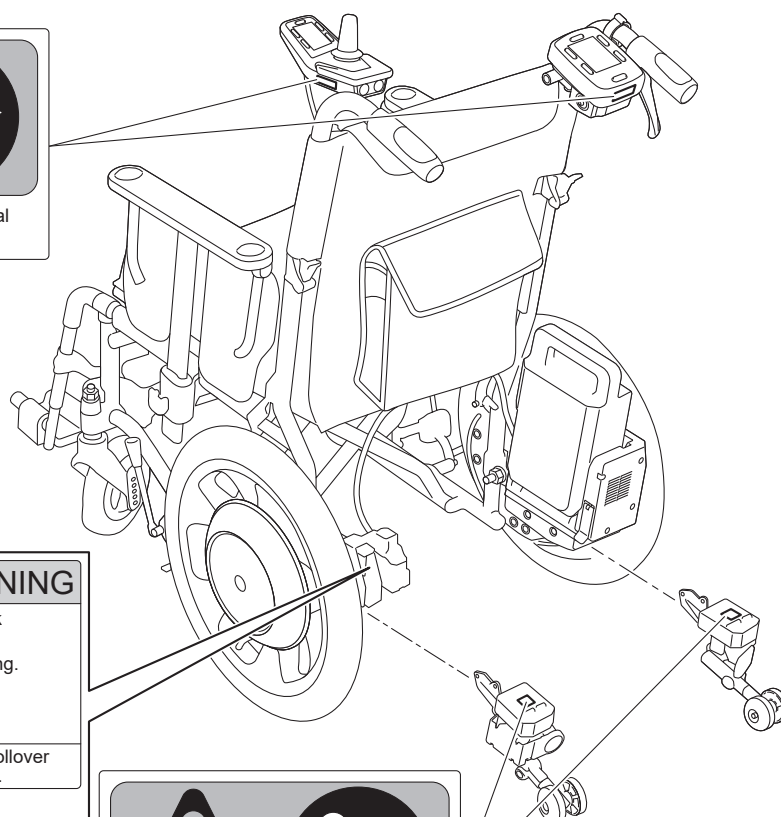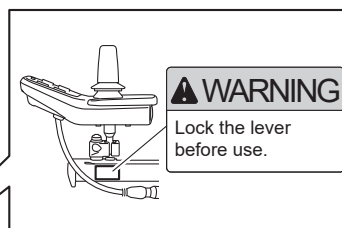
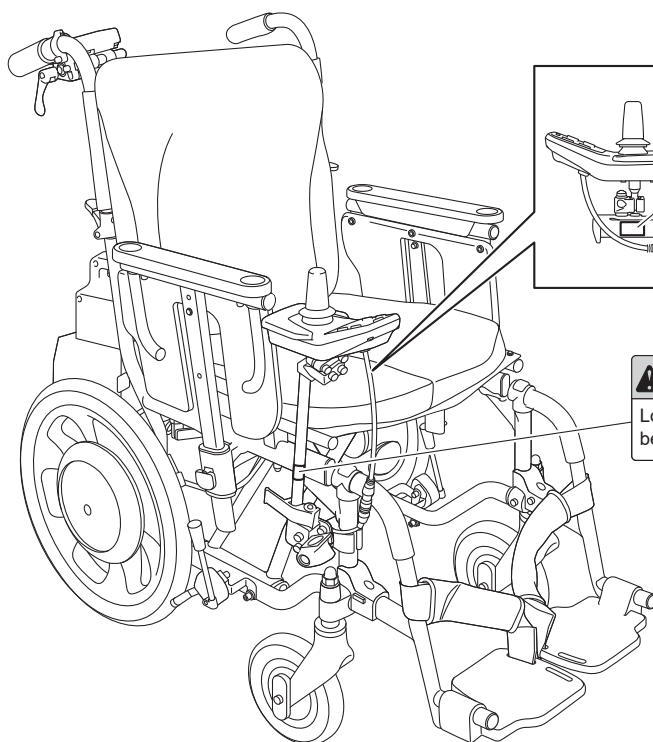


OP



● Lithium-ion Battery [Model: JWB3]

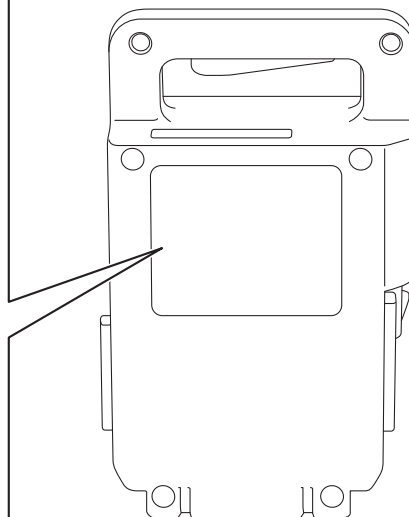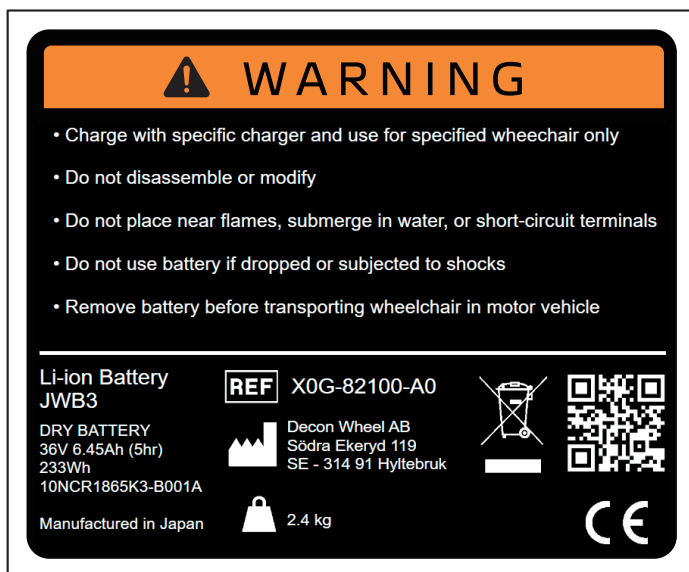

● Batterioplader [Model: JWC4]

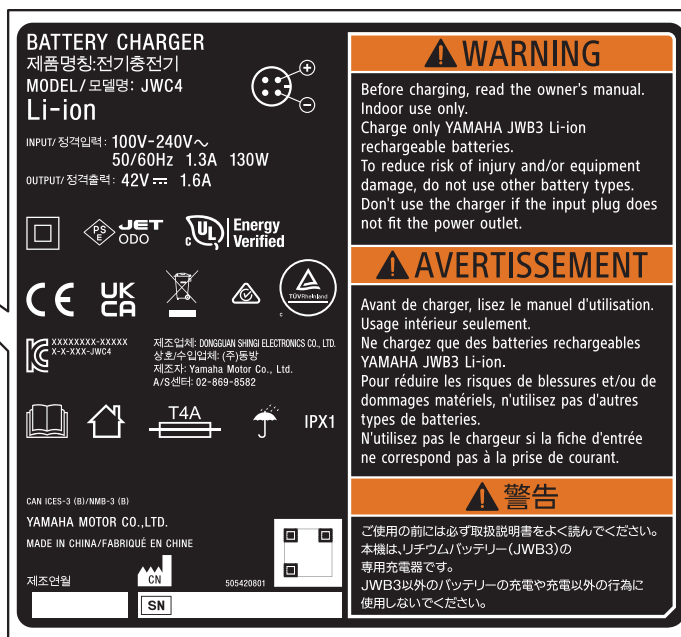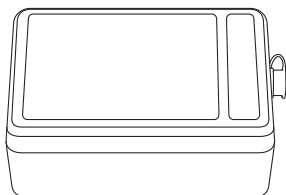

● Holder [Model: JWC4]

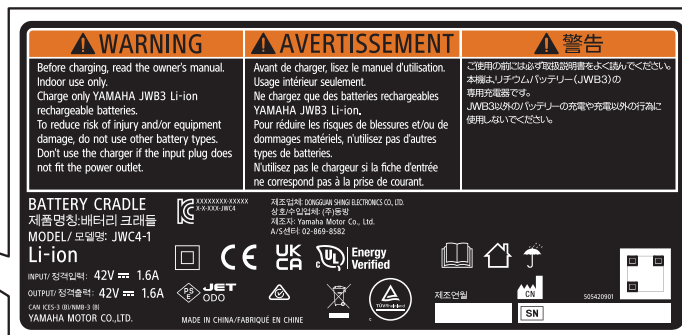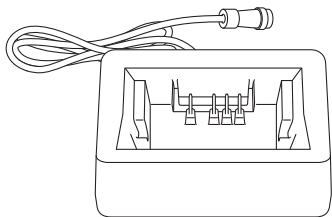

2 Navne på dele og hvordan de bruges

Dette kapitel beskriver navnene på delene af dette produkt, deres funktioner og hvordan man håndterer disse dele.

For detaljer om de dele, der vises i illustrationerne nedenfor, henvises til forklaringssiderne for de respektive dele.


E-Drive NXT (20-26 tommer)




Dele der kan justeres for position eller vinkel.

OP

Denne del sælges separat.

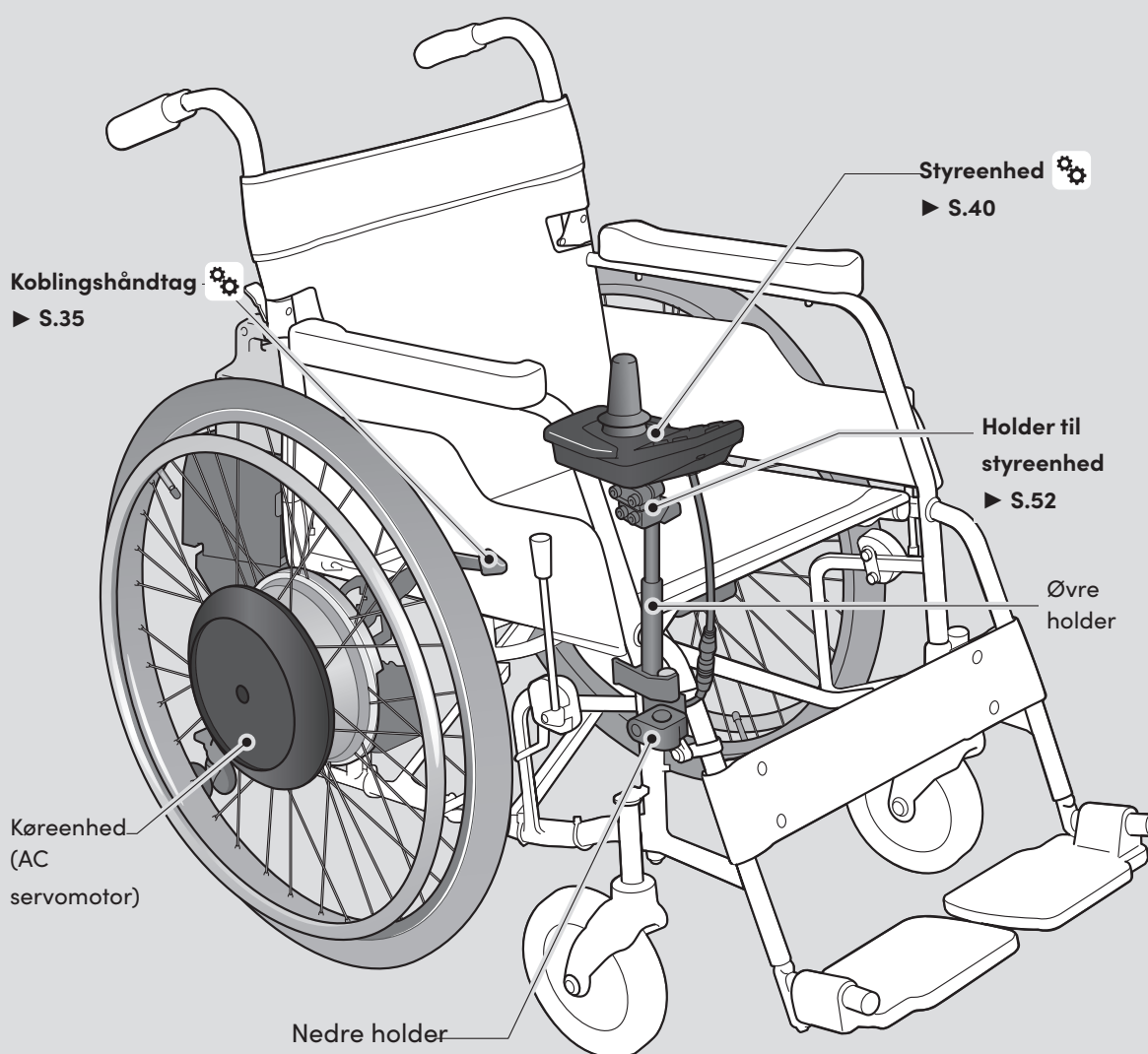

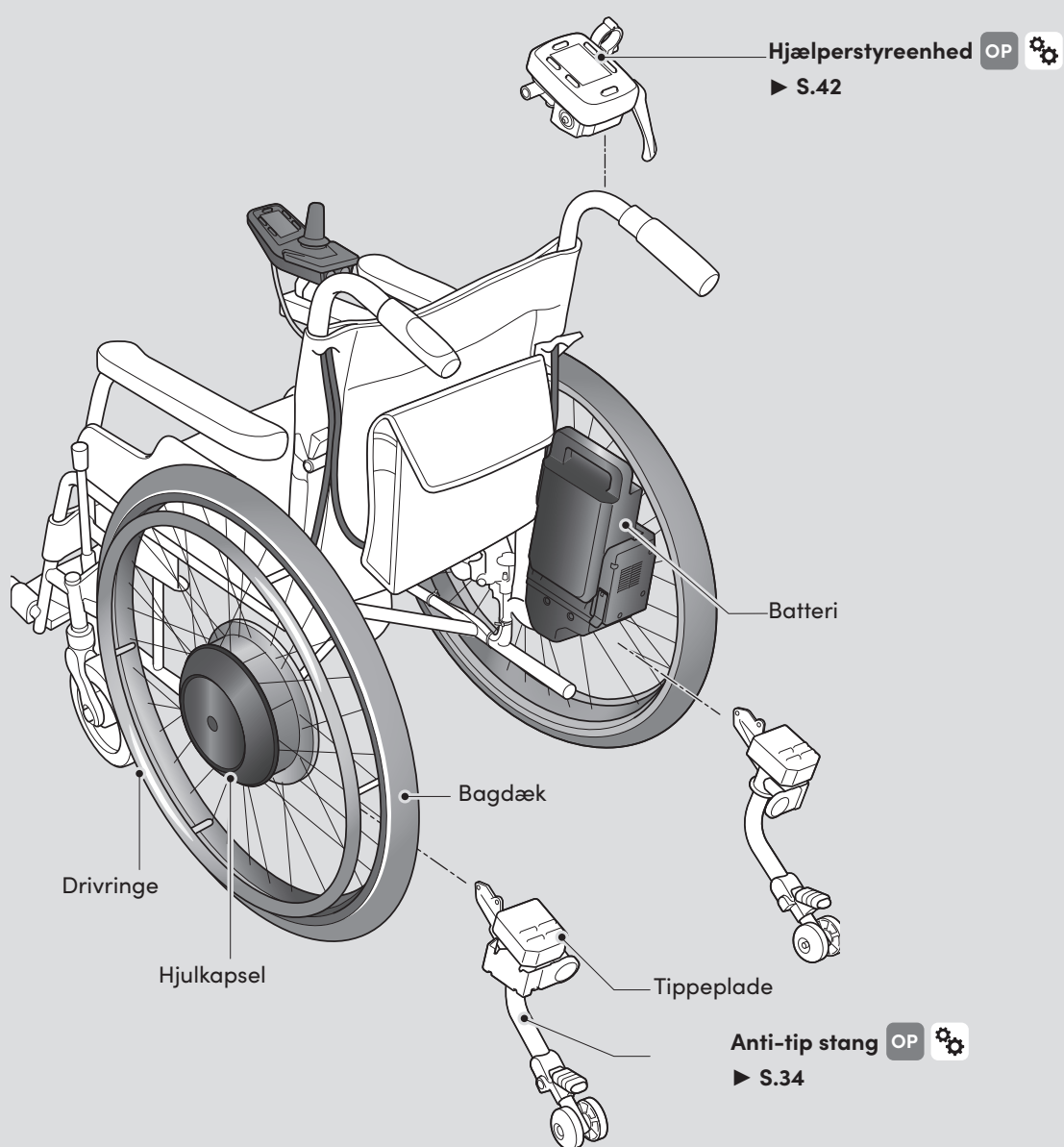

Dette kapitel beskriver navnene på delene af dette produkt, deres funktioner og hvordan man håndterer disse dele. For detaljer om de dele, der vises i illustrationerne nedenfor, henvises til forklaringssiderne for de respektive dele.


E-Drive NXT (16 tommer)




Dele der kan justeres for position eller vinkel.



OP

Denne del sælges separat.

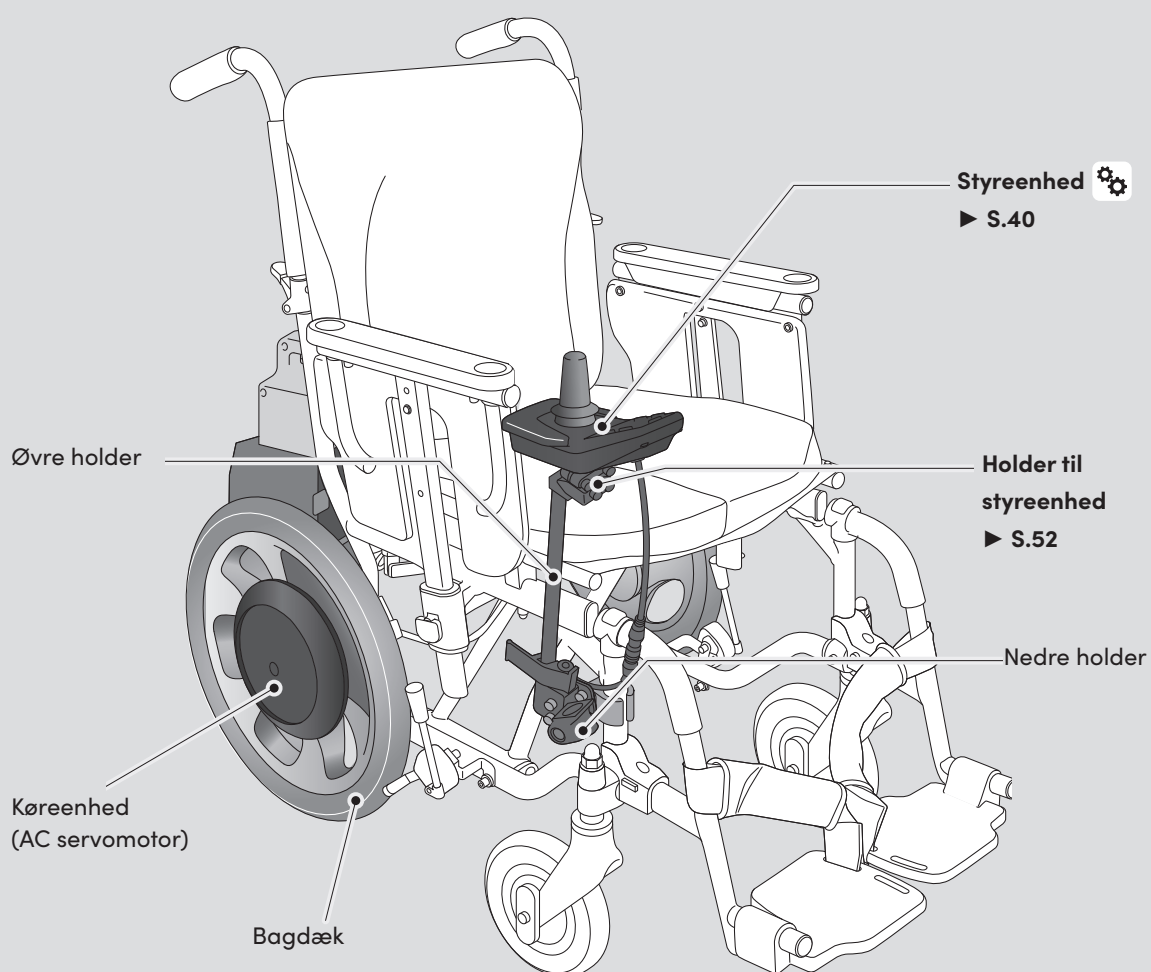

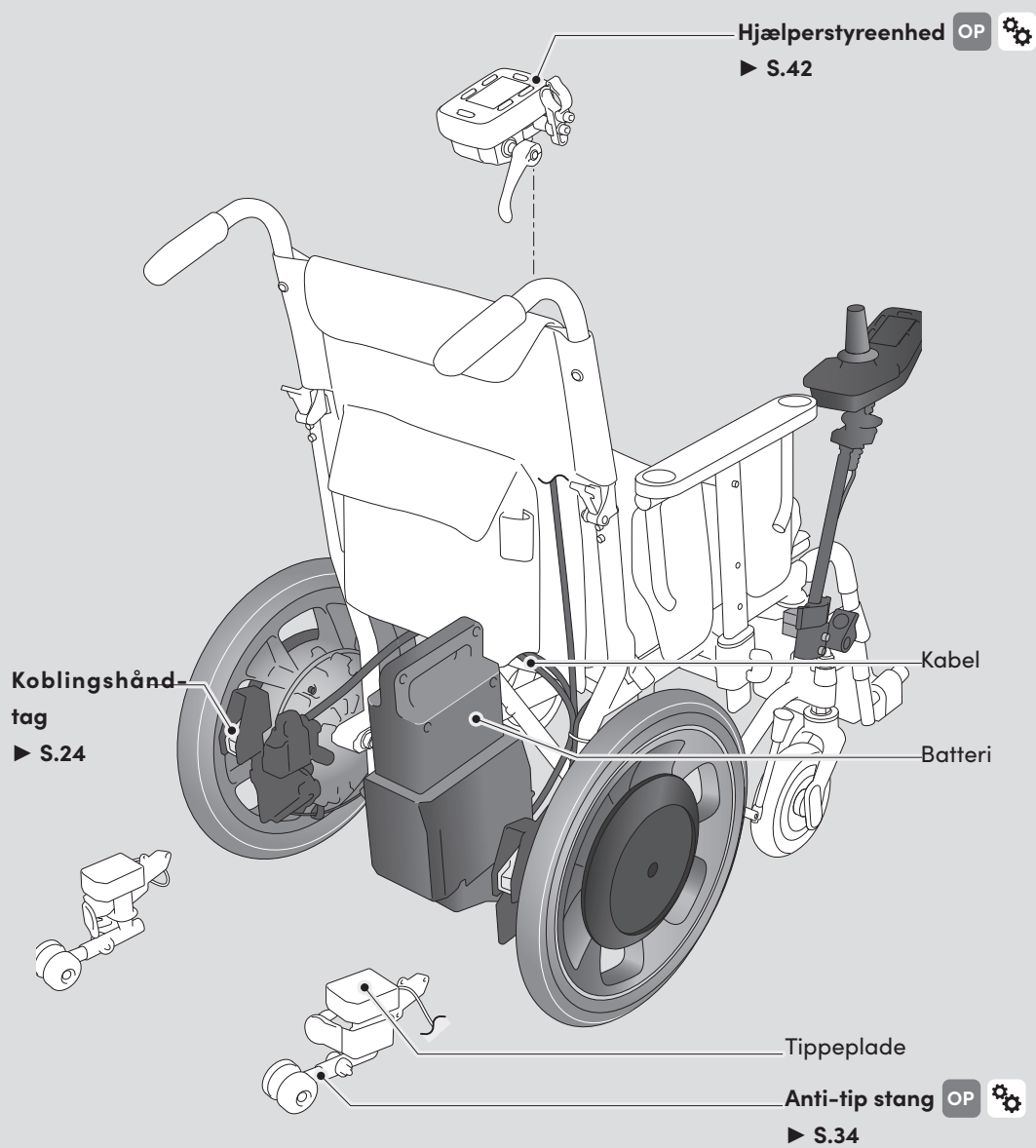


Lithium-ion Batteri [Model: JWB3]

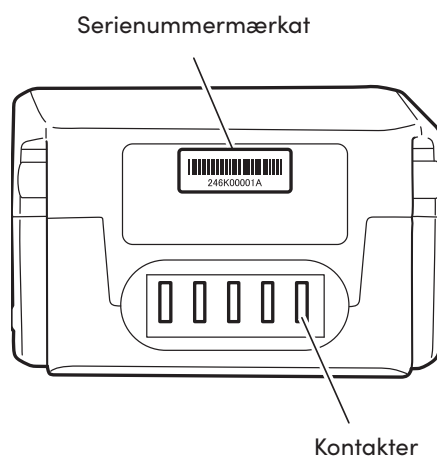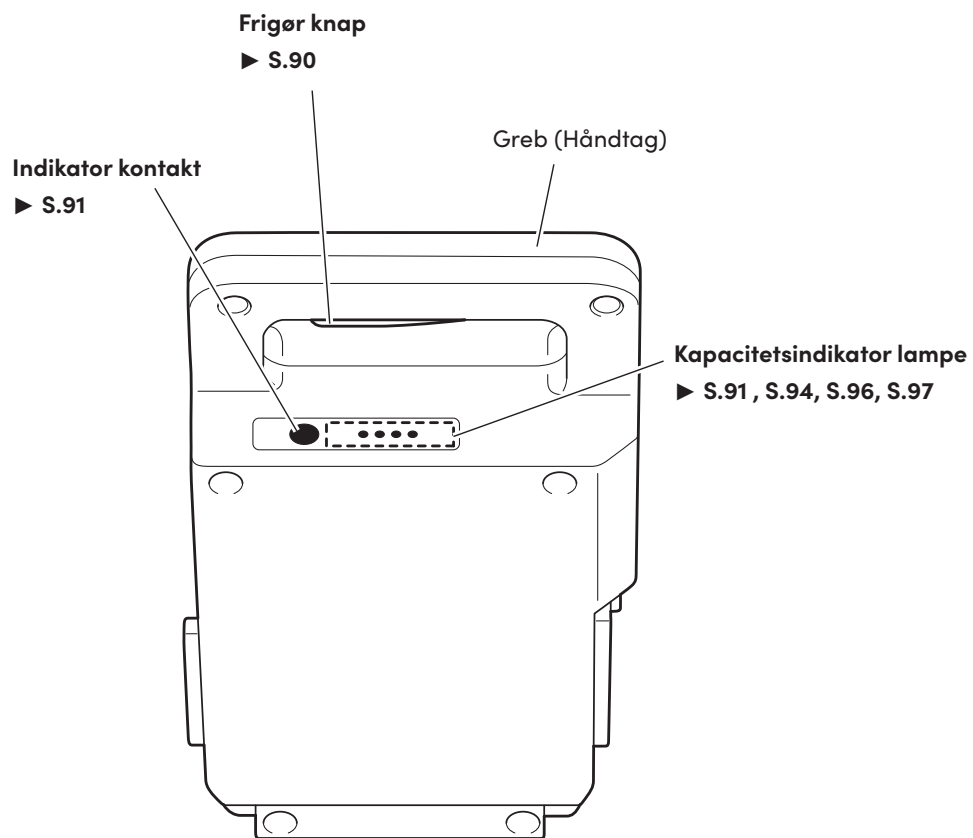

Batterioplader/holder [Model: JWC4]

2

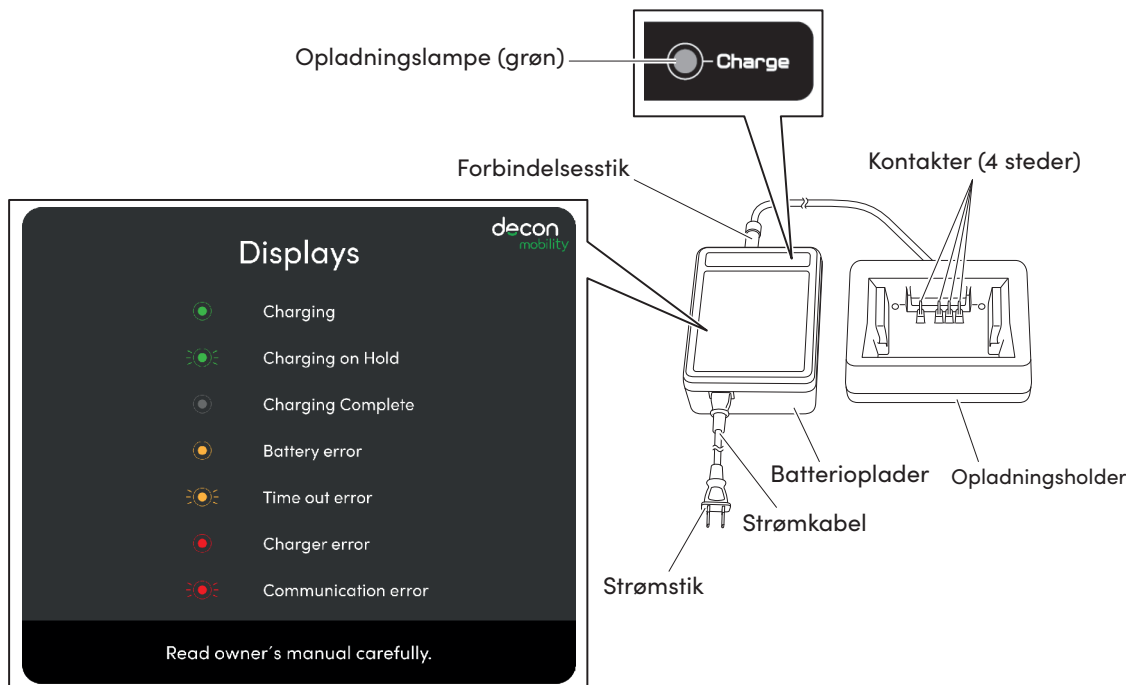


Anti-tip enhed (sælges separat)

Forhindrer kørestolen i at tippe bagover.

I uundgåelige tilfælde, såsom kørsel over en kantsten, kan anti-tip stangen foldes.

⚠ ADVARSEL


- Træd ikke på tippepladedelen af anti-tip enheden.
Dette kan forårsage, at du mister balancen og tipper.

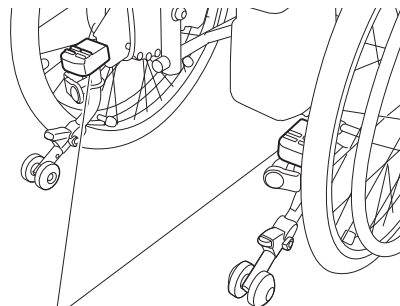

Tippeplade

Sådan foldes/udfoldes

- 1 Tryk låsehåndtaget ind og drej anti-tip stangen indad for at folde den.

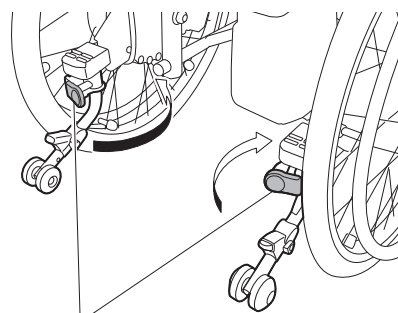

Låsehåndtag

- 2 Returner anti-tip stangen til den oprindelige position, og sikre dig, at du hører et klik for at bekræfte, at låsen er aktiveret.
- 3 Sving anti-tip stangen fra side til side for at sikre, at den er sikkert låst på plads.


Notifikationsfunktion når anti-tip stængerne forbliver trukket tilbage

Hvis en af anti-tip stængerne ikke er låst, vises "C2" eller "C3" på LCD-skærmen. Samtidig lyder en kontinuerlig "bip"-summen.

Når du låser begge anti-tip stænger, stopper summen, og LCD-skærmen vender tilbage til normal visning.

C2: Anti-tip stangen forbliver trukket tilbage under stop

C3: Anti-tip stangen forbliver trukket tilbage under kørsel

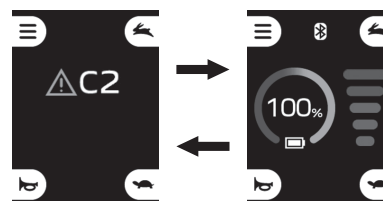

Koblingshåndtag (20-26 tommer)


Skifter mellem el-kørsel og manuel kørsel tilstand.

• "El-kørsel"

Gør det muligt for dig at betjene kørestolen i el-kørsel tilstand. Når kørestolen ikke bevæger sig, aktiveres de elektromagnetiske bremses.

• "Manuel Kørsel"

Frigør koblingen og tillad manuel drift. Medmindre du betjener kørestolen med drivringe eller når en hjælper betjener kørestolen ved hjælp af håndtagene, skal du holde koblingshåndtagene i el-kørsel position.

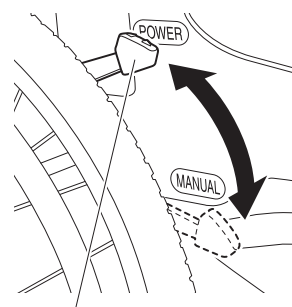

Koblingshåndtag

2

Koblingshåndtag (16 tommer)

Hver af de venstre og højre elektriske motorenheder er udstyret med et koblingshåndtag, så du kan skifte mellem el-kørsel og skubbe positioner.


Medmindre kørestolen skubbes manuelt, skal du bruge kørestolen med begge koblingshåndtag indstillet til elektrisk kørsel position.

• "Elektrisk kørsel"


El-kørsel kan udføres ved at betjene joysticket eller hjælperens styreenhed. Når joysticket ikke betjenes, aktiveres de elektromagnetiske bremses på bagdækkene.

• "Skub"


Koblingen er frigjort, og kørestolen kan flyttes ved at skubbe.

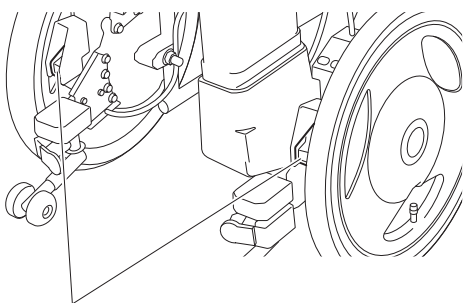

Koblingshåndtag

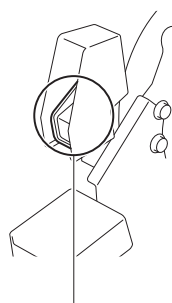

"Elektrisk kørsel"

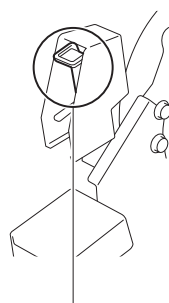


"Skub"

Fjernelse og installation af enheden


Motorenhederne på E-Drive NXT kan fjernes fra stellet, når de nuværende hjul udskiftes med manuelle hjul, eller når kørestolen transporteres.

Fjernelse af motorenhederne fra stellet


- 1 Sluk for strømmen, og fjern batteriet.

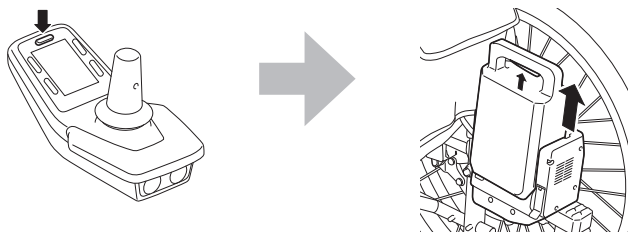

- 2 Skift venstre og højre kobling til el-kørselstilstand.

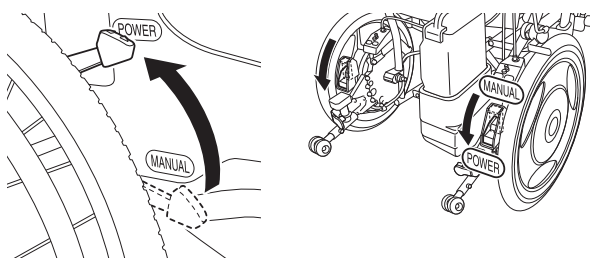


- 3 Drej kabelstikringen for enden af kablet mod uret, mens du trækker kabelstikket op for at afbryde kablet.

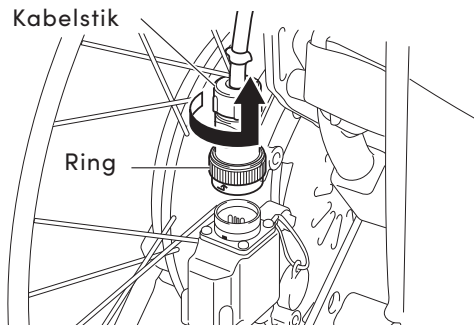


TIP

På modeller med integreret batterisæde er kabelstikket placeret på venstre hjul. På modeller med aftageligt batterisæde er der et kabelstik på både venstre og højre hjul.


- 4 Sæt hættten på for at forhindre snavs eller vand i at trænge ind i kabelstikket.

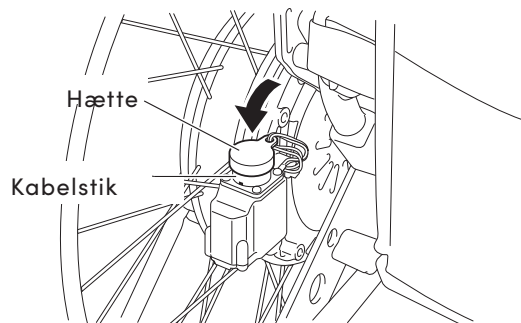


- 5 Placér kørestolen, så den ikke bliver ustabil, når motorenhederne fjernes. (For eksempel som vist på figuren.)

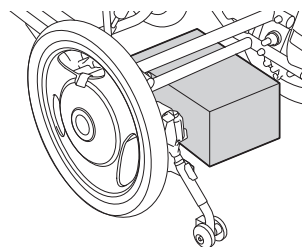

- 6 Frigør parkeringsbremserne.

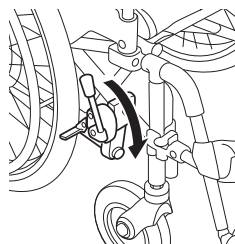


- 7 Hold navet med begge hænder og tryk midten af navkapslen "a" med dine fingre, og træk derefter hver motorenhed ud med begge hænder.

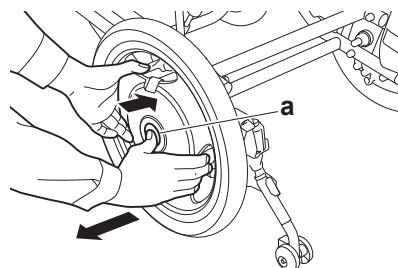


Montering af motorenhederne på stellet

- 1 Placér kørestolen, så den ikke bliver ustabil. (For eksempel som vist på figuren.)

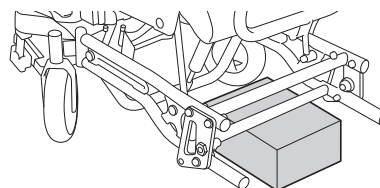


- 2 Skift koblingerne på enhederne til elektrisk kørselstilstand.


- 3 Tryk midten af navkapslen "a" med dine fingre, så enden af hjulakslen "b" stikker ud og holdes på plads.

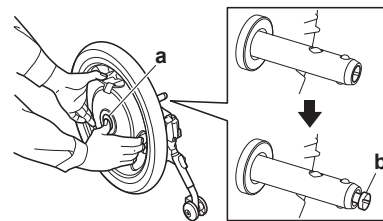


- 4 Juster akslen "c" med akselhullet i akselærm "d", og juster stiften "e" på hjul kørenhedssamlingen med hullet i stoparmen "f", og sæt dem derefter sammen.

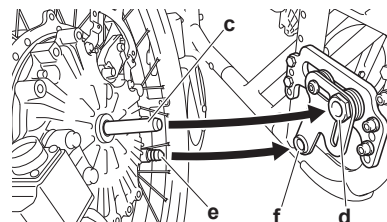


- 5 Skub hver motorenhed helt ind. Kontrollér for at sikre, at de to kugler "g" på enden af akslen kan ses helt, og at stiften "e" er sikkert indsat i stoparmen "f".

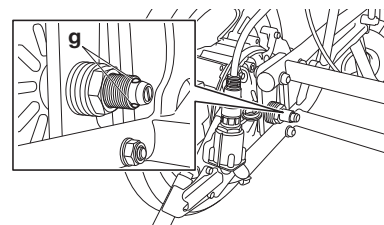

- 6 Træk i hver motorenhed for at sikre, at den ikke falder af.

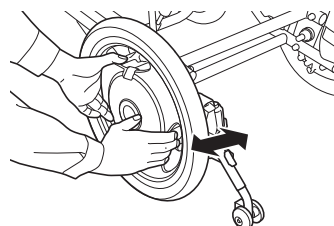

- 7 Placér motorenhederne i deres normale position, og aktiver derefter parkeringsbremsen.

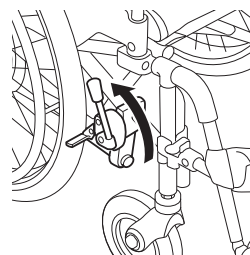

- 8 Fjern hættten fra kabelstikket på venstre hjul.

9 Juster den hvide prik (pilmarkering) på kabelstikket ved enden af kablet med den hvide pil på kabelstikket på hjulsiden, og tryk derefter kabelstikket ind, indtil det klikker.


Tilslut kablet med et L-mærke til kabelstikket med et L-mærke (på hjulsiden), og tilslut kablet med et R-mærke til kabelstikket med et R-mærke (på hjulsiden).

Kabelstik
(på kablesiden)

Hvid pil

Kabelstik
(på hjulsiden)


Hvid pil

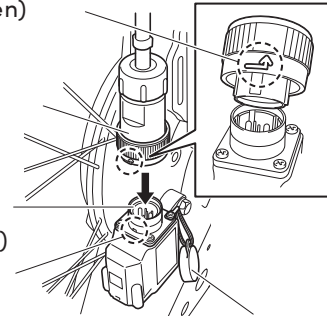

Hætte

10 Sørg for, at kabelstikket ikke bliver afbrudt.

11 Installer batteriet.

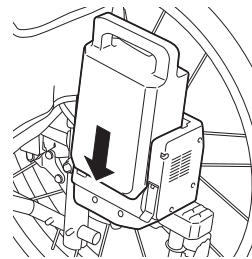

ADVARSEL

- Når en person sidder i kørestolen, må du ikke fjerne eller montere hjulene. Personen, der sidder i kørestolen, eller personer omkring kørestolen kan komme til skade.
- Efter at motorenhederne er monteret på stedet, skal du sikre, at kuglerne for enden af hver aksel kan ses, og at enhederne ikke løsner sig, hvis de trækkes. Hvis akslerne ikke er sikret, kan akslerne pludselig falde af, mens kørestolen er i bevægelse, og kørestolen kan vælte, hvilket kan forårsage alvorlig skade.


Styreenhed

Startskærm

Funktionen af knapperne ændres afhængigt af den viste skærm.



Dele der kan justeres for position eller vinkel.

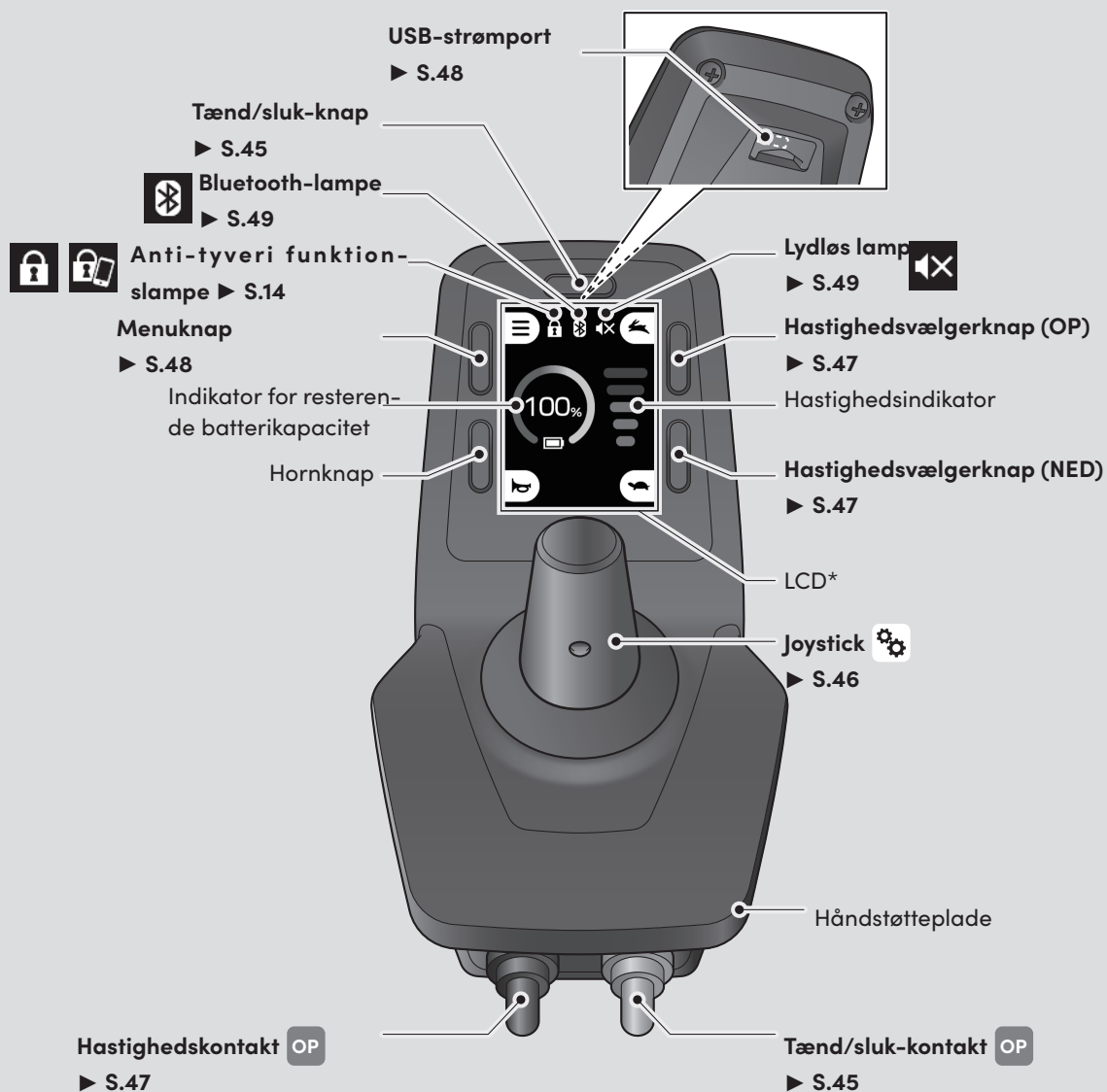


*Hvis kørestolen har en fejl af nogen art, vises en fejlkode sammen med en summelyd.

▶ s.119 "Fejlfinding"

Menuside

Funktionen af knapperne ændres afhængigt af den viste skærm.

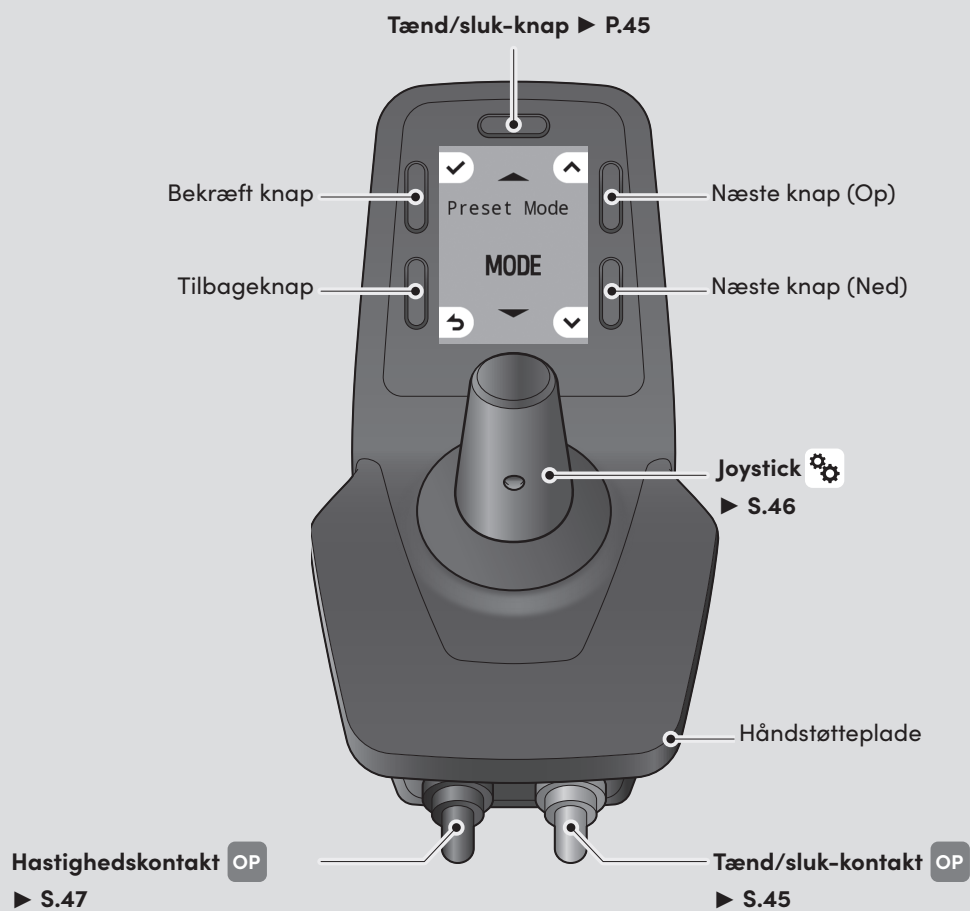

Hjælper styreenhed


Denne del sælges separat.

Startskærm

Funktionen af knapperne ændres afhængigt af den viste skærm.



Dele der kan justeres for position eller vinkel.

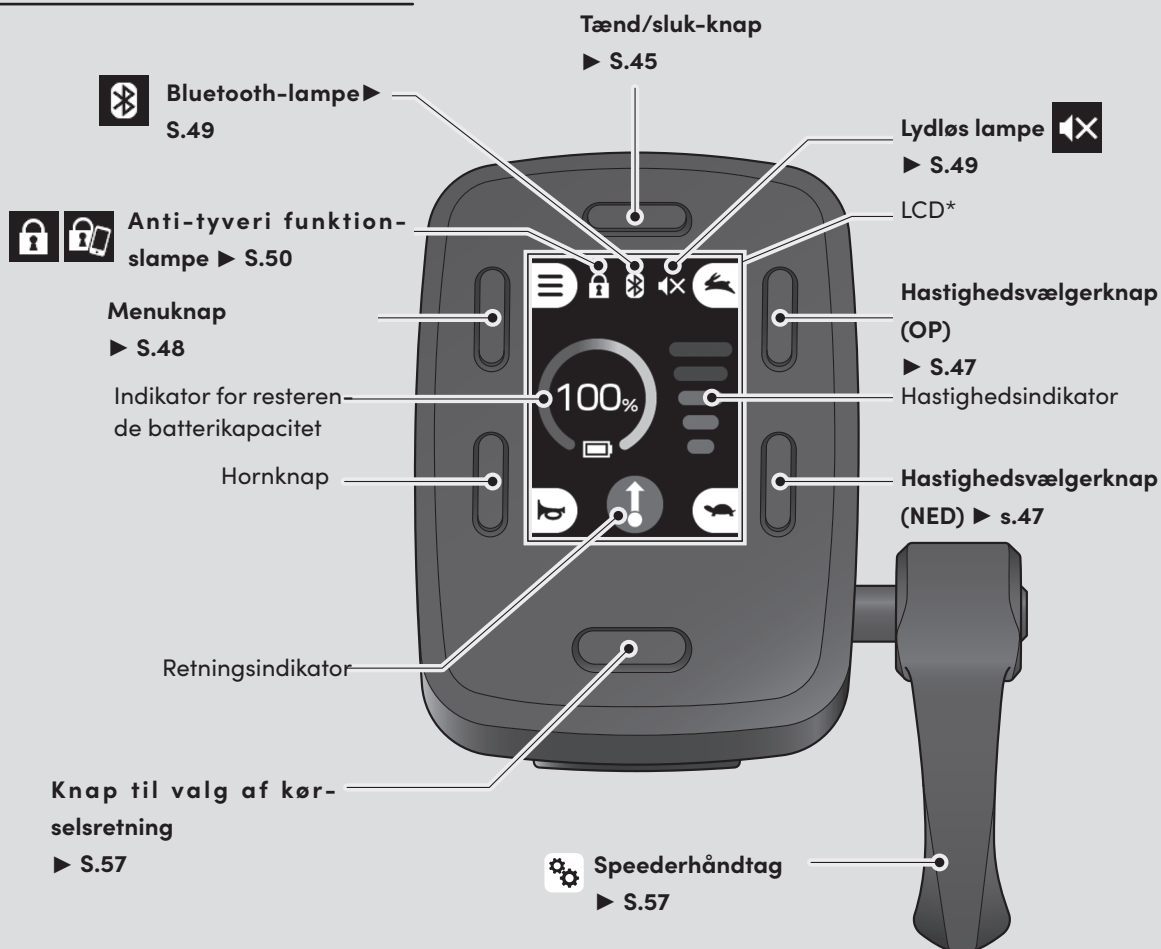


*Hvis kørestolen har en fejl af nogen art, vises en fejlkode sammen med en summelyd.
▶ s.119 "Fejlfinding"

Menuside


Funktionen af knapperne ændres afhængigt af den viste skærm.




Vertikal styreenhed

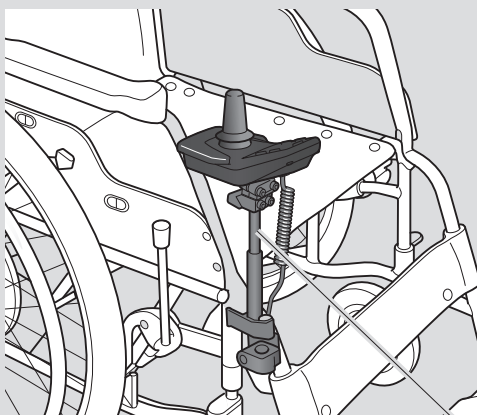

Parallel styreenhed

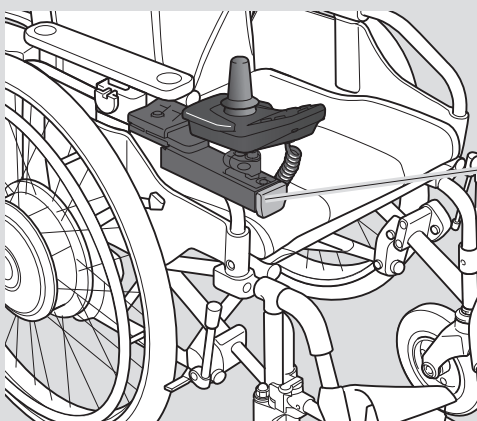

Horisontal styreenhed

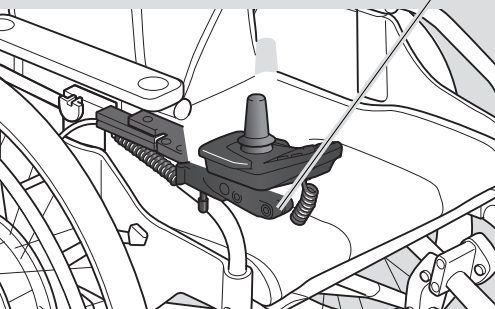

Holder til styreenhed 
► S.52

Tænd/sluk-knap

Tryk på tænd/sluk-knappen for at køre kørestolen i el-tilstanden.



● Tænd for strømmen

Tryk og hold knappen nede (ca. 2 sekunder) for at tænde for strømmen og tænde LCD-skærmen. Når du hører "bip"-lyden, og LCD-skærmen skifter til startskærmen, kan kørestolen betjenes i el-kørsel tilstand.

Når den er sat til lydløs, vil der ikke være nogen driftslyd, når strømmen tændes.

● Sluk for strømmen

Tryk på tænd/sluk-knappen igen for at slukke for strømmen og slukke LCD-skærmen.

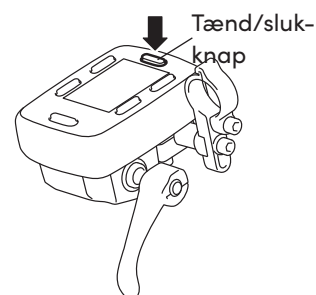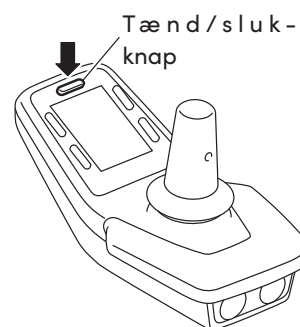

Tænd/sluk-kontakt (styreenhed) (sælges separat)


Tænd for strømafbryderen for at betjene kørestolen i el-kørsel tilstand.

● Tænd for strømmen

Flyt strømafbryderen op eller ned for at tænde styreenheden og tænde LCD-skærmen. Når du hører "bip"-lyden, og LCD-skærmen skifter til startskærmen, kan kørestolen betjenes i el-kørsel tilstand. Når den er sat til lydløs, vil der ikke være nogen driftslyd, når strømmen tændes.

● Sluk for strømmen

Flyt strømafbryderen op eller ned for at slukke styreenheden og slukke LCD-skærmen.

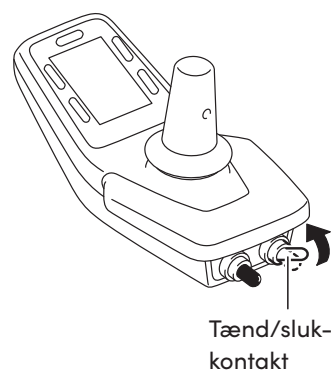

Joystick (styreenhed)


Betjen joysticket for at betjene og køre kørestolen.

● Kørestolsdrift

Kørestolen bevæger sig i den retning, hvor joysticket vippes, og kørestolen stopper, når joysticket føres tilbage til midterpositionen. Vip joysticket til den ønskede side for at dreje kørestolen.


● Justering af hastigheden

Hastigheden kan justeres ved at vippe joysticket.

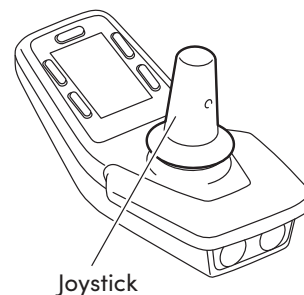

Udskiftning af joystick

Afhængigt af din fysiske tilstand kan joysticket udskiftes med forskellige former. (sælges separat)
Kontakt din forhandler for eventuelle udskiftninger.

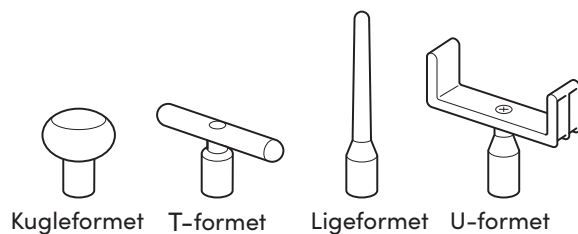

Hastighedsvælgerknap

Giver dig mulighed for at skifte den maksimale hastighed mellem fem forskellige niveauer.

Øg hastigheden

Ved at trykke på hastighedsvælgerknappen (OP) lyder der et "bip", og hastigheden øges.

Reducer hastigheden

Ved at trykke på hastighedsvælgerknappen (NED) lyder der et "bip", og hastigheden reduceres.



Hastighedsvælgerkontakt (styreenhed) (sælges separat)

Giver dig mulighed for at skifte den maksimale hastighed mellem fem forskellige niveauer.

Øg hastigheden

Ved at flytte hastighedsvælgerkontakten (OP) lyder der et "bip", og hastigheden øges.

Reducer hastigheden

Ved at flytte hastighedsvælgerkontakten (NED) lyder der et "bip", og hastigheden reduceres.



USB-strømport

USB-strømport Type-C anvendes. Strømdøgngen er op til 3A.

TIP

Strømdøgngen er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af udstyret.

TIP

USB-strømporten har ingen kommunikationsfunktioner.

Bemærk

- **Luk gummi hæften, når USB-strømporten ikke er i brug.**
Regnvand og lignende kan trænge ind i porten, beskadige elektronisk udstyr og forårsage funktionsfejl.
- **Indsæt ikke andre genstande end et USB-kabelstik i USB-strømporten.**
Ellers kan USB-strømporten blive beskadiget.

Menuvalg

Giver dig mulighed for at kontrollere eller ændre forskellige indstillinger fra menuen.

Rejsejustering


Giver dig mulighed for at ændre driften til den foretrukne rejsetilstand.

Vælg mellem forudindstillet tilstand "Sport/Standard/Soft/Custom" for styreenheden og "Standard/Custom" for hjælperens styreenhed.

Vælg det ønskede punkt, og tryk på knappen »Bekræft« for at afslutte indstillingen.

"Custom"-tilstand kan indstilles efter dine præferencer i "JW Smart Tune".

► s.117 "Ændring af indstillingerne"

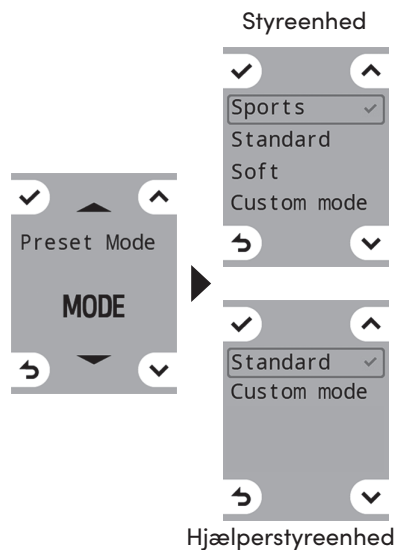

Bemærk

- **Når du ændrer den forudindstillede tilstand, ændres den maksimale hastighed og acceleration/ deceleration. Brug venligst med forsigtighed.**
Hvis ændring af den forudindstillede tilstand forårsager problemer med driften, skal du stoppe med at bruge den indstilling og vende tilbage til den oprindelige indstilling.

LCD-lysstyrke

Skærmens lysstyrke kan skiftes mellem fire forskellige niveauer.

Øg lysstyrken

Ved at trykke på Næste-knappen (OP) lyder der et "bip", og lysstyrken øges.


Vælg den ønskede lysstyrke, og tryk på "Bekræft"-knappen for at fuldføre indstillingen.

Reducer lysstyrken

Ved at trykke på Næste-knappen (Ned) lyder der et "bip", og lysstyrken reduceres.

Vælg den ønskede lysstyrke, og tryk på "Bekræft"-knappen for at fuldføre indstillingen.

Lysstyrkeindstilling 4
(maksimal indstillet lysstyrke)

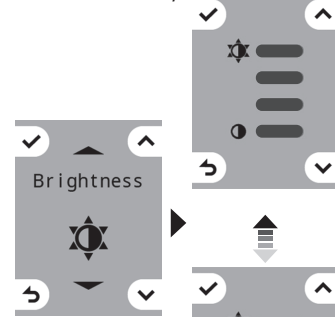


Lysstyrkeindstilling 1
(minimal indstillet lysstyrke)

Lydløs indstilling

Giver dig mulighed for at sætte skærmens driftslyd på lydløs. Vælg det ønskede punkt, og tryk på knappen »Bekræft« for at afslutte indstillingen.

Indstilling af skærmens driftslyd til lydløs vil ikke slukke for hornet og advarselslyde.

Ikonet, der vises i menuen, er forskelligt, når lydløs er aktiveret, og når lydløs er deaktiveret.

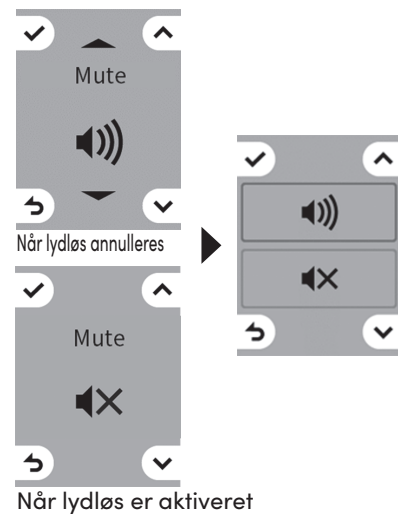


Bluetooth

Giver dig mulighed for at skifte mellem Bluetooth-forbindelse til/fra.

Vælg det ønskede punkt, og tryk på knappen »Bekræft« for at afslutte indstillingen.

Når "Til" er valgt, vises Bluetooth-symbol på LCD-skærmen.

Bluetooth-forbindelse bruges til indstillinger i "JW Smart Tune".

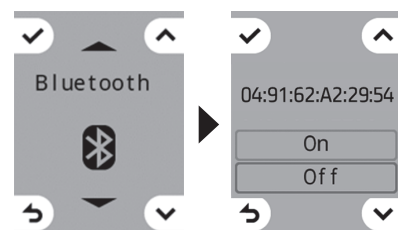

L/R-indstillinger

Startskærmens visning og betjeningsknapperne på skærmen kan byttes mellem venstre og højre.

R (højre-side indstilling)

Giver dig mulighed for at placere visningen af hastighedsindstillinger på højre side af startskærmen. Vælg det ønskede punkt, og tryk på knappen »Bekræft« for at afslutte indstillingen.



Når indstillet til højre side

L (venstre-side indstilling)

Giver dig mulighed for at placere visningen af hastighedsindstillinger på venstre side af startskærmen. Vælg det ønskede punkt, og tryk på knappen »Bekræft« for at afslutte indstillingen.



Når indstillet til venstre side

Sprogindstillinger

Giver dig mulighed for at ændre sproget for teksten på skærmen. Vælg det ønskede sprog, og tryk på »Bekræft«-knappen for at fuldføre indstillingen.



Tyverisikring

Denne funktion deaktiverer drift af joystick eller speederhåndtag, når det betjenes af en anden person.

Sådan indstilles tyverisikringen


Tyverisikringen kan indstilles fra enten styreenheden eller hjælperens styreenhed. Når indstillingerne er udført på én styreenhed, aktiveres tyverisikringen automatisk på den anden styreenhed.

- 1 Tænd for strømmen og øg hastighedsindstillingen op til 5.
- 2 Frigør knappen én gang, og hold derefter hastighedsvælgerknappen (OP) nede i mindst 5 sekunder.

TIP

Hvis der foretages en anden indtastning, mens hastighedsvælgerknappen (OP) holdes nede, skal du trykke på og holde hastighedsvælgerknappen (OP) nede igen.


Hastighedsvælgerknapp (OP)

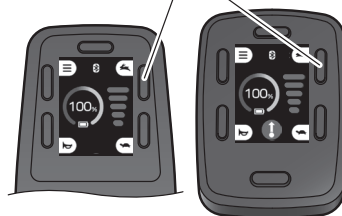

- 3 Efter biplyden og tyverisikringslampen lyser på LCD-skærmen, er indstillingen fuldført. Når indstillingen er fuldført, sættes "Hastighedsindstilling Visning" til 0.

TIP

Hvis kraften tændes igen efter indstillingen er fuldført, forbliver tyverisikringen aktiveret.

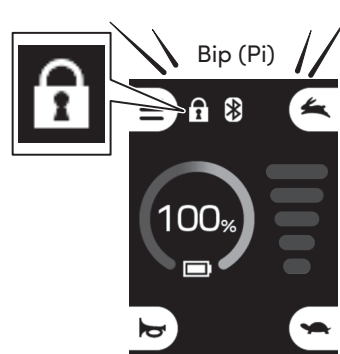

2

Sådan deaktiveres tyverisikringen



- 1 Mens tyverisikringen er aktiveret, skal du holde hastighedsvælgerknappen (OP) nede i mindst 5 sekunder.

TIP

Hvis der foretages en anden indtastning, mens hastighedsvælgerknappen (OP) holdes nede, skal du trykke på og holde hastighedsvælgerknappen (OP) nede igen.

- 2 Når biplyden høres, og tyverisikringslampen på LCD-skærmen slukkes, annulleres indstillingen.

Hastighedsvælgerknapp (OP)

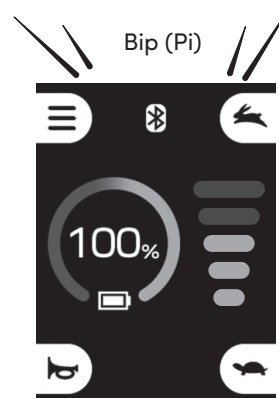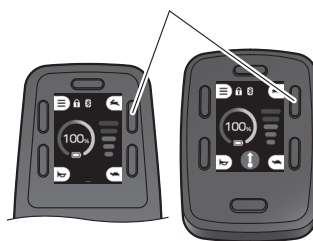

Holder til styreenhed

Håndtering af styreenhedsholdere varierer afhængigt af holdertypen.

Vertikal holder:

Vertikal

Parallel holder: Horisontal holder:

Parallel

Horisontal

Justering af styreenhedens position

Styreenhedens position kan justeres til en position eller vinkel, der er nem at betjene for dig.

Tilbagetrækning af styreenheden

Styreenheden kan trækkes tilbage, hvis den bliver en forhindring, når du kommer tæt på et bord eller skrivebord.

⚠ ADVARSEL

- **Fjern ikke styreenheden fra holderen, mens strømmen er tændt.**

Joysticket kan vippe, hvilket kan forårsage, at kørestolen bevæger sig uventet og dermed medføre personskade på dig eller andre personer i nærheden.

- **Tænd ikke for strømmen efter at have fjernet styreenheden fra den nedre holder.**

Joysticket kan vippe, hvilket kan forårsage, at kørestolen bevæger sig uventet og dermed medføre personskade på dig eller andre personer i nærheden.

- **Rejs aldrig i el-kørselstilstand med styreenheden fjernet fra den nedre holder.**

Du kan muligvis ikke betjene kørestolen korrekt, hvilket kan resultere i skade på dig eller andre personer omkring dig.

- **Fjern ikke styreenheden fra den nedre holder under rejse.**


Du kan muligvis ikke betjene kørestolen korrekt, hvilket kan resultere i skade på dig eller andre personer omkring dig.

- **Kontrollér styreenheden for at sikre, at den er fastgjort til kørestolen før rejse.**


Du kan muligvis ikke kontrollere kørestolen korrekt, hvis styreenheden ikke er fastgjort, hvilket kan resultere i skade på dig eller andre personer omkring dig.

- **Hvis styreenheden er justeret uden for håndfælg, skal du være opmærksom på personer og vægge omkring dig.**

Kontakt mellem styreenheden og andre personer eller forhindringer kan resultere i skade eller beskadigelse.

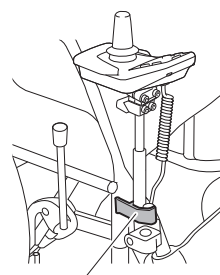


Nedre holder

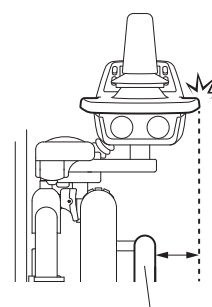

Drivringe

Justering af styreenhedens position


Positionen og højden af styreenheden kan justeres. Kontakt din forhandler, hvis du ønsker at foretage justeringer.

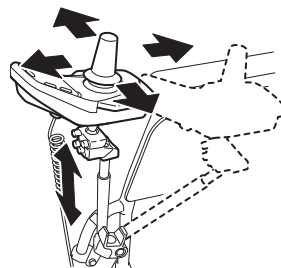

Sådan trækkes den ud


1 Bekræft at strømmen er slukket.

2 Fjern låsehåndtaget.

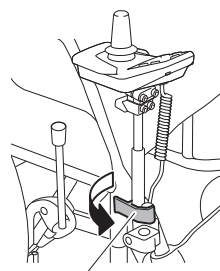


Låsehåndtag

3 Træk styreenheden ud.

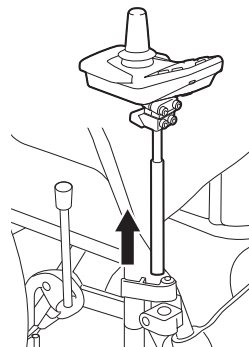

4 Indsæt styreenheden i den nederste holder.

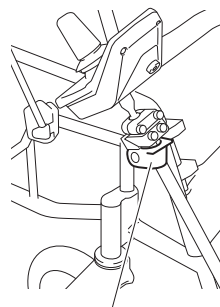

Nedre holder

5 For at returnere styreenheden til dens oprindelige position, omvend proceduren.


Justering af styreenhedens position

Justering af den vandrette position

Positionen af styreenheden kan justeres vandret i forhold til armlænsstøtten i tre positioner: indvendig, midterste og ydre side.


1 Bekræft at strømmen er slukket.

2 Juster positionen af styreenheden til den ønskede position, mens du trækker låsehåndtaget op.

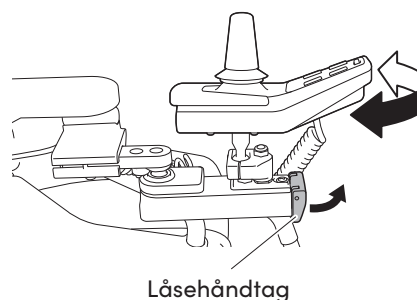

Låsehåndtag

3 Når du slipper låsehåndtaget, fastlåses styreenhedens position, hvor låsepositionen matcher.

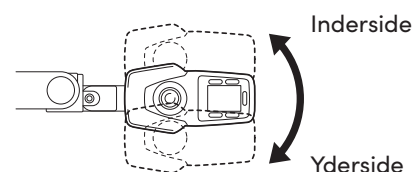


TIP

Afhængigt af højden på armlænsstøtten og monteringsforholdene for styreenheden kan det være svært at fastgøre den på indersiden.


Justering af fremad/bagud position, vinkel og retning

Kontakt din forhandler, hvis du ønsker at foretage justeringer.


- Fremad/bagud position

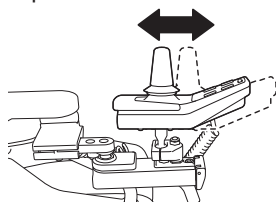


- For-bag vinkel

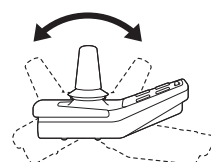

- Venstre-højre vinkel


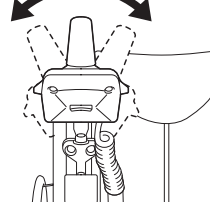


- Retning

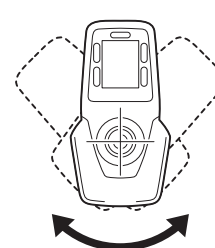

Sådan trækker man tilbage

- 1 Bekræft at strømmen er slukket.
- 2 Flyt styreenheden, mens du trækker låsehåndtaget op.
- 3 Bevægelsesområdet for styreenheden er bredere end området for den faste position.

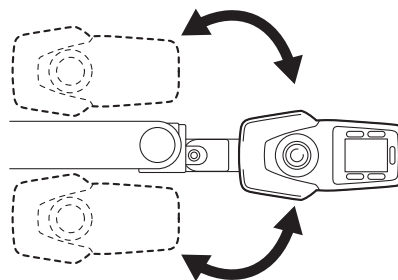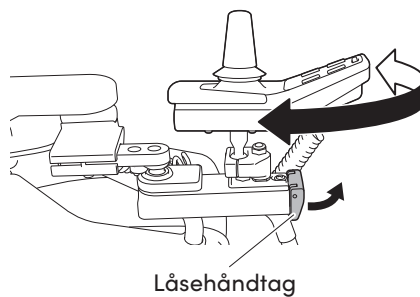


TIP

I den tilbagetrukne position er styreenheden ikke fastgjort.


Justering af styreenhedens position

- Justering af position, vinkel og retning Kontakt din forhandler om denne justering.


• Position

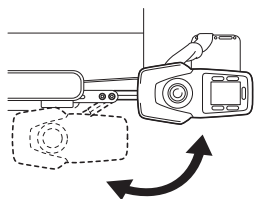


• For-bag vinkel

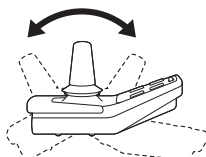

• Venstre-højre vinkel

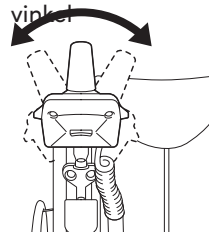


• Retning

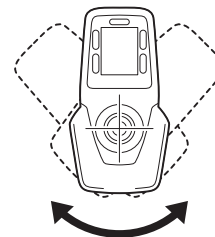

Sådan trækker man tilbage

1 | Bekræft at strømmen er slukket.

2 | Drej styreenheden, mens låsehåndtaget på holderen skubbes fremad.

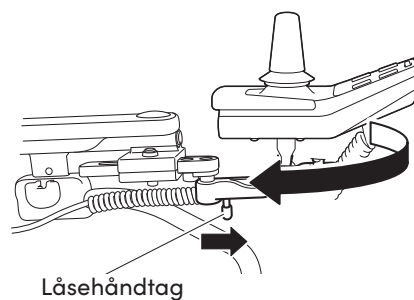


3 | For at returnere styreenheden til dens oprindelige position, omvend proceduren. Sørg for, at styreenheden er låst i position.


Justering af positionen for hjælperens styreenhed (sælges separat)

Venstre/højre position, højde og vinkel på hjælperens styreenhed kan justeres. Kontakt din forhandler, hvis du ønsker at foretage justeringer.

- Højde

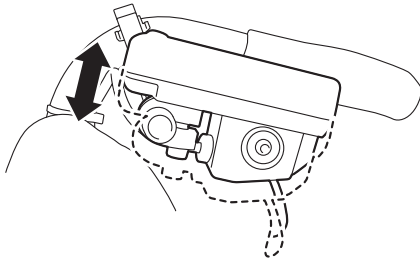

- Vinkel

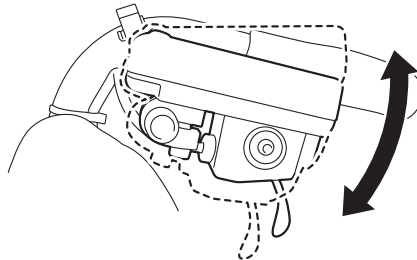

Kørselsretningsvælgerknop (hjelperens styreenhed) (sælges separat)

Når du betjener kørestolen ved hjælp af hjælperens styreenhed, kan kørselsretningen ændres ved at trykke på retningsvælgerknappen.


Kørselsretningen kan vælges mellem tre mønstre: fremad, bagud og drej.

Fremad/bagud

Tryk på retningsvælgerknappen for at skifte mellem fremad og bagud køreretning.

Drejninger

Tryk og hold kørselsretningsvælgerknappen nede for at skifte til drej.

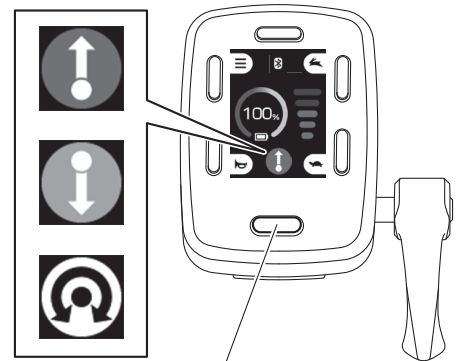


Knap til valg af kørselsretning

Justering af speederhåndtaget (hjelperens styreenhed) (sælges separat)

Juster speederhåndtaget for at betjene kørestolen.

Justering af hastigheden

Hastigheden kan øges eller mindskes afhængigt af hvor hårdt hjælperen griber om speederhåndtaget.

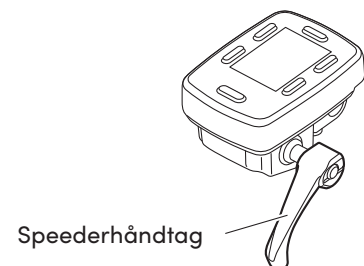

3 Inspektion af forskellige dele af den elektriske



ADVARSEL

- **Kontroller hver dag inden brug. Gør det til en vane at inspicere kørestolen.**

Fortsat brug af kørestolen med et problem i kørestolens stel eller hjul kan forårsage skade på kørestolen under rejse og kan resultere i væltning eller fald.

motorenhed

Dette kapitel forklarer de dele, der skal kontrolleres dagligt for at sikre sikker brug af dette produkt.

For inspektion af en kørestol udstyret med dette produkt, henvises til brugervejledningen for kørestolen.

E-Drive NXT (20-26 tommer)

Inspektionssteder

(8 elementer)

OP

Denne del sælges separat.

Bagdæk ► s.51

- ☐ Slitage og revner på dækkets overflade
- ☐ Lufttryk

Håndringe ► s.54

- ☐ Deformation, ridser
- ☐ Raslen

Hjul, eger

► s.53

- ☐ Deformation, ridser
- ☐ Raslen
- ☐ Egerbrud
- ☐ Monteringsforhold for hjulkapslen


Koblingshåndtag ► s. 54

- ☐ Normal skift
- ☐ Monteringsforhold for koblingshåndtaget

Styreenhedsholder ►

s.55

- ☐ Raslen

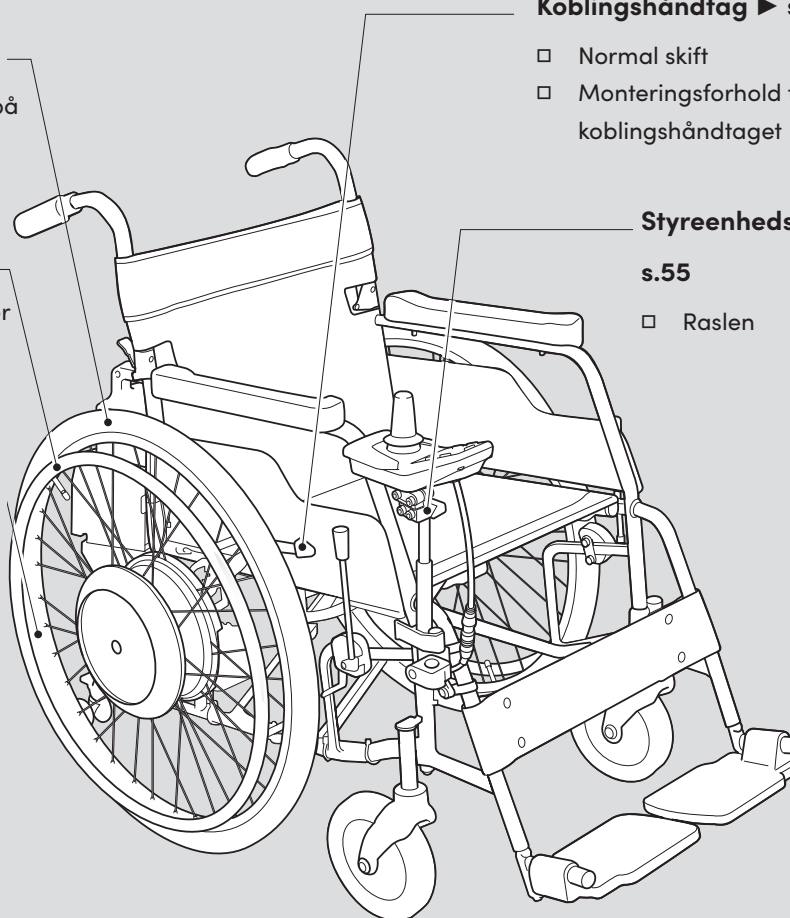

Bemærk


- Hvis du registrerer et problem, som du ikke selv kan løse (hvis du ikke kan løse fejlen ved hjælp af "fejlfinding"), skal du stoppe med at bruge kørestolen og kontakte din forhandler.

Fortsat brug af kørestolen i denne tilstand kan forårsage skade på den elektriske motorenhed eller få kørestolen til at standse under kørsel.

⚠ ADVARSEL

- Brug ikke kørestolen med beskadigede bagdæk.

Fortsat brug under sådanne forhold kan forårsage, at kørestolen bryder sammen under kørsel, hvilket kan resultere i, at du mister balancen og tipper.

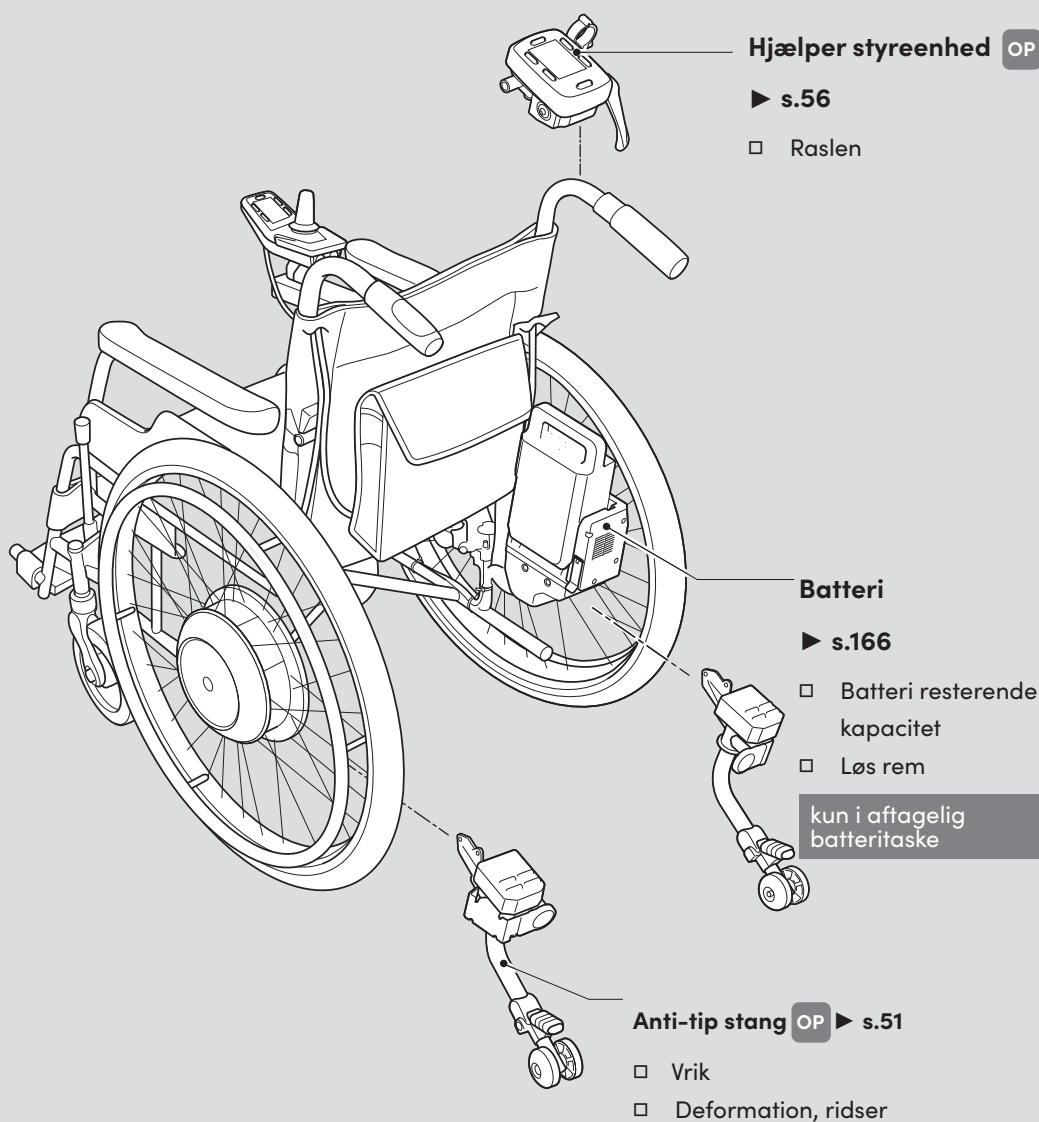

3

E-Drive NXT (16 tommer)

Inspektionssteder (7 elementer)

Bemærk

- Hvis du registrerer et problem, som du ikke selv kan løse (hvis du ikke kan løse fejlen ved hjælp af "fejlfinding"), skal du stoppe med at bruge kørestolen og kontakte din forhandler.

Fortsat brug af kørestolen i denne tilstand kan forårsage skade på den elektriske motorenhed eller få kørestolen til at standse under kørsel.

OP

Denne del sælges separat.

Bagdæk

► S.62

- Slitage og revner på dækkets overflade
- Lufttryk

Hjul


► S.64

- Deformation, ridser
- Raslen
- Monteringsforhold for hjulkapslen

Styreenhedsholder ►

s.41


- Raslen

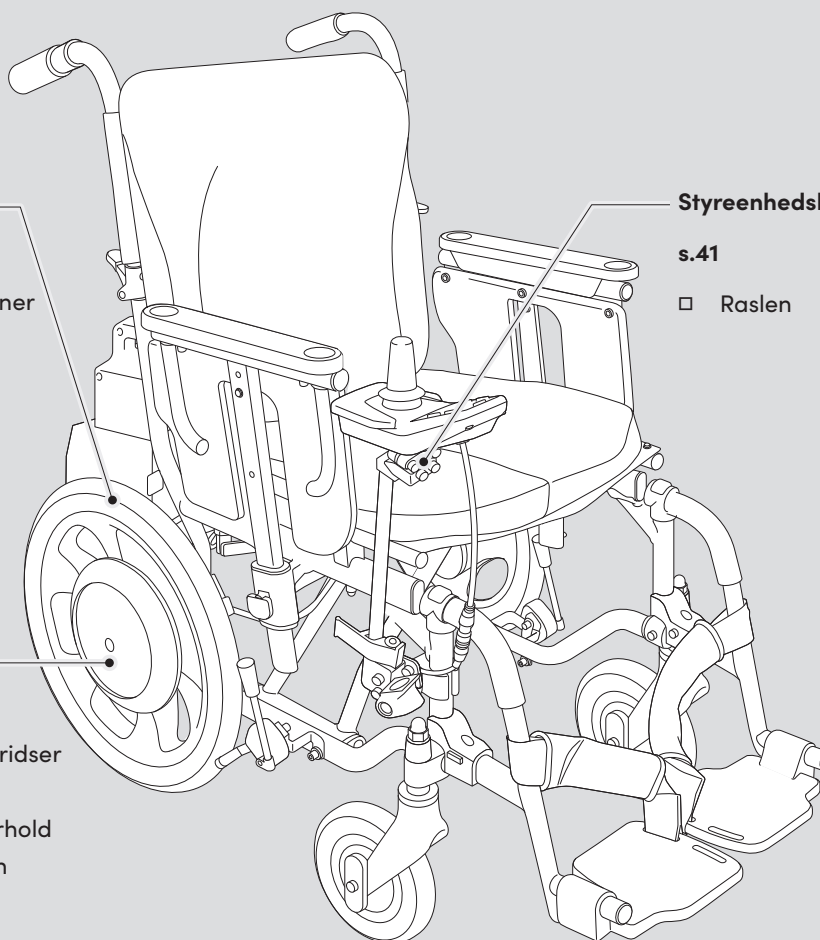

⚠ ADVARSEL

- Brug ikke kørestolen, hvis der er en unormalitet i kørestolen eller bagdækkene.

Fortsat brug under sådanne forhold kan forårsage, at kørestolen bryder sammen under kørsel, hvilket kan resultere i, at du mister balancen og tipper.

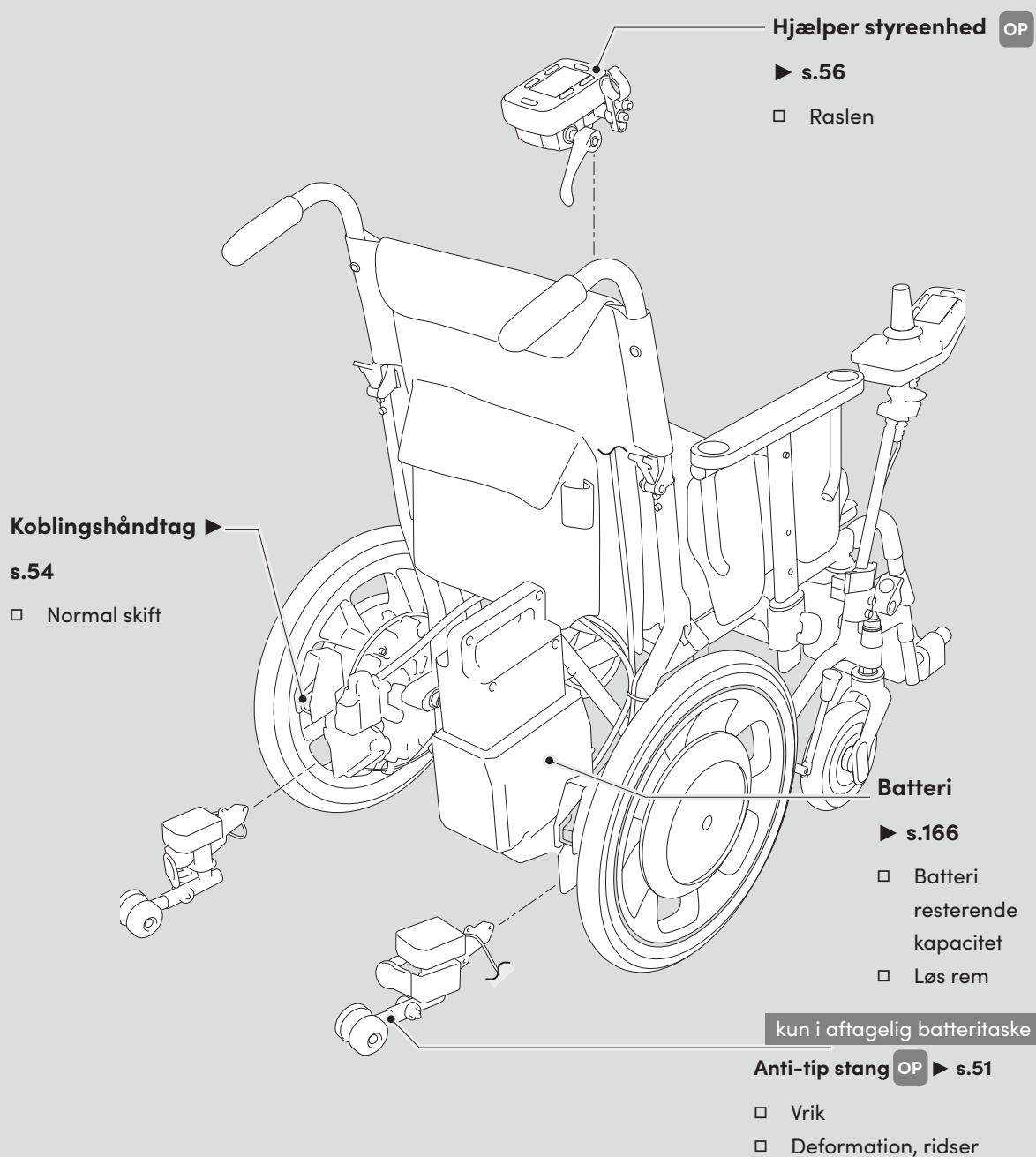


Anti-tip enhed (sælges separat)

Denne del sælges separat.

• Vrik

Mens anti-tip enheden er udstrakt, bevæg den frem og tilbage for at sikre, at den er låst i position og ikke er løs.

Hvis anti-tip enheden ikke er låst, bevæg den frem og tilbage. Når anti-tip enheden er låst i position, vil du høre et klik, der bekræfter, at låsen er aktiveret.

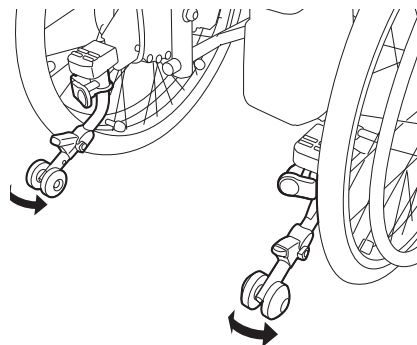

• Deformation, ridser

Bekræft, at anti-tip enheden ikke har deformation eller skade.

Bagdæk (E-Drive NXT (20-26 tommer))

Passende lufttryk varierer afhængigt af dækkets størrelse.

• Slitage og revner på dækkets overflade


Kontrollér for at sikre, at der er dækmønster.

Kontrollér dækkets overflade for at sikre, at der ikke er revner.

• Lufttryk

Kontrollér for at sikre, at der er luft i dækket ved at trykke på dækket med din finger.

Hvis der ikke er nok luft, pump luft i med en luftpumpe.

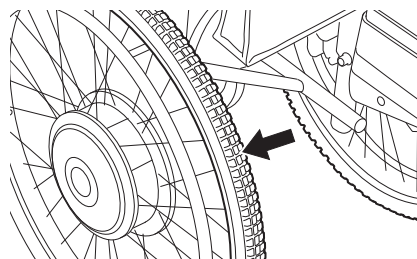

TIP

Passende lufttryk for bagdæk, se "8 Dimensioner og specifikationer"

⚠ ADVARSEL


• Kontrollér lufttrykket i bagdækkene og juster efter behov.

Hvis lufttrykket i bagdækket falder, kan parkeringsbremsene muligvis ikke fungere korrekt.

Bagdæk (E-Drive NXT (16 tommer))

● Slitage og revner på dækkets overflade

Kontrollér for at sikre, at der er dækmønster.
Kontrollér dækkets overflade for at sikre, at der ikke er revner.

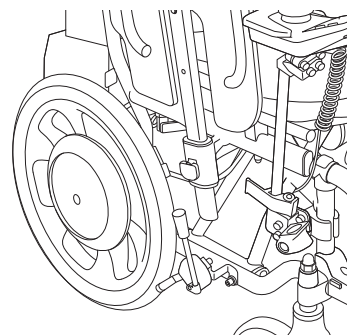


Punkteringssikre dæk (sælges separat)

Denne del sælges separat.

● Slitage og revner på dækkets overflade

Kontrollér for at sikre, at der er dækmønster.
Kontrollér dækkets overflade for at sikre, at der ikke er revner.

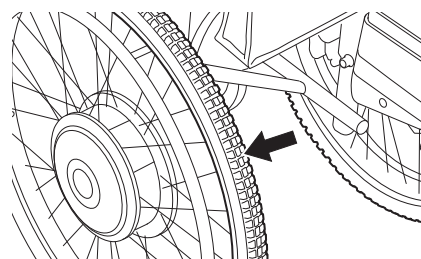

TIP

Udskift de selvforseglende dæk hvert tredje år.
Kontakt din forhandler for udskiftning.



ADVARSEL

- **Kontrollér slid og slitage på de selvforseglende dæk, og hvis dækmønsteret ikke er tilstrækkeligt, kontakt forhandleren.**

Hvis de selvforseglende dæk er slidte, kan de blive glatte, og parkeringsbremserne kan muligvis ikke fungere korrekt.

Hjul, eger (E-Drive NXT (20-26 tommer))

Deformation, ridser

Kontrollér hjulene for at sikre, at de ikke er deformerede eller beskadigede.

Raslen

Kontrollér hjulene for at sikre, at hjulene ikke rasler.

Knækkede eger


Kontrollér egerne for at sikre, at de ikke er knækkede.

Monteringsforhold for hjulkapslen


Sørg for, at hjulkapslerne ikke er løse eller afmonteret.

Hjul

Ved aftagelige enheder skal du sikre, at akselstopkuglerne er synlige, og at akselakslerne er sikkert låst, så enhederne ikke falder af.

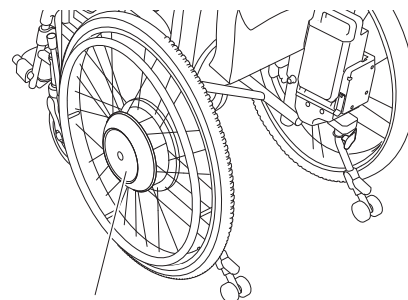

Hjulkapsel

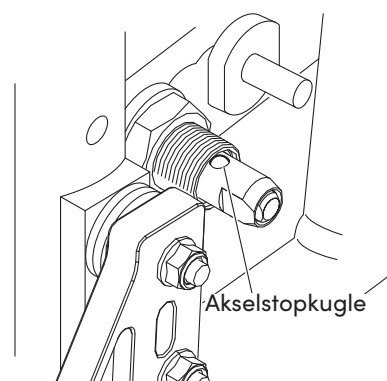

Akselstopkugle

Hjul (E-Drive NXT (16 tommer))

Deformation, ridser

Kontrollér hjulene for at sikre, at de ikke er deformerede eller beskadigede.


Raslen

Kontrollér hjulene for at sikre, at hjulene ikke rasler.


Monteringsforhold for hjulkapslen

Sørg for, at hjulkapslerne ikke er løse eller afmonteret.

Hjul

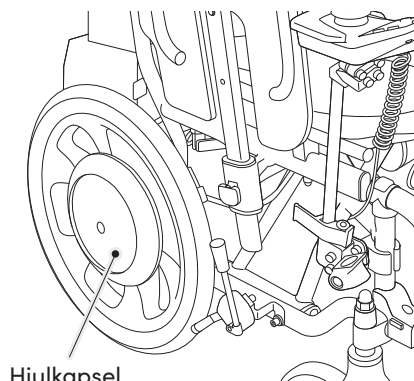

Hjulkapsel

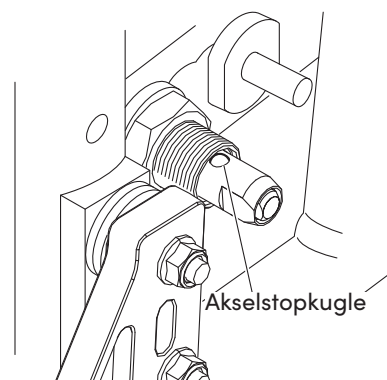

Akselstopkugle

Ved aftagelige enheder skal du sikre, at akselstopkuglerne er synlige, og at akselakslerne er sikkert låst, så enhederne ikke falder af.

Drivringe (E-Drive NXT (20-26 tommer))

Deformation, ridser

Kontrollér, at drivringene ikke er deformerede eller beskadigede.

Raslen

Kontrollér, at drivringene ikke rasler.

Koblingshåndtag

Normal omkobling

Betjen koblingshåndtagene for at kontrollere, om der er normal skift mellem el-kørsel/manuel kørsel positionerne.

Monteringsposition for koblingshåndtagene (E-Drive NXT (20-26 tommer))

Kontrollér, at der ikke er nogen interferens mellem koblingshåndtagene og stellet (parkeringsbremses, sidebeskyttere osv.), og om koblingshåndtagene kan betjenes problemfrit.

Holder til styreenhed

Inspektionsmetoden varierer afhængigt af holdertypen.

Vertikal holder: Para **Vertikal** Horisontal holder:

Parallel

Horisontal


Vertikal

❶ Raslen

Flyt styreenheden frem og tilbage for at sikre, at holderen er fast og korrekt fastgjort til kørestolen.

Hold og træk styreenheden op, og kontrollér derefter, at den er sikkert låst med låsehåndtaget.

Hvis den ikke er låst korrekt, skal du fjerne og genindsætte styreenheden og bruge låsehåndtaget til at låse den.

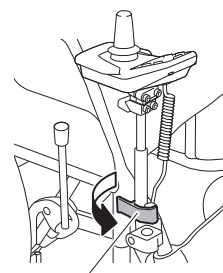


Låsehåndtag

Parallel og Horisontal

❶ Raslen

Flyt styreenheden frem og tilbage for at sikre, at holderen er fast og korrekt fastgjort til kørestolen.

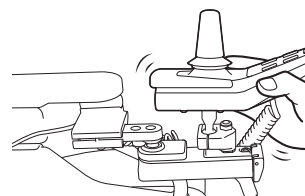

Batteri



ADVARSEL

- **Kontrollér den resterende kapacitet på batteriet.**

Hvis den resterende kapacitet af batteriet er lav, kan batteriet løbe tør under drift, og det kan blive umuligt at rejse i el-kørselstilstand.

- **Sørg for, at fastgørelsesremmen på batteritasken ikke er løs.**

Hvis fastgørelsesremmen er løs, kan batteritasken falde af, eller den løse fastgørelsesrem kan vikle sig rundt om bagdækket eller andre bevægelige dele, hvilket muligvis kan forårsage en ulykke.

Udfør følgende inspektion, når du bruger en kørestol med aftagelig batteritaske.

- **Løs rem**

Sørg for, at fastgørelsesremmen på den aftagelige batteritaske ikke er løs. Sørg desuden for, at fastgørelsesremmen ikke forstyrrer anti-tip stangen, bagdæk eller andre bevægelige dele.

Hvis remmen er løs, skal du stramme remmen efter at have sikret, at den ikke forstyrrer nogen bevægelige dele.

Assistent styreenhed (sælges separat)

Denne del sælges separat.

- **Raslen**

Flyt assistent styreenheden frem og tilbage for at sikre, at holderen er fast og korrekt fastgjort til kørestolen.

4 Kørsel med kørestolen

Dette kapitel beskriver de nødvendige trin for at komme ind i og betjene en kørestol udstyret med dette produkt. Læs venligst denne brugervejledning grundigt sammen med instruktionsmanualen for den elektriske kørestol, der er udstyret med dette produkt.

⚠ ADVARSEL

- Når du skifter koblingshåndtagene til manuel kørsel eller skubbe-position, skal du parkere på en flad overflade, aktivere parkeringsbremsen og slukke for strømkontakten.

Kørestolen kan begynde at bevæge sig uventet, hvilket kan forårsage skade på dig eller andre omkring dig.

- Skift ikke koblingsgrebene til manuel kørsel eller skub-position i områder med hældning.

Kørestolen kan begynde at bevæge sig uventet og kan kollideres eller vælte.

Dette kan resultere i skade på dig og andre omkring dig.

- Betjen ikke koblingsgrebene, mens kørestolen er i bevægelse.

Der er risiko for kollision eller væltning.

Dette kan resultere i skade på dig og andre omkring dig.


- Du må ikke skifte koblingshåndtagene til manuel kørsel eller skubbe dem i skubbe-position, mens du kører i motordrevet kørsel.

Hvis du gør dette, kan motorbremsen miste sin effekt. Især på hældninger kan kørestolen komme ud af kontrol.


Dette kan resultere i skade på dig og andre omkring dig.

- Skift ikke koblingsgrebene til motordrevet kørsel, mens du kører i manuel kørsel.

Hvis dette gøres, aktiveres bremserne på baghjulene. Den pludselige opbremsning kan forårsage, at din krop kastes fremad som reaktion, hvilket kan forårsage skade på dig eller andre omkring dig, eller beskadige kørestolen.

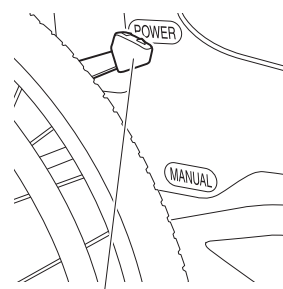

Koblingshåndtag

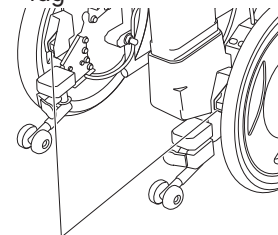

Koblingshåndtag

Forberedelse til at komme ind/ud af kørestolen

Sikre, at kørestolen står fast i en stabil position og ikke bevæger sig.

Før kørsel i motordrevet tilstand, skal du sikre, at batteriet er fuldt opladet. For at kontrollere batteriets opladningsniveau og hvordan batteriet installeres, henvises til instruktionerne om håndtering af batteri. ► S.83
"Håndtering af batterier, opladere"



ADVARSEL

- **Når du går ind/ud af kørestolen, skal du huske følgende.**

Kørestolen kan begynde at bevæge sig uventet, hvilket kan resultere i, at du falder ud af kørestolen og kommer til skade.




- Sluk for strømmen.
- Sæt koblingshåndtagene i motordrevet positionen.
- Aktivér parkeringsbremsene.

- **Sluk altid for strømmen, før du går ind/ud af kørestolen.**


Hvis strømmen er tændt, og din krop rammer joysticket, kan kørestolen bevæge sig uventet, og du eller andre personer i nærheden kan komme til skade.

Sådan stopper du kørestolen


- 1 Hold kørestolen på et jævnt og fladt sted.
- 2 Sluk for strømmen til styreenheden.
- 3 Sæt koblingshåndtagene i motordrevet positionen.

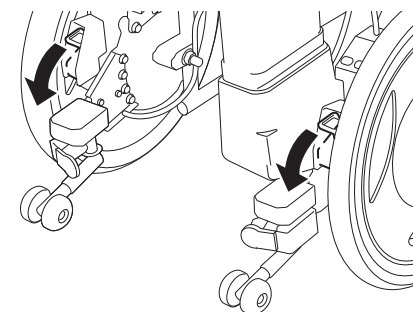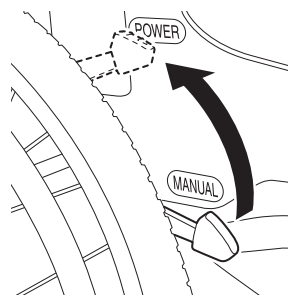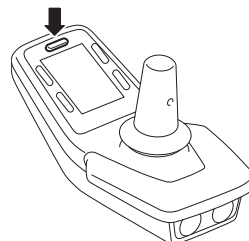

- 4 Aktivér parkeringsbremserne.

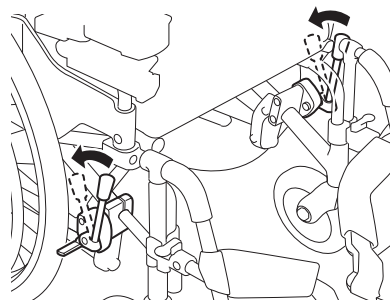

- 5 Flyt anti-tip stangen frem og tilbage, mens den er udstrakt, for at sikre, at den er låst i position. (sælges separat, forudsat at du har udstyret)

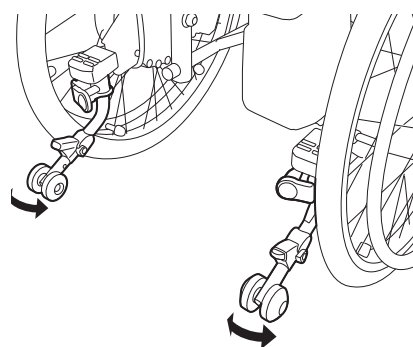


Ind- og udstigning af kørestol

ADVARSEL

- Når styreenheden er fastgjort til kørestolens opklappelige armlæn, skal du være opmærksom på følgende.

- Hæv ikke armlænet efter at have tændt for strømmen.
- Tænd ikke for strømmen, mens armlænet er hævet.
- Betjen aldrig kørestolen med armlænet hævet.


Joysticket kan vippe, hvilket kan forårsage, at kørestolen bevæger sig uventet og dermed medføre personskade på dig eller andre personer i nærheden.

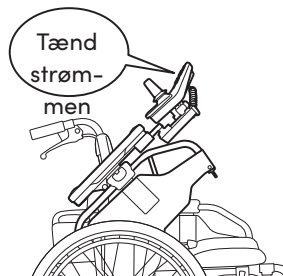

- For kørestole, der bruger en lodret holder til at montere styreenheden, skal du overholde følgende.

- Fjern ikke styreenheden fra holderen nedenunder, mens strømmen er tændt.
- Tænd ikke for strømmen efter at have fjernet styreenheden fra den nedre holder.
- Rejs aldrig i kørestolen med styreenheden fjernet fra holderen nedenunder.


Joysticket kan vippe, hvilket kan forårsage, at kørestolen bevæger sig uventet og dermed medføre personskade på dig eller andre personer i nærheden.

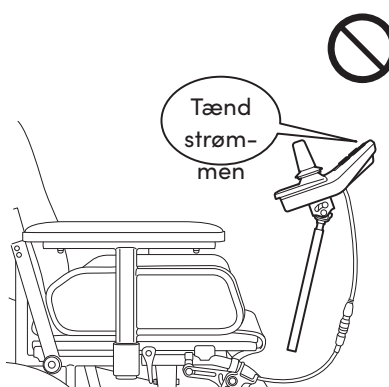

- For kørestole, der bruger en parallel eller vandret holder til at montere styreenheden, skal du overholde følgende.

- Træk ikke styreenheden tilbage, mens strømmen er tændt.
- Tænd ikke for strømmen efter at have trukket styreenheden tilbage.
- Rejs aldrig i kørestolen med styreenheden trukket tilbage.

Joysticket kan vippe, hvilket kan forårsage, at kørestolen bevæger sig uventet og dermed medføre personskade på dig eller andre personer i nærheden.

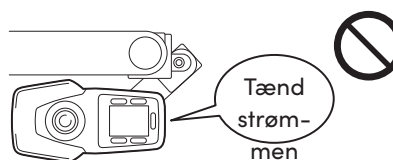

Sikring af frihøjde

- 1 | Vip fodstøtterne op.
- 2 | Følgende bevægelige dele kan flyttes efter behov for at lette ind- og udstigning af kørestolen.
 - Flyt styreenheden ► s.41 "Styreenhedsholder"

Sidde i kørestolen

- 1 | Sæt dig i kørestolen og sæt dig godt ned, så du sidder i en stabil position.
- 2 | Sænk fodstøtterne og placer dine fødder sikkert på dem.
- 3 | Hvis du flytter andre bevægelige dele, skal du sikre, at disse dele vender tilbage til deres oprindelige position og er fastgjort sikkert.

Kontrollér før kørsel med kørestolen

ADVARSEL

- **Kontrollér styreenheden for at sikre, at den er fastgjort til kørestolen før rejse.**

Du kan muligvis ikke kontrollere kørestolen korrekt, hvis styreenheden ikke er fastgjort, hvilket kan resultere i skade på dig eller andre personer omkring dig.

Før du tænder for strømmen til styreenheden

4

● **Tøj, der sidder fast i kørestolen**

Kør ikke med tøj som bukser eller nederdele med brede sømme og skødetæpper, der kan sidde fast i nogen del af kørestolen.

● **Joystick**

Bevæger joysticket sig jævnt uden at sidde fast, mens strømmen er slukket? Går det tilbage til midten, når du slipper?

Kontrol af styreenhedens drift

Tænd for strømmen til styreenheden, mens parkeringsbremsen er aktiveret.


● **Startskærm**

Når du tænder for strømmen, vil du høre bilyden "Pi". Batteriets resterende kapacitet vises med tal.

Indikator for
resterende
batterikapacitet



● Hvis denne LCD-indikation vises

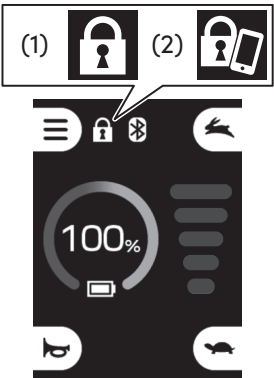LCD-indikation	Hvad du skal gøre
	Strømkontakten blev tændt, mens joystick-grebet var vippe. Sluk for strømkontakten, slip joysticket, og tænd derefter for strømmen igen.
	(1) Kørestolen er låst på grund af denne drift. Deaktiver anti-tyveri funktionen. ► s.39 "Anti-tyveri funktion" (2) Kørestolen er låst på grund af applikationens drift. Deaktiver anti-tyveri funktionen. ► s.117 "Ændring af indstillingerne"

Hvis en anden indikation vises, og problemet ikke er løst, skal du kontrollere i henhold til "Fejlfinding".

► **s.119** "Fejlfinding"

Kørsel med kørestolen

Hvis der ikke er problemer ved inspektionen før indstigning i kørestolen, skal du frigøre parkeringsbremsen og begynde at køre kørestolen.



ADVARSEL

- **Når summeren afgiver bip for at angive advarsel om lav resterende batterikapacitet, skal du straks flytte dig til et sikkert sted.**

En situation, hvor du ikke kan bevæge dig, f.eks. når du krydser en vej, kan resultere i en ulykke. Flyt dig til et sikkert sted og udskift derefter batteriet med et ekstra (sælges separat) eller oplad batteriet.

- **Kør ikke med kørestolen, mens en USB-enhed er tilsluttet USB-strømporten.**

Ellers kan USB-strømticket blive udsat for stød, og styreenheden kan blive beskadiget, hvis kørestolen støder ind i et objekt. Et kabel tilsluttet USB-enheden kan vikle sig rundt om joysticket, koblingsgrebet eller et baghjul, hvilket muligvis kan forårsage en ulykke.

Bemærk

- **Hvis du registrerer et problem, som du ikke selv kan løse (hvis du ikke kan løse fejlen ved hjælp af "fejlfinding"), skal du stoppe med at bruge kørestolen og kontakte din forhandler.**

Fortsat brug af kørestolen i denne tilstand kan forårsage skade på den elektriske motorenhed eller få kørestolen til at standse under kørsel.

4

Betjening af joysticket

Flyt først joysticket let frem og tilbage samt til siderne for at sikre, at kørestolen bevæger sig som betjent.

◀ Fremad, bagud og drej

Vip joysticket fremad for at køre fremad, og vip det mod dig for at køre bagud. Vip joysticket diagonalt for at køre fremad eller bagud, mens du drejer til venstre eller højre.

◀ Drejninger


Vip joysticket til den ene eller anden side for at dreje kørestolen til den side.

◀ Justering af hastigheden

Hastigheden kan justeres ved at vippe joysticket.

◀ Nedsætte hastigheden og stop

Før joysticket tilbage til midterpositionen for at nedsætte hastigheden og stoppe kørestolen. Mens joysticket er i midterpositionen, forbliver bremserne aktiveret.

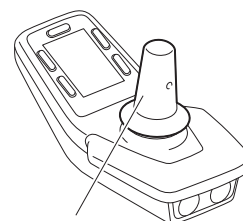

Joystick

TIP

Hastigheden samt joystickfølsomheden kan justeres.

► s.117 "Ændring af indstillingerne"



Indstilling af den maksimale hastighed

Du kan kontrollere den nuværende maksimale hastighedsindstilling (hastighed når joysticket er helt vippet) på styreenhedens LCD-skærm.

Hastighedsvælgerknop

● Indstilling af hastigheden

Tryk på hastighedsvælgerknappen (OP) for at øge hastigheden, og tryk på hastighedsvælgerknappen (NED) for at mindske hastigheden.

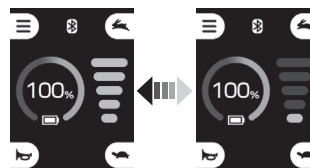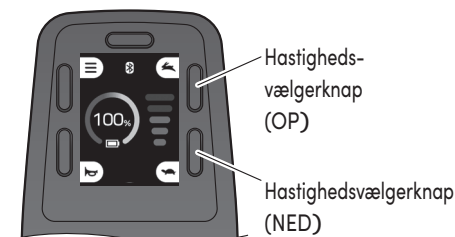

Hastighedsindstilling 5
(maksimal indstillet
hastighed)

Hastighedsindstilling 1
(minimal indstillet
hastighed)

Hastighedsvælgerkontakt (sælges separat)

● Indstilling af hastigheden

Drej hastighedsvælgerkontakten op (OP) for at øge den indstillede hastighed, og drej hastighedsvælgerkontakten ned (NED) for at mindske den indstillede hastighed.



Bekræftelse af batteriets resterende kapacitet

Du kan kontrollere batteriets resterende kapacitet på styreenhedens LCD-skærm.

● Indikator for resterende batterikapacitet


Batteriets resterende kapacitet vises i trin på 5 %, fra 100 % til 5 %.



på

● Advarsel for resterende batterikapacitet


- 10 %... Summeren afgiver biplyd "Pi Pi Pi Pi" (4 gange)
- 5 %... Summeren afgiver biplyd "Pi Pi Pi Pi" (4 gange)
- 1 %... Summeren fortsætter med at afgive biplyd "Pi -Pi -".

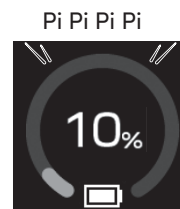

🔊 Batteri opbrugt

Når batteriets resterende kapacitet er opbrugt, lyder en lang biplyd "Pi -", og kørestolen stopper.

Lang biplyd (Pi -)

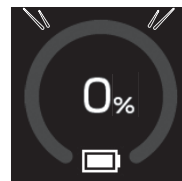

Automatisk sluk-funktion

Hvis joysticket ikke betjenes i 10 minutter, mens strømmen er tændt, slukkes strømmen automatisk, og yderligere drift kan ikke udføres.

Hvis strømmen slukkes, skal du tænde den igen.

TIP

Aktivering af funktionen til automatisk slukning af strømmen kan forsinkes i 60 minutter eller deaktiveres helt.

► s.117 "Ændring af indstillingerne"

Øv dig i at køre kørestolen

Når du bruger kørestolen udstyret med dette produkt for første gang, skal du øve de grundlæggende funktioner på et åbent, jævnt underlag.

Sørg for at have en hjælper med dig, og vær opmærksom på sikkerhed.

Grundlæggende drift

- (1) Indstil først den maksimale hastighed til langsom hastighed, og lær at bruge joysticket.
 - Vip joysticket i den retning, du ønsker at køre.
 - Bevæg joysticket langsomt.
- (2) Med den maksimale hastighed indstillet til langsom hastighed, lær hvordan joystickdriften føles.
 - For at køre langsomt skal du vippe joysticket en smule.
 - For at køre hurtigt skal du vippe joysticket længere.
 - For at nedsætte hastigheden og stoppe, skal du føre joysticket tilbage til midten.

- (3) Prøv at bevæge dig på følgende måder.


■ Baglæns

- Bliv fortrolig med håndtering og ydeevne ved bakning.
- Kontrollér bag dig for sikkerhed.




■ Drejninger

- Vip joysticket til siden for at dreje på stedet.
- Øv dig i at dreje til højre og venstre.

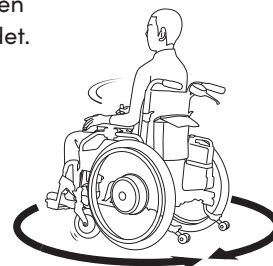

■ S-formede kurver

- Lær fornemmelsen af hastighed og timing, når du foretager drejninger.
- Øv dig, indtil du kan køre i den ønskede retning.

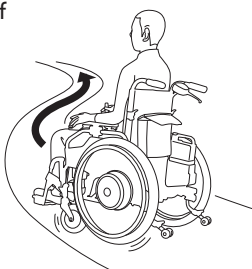

■ Undgå forhindringer

- Øv dig i at undgå forhindringer.
- Stop før du når forhindringen.



- (4) Forøg den maksimale hastighed gradvist, og øv dig på samme måde.

ADVARSEL

- Hvis en hjælper ledsager dig, skal du udvise forsigtighed for at undgå at støde ind i ham eller hende, når du kører baglæns.

Manglende forsigtighed kan forårsage skade på din hjælper.

Når du er fortrolig med dens drift, skal du øve sikker kørsel med kørestolen på det sted, hvor du har tænkt dig at bruge den.


Sørg for at have en hjælper med dig, og vær opmærksom på sikkerhed.

Kontrollér de ofte benyttede områder for store huller eller kantsten, stejle hældninger eller ujævne veje, og prøv at vælge en rute, der ikke passerer sådanne farlige steder.

Øv dig i at køre kørestolen

(1) Fortov

- Justér din drift, så den passer til vejens overfladeforhold.
- Vær forsigtig, så du ikke støder ind i fodgængere og forhindringer.

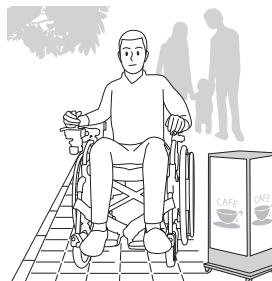


(2) Kørsel op og ned ad en kantsten

- Kontrollér brugervejledningen for kørestolen udstyret med dette produkt, og sørg for, at højden på kantstenen er inden for det acceptable område.
- Drej kørestolen, så den kan køre over kantstenen i rette vinkler.
- Stop din kørestol, før du nærmer dig en kantsten, og fortsæt derefter forsigtigt.
- En anden måde at komme over en lav kantsten på er at klatre baglæns.


(3) Fodgængerfelt

- Vær forsigtig med kantstenen mellem vejen og fodgængerovergangen.
- Sørg for at have tilstrækkelig tid til at krydse fodgængerovergangen, så trafiklyset ikke skifter, mens du krydser.

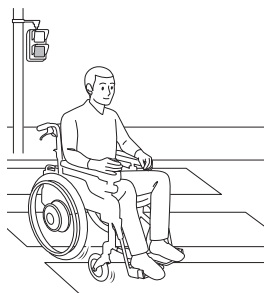


(4) Hældning

- Få fornemmelsen af at køre op og ned ad en hældning.
- Kontrollér brugervejledningen for kørestolen udstyret med dette produkt, og sørg for, at hældningen er inden for den praktiske klatrevinkel. (Se den maksimale sikre hældningsvinkel i specifikationstabellen.)
- Genstart forsigtigt på en opadgående hældning.

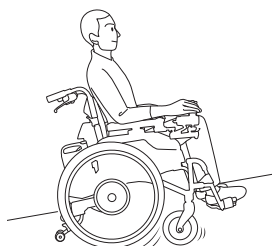

(5) Automatisk dør

- Øv dig på den korrekte stopposition.

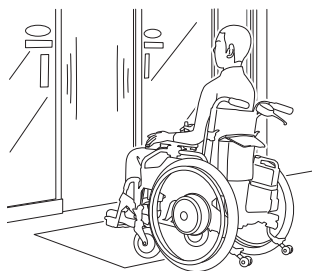

Forlade kørestolen

ADVARSEL

- **Sørg for at slukke for strømmen, når kørsel i motordrevet kørselstilstand er afsluttet.**


Hvis strømmen er tændt, mens du er ved at forlade kørestolen, og din krop rammer joysticket, kan kørestolen bevæge sig uventet, og du eller andre personer i dit nærområde kan komme til skade.

- **Ved udstigning fra kørestolen til en stol eller en seng skal du altid sætte koblingshåndtagene i motordrevet kørselsposition og aktivere parkeringsbremsene.**

Kørestolen kan begynde at bevæge sig uventet, hvilket kan resultere i, at du falder ud af kørestolen og kommer til skade.

Sådan stopper du kørestolen

- 1 Brug joysticket til at parkere kørestolen på et fladt sted.
- 2 Kontrollér, at parkeringsbremsene er aktiveret, og at koblingshåndtagene er i motordrevet kørselsposition.
- 3 Sluk for strømmen til styreenheden.

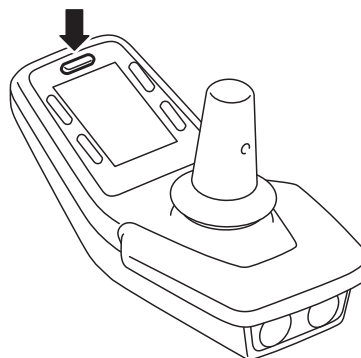

At komme ud af kørestolen

Følg samme procedure som ved indstigning i kørestolen. Sikre, at der er nok plads til sikkert at komme ud af kørestolen.

► **S. 72** "Sikring af frigang"

Fjernelse af batteriet

Efter at have forladt kørestolen, hvis batteriet skal oplades, eller hvis du ikke planlægger at bruge batteriet i en længere periode, skal du fjerne batteriet fra kørestolen og oplade eller opbevare det. ► **S. 94** "Håndtering af batterier og opladere"

5 Kørsel med kørestolen med hjælper

Dette kapitel beskriver fremgangsmåden for udførelse af assistentfunktioner i motordriftstilstand. Hjælper styreenhed og hjælper bremsen er valgfrie (sælges separat).

Læs venligst denne brugervejledning grundigt sammen med instruktionsmanualen for kørestolen, der er udstyret med dette produkt.

⚠ ADVARSEL

- Når du skifter koblingshåndtagene til manuel kørsel eller skubbe-position, skal du parkere på en flad overflade, aktivere parkeringsbremsen og slukke for strømkontakten.

Kørestolen kan begynde at bevæge sig uventet, hvilket kan forårsage skade på dig eller andre omkring dig.

- Skift ikke koblingsgrebene til manuel kørsel eller skub-position i områder med hældning.

Kørestolen kan begynde at bevæge sig uventet og kan kollidere eller vælte.

- Betjen ikke koblingsgrebene, mens kørestolen er i bevægelse.


Der er risiko for kollision eller væltning.

- Du må ikke skifte koblingshåndtagene til manuel kørsel eller skubbe dem i skubbe-position, mens du kører i motordrevet kørsel.


Hvis du gør dette, kan motorbremsen miste sin effekt. Især på hældninger kan kørestolen komme ud af kontrol.

- Skift ikke koblingsgrebene til motordrevet kørsel, mens du kører i manuel kørsel.

Hvis dette gøres, aktiveres bremserne på baghjulene. Den pludselige opbremsning kan forårsage, at din krop kastes fremad som reaktion, hvilket kan forårsage skade på dig eller andre omkring dig, eller beskadige kørestolen.

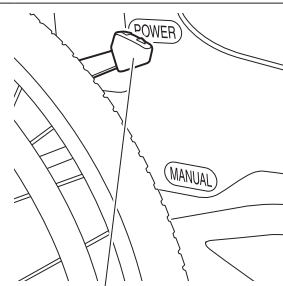

Koblingshåndtag

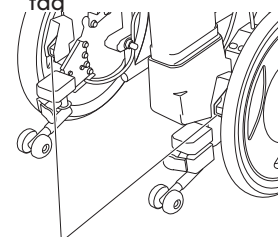

Koblingshåndtag

Før flytning af person til kørestolen

Sikre, at kørestolen står fast i en stabil position og ikke bevæger sig.

Før kørsel i motordrevet tilstand, skal du sikre, at batteriet er fuldt opladet. For at kontrollere batteriets opladningsniveau og hvordan batteriet installeres, henvises til instruktionerne om batterihåndtering.

► **S.83** "Håndtering af batterier og opladere"



ADVARSEL

- **Når en person flyttes til kørestolen, skal følgende overholdes:**

Kørestolen kan begynde at bevæge sig uventet, hvilket kan resultere i, at du falder ud af kørestolen og kommer til skade.


- Sluk for strømmen.
- Sæt koblingshåndtagene i motordrevet position.
- Aktivér parkeringsbremsene.

- **Sluk altid for strømmen til styreenheden, før du flytter til kørestolen.**

Hvis strømmen er tændt, og kroppen på personen, der sidder i kørestolen, rammer joysticket, kan kørestolen bevæge sig uventet, og du eller andre personer i dit nærområde kan komme til skade.

Sådan stopper du kørestolen



- 1 Hold kørestolen på et jævnt og fladt sted.
- 2 Sluk for strømmen til hjælper styreenheden.

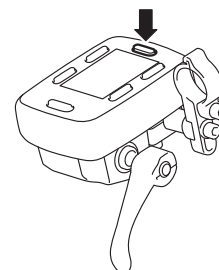

TIP

Hvis strømmen til styreenheden tændes, før strømmen til hjælper styreenheden tændes, vil hjælper styreenheden ikke tænde.


- 3 Sæt koblingshåndtagene i motordrevet positionen.

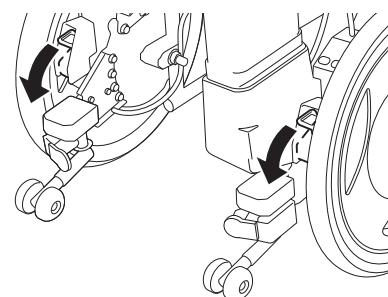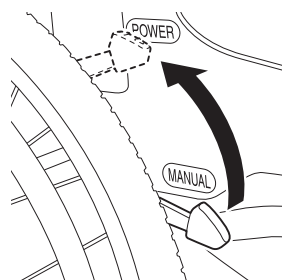

- 4 Aktivér parkeringsbremserne.



- 5 Bevæg anti-tip enheden frem og tilbage, mens den er udstrakt, for at sikre, at den er låst i position.
(sælges separat, hvis installeret)

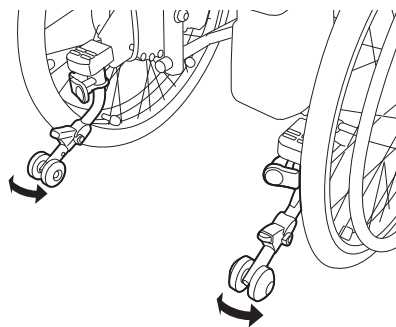

Flytning af person til kørestolen

Sikring af frihøjde

- 1 | Vip fodstøtterne op.
- 2 | Følgende bevægelige dele kan flyttes efter behov for at lette ind- og udstigning af kørestolen.
 - Flyt styreenheden ► **S.41** "Holder til styreenhed"

Kontrol af sædet

Efter at have flyttet personen til kørestolen, sikre at følgende betingelser er opfyldt:

- ❑ **Personen sidder godt fast med en stabil kropsholdning**
- ❑ **Fodstøtterne er sænket, og fødderne på personen, der sidder i kørestolen, er placeret fast, så hælene rører fodstøttebæltet.**
- ❑ **Hvis du har flyttet andre bevægelige dele, skal disse dele returneres til deres oprindelige positioner og sikres på plads.**

Kontrollér før kørsel med kørestolen

ADVARSEL

- Når hænderne på en person i kørestolen er tæt på bagdækkene eller drivringene, må der ikke gives assistance.

Tøj og fingre kan blive fanget, hvilket udgør en risiko for skade.

Før tænding af strømmen til hjælper styreenheden

● Tøj, der sidder fast i kørestolen

Kør ikke med tøj som bukser eller nederdele med brede sømme og skødetæpper, der kan sidde fast i nogen del af kørestolen.

● Kropsholdning for en person i kørestolen

Sidder personen i kørestolen korrekt? Er hænderne fri af bagdækkene eller drivringene?

5

Kontrol af drift af hjælper styreenheden

Med parkeringsbremsen aktiveret, tænd for strømmen til hjælper styreenheden.



● Startskærm

Når du trykker og holder strøm knappen nede (i ca. 2 sekunder), lyder der en biplyd (Pi). Batteriets resterende kapacitet vises med tal.

Indikator for
resterende
batterikapacitet



● Hvis denne LCD-indikation vises

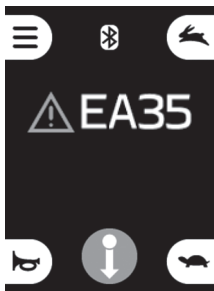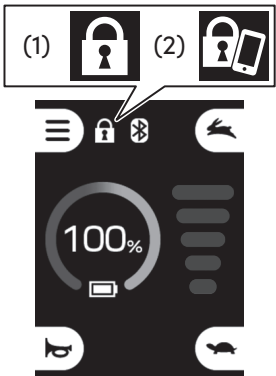LCD-indikation	Hvad du skal gøre
	Strømkontakten blev tændt, mens joystick-grebet var vippet. Sluk for strømkontakten, frigør speederhåndtaget, og tænd derefter strømmen igen.
	(1) Kørestolen er låst på grund af denne drift. Deaktiver anti-tyveri funktionen. ► s.39 "Anti-tyveri funktion" (2) Kørestolen er låst på grund af drift af applikationen. Deaktiver anti-tyveri funktionen. ► S.117 "Ændring af indstillingerne"

Hvis en anden indikation vises, og problemet ikke er løst, skal du kontrollere i henhold til "Fejlfinding".

► **s.119** "Fejlfinding"

Kørsel med kørestolen

Hvis der ikke er problemer ved driftskontrollen udført før indstigning i kørestolen, frigør parkeringsbremsene og begynd at køre kørestolen.

Knap til valg af kørselsretning


Sørg for, at køreretningen på kørestolen er indstillet til den ønskede retning, inden du bruger den.

◼ Fremad/bagud

Tryk på knappen til valg af kørselsretning for at skifte mellem fremad og bagud retning.

◼ Drejninger

Tryk og hold kørselsretningsvælgerknappen nede for at skifte til drej.

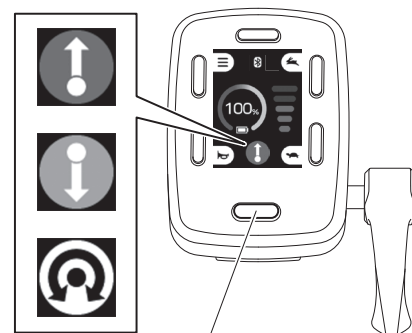

Knap til valg af kørselsretning

5

Betjening af speederhåndtaget


Indstil først hastigheden til minimum, indstil den ønskede kørselsretning (fremad, bagud eller drej), og tag derefter fat i speederhåndtaget for at bekræfte, at kørestolen bevæger sig fremad, bagud eller drejer som ønsket.

◼ Fremad, bagud eller drej

Indstil kørselsretningen til fremad og grib gashåndtaget. Kørestolen vil bevæge sig fremad.

Indstil kørselsretningen til bagud og grib gashåndtaget. Kørestolen vil bevæge sig bagud.

Indstil rejseretningen til drej og grib gashåndtaget, så du kan dreje kørestolen ved hjælp af hjælperens håndtag. Du kan dreje kørestolen med hjælp fra hjælperen.

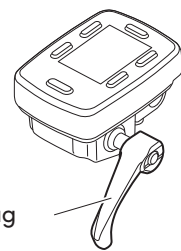

Speederhåndtag

◼ Nedsætte hastigheden og stop


Hastigheden ændres afhængigt af vinklen, hvor hjælperen griber gashåndtaget. Kørestolen vil blive langsommere, hvis hjælperen slipper trykket på gashåndtaget. Kørestolen vil stoppe, når hjælperen slipper gashåndtaget.

Indstilling af den maksimale hastighed

Indstil først hastigheden til langsom, og juster gradvist hastigheden, efterhånden som du vænner dig til at betjene kørestolen.

Indstilling af hastigheden

Tryk på hastighedsvælgerknappen (OP) for at øge hastigheden, og tryk på hastighedsvælgerknappen (NED) for at mindske hastigheden.

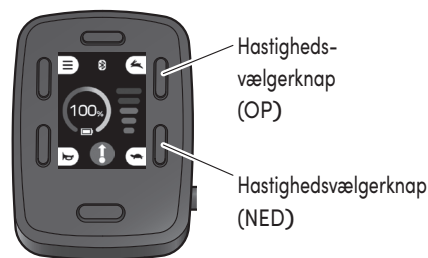

Bekræftelse af batteriets resterende kapacitet

Du kan kontrollere batteriets resterende kapacitet på LCD-skærmen på hjælperens styreenhed.

Indikator for resterende batterikapacitet

Batteriets resterende kapacitet vises i trin på 5 %, fra 100 % til 5 %.

Advarsel for resterende batterikapacitet


- 10 %... Summeren afgiver biplyd "Pi Pi Pi Pi" (4 gange)
- 5 %... Summeren afgiver biplyd "Pi Pi Pi Pi" (4 gange)
- 1 %... Summeren fortsætter med at afgive biplyd "Pi -Pi -".



Batteri opbrugt

Når batteriet er opbrugt, blinker advarselslampen, batteriets resterende kapacitetsvisning blinker "0", en lang biplyd "Pi -" lyder, og kørestolen stopper.

Lang biplyd (Pi -)

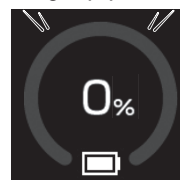

Automatisk sluk-funktion

Hvis gashåndtaget ikke betjenes i 10 minutter, mens strømmen er tændt, slukkes strømmen automatisk, og yderligere drift kan ikke udføres.

Hvis strømmen slukkes, skal du tænde den igen.

Grebstype nødsituation stopfunktion

Hvis du føler fare, grib gashåndtaget stramt for at stoppe kørestolen.

TIP

Brug ikke gashåndtaget som bremser under normale forhold.




Grundlæggende om kørsel med kørestolen


Hvis du er en hjælper, der betjener en kørestol i motordrevet tilstand, skal du korrekt forstå og udføre de grundlæggende driftsprocedurer i følgende situationer:

Grundlæggende drift


- For at ændre bevægelsesretningen eller for at dreje
 - Uanset om det er i manuel kørsel tilstand eller motordrevet kørsel tilstand, kan du ændre retningen på kørestolen ved hjælp af håndtagene.
 - Når du kører i motordrevet kørsel position, skal du holde gashåndtaget for at flytte kørestolen fremad og ændre retningen.

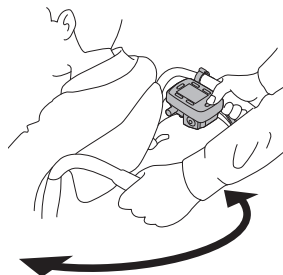

- Nedkørsel af en hældning
 - Nedkørsel i bak for at undgå risikoen for at vælte fremad.

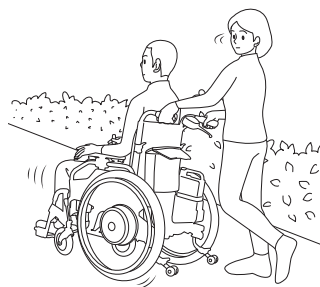

- Komme op ad en kantsten
 - Sluk for strømmen til hjælperens styreenhed og skift koblingshåndtagene til manuel kørsel position eller skubbe-position.
 - Flyt kørestolen, så den kan komme over kantstenen i rette vinkler.
 - Mens du forsigtigt træder på vippepladen på anti-tip enheden, som om du skubber den fremad, træk håndtagene ned og bagud for at løfte forhjulene og komme over kantstenen.

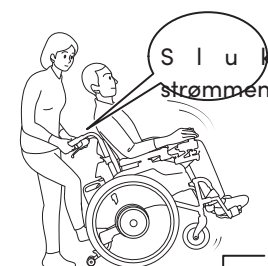

- Komme op ad en høj kantsten
 - Hvis du har installeret E-Drive NXT anti-tip enheden (sælges separat) på kørestolen, skal du opbevare den og fortsætte som ved "Komme op ad en kantsten".
 - Når E-Drive NXT anti-tip enheden (sælges separat) er installeret, skal du sørge for at returnere E-Drive NXT anti-tip enheden til sin oprindelige position og låse den sikkert efter at have passeret kantstenen.

Ud af kørestolen


ADVARSEL

- Ved udstigning fra kørestolen til en stol eller en seng skal du altid sætte koblingshåndtagene i motordrevet kørselsposition og aktivere parkeringsbremsene.

Kørestolen kan begynde at bevæge sig uventet, hvilket kan resultere i, at du falder ud af kørestolen og kommer til skade.

Sådan stopper du kørestolen

- 1 Stop kørestolen på et jævnt og fladt sted.
- 2 Kontrollér, at parkeringsbremsene er aktiveret, og at koblingshåndtagene er i motordrevet kørselsposition.
- 3 Sluk for strømmen til hjælper styreenheden.

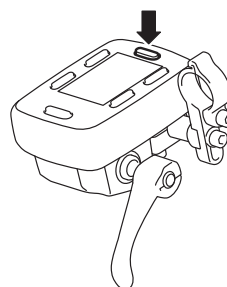

5

Ved assistance til at komme ud af kørestolen

Følg samme procedure som ved indstigning i kørestolen. Sikre, at der er nok plads til sikkert at assistere personen med at komme ud af kørestolen.

- S.61 "Sikring af frihøjde"

Fjernelse af batteriet

Efter at være kommet ud af kørestolen, hvis batteriet skal oplades, eller hvis du ikke planlægger at bruge batteriet i en længere periode, skal du fjerne batteriet fra kørestolen og oplade eller opbevare det.

- S.83 "Håndtering af batterier og opladere"

6 Håndtering af batterier og opladere

Håndtering af batterier, opladere

⚠ ADVARSEL


- Hvis du håndterer et af disse batterier eller deres opladere forkert, kan det medføre varmeudvikling, sprængning, elektrisk stød eller personskade. Sørg for at overholde nedenstående punkter.

Opladeren er ikke beregnet til brug af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring og viden (herunder børn). Hvis sådanne personer bruger opladeren, skal deres brug overvåges eller instrueres af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Overvåg børn for at sikre, at de ikke leger med opladeren.

Rør ikke de metalterminaler på batteriet eller opladeren direkte med fingrene, og rengør ikke terminalerne med et vådt håndklæde. Ellers kan der opstå elektrisk stød eller kortslutning.

Oplad ikke batteriet med en anden oplader end den angivne oplader, og brug ikke batteriet på andet end den specificerede kørestol.

Adskil eller modificér ikke batteriet.

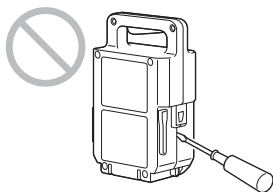


Placer ikke batteriet i nærheden af åben ild og kast det ikke i ild.



Placer ikke batteriet i vand, og sprøjt ikke vand på det.




Ved transport af kørestolen, for eksempel i en bil, skal du fjerne batteriet fra kørestolen.

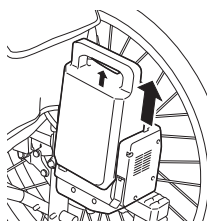


⚠ ADVARSEL

- Hvis du håndterer et af disse batterier eller deres opladere forkert, kan det medføre varmeudvikling, sprængning, elektrisk stød eller personskade. Sørg for at overholde nedenstående punkter.

Kortslut ikke batteriets terminaler med ledninger eller andre metaller.

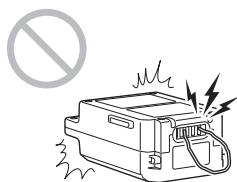


Opbevar ikke batteriet et sted, hvor børn eller kæledyr kan komme i nærheden af det.

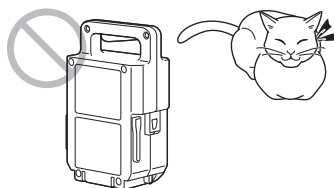


Tab ikke batteriet og udsæt det ikke for stød.




Brug ikke et ødelagt eller beskadiget batteri.

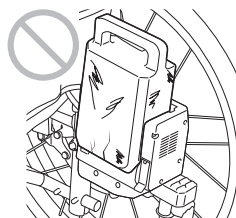

Oplad ikke batteriet et sted, hvor børn eller kæledyr kan komme i nærheden af det.

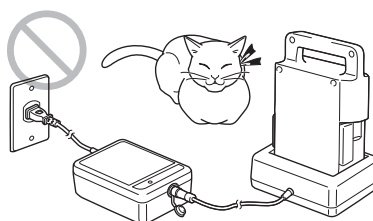


Brug opladeren på en plan overflade. Efter brug må du ikke lade den være tilsluttet strømudtaget.

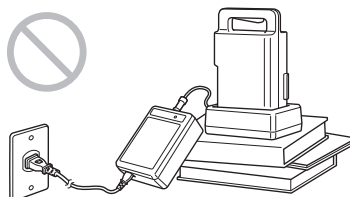


⚠ ADVARSEL

- Hvis du håndterer et af disse batterier eller deres opladere forkert, kan det medføre varmeudvikling, sprængning, elektrisk stød eller personskade. Sørg for at overholde nedenstående punkter.


Vikl ikke strømkablet eller opladningskablet rundt om opladeren under opladning.

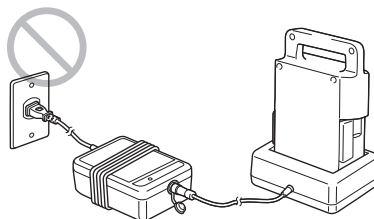


Brug ikke opladeren udendørs eller i nærheden af brandfarlige genstande.

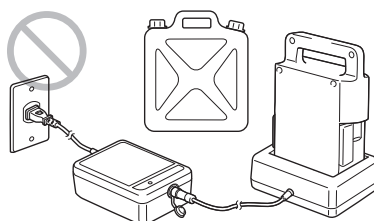


Brug ikke et beskadiget kabel eller et kabel med beskadiget strømstik eller beskadiget stik.

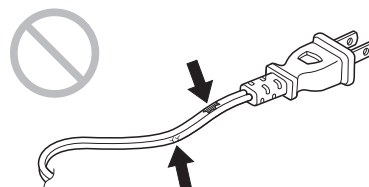


Rør ikke ved opladeren og strømkablet med en våd hånd. Brug ikke opladeren, nedsænk den ikke i vand, sprøjt ikke vand på den, og lad den ikke stå ude i regnvejr.

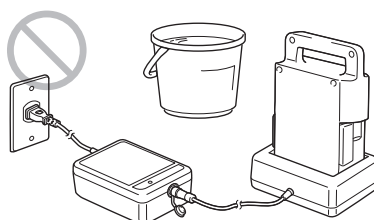

Adskil eller modificer ikke batteriopladeren.

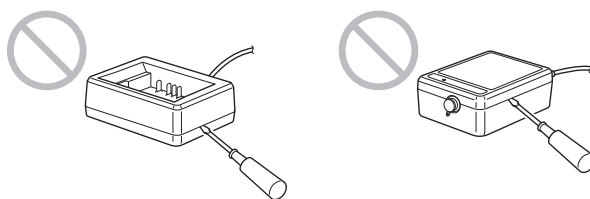


Tab ikke opladeren og udsæt den ikke for stød.

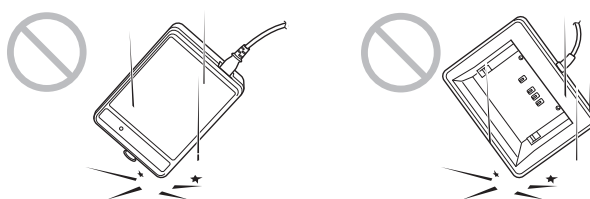


⚠ ADVARSEL

- Hvis du håndterer et af disse batterier eller deres opladere forkert, kan det medføre varmeudvikling, sprængning, elektrisk stød eller personskade. Sørg for at overholde nedenstående punkter.

Placer ikke noget omkring opladeren under opladning.
Sørg for plads til varmestråling.

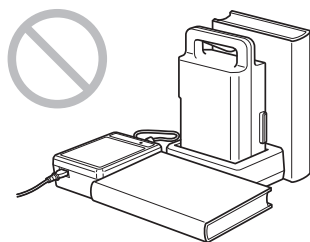

Indsæt ikke ledninger eller andre genstande i batteristikket.

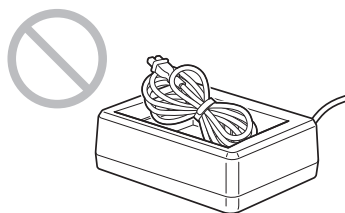

Hvis batteriet eller opladeren er deformeret eller har en usædvanlig lugt, eller hvis du bemærker nogen anden unormalitet, må du ikke bruge batteriet eller opladeren.

Undgå langvarig kontakt med huden.

Det er normalt, at opladeren bliver varm under opladning. Derfor kan langvarig kontakt med huden resultere i forbrændinger ved lav temperatur.

Hvis der bruges en forlængerledning ved opladning, må strømstyrken for forlængerledningen ikke overskrides.

Indsætning/fjernelse af batteriet

ADVARSEL

- **Indsæt ikke batteriet, hvis indersiden af batterisædet på kørestolen er snavset eller våd.**
Dette kan forårsage en kortslutning, hvilket kan resultere i varmeudvikling, brand eller elektrisk stød.

Bemærk

- **Udskift ikke batteriet, mens strømmen er tændt.**
Dette vil beskadige kontakterne eller kørestolen.

Bemærk

- **Fjern regelmæssigt batteriet fra batterisædet og rengør batterisædet og kontakterne. (En gang om ugen)**
Hvis dette ikke gøres, kan det forårsage, at kørestolen stopper under kørsel.

Montering af batteriet


Montering af batteriet varierer afhængigt af typen af batterisæde.

Integreret batterisæde: **Integreret**


Aftageligt batterisæde: **Aftagelig**

Integreret

- 1 Bekræft, at strømmen til kørestolen er slukket.
- 2 Bekræft, at batteriet og batterisædet ikke er våde, og at kontakterne ikke er snavsede.
Hvis de er våde eller snavsede, tør batterisædet eller kontakterne af med en tør klud.

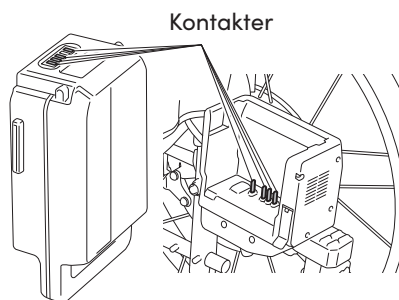



- 3 Indsæt batteriet, indtil det klikker på plads.

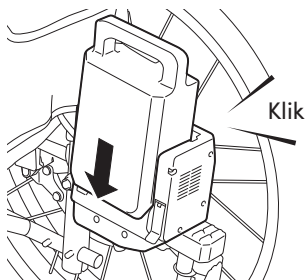

1 Bekræft, at strømmen til kørestolen er slukket.

2 Bekræft, at batteriet og batterisædet ikke er våde, og at kontakterne ikke er snavsede.
Hvis de er våde eller snavsede, tør batteriposen eller kontakterne af med en tør klud.

3 Indsæt batteriet, indtil det klikker på plads.

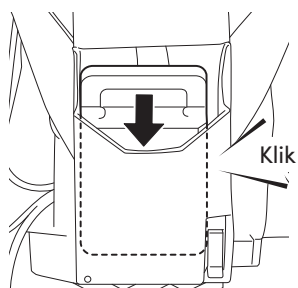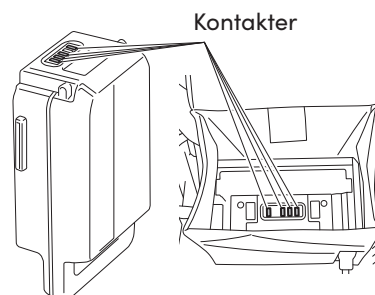

Fjernelse af batteriet


Fjernelse af batteriet varierer afhængigt af typen af batterisæde.

Integreret batterisæde: Integreret

Aftageligt batterisæde: Aftagelig


Integreret

- 1 Bekræft, at strømmen til kørestolen er slukket.
- 2 Afbryd batteriet ved at trække det lige ud, mens du trykker på frigør-knappen. Træk det ikke ud i en vinkel.

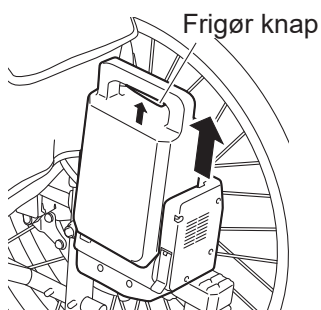

Aftagelig

- 1 Bekræft, at strømmen til kørestolen er slukket.
- 2 Placer din hånd på batterisædet og træk det lige ud, mens du trykker på frigør-knappen. Træk det ikke ud i en vinkel.

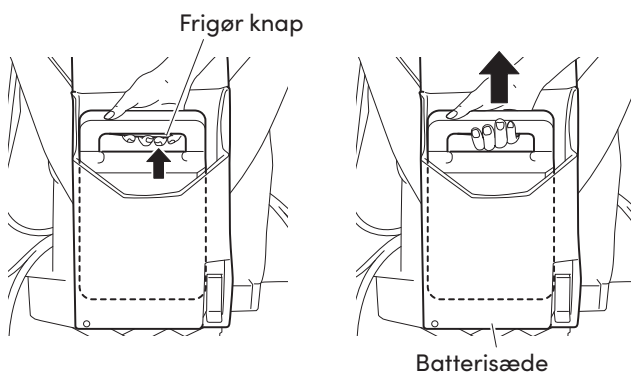

Lithium-ion Batteri [Model: JWB3]

Funktioner

- Udstyret med et Batteri Management Control System (BMC). (Indbygget mikrocomputer) Dette er et system, der bruger en computer til at spore opladning/afladningsstatus, driftsforhold og temperatur.
- Selv ved gentagne overfladiske aflade-/opladningscyklusser er det vanskeligt for memory-effekten at opstå. Derfor er opdater opladning ikke nødvendig, og dens opladninger kan suppleres løbende.
- Dette er et miljøvenligt batteri, der ikke indeholder kviksølv eller cadmium.
- Kompakt men høj kapacitet.
- Ved nedkørsel af en hældning i en kørestol genererer den interne motor elektricitet, og opladning finder sted.


Sådan bruger du batteriet

Montering og afmontering af batteriet på og fra kørestolen

For instruktioner om montering og fjernelse af lithium-ion batteriet til og fra kørestolen, se ► **S. 99** "Montering af batteri", ► **S. 101** "Fjernelse af batteri".

Kontrollér batteriets resterende kapacitet

Tryk på indikator kontakten for at vise batteriets resterende kapacitet.

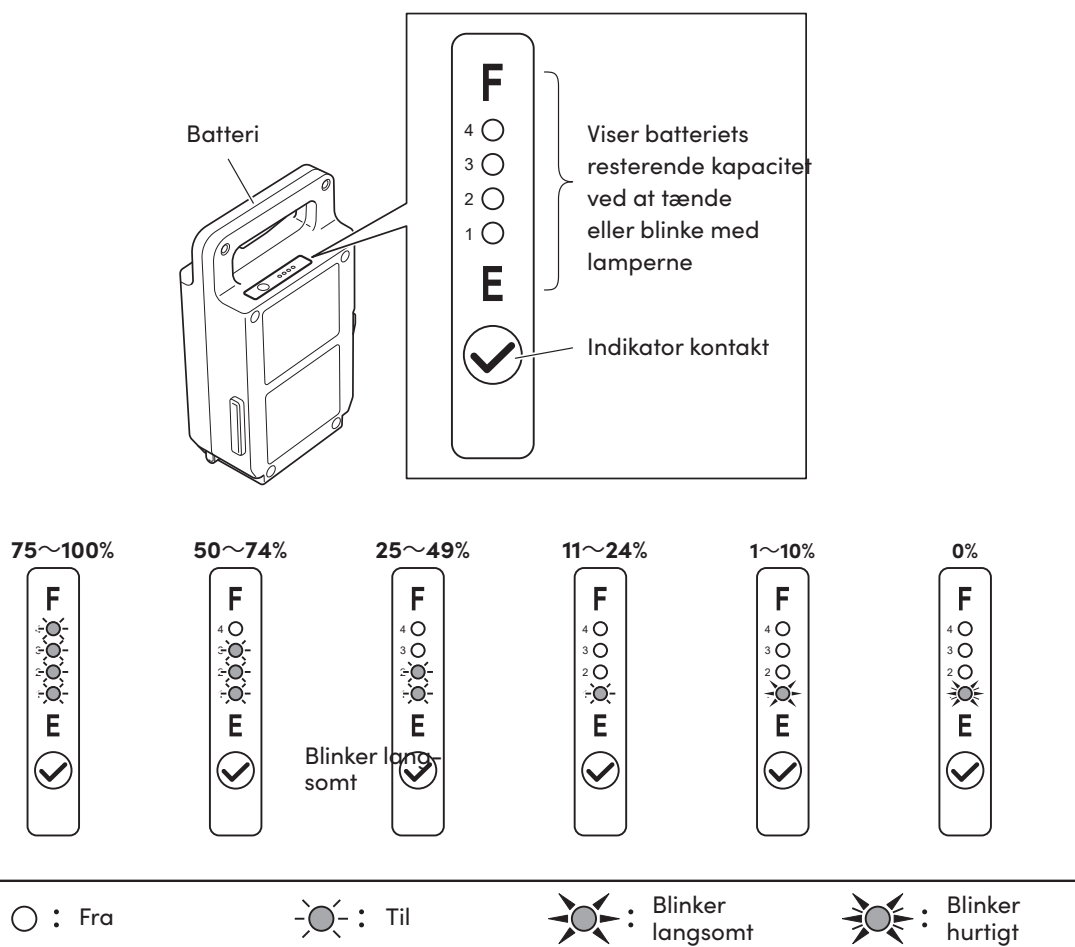


Opbevaring af batteriet

Opbevar batteriet et køligt, tørt sted. (Et sted med en temperatur mellem 10 og 25°C er egnet til opbevaring.)

Hvis du ikke planlægger at bruge batteriet i en længere periode (30 dage eller mere), oplad det indtil to af kapacitetsindikatorlamperne lyser, og opbevar det derefter.

For at opbevare batteriet uden at bruge det i over tre måneder, kontrollér hver tredje måned for at sikre, at to af kapacitetsindikatorlamperne lyser.

Hvis kun én kapacitetsindikatorlampe lyser, oplad batteriet indtil de tre lamper tænder.

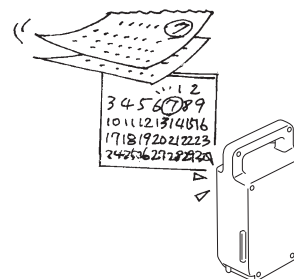

Egenskaber og håndtering

Temperaturmiljø

Afhængigt af temperaturmiljøet kan den afstand, der kan køres, blive forkortet.

For at maksimere batteriets ydeevne anbefales det at bruge batteriet under følgende forhold.

Anbefalet temperatur

Ved brug på kørestolen:

Temperaturområde mellem 0 og 35 °C

Ved opbevaring uden for kørestolen:

Temperaturområde mellem 10 og 25 °C

Ved opladning:

Temperaturområde mellem 10 og 25 °C

- Opbevaring af batteriet ved for høje eller lave temperaturer vil fremskynde dets nedbrydning, og kapaciteten vil hurtigt falde.
- Brug af kørestolen ved ekstremt høje eller lave temperaturer vil forårsage, at batteriets forringelse accelererer, og dets kapacitet hurtigt falder. For information om nedbrydning, se "Batteriets forringelsesegenskaber" på næste side.

Tilgængelig temperatur

Ved brug på kørestolen:

Temperaturområde mellem -25 og 50 °C

Ved opbevaring uden for kørestolen:

Temperaturområde mellem -40 og 65 °C

Ved opladning:


Temperaturområde mellem 0 og 40 °C

Hvis temperaturen inde i batteriet er under 0 °C eller over 60 °C og regenerativ strømstyrke registreres, vises en fejl, og kørestolen stopper.

Og afhængigt af omgivelsestemperaturen bliver den mulige rækkevidde forkortet, og batteriets forringelse vil blive accelereret.

For at maksimere batteriets ydeevne, brug batteriet under "Anbefalet temperatur"-forhold.

- Opbevaring af et batteri ved varme eller kolde temperaturer vil forårsage, at batteriet hurtigt forringes, og dets kapacitet vil hurtigt falde.
- Hvis du fortsætter med at bruge din kørestol ved meget lave temperaturer, vil batteriet forringes hurtigere, og dets kapacitet vil hurtigt falde. For information om batteriforringelse, se ► s. 105 "Batteriforringelse".

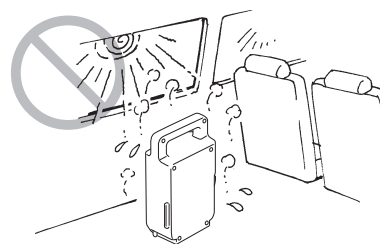

TIP



Når den interne temperatur i lithium-ion-batteriet bliver for høj eller for lav, mens kørestolen er i drift, vil LCD-indikationen på styreenheden ændre sig til en advarsel, og summeren vil lyde. Afhængigt af forholdene kan kørestolen stoppe under drift. Undgå at bruge kørestolen med batteriet under følgende forhold.

- Batterier, der har været opbevaret i direkte sollys eller i en bil osv., og hvor den interne temperatur er steget
- Et batteri med forhøjet intern temperatur umiddelbart efter opladning blev stoppet på grund af overophedning
- Et batteri opbevaret et sted, hvor temperaturen falder under frysepunktet, og batteriets interne temperatur er faldet.

● Batteritemperatur advarsel

Når den interne temperatur i batteriet falder under 2°C eller overstiger 58°C, vises "N6" på LCD-skærmen.


Når den interne temperatur i batteriet falder under 0°C eller overstiger 60°C, vises "CA", og kørestolens hastighed begrænses til 1 km/t. Flyt til et sted med en temperatur på ca. 10 til 25°C så hurtigt som muligt.

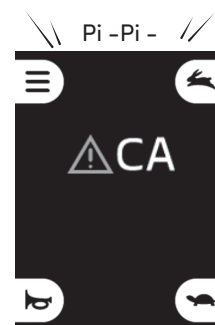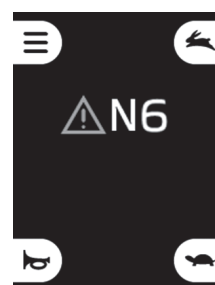

● Stop af kørestolen

Hvis batteriet oplades under nedkørsel, mens displayet viser "CA", kan kørestolen stoppe for at beskytte batteriet.

I sådanne tilfælde vil kørestolen stoppe med en biplyd "Pi -", og "EC81" vil blive vist på LCD-skærmen.

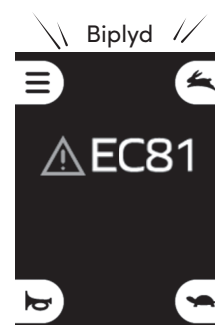

● Batteriforringelse

Batterier er forbrugsvarer. Et batteri forringes gradvist, og dets kapacitet falder over tid og ved brug. Omfanget af, hvor meget kapaciteten forringes, varierer afhængigt af brugsforholdene. Selv hvis batteriet ikke bruges og opbevares over en længere periode, vil det forringes, og dets kapacitet vil falde. Ved brug af flere batterier, skift mellem batterierne.


● Maksimal levetid for lithium-ion-batteriet

Den maksimale levetid for lithium-ion-batteriet (JWB3) er 8 år fra den første opladning, når den samlede opladningskapacitet når 7.200 Ah, eller når batteriforringelsesniveauet (*) falder til 25% eller derunder.

* Batteriforringelsesniveauet udtrykkes som et forhold mellem kapaciteten sammenlignet med et nyt batteri.

• Advarsel om batterilevetid

Kapacitetsindikatorlampen begynder at advare dig tre måneder før batteriet ikke længere kan oplades på grund af slutningen af dets levetid, eller når den samlede opladningskapacitet når 6.900 Ah, eller når batteriforringelsesniveauet falder til 50%. Når opladningen starter, tænder indikatorlamperne, og derefter vises kapaciteten som vist på figuren til højre. På dette tidspunkt vises "N1" på LCD-skærmen.

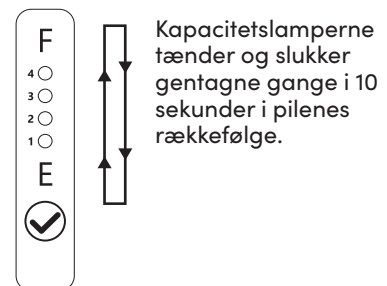

• Når batteriet når slutningen af dets levetid

Når batteriet når slutningen af dets levetid, vil lampen på opladeren ikke tænde, når du forsøger at oplade batteriet. Desuden vil batteriets kapacitetsindikatorlamper ikke længere tænde, og batteriet kan ikke oplades. På dette tidspunkt vises "N2" på LCD-skærmen.



TIP**• Hvis du glemmer startdatoen for lithium-ion-batteriet**

Kontrollér -nummeret på bunden af batteriet.

**246K**

Fremstillet den 19. juni 2024

Antal	År
24	2024
25	2025
26	2026
27	2027
28	2028
29	2029
30	2030
31	2031
...	...

Antal	Måned
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
X	10
Y	11
Z	12

Antal	Dato	Antal	Dato
1	1	H	17
2	2	J	18
3	3	K	19
4	4	L	20
5	5	M	21
6	6	N	22
7	7	O	23
8	8	P	24
9	9	Q	25
A	10	R	26
B	11	S	27
C	12	T	28
D	13	U	29
E	14	V	30
F	15	W	31
G	16		

- Batteriets startdato er den dato, hvor brugeren opladede det for første gang efter, at det blev sendt fra fabrikken.

(Dette svarer ikke til fremstillingsdatoen ovenfor.)

- Hvis den samlede opladningskapacitet når 7200 Ah, eller hvis batteriets forringelsesniveau falder til 25% eller derunder, vil batteriet ikke kunne bruges, selvom det ikke har opnået 8 års levetid.

TIP

Batteriet er et genanvendeligt batteri, der indeholder værdifulde vedvarende ressourcer.

Genbrug venligst dine brugte batterier.

Indsaml og genbrug de brugte batterier hos din forhandler.

Sådan oplader du lithium-ion-batteriet (JWB3)

Der er to måder at oplade batteriet på; ved at fjerne det fra kørestolen (bordopladning) eller mens det stadig er monteret på kørestolen (opladning i køretøjet).

• Opladningstid



Opladningstid: 5 timer (ved opladning af batteriet fra tom tilstand)

● Opladning af batteriet uden for enheden (bordopladning)



- 1 Fjern stikkontaktdækslet fra opladeren og tilslut stikket fra opladningsholderen til opladeren.

TIP

Indsæt forbindelsesstikket i opladeren, og drej stikket som vist på figuren, indtil du hører et "klik" for at låse det.

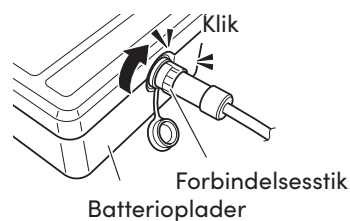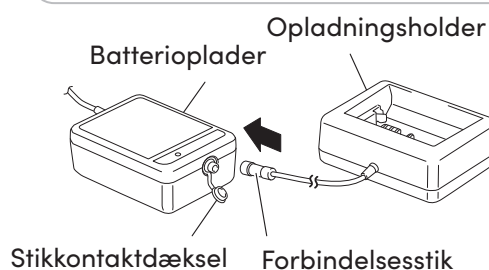


- 2 Indsæt strømkontakten i opladeren og tilslut strømstikket til en almindelig stikkontakt.

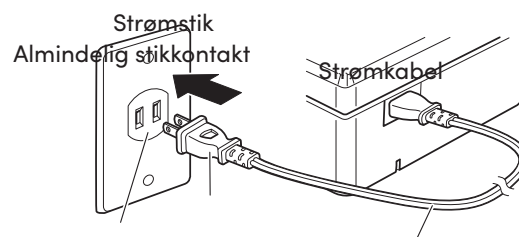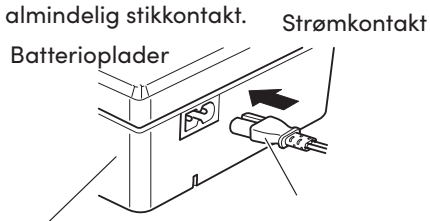


- 3 Indsæt batteriet i opladeren som vist på figuren.

TIP


(1) på figuren til højre, indsæt batteriet i den vinklede position, og juster tappen med guiden, mens du løfter det i retningen af (2). Forbind derefter batteriet sikkert.

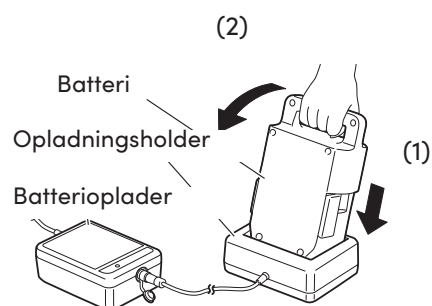

- 4 Opladningslampen på opladeren bliver grøn, og opladningen starter automatisk.

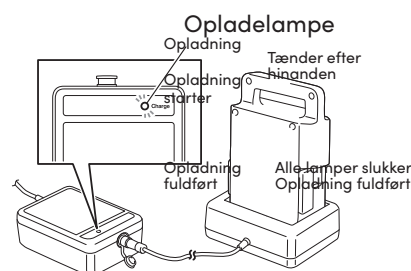


- 5 Under opladning kan du kontrollere opladningsstatus med kapacitetsindikatorlamperne på batteriet. Kapacitetsindikatorlamperne slukker, når opladningen er afsluttet. Forudsat at opladningen startede med batteriet i tom tilstand, er den typiske opladningstid 5 timer.

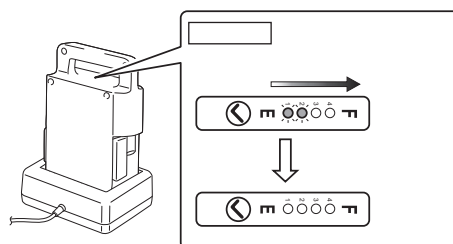


- 6 Fjern batteriet fra opladeren som vist på figuren.

TIP

Som vist i (1) på figuren til højre, vip batteriet og løft det derefter diagonalt i den retning, der er angivet i (2). Hvis du trækker batteriet lige op uden at vippe det, vil opladningsholderen og batteriet ikke adskilles, men komme op sammen.

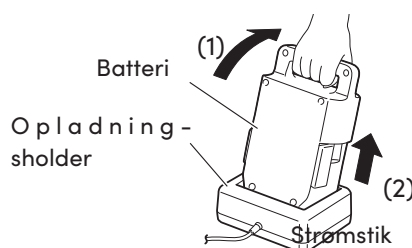

- 7 Fjern strømstikket, derefter strømkontakten, opladningsstikket, og luk derefter opladerens stikkontaktdæksel sikkert.

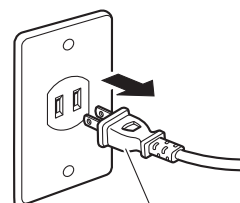

Bemærk

- Træk ikke i ledningen for at tage stikket ud. Dette kan forårsage, at ledningerne knækker.

Integreret

Bemærk

- Brug ikke overdreven kraft for at tage strømkontakten eller opladningsstikket ud. Dette kan forårsage, at kabelstikkene går i stykker.


❶ Opladning af batteriet monteret på kørestolen: opladningskabel til køretøj (sælges separat)

Montering af batteriet varierer afhængigt af typen af batterisæde.


Integreret batterisæde: Integreret

Aftageligt batterisæde: Aftagelig

- 1 Forbered kørestolen til opladning.
Fjern alle tasker og bagage fra ryglænet på kørestolen samt andre genstande, der potentielt kan forårsage afbrydelse af opladerkablet. Parker kørestolen indendørs på et plant gulv, og aktiver parkeringsbremsene.

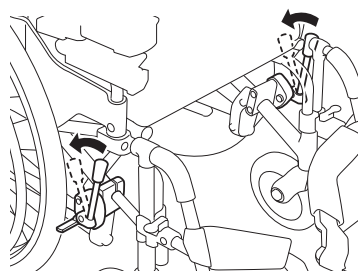

- 2 Sluk for strømmen til kørestolen.
For at undgå ulykker vil strømmen ikke blive tændt, selvom du trykker på knappen under opladning i køretøjet.

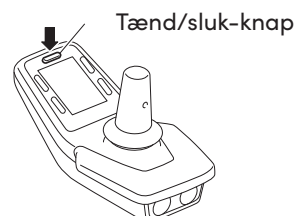


- 3 Fjern stikkontaktdækslet fra opladeren og tilslut stikket fra opladningsholderen til køretøj (sælges separat) til opladeren.

TIP



Indsæt forbindelsesstikket i opladeren, og drej stikket som vist på figuren, indtil du hører et klik.

Batterioplader


Strømkontakt

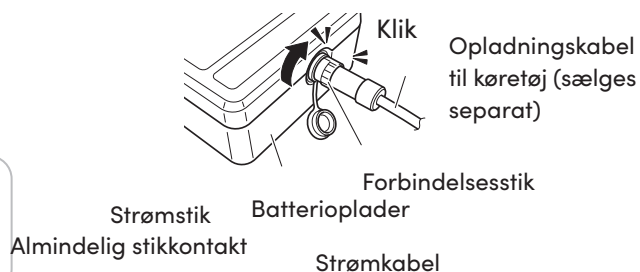


- 4 Indsæt strømkontakten i opladeren og tilslut strømstikket til en almindelig stikkontakt.

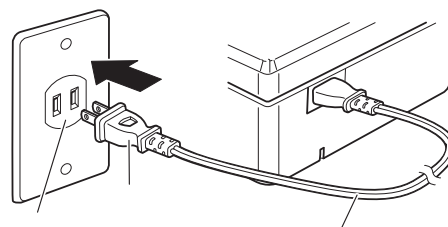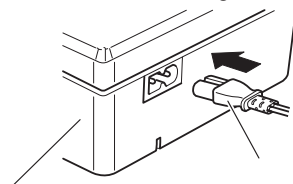

- 5 Åbn opladningsdækslet til køretøj på batterisædet og tilslut opladningsstikket fra opladerkablet.

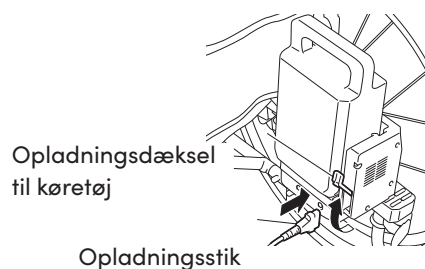


- 6 Opladningslampen på opladeren bliver grøn, og opladningen starter automatisk.

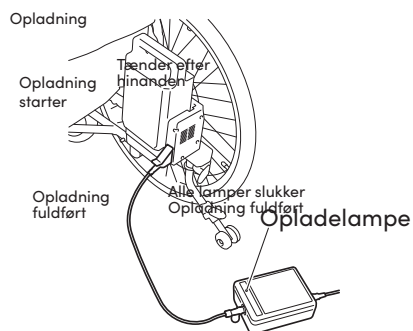



Strømskik

- 7 Under opladning kan du kontrollere opladningstilstanden med kapacitetsindikatorlamperne på batteriet. Kapacitetsindikatorlamperne slukker, når opladningen er afsluttet. Forudsat at opladningen startede med batteriet i tom tilstand, er den typiske opladningstid 5 timer.

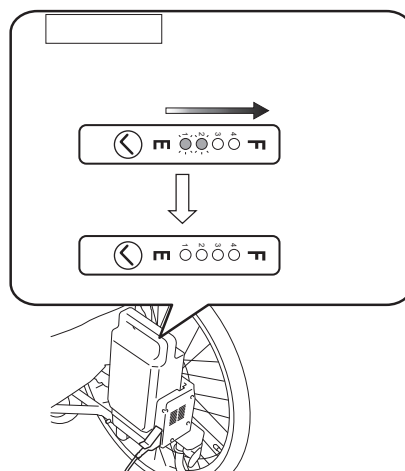


Når opladningen er afsluttet, tag strømstikket ud, derefter strømkontakten, opladningsstikket og luk derefter batteriets opladningsdæksel til køretøj på batterisædet sikkert.

Opladningsdæksel til køretøj
Opladningsstik

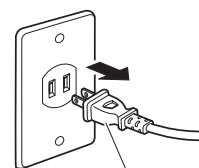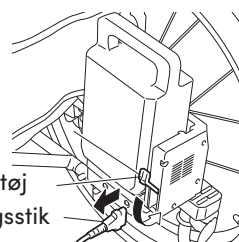

1


Forbered kørestolen til opladning. Fjern alle tasker og bagage fra ryglænet på kørestolen samt andre genstande, der potentielt kan forårsage afbrydelse af opladerkablet. Parkér kørestolen indendørs på et plant gulv, og aktiver parkeringsbremsene.

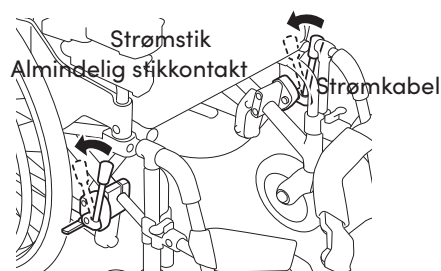

2

Sluk for strømmen til kørestolen. For at undgå ulykker vil strømmen ikke blive tændt, selvom du trykker på knappen under opladning i køretøjet.

Tænd/sluk-knap

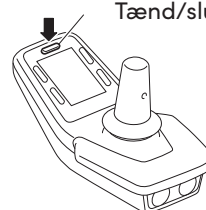


3

Fjern stikkontaktdækslet fra opladeren og tilslut stikket fra opladningsholderen til køretøj (sælges separat) til opladeren.



TIP

Indsæt forbindelsesstikket i opladeren, og drej stikket som vist på figuren, indtil du hører et klik.

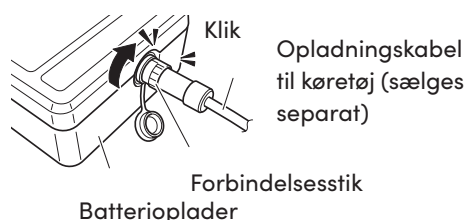


4


Indsæt strømkontakten i opladeren og tilslut strømstikket til en almindelig stikkontakt.

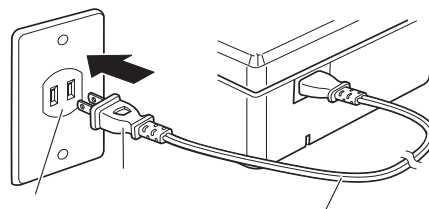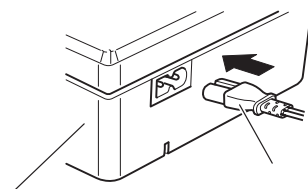

- 5 Åbn batteritasken. Åbn opladningsdækslet til køretøj på batterisædet og tilslut stikket fra opladerkablet.

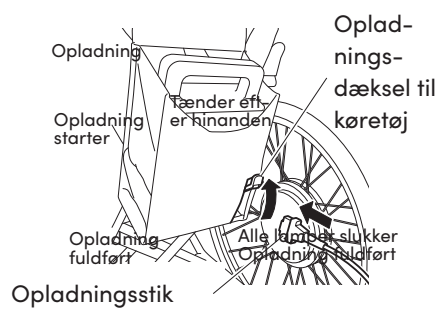


- 6 Opladningslampen på opladeren bliver grøn, og opladningen starter automatisk.

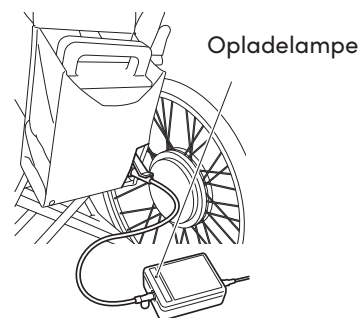

Strømsstik


7

Under opladning kan du kontrollere opladningstilstanden med kapacitetsindikatorlamperne på batteriet. Kapacitetsindikatorlamperne slukker, når opladningen er afsluttet. Forudsat at opladningen startede med batteriet i tom tilstand, er den typiske opladningstid 5 timer.

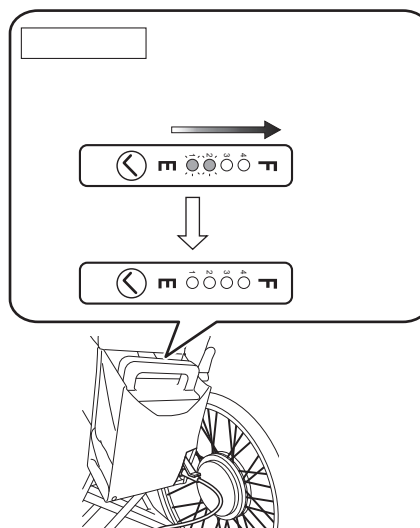

8

Når opladningen er afsluttet, tag strømstikket ud, derefter strømkontakten, opladningsstikket og luk derefter batteriets opladningsdæksel til køretøj på batterisædet sikkert.

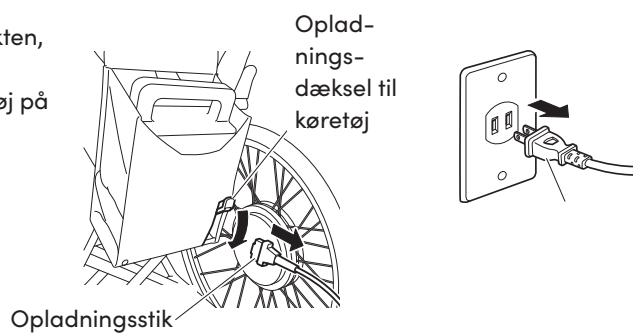

6

Bemærk

- Træk ikke i ledningen for at tage stikket ud. Dette kan forårsage, at ledningerne knækker.
- Brug ikke overdreven kraft for at tage strømkontakten eller opladningsstikket ud. Dette kan forårsage, at kabelstikkene går i stykker.

TIP

Når du ikke kan oplade batteriet,

- Se ► s.117 "Hvad du skal gøre".

● Eget temperatur under opladning

Oplad batteriet i et miljø med en temperatur på 10 til 25°C.


- For at beskytte batteriet, hvis den interne temperatur i batteriet er 0°C eller derunder eller 45°C eller derover, starter opladning ikke. I stedet går den i standbytilstand. I denne periode blinker opladelampen grønt.

Mens den er i standbytilstand, når batteriet når en passende temperatur, vil opladelampen skifte fra blinkende grøn til konstant grøn, og opladning starter automatisk. (Længden af standbytiden varierer afhængigt af forholdene.)

- Batteriets temperatur stiger under opladning. Dog, hvis batteritemperaturen stiger over 70°C, vil strømmen til opladeren blive slukket for at beskytte batteriet.

I sådanne tilfælde, da opladningen ikke er fuldført, er det nødvendigt at oplade igen, efter at batteritemperaturen er faldet.

Opladelampe

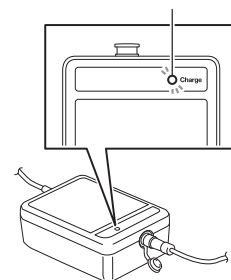


Oplader (JWC4) indikatorlamper

Opladeren har en opladelampe

Opladelampen angiver batteriets og opladningens tilstande afhængigt af lampens farve, og om den er tændt eller blinker.

Lampeindikatorerne forklares i følgende tabel.







Opladelampe

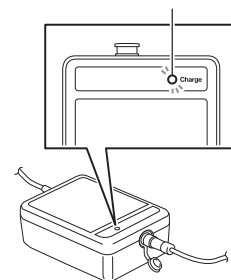

TIP

- Standbytilstand kan blive aktiveret, og opladningsindikatorlampen kan blinke grønt (én gang pr. sekund), hvis omgivelsestemperaturen ændrer sig, mens opladeren oplader. I standbytilstand starter opladning ikke. Når temperaturen bliver egnet til opladning, vil opladningsindikatorlampen stoppe med at blinke og forblive grøn, og opladningsdriften vil automatisk genstarte.
- Hvis standbybetingelser fortsætter i lang tid, vil opladningsindikatorlampen begynde at blinke gult (én gang pr. sekund), og opladningsdriften vil blive afsluttet. Hvis dette sker, skal du tage opladningsstikket og strømstikket ud. Tilslut opladeren igen som anvist i ► s. 106 "Sådan oplades lithium-ion batteriet (JWB3)" og oplad batteriet igen.

Ved opladning af lithium-ion batteriet (JWB3)

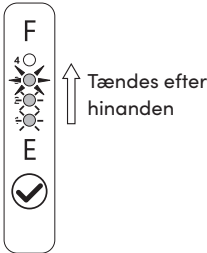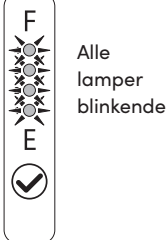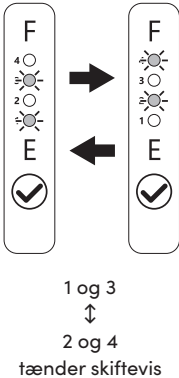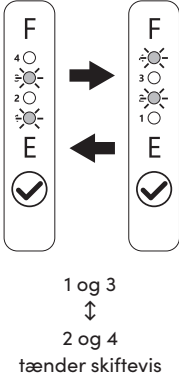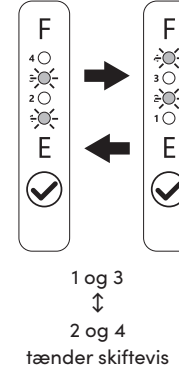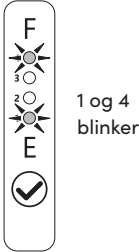Oplader lampeindikator	Batteri kapacitetsindikator lamper	Beskrivelse
■ Opladelampen lyser grønt  Opladningslampe (grøn)		Indikerer normal opladning. Opladelampen slukker, når opladningen er afsluttet.
■ Opladelampen blinker grønt (én gang pr. sekund)  Opladningslampe (grøn)		Indikerer oplade standby. - Når temperaturen på batteriet ikke er inden for det opladelige område (0 til 45°C), går opladeren i standbytilstand, og opladelampen begynder at blinke grønt. - Så snart batteritemperaturen falder inden for det opladelige område under standby, starter opladning automatisk, og opladelampen (grøn) skifter fra blinkende til tændt tilstand.
■ Opladelampen blinker gult (én gang pr. sekund)  Opladningslampe (gul)	 1 og 3 ↕ 2 og 4 tænder skiftevis	Indikerer timeout af oplade standby. - Opladeren har været i standbytilstand i lang tid og er holdt op med at oplade batteriet. Vent på, at batteritemperaturen falder, og flyt derefter batteriet til et miljø egnet til opladning. - Hvis opladnings standbytilstanden overstiger 12 timer, vil den time out og stoppe opladning.
■ Tændt rød  Oplade lampe (rød)	 1 og 3 ↕ 2 og 4 tænder skiftevis	Indikerer at der er blevet registreret et problem i opladeren. Afbryd strømstikket for at stoppe opladning. Kontrollér at der ikke er nogen unormale forhold med batteriet, opladeren eller ledningsforbindelserne, og oplad derefter igen. Hvis opladelampen bliver rød igen, kan der være opstået en udstyrsfejl. Afbryd strømstikket for at stoppe opladning og kontakt butikken eller forhandleren.
■ Blinker rødt  Oplade lampe (rød)	 1 og 3 ↕ 2 og 4 tænder skiftevis	Indikerer en kommunikationsfejl mellem opladeren og batteriet. Kontrollér opladerens og batteriets terminaler, rengør dem med en tør klud eller lignende, og oplad derefter igen. Hvis opladelampen blinker rødt igen, kan der være opstået en udstyrsfejl. Afbryd strømstikket for at stoppe opladning og kontakt butikken eller forhandleren.
■ Lyser gult  Opladningslampe (gul)	 1 og 4 blinker	Indikerer at der er blevet registreret et problem i batteriet. Afbryd strømstikket for at stoppe opladning. Kontrollér at der ikke er nogen unormale forhold med batteriet, opladeren eller ledningsforbindelserne, og oplad derefter igen. Hvis opladelampen bliver gul igen, kan der være opstået en udstyrsfejl. Afbryd strømstikket for at stoppe opladning og kontakt butikken eller forhandleren.

7 Transport, vedligeholdelse og opbevaring

Ved transport af kørestolen i en bil eller når den ikke bruges i længere tid, skal du sørge for at følge instruktionerne og håndtere den korrekt.

For håndtering og langtidsopbevaring af fjernede batterier, se ► s.83 "Håndtering af batterier og opladere"



ADVARSEL

- **Ved løft af en kørestol, må du aldrig løfte den i batteri, styreenhed eller kabler.**
Ellers kan en af disse enheder falde af og forårsage skade eller beskadigelse af udstyret.

Bemærk

- **Tab ikke kørestolen og udsæt den ikke for stød.**
Dette kan forårsage skade på enheden, styreenheden eller batteriet.

Indlæsning af kørestol i køretøj

Dette kapitel beskriver trinene til at indlæse kørestolen udstyret med dette produkt i en bil. Læs venligst denne brugervejledning grundigt sammen med brugsanvisningen til den elektriske kørestol udstyret med dette produkt. Hvis du bruger et kørestolsvenligt køretøj, kontrollér køretøjets brugervejledning.

Bemærk

- Under transport må du ikke placere batteriet eller kørestolen et sted, hvor det kan blive varmt, eller i direkte sollys.


Dette kan føre til funktionsfejl eller få forringelsen af batteriet til at udvikle sig hurtigt.

Indlæsning af kørestol

- 1 Parker kørestolen på et fladt sted og sluk for strømmen.
- 2 Kontrollér, at begge parkeringsbremsen er aktiveret, og at koblingshåndtagene er i el-kørsel positionen.
- 3 Fjern batteriet.
- 4 Løft kørestolen oprejst ved at holde på stellet med begge hænder.
- 5 Sikr kørestolen for at forhindre, at den eller omkringliggende genstande bevæger sig, ved at spænde den fast med et bælte eller placere et stødabsorberende materiale under eller omkring kørestolen.

TIP

Hvis du er nødt til at placere kørestolen på siden, skal du placere den, så styreenheden er øverst, og sikre kørestolen, mens du sikrer, at styreenheden ikke rammer nogen omkringliggende genstand.

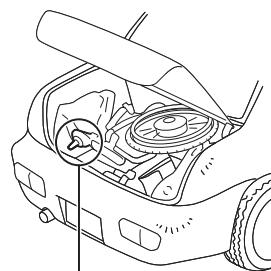

Styreenhed er på oversiden

Aflæsning af kørestol

- 1 | Hold på kørestolens stel med begge hænder og sænk den ned på et fladt sted.
- 2 | Sørg for, at anti-tip stangen er låst i udadgående position. (sælges separat, hvis installeret)

Håndtering i fly

Ved rejse med fly kan håndteringen af den elektriske kørestol variere afhængigt af flyselskabet. Informer flyselskabet på forhånd om, at du vil bruge en elektrisk kørestol, og følg deres instruktioner.

Der kan især være restriktioner for at medbringe batterier ombord eller indchecke dem som bagage. Sørg for at konsultere flyselskabet på forhånd.

Giv flyselskabet følgende specifikationer på din elektriske kørestol og batteri, hvis nødvendigt:

● Lithium-ion batteri (vist som "Li-ion" på mærkaten)

Model: JWB3

Spænding: 36 V

Kapacitet: 6,45 Ah (232,2 Wh)

Type: Tørbatteri med indbygget mikrocomputer

TIP

Bemærk, at hvis du bruger dette produkt i udlandet, selv ved midlertidig rejse, vil denne periode ikke være dækket af service support.

Vedligeholdelse

Bemærk

- **Vask ikke ved at spule den direkte med vand eller bruge damp.**
De elektroniske enheder kan blive beskadiget, hvilket kan føre til funktionsfejl.
- **Rengør ikke med opløsningsmidler såsom benzin eller fortynder.**
Dette kan beskadige malingen eller plastdelene.

Vedligeholdelse af den elektriske motorenhed

● **Snavs**

For at tørre almindeligt snavs eller pletter af, brug et hårdt opvredet håndklæde.

● **Kontakt med vand**

Tør al fugt af de våde områder og lad dem tørre.

● **Anvendelse af rengøringsmiddel**

Fortynd et neutralt rengøringsmiddel med vand, læg et håndklæde i det, og vrid det grundigt op før aftørring.

● **Desinfektionsmiddel**

Ved desinfektion af produktet, brug et alkoholbaseret desinfektionsmiddel, der er egnet til din anvendelse. Ved brug, følg desinfektionsmiddelproducentens anvisninger for eksponeringstid, koncentration osv. Herefter skal du væde et håndklæde med desinfektionsmiddel og tørre produktet af med håndklædet. Efter desinfektion skal du væde håndklædet i rent vand, vride det hårdt op og aftørre eventuel resterende alkohol med håndklædet.

Bemærk

- **Fjern regelmæssigt batteriet fra batterisædet og rengør batterisædet og kontakterne. (En gang om ugen)**
Hvis dette ikke gøres, kan det forårsage, at kørestolen stopper under kørsel.



ADVARSEL

- **Læs desinfektionsmidlets brugervejledning grundigt, før du bruger desinfektionsmidlet.**

Almindelige reparationer

Hvis andre dele er beskadiget eller bortkommet, skal du straks kontakte forhandleren. Lad forhandleren udskifte delene eller reparere kørestolen.

Ved almindelig vedligeholdelse, reparation eller service skal du sikre at kontakte forhandleren. Brugeren bør ikke reparere eller servicere kørestolen eller fjerne, pakke og sende dele for at anmode om reparation. Hvis kørestolen ikke er fuldstændig repareret eller samlet, kan brugeren eller personer omkring brugeren komme til skade.

Forhandleren anvender servicevejledning, reservedelskatalog og anden dokumentation til at udføre reparation og service. Disse materialer sælges ikke til offentligheden.

Ved anmodning om reparation må kørestolen ikke sendes direkte. Kontakt først forhandleren.

Der udleveres desuden ikke en erstatningskørestol under reparation eller inspektion.

De skal selv betale for reparationer, der ikke er dækket af garantien.

Levetid & reservedele

Den forventede levetid er 6 år. Dog afhænger levetiden af brugsforhold, miljø og hyppighed. Levetiden betyder den periode, hvor produktets ydeevne skal opretholdes ved udførelse af vedligeholdelse og inspektion af forhandleren. Dele, der er nødvendige for reparationer, vil være tilgængelige i 8 år efter produktionen er ophørt.

Genbrug

Når E-Drive NXT skal overdrages til en ny bruger, skal al teknisk dokumentation også overdrages. Produktet skal rengøres, desinficeres og serviceres professionelt.

Opbevaring af kørestol

ADVARSEL

- **Fjern altid batteriet fra kørestolen ved opbevaring.**

Strømmen til kørestolen kan tænde, hvilket kan få kørestolen til at begynde at bevæge sig uventet og forårsage skade på dig eller andre omkring dig.

Fugt og andre faktorer kan forårsage dårlig isolering, hvilket kan føre til varmeudvikling og brand.

Bemærk

- **Fjern altid batteriet fra kørestolen ved opbevaring.**

Dette kan forårsage, at batteriets forringelse fremskyndes hurtigt.

- **Opbevar ikke batteriet vådt eller snavset i længere tid.**

Dette kan føre til fejl.

- **Opbevar ikke på et sted, der kan blive vådt af regn, eller hvor der er høj luftfugtighed.**

Dette kan føre til fejl.

- **Opbevar ikke på et sted, der kan blive varmt, eller i direkte sollys.**



Dette kan føre til funktionsfejl eller få forringelsen af batteriet til at udvikle sig hurtigt.

Opbevaring af kørestol



Hvis du ikke planlægger at bruge dette produkt i en længere periode, kontrollér følgende forhold og opbevar det et tørt sted indendørs.

Læs venligst denne brugervejledning grundigt sammen med instruktionsmanualen for den elektriske kørestol, der er udstyret med dette produkt.

- **Koblingshåndtagene er i motordrevet kørsel positionen**

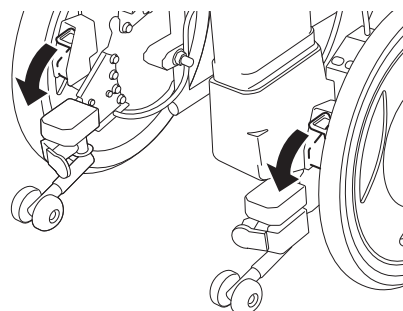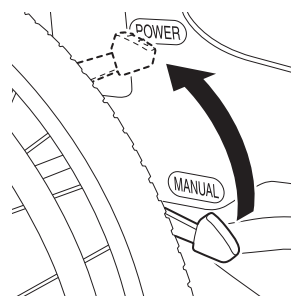

● **Strømmen er slukket**

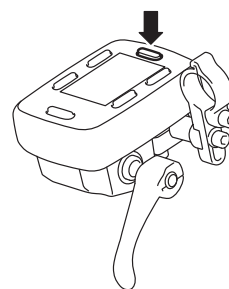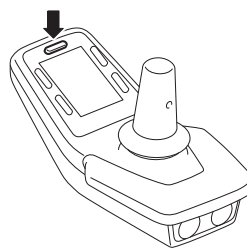

● **Batteriet er fjernet**

For langtidsopbevaring af det fjernede batteri, se følgende og håndter det korrekt.

► **S.92** "Opbevaring af batteriet"

● **Der sidder hverken vand eller snavs fast**

Tør eventuelle vanddråber eller snavs af før opbevaring. ► **S. 120** "Vedligeholdelse"


8 Dimensioner og specifikationer

Dette kapitel beskriver specifikationerne for den elektriske motor enhed.


Dimensioner (i mm)

E-Drive NXT (24 tommer)

Den ydre diameter på dækket og hånddringen varierer afhængigt af dækkets størrelse. Figuren nedenfor viser dimensionerne for 24 tommer modellen.

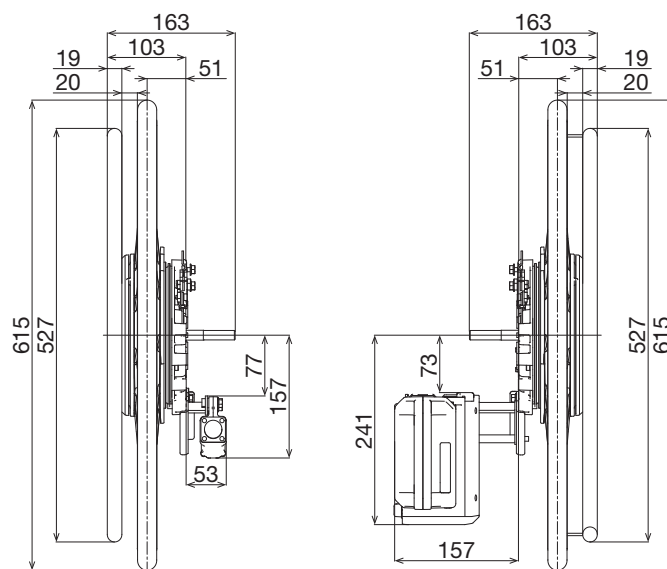

E-Drive NXT (16 tommer)

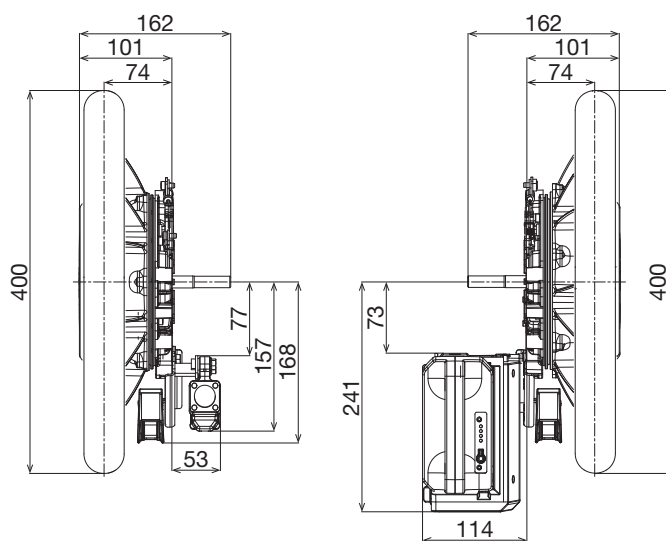

Specifikationer

Model					E-Drive NXT				
Vægt	Total (R+L enhed + JS styreenhed + batteritaske inkl. batteri sæde + batteri)				16.1 kg	16.5kg	16.9 kg		
	Højre enhed				5.8 kg	6.0kg	6.2 kg		
	Venstre enhed				5.8 kg	6.0kg	6.2 kg		
	Joystick styreenhed med lodrette holdere				0.8 kg				
	Hjælper styreenhed med beslag				0.36 kg				
	Li-ion batteri				2.4 kg				
Bagt dæk	Dækstørrelse				16 tommer	22 tommer	24 tommer		
	Dækspecifikationer				47-305 (16 × 1,75)	25-489 (22 × 1)	37-540 (24 × 1 3/8)	25-540 (24x1)	
	Anbefalet lufttryk				Solid inderslange	5-10 bar	4,5 bar	6-10 bar	
Batteri	Li-ion (JWB3)				(36 V 6,45 Ah) × 1 (5 timers hastighed) (232,2 Wh)				
Batterioplader	Nomineret udgangseffekt under opladning				42 V/1,6 A				
Drivmotor					AC servomotor 36 V 150 W × 2				
Driftsystem					Baghjul direkte kør				
Bremsesystem					Motor generativ bremse + Elektromagnetisk bremse				
Styresystem					Joystickstyring				
Styreenhedssystem					Mikroprocessorstyreenhed				
Rækkevidde	med Li-ion batteri (JWB3) *1				20 km	25 km	25 km		
Maksimal hastighed km/t *6	Joystick styreenhed	fremad	1.	6 km/t-8,5 km/t	1,2 km/t-1,7 km/t				
			2.		2,4 km/t-3,4 km/t				
			3.		3,6 km/t-5,1 km/t				
			4.		4,8 km/t-6,8 km/t				
			5.		6,0 km/t-8,5 km/t				
		Bak	1.	3 km/t-4,3 km/t	0,6 km/t-0,9 km/t				
			2.		1,2 km/t-1,7 km/t				
			3.		1,8 km/t-2,6 km/t				
			4.		2,4 km/t-3,4 km/t				
			5.		3,0 km/t-4,3 km/t				
Maksimal hastighed km/t *6	Hjælper-styreenhed	fremad	1.	6 km/t	1,2 km/t-1,7 km/t				
			2.		2,4 km/t-3,4 km/t				
			3.		3,6 km/t-5,1 km/t				
			4.		4,8 km/t-6,8 km/t				
			5.		6,0 km/t-8,5 km/t				
		Bak	1.	3 km/t-4,3 km/t	0,6 km/t-0,9 km/t				
			2.		1,2 km/t-1,7 km/t				
			3.		1,8 km/t-2,6 km/t				
			4.		2,4 km/t-3,4 km/t				
			5.		3,0 km/t-4,3 km/t				
Maksimal brugervægt					160 kg *2 *5				
Maksimal samlet vægt					212 kg *7				
Maksimal sikker hældningsvinkel, nominel hældning					6 grader *3				

Model		E-Drive NXT
Trådløs teknologi	Type	Bluetooth ver. 5.0 (Bluetooth Low Energy)
	Bærerfrekvens	2400 MHz ~ 2483.5 MHz
	Modulation	GFSK
	Udgangseffekt	+4 dBm maks.
	Rækkevidde	Ca. 10 m
	Modelnavn	FWM7BLZ20B
Driftsforhold	miljø	Indendørs og udendørs
	temperatur	-25 til 50 °C *4
	luftfugtighed	Ingen kondens
IEC vandtæt standard		IPX4 (modstandsdygtighed mod stænkende vand)
IEC-støvsbeskyttelsesstandard		IP5X

*1 Målt i henhold til ISO 7176-4 : 2008 (24-tommer hjul, nyt fuldt opladet batteri og omgivelsestemperatur på 18–25°C, vægt 100 kg)

*2 E-Drive NXT-enheden kan modstå en maksimal brugervægt på 160 kg.

Bekræft dog de detaljerede specifikationer, herunder stelstyrke, med kørestolsproducenten.

*3 Dette er værdien, når den er justeret under følgende betingelser.

· Med hjulene og bagdækkene, der rører jorden, og hjælpehjulene for enden af anti-tip stængerne i en højde på 35 til 50 mm fra jorden

· Med en afstand på 245 mm eller mere fra bagrøret til midten af hjælpehjulene for enden af anti-tip stængerne

Den maksimale sikre hældningsvinkel angivet af kørestolsproducenten har forrang, så sørg for at kontrollér med producenten.

*4 Dette er det tilgængelige temperaturområde. Bekræft de anbefalede temperaturer for "1. Egenskaber og håndtering" *5

Værdien er den maksimale brugervægt for E-Drive NXT med Heavy Duty-fælg *6 Den maksimale opnåelige hastighed

afhænger af hjulstørrelsen *7 E-Drive NXT kan modstå en maksimal samlet vægt på 212 kg (E-Drive NXT + Bruger + Kørestol +

Bagage). Bekræft dog de detaljerede specifikationer, herunder stelstyrke, med kørestolsproducenten. Også for at definere

en specifik brugervægt, henvises til "Weight Calculator" på Decons hjemmeside, www.decon.se/en

9 Hvad skal man gøre

Dette kapitel giver information om, hvordan man ændrer funktioner og indstillinger, samt hvad man skal gøre, hvis der opstår problemer.

Hvis du har spørgsmål eller ikke kan løse problemet, kontakt din forhandler.

Ændring af indstillingerne

Den dedikerede "JW Smart Tune" software gør det muligt for kørestolsbrugeren at ændre indstillingerne for dette produkt, så de passer til deres fysiske tilstand og brugsmønster.

For at ændre indstillingerne, søg vejledning fra eksperter såsom en fysioterapeut eller ergoterapeut hos forhandleren.

Køreparametre

Du kan justere indstillinger såsom lethed af acceleration og joystickfølsomhed.

Hastighed og acceleration

For eksempel...

- Når jeg kører fremad, vil jeg accelerere langsomt
- Jeg vil gerne kunne ændre retning lidt hurtigere

Joystickfølsomhed


For eksempel...

- Jeg vil gerne ændre hældningsgraden ved maksimal hastighed.
- Jeg vil gerne undgå følsomhed over for rystelser i hånden

Joystickens inputretning

For eksempel...

- Jeg vil gerne ændre joystickens hældningsretning ved bakning.

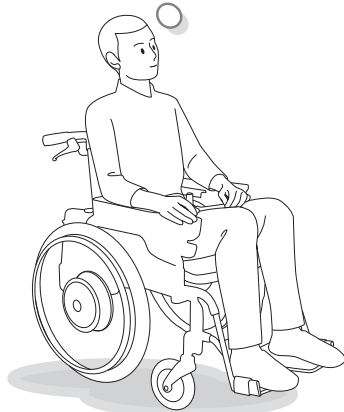

JW Smart Tune
er

løsningen!

Du kan ændre hastighed, acceleration/deceleration, joystick input registreringsrækkevidde, osv.

for at passe til din brug.

Funktionelle parametre

Indstillinger for forskellige funktioner forbundet med drift, såsom LCD-lysstyrke og driftslyd.

■ Automatisk sluk-funktion

- Indstilling 1: Strømmen slukker, hvis joysticket ikke er blevet betjent i 10 minutter. (Standardindstilling)
- Indstilling 2: Strømmen slukker, hvis joysticket ikke er blevet betjent i 60 minutter.
- Indstilling 3: Strømmen slukker ikke automatisk.

■ Elektromagnetisk bremse driftstiming

- Indstilling 1: Den elektromagnetiske bremse aktiveres 10 sekunder efter, at kørestolen stopper. (Standardindstilling)
- Indstilling 2: Den elektromagnetiske bremse aktiveres umiddelbart efter, at kørestolen stopper.

■ Batteriindikator

- Mønster 1
100 → 95 → 90 → (alle i 5% intervaller) → 10 → 5 → 1 → 0
- Mønster 2
100 → 80 → 70 → 60 → 50 → 45 → 40 → (derefter i 5% intervaller) → 10 → 5 → 1 → 0

Brug den dedikerede JW Smart Tune software (tilgængelig til Windows-pc'er og Android enheder), når du indstiller køreparametre.

Når du bruger JW Smart Tune, anvendes Bluetooth-modulet, der er indbygget i motorenheden

(Bluetooth-modulet, der er indbygget i denne enhed, bruges kun ved indstilling af parametre med JW Smart Tune).

Når du indstiller parametre relateret til kørsel med JW Smart Tune, skal du sikre, at de indstillinger, du ønsker at bruge, er foretaget i nærvær af en ekspert.

Da køreegenskaberne vil ændre sig, skal du også øve dig tilstrækkeligt, indtil du er fortrolig med de nye indstillinger.

Bluetooth er designet til kortdistancekommunikation (ca. 10 m) og kræver parring første gang det tilsluttes; parring krypterer kommunikationen for at sikre fortrolighed mod aflytning. Derudover kan du ved at indstille en adgangskode for hvert køretøj i JW Smart Tune,

opretholde fortroligheden af hvert køretøjs indstillinger og kørselshistorik.

Da Bluetooth trådløs kommunikation er designet til korte afstande,

kan kommunikationen være ustabil, hvis du bruger det i nærheden af andre kommunikationsenheder (såsom trådløst LAN) eller enheder, der udsender elektromagnetiske bølger.

Kontrollér venligst, at indstillingerne er gennemført med kommunikationsforbindelsen i normal tilstand,

og kontrollér også, at indstillingerne er som ønsket under den ovenfor beskrevne testkørsel.

Hvis E-Drive NXT bruges uden for købslandet, skal det bruges i overensstemmelse med lovgivningen og reglerne i det pågældende land.

Se JW Smart Tune brugervejledning for detaljer om, hvordan du tilslutter, kontrollerer kommunikationsstatus og foretager indstillinger.

Fejlfinding

Den giver information om symptomer på fejl og deres løsninger.

Hvis du ikke selv kan løse problemerne, skal du kontakte din forhandler og anmode om reparation.

Fejlkoder og LCD-indikationsliste

LCD-indikation	Summer	Viste tilstand	Problem	Hvad skal du gøre / Forklaring
		Strømkontakten er tændt, og koblingshåndtagene er i manuel kørsel position.		Sæt koblingshåndtagene i motordrevet kørsel position. Hvis problemet ikke er løst, kan der være opstået en fejl. Kontakt din forhandler.
	Bip (Pi Pi) (4 gange)	Når koblingen frakobles under kørsel i motordrevet kørsel positionen.	Kørestolen bevæger sig lidt og stopper derefter.	Sæt koblingshåndtagene i motordrevet position. Hvis problemet ikke er løst, kan der være opstået en fejl. Kontakt din forhandler.
 	Biplyd (Pi -)	Strømmen tændes imens du betjener joysticket, en hvilken som helst knap bortset fra strøm knappen eller gashåndtaget.	Kørestolen fungerer ikke.	Sluk for strømmen, og tænd den derefter igen uden at røre ved joysticket, en hvilken som helst knap bortset fra strøm knappen eller gashåndtaget. Hvis problemet ikke er løst, kan der være opstået en fejl. Kontakt din forhandler.
 	Bip (Pi Pi-) (gentagne gange)	Anti-tip stangen er foldet.	Kørestolen kan køres som den er.	Træk anti-tip stangen ud. Advarselsvisningen vil blive fjernet, når begge anti-tip stænger er trukket ud og låst.
	Bip (Pi - Pi - Pi -) (gentagne gange indtil det forsvinder)	Overdreven belastning påføres motoren.	Kørestolen kan køres som den er.	Reducer belastningen ved at undgå opkørsel og transport af tunge belastninger. Advarselsvisningen vil blive fjernet, når belastningen er reduceret.

LCD-indikation		Viste tilstand	Problem	Hvad skal du gøre / Forklaring
	Bip (Pi Pi Pi) (gentagne gange)	Belastningen påføres motoren, hvilket får den interne temperatur til at stige.	Motorens output er begrænset.	Reducer belastningen ved at undgå opkørsel og transport af tunge belastninger. Advarselsvisningen vil blive fjernet, når du slukker for strømmen, venter på at motoren køler af, og derefter tænder for strømmen igen.
	Bip (Pi Pi Pi) (gentagne gange)	Batteriet bliver for koldt eller for varmt.	Motorens output er begrænset.	Brug kørestolen i et miljø med en passende omgivende temperatur. ► S.103
	Bip (Pi -Pi -...) (gentagne gange)	Belastning påføres motoren.	Kørestolen kan køres som den er.	Reducer belastningen ved at undgå opkørsel og transport af tunge belastninger. Advarselsvisningen vil blive fjernet, når belastningen er reduceret.
	Bip (Pi Pi...) (gentagne gange)	En høj belastning påføres motoren i en vis periode.	Motorens output er begrænset.	Kør ikke kontinuerligt under høj belastning. Advarselsvisningen vil blive fjernet, når belastningen er reduceret.
	Biplyd (Pi -) (2,5 sekunder)	Overdreven belastning påføres motoren.	Kørestolen stopper.	Kør ikke kontinuerligt under høj belastning. Genstart.
	Biplyd (Pi -)	W3 opstår gentagne gange.	Kørestolen stopper.	Advarselsvisningen vil blive fjernet, når du slukker for strømmen og derefter tænder den igen.
				
	Bip (Pi - Pi -_Pi - Pi -...) (gentaget indtil advarslen forsvinder)	Den regenerative strømstyrke overstiger en grænseværdi.	Begræns hastigheden.	Reducer belastningen ved at undgå nedkørsel af stejle hældninger og transport af tunge belastninger.

LCD-indikation	Summer	Viste tilstand	Problem	Hvad skal du gøre / Forklaring
	Bip (Pi -Pi -...) (gentaget indtil advarslen forsvinder)	Den interne batteri temperatur overstiger det normale område.	Hastigheden er begrænset til 1 km/t.	Brug kørestolen i et miljø med en passende omgivende temperatur. ► P.92
	Biplyd (Pi -) (hver 15. sekund indtil det forsvinder 5 gange)	Forsigtighed ved resterende batterikapacitet.	Kørestolen kan køres som den er.	Oplad eller udskift batteriet straks.
 Styreenhedslås  App-lås		Tyverisikringen er aktiveret.	Kørestolen fungerer ikke.	Deaktiver anti-tyveri funktionen. ► P.39
	Biplyd (Pi -) (2,5 sekunder)	Der er et problem med de elektroniske komponenter.		Kontakt din forhandler.
	Biplyd (Pi -) (2,5 sekunder)	Grip-type nødsituation stopfunktionen er aktiveret.	Kørestolen stopper.	Grip-type nødsituation stopfunktionen blev aktiveret. Fjern dine hænder fra hjælperens styrehåndtag.
		Dårlig kommunikation med batteriet.		Fjern batteriet fra batterisædet og rengør batterisædet og kontakterne. Hvis problemet ikke er løst, kan der være opstået en fejl. Kontakt din forhandler.

Ved kørsel

Problem	Kontrollér punkt	Hvad skal du gøre / Forklaring
Ingen respons på joystickdrift, ingen strøm	Er batteriet isat korrekt?	Isæt batteriet korrekt igen.
	Er strømmen blevet slukket af auto-sluk funktionen?	Sluk for strømmen og tænd igen.
	Er strømmen til hjælperens styreenhed tændt?	Sluk for strømmen til hjælper styreenheden.
Langsom hastighed, utilstrækkelig kraft	Er hastigheden sat til langsom ved brug af hastighedsvælgerknappen?	Indstil hastigheden til høj.
	Er parkeringsbremsene stadig aktiveret?	Frakobl parkeringsbremsene.
	Er batteriet koldt?	Brug i et miljø med passende omgivende temperatur. Ved brug af et lithium-ion batteri ► P.92
	Er nogen indstillinger ændret for hastighed eller acceleration?	Kontakt din forhandler.
Kort rækkevidde	Er batteriet tilstrækkeligt opladet?	Oplad eller udskift batteriet. ► P.95
	Er batteriet forringet?	Udskift batteriet.
	Kører du ofte op ad bakke eller bærer en tung belastning?	Reducer belastningen ved at undgå opkørsel og transport af tunge belastninger.
	Er dæktrykket lavt?	Sørg for at lufttrykket i dækkene er korrekt. Ved brug af 24-tommer dæk ► P.51 Ved brug af 16-tommer dæk ► P.52
Rejse i manuel kørsel position er vanskelig	Er dæktrykket lavt?	Sørg for at lufttrykket i dækkene er korrekt. Ved brug af 24-tommer dæk ► P.51 Ved brug af 16-tommer dæk ► P.52
	Er parkeringsbremsene stadig aktiveret?	Frakobl parkeringsbremsene.
Ingen driftslyd fra styreenheden	Er enheden sat på lydløs?	Deaktiver lydløs indstillingerne. ► P.38
Unormal vibration eller støj	Føles akselmonteringsdelen af kørestolen løs?	Kontakt din forhandler.
	Er kørestolens stel eller hjul løs?	Kontakt din forhandler.
	Er der unormal støj fra kør enheden?	Kontakt din forhandler.

Ved brug af hjælper styreenhed

Problem	Kontrollér punkt	Hvad skal du gøre / Forklaring
Gashåndtaget reagerer ikke	Er strømmen blevet slukket af auto-sluk funktionen?	Sluk for strømmen og tænd igen.
	Er strømmen til styreenheden tændt?	Sluk for strømmen til styreenheden.

Problem	Kontrollér punkt	Hvad skal du gøre / Forklaring
Bremserne fungerer ikke effektivt	Er der for meget slør i bremsehåndtaget?	Kontakt din forhandler.
	Fungerer venstre og højre bremser ujævnt?	Kontakt din forhandler.
Der er en lyd ved bremsning	Har bremserne været aktiveret i lang tid?	Bremserne kan lave en lyd afhængigt af, hvordan de bruges. Kontakt din forhandler, hvis den laver en frygtelig lyd.
		Indersiden af bremsemekanismen kan være slidt eller beskadiget. Kontakt din forhandler.

Forespørgsel og garanti

🔊 Forespørgsel og serienummerplacering

For forespørgsler om inspektion, reparation og servicebehov af din E-Drive NXT, kontakt den forhandler, hvor du har købt produktet.

Når du kontakter, kan du blive bedt om serienummeret på din E-Drive NXT. Serienummeret er mærket på bagsiden

Under opladning

Problem	Oplader LED	Batteri LED	Kontrollér punkt	Hvad skal du gøre / Forklaring
Oplader ikke	Fra	Fra	Er strømkablet og opladningsstikket tilsluttet?	Tilslut dem.
	Fra	Fra	Kan du oplade et andet batteri?	Hvis opladeren kan oplade batteriet, er opladeren normal. Hvis opladeren ikke kan oplade batteriet, kan opladeren være defekt. Ved fejl, kontakt din forhandler.
	Blinkende gul (én gang pr. sekund)	Fra		Fordi opladeren har været i standby tilstand i lang tid, er den stoppet med at oplade batteriet. Vent på, at batteriets temperatur falder, og prøv at oplade batteriet igen.
	Blinkende rød (én gang pr. sekund)	Fra	Kan du oplade et andet batteri?	Indikerer en kommunikationsfejl mellem opladeren og batteriet. Kontrollér opladerens og batteriets terminaler, rengør dem med en tør klud eller lignende, og oplad derefter igen. Hvis opladelampen blinker rødt igen, kan der være opstået en udstyrsfejl. Tag strømkablet ud for at stoppe opladning og kontakt din forhandler.
	Tændt rød	Fra		Opladeren kan være defekt. Tag strømkablet ud for at stoppe opladning af batteriet, og kontakt din forhandler.
	Lyst gul	Fra		Batteriet kan være defekt eller har nået slutningen af dets levetid. Tag strømledningen ud for at stoppe opladning af batteriet, og kontakt forhandleren eller din forhandler.

Problem	Oplader LED	Batteri LED	Kontrollér punkt	Hvad skal du gøre / Forklaring
Langvarig standby-tilstand	Blinkende grøn (én gang pr. sekund)	Alle de resterende kapacitets-indikator-lamper blinker	Er batteri temperaturen passende?	Dette indikerer ikke en fejl. Vent, indtil batteriet når en passende temperatur.
Stopper opladning halvvejs	Blinkende gul (én gang pr. sekund)	1 og 3 ↕ 2 og 4 tænder skiftevis	Er omgivelses-temperaturen passende?	Når batteriet er kølet ned, prøv at oplade det igen i et miljø med passende temperatur.
Opladeren udsender en lugt	Lampeskærmen varierer afhængigt af forholdene	Den resterende kapacitets-indikator-lampe er tændt		Opladeren kan afgive en lugt umiddelbart efter den tages i brug, men lugten vil forsvinde med tiden. Hvis du føler, at lugten fortsætter, kan opladeren være defekt. Kontakt din forhandler.

Ofte stillede spørgsmål

Batteri

Q Kan jeg opbevare batteriet uden at bruge det?

A Batterier er forbrugsvarer. Selv hvis batteriet ikke bruges og opbevares over længere tid, vil det forringes og dets kapacitet vil falde. Hvis du har flere batterier, så skift mellem batterierne.

Q Tager det lang tid at oplade batteriet?

A Når du oplader et nyt batteri et varmt sted eller umiddelbart efter rejse, vil det sandsynligvis forårsage en temperaturstigning. For at forhindre skader på batteriet fra høje temperaturer, kan opladningstiden blive forlænget, eller opladningen kan stoppe før batteriet er fuldt opladet. Sørg for, at batteriet er kølet ned, og prøv derefter at oplade det igen.

Q Selv efter opladning er afsluttet, er de fire kapacitetsindikatorlamper ikke tændt.

A Opladning kan være stoppet på grund af en stigning i batteriets temperatur. Dette sker, når der oplades i et miljø med høj temperatur eller når et nyt batteri oplades. Fjern batteriet fra opladeren og prøv derefter at oplade det igen.

Q Hvornår skal jeg skifte batteri?

A Batteriets levetid varierer afhængigt af brug og opbevaringsforhold, rejseforhold, temperatur og opladningsmetode. Batterier er forbrugsvarer. Hvis den distance, du kan rejse på en enkelt opladning, bliver væsentligt kortere, bør du overveje at udskifte batteriet med et nyt. Levetiden for Li-ion batteriet er 8 år fra den første opladning, 7.200 Ah samlet opladningskapacitet eller hvis batteriets forringelsesniveau falder under 25%.

Kapacitetsindikatorlamperne begynder at advare dig tre måneder før batteriet ikke længere kan oplades på grund af slutningen af dets levetid, når den samlede opladningskapacitet når 6.900 Ah eller batteriets forringelsesniveau falder 50%. Udskift batteriet straks.

Ombordstigning på et fly og brug af kørestol i udlandet

Q Flyselskabet har bedt mig om at indsende flydokumenter.

A Du kan downloade flydokumenterne online.
Besøg vores hjemmeside www.decon.se/en.

Q Kan jeg oplade batteriet i udlandet? Skal jeg bruge en konverter?

A Opladeren er kompatibel med 100-240 V AC, 50/60 Hz.
Hvis du har en strømstik-konverteringsadapter, behøver du ikke en konverter.

Kontakt med vand

Q Kan jeg gå ud, når det regner?

A Selv hvis batteriet eller motorenheden bliver våd af let regn, vil det ikke tage skade.
Efter brug, tør al fugt af og lad det tørre. Dog kan det være farligt at gå ud i regnvejr på grund af glatte dæk og dårlig sigtbarhed. Undgå at gå ud, hvis det er muligt, og hvis det er uundgåeligt, køр forsigtigt.

Q Hvad hvis der kommer vand ind i batteriet eller motorenheden?

A Hvis der kommer vand ind i batteriet, opladeren eller strømenheden på den elektriske motorenhed, skal du stoppe med at bruge kørestolen og kontakte din forhandler straks.
Selv hvis kørestolen virker efter at være blevet våd, kan det forårsage fejl senere.


Bortskaffelse af kørestole og batterier

• Bortskaffelse af kørestolen

Når E-Drive NXT er ved slutningen af sin levetid og skal bortskaffes, kontakt først din lokale myndighed for genbrug og følg deres instruktioner. Eller kontakt din forhandler for at genbruge din brugte E-Drive NXT og dets batterier.

• Genbrug af batteriet

Batteriet til E-Drive NXT er et genanvendeligt batteri, der indeholder værdifulde ressourcer. Kontakt forhandleren for at genbruge dine brugte batterier.

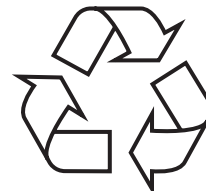

• Om det europæiske WEEE-direktiv 2012/19/EU




E-Drive NXT og dets tilbehør er omfattet af det europæiske WEEE-direktiv. Følg de gældende regler i dit land eller din region, når du bortskaffer denne enhed eller dets tilbehør.

(WEEE står for Waste Electrical and Electronic Equipment – affald af elektrisk og elektronisk udstyr.)



af hjulet. Vi anbefaler, at du skriver nummeret ned på forhånd.

Garanti

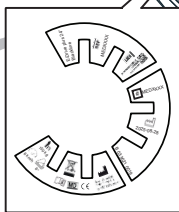

for E-Drive NXT er 2 år fra købsdatoen.

I denne periode vil defekte dele blive udskiftet eller repareret uden beregning, hvis der er en fabrikationsfejl i den E-Drive NXT, du har købt. Garantien dækker kraftenheden, elperstyreenheden og opladeren. Forbrugsdele, såsom batteri, dæk og slanger, er

uændret af denne garanti.

Denne garanti dækker ikke funktionsfejl som følge af brugerens forsætlige misbrug eller uagtsom brug, såsom fejl forårsaget af brug, der ikke er angivet i denne brugervejledning. Denne garanti dækker heller ikke funktionsfejl som følge af ændringer af enheden eller vedvarende brug under andre forhold end de specificerede, såsom overskridelse af den maksimale belastning mv., uanset årsagen til fejlen.

Ridser, mathed og snavs på produktets overflade som følge af normalt brug er ikke omfattet af garantien. Hvis garantireparationer er nødvendige, kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.

Produktsikkerhed og information om produkt tilbagekaldelse

Decon fører register over anvendte komponenter og tildelte serienumre. I sjældne tilfælde af sikkerhedsmeddelelse og/eller produktindkaldelse kan Decon kontakte den nationale distributør eller den endelige forhandler. De vil derefter kunne kontakte og informere slutbrugeren om eventuelle foranstaltninger, der skal træffes.

Alvorlige hændelser med E-Drive NXT skal rapporteres til Decon og den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor brugeren/patienten er etableret.

10 Anbefalet periodisk inspektion

Den standardmæssige levetid for E-Drive NXT enhed er seks år (eksklusive forbrugsvarer såsom dæk og batterier).

Den standardmæssige levetid er den periode, hvor produktets ydeevne forventes at blive opretholdt, hvis periodisk inspektion og vedligeholdelse udføres.

Dog kan el-kraftenheden blive ubrugelig før de seks år er gået, afhængigt af brug og rejserækkevidde.

Vi anbefaler at udskifte E-Drive NXT enhed, der har overskredet den standardmæssige levetid.

For at sikre sikker og komfortabel brug af kørestolen, skal du lade din forhandler kontrollere den hver 6. måned. (Inspektion er mod betaling)



ADVARSEL

- **Brug ikke kørestolen, hvis du bemærker nogen unormale forhold.**

Fortsat brug under sådanne forhold kan forårsage, at kørestolen bryder sammen under kørsel, hvilket kan resultere i, at du mister balancen og tipper.

- **Dæk er forbrugsvarer.**

Hvis rillerne er slidte eller revnede, skal de udskiftes straks.

TIP

Ovenstående information gælder for motorenheden.
For inspektion af en kørestol udstyret med dette produkt, kontakt den forhandler, hvor du har købt produktet.

Daglige kontrolpunkter

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Udvendigt | Kontrollér visuelt komponenterne, herunder oplader og strømkabel, og sikre, at de ikke er beskadigede. |
| 2. Anti-tip enhed | Sørg for, at anti-tip enheden er i den korrekte position og låst på plads. |
| 3. Bagdæk | Sørg for, at der er dækmønster, ingen revner, og at der er tilstrækkeligt lufttryk. Hvis trykket ikke er tilstrækkeligt, pump E-Drive NXT op i henhold til "8 Dimensioner og Specifikationer". |
| 4. Parkeringsbremser | Sikre, at parkeringsbremserne kan stoppe hjulene fra at bevæge sig, og at de er monteret sikkert på stellet. |
| 5. Hjul | Sikre, at hjulene ikke er deformerede, og at egerne ikke er knækkede. |
| 6. Forhjul | Sikre, at der er dækmønster, og at der ikke er revner.
Sikre, at forgaffelholderne ikke er beskadigede.
Sørg for, at møtrikkerne, der fastgør dækkene, ikke er løse. |
| 7. Batteri | Kontrollér den resterende kapacitet. |

Decon Wheel AB
Södra Ekeryd 119, SE-314 91 Hyltebruk
Tlf.: +46 (0)345 40880
Fax: +46 (0)345 40895
E-mail: info@decon.dk

