


Monteringsanvisning E-Walk på Meyra Eurochair Vario typ 1,750, Eurochair Basic Model 1.751 MCG1170

1. Demontera hjulen på båda sidor.

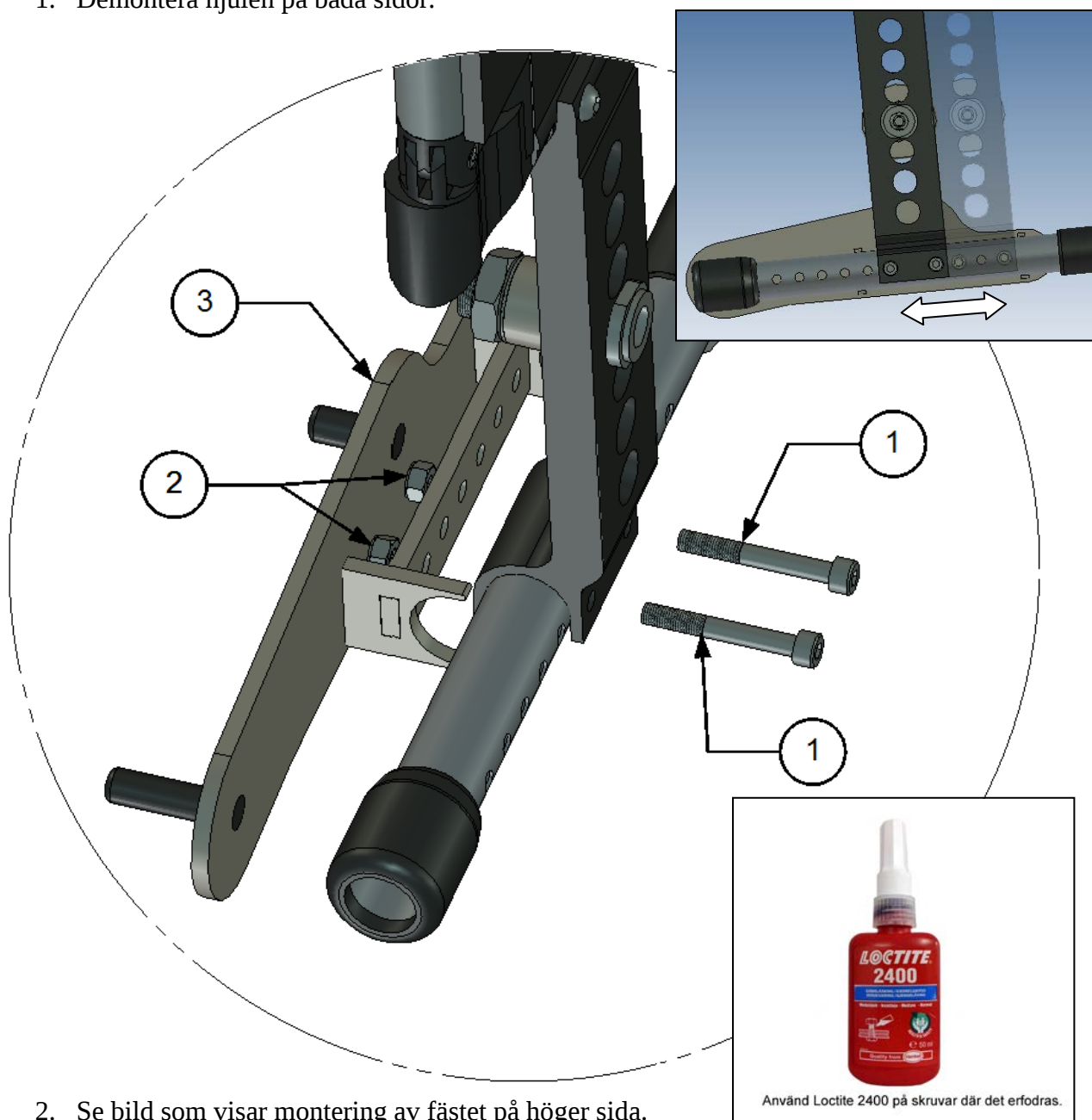


2. Se bild som visar montering av fästet på höger sida.
För montering skall följande ingå per sida.

Placering	Detalj nummer	Antal	Beskrivning
1	MC6SM6X45	2	Skruv - M6 x 45
2	XSM6ML	2	Låsmutter - M6
3	MCG1170R	1	Fäste Högersida


R= Höger och L=Vänster (MCG1170L)

Center placerad styrkontroll



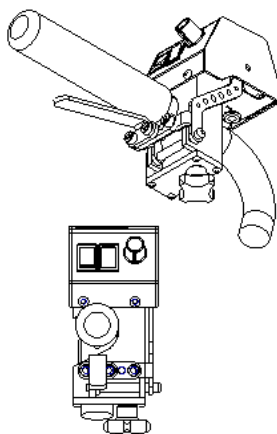


När det ej är monterat broms på körhandtaget, bör denna placering användas.

Sidoplacerad styrkontroll

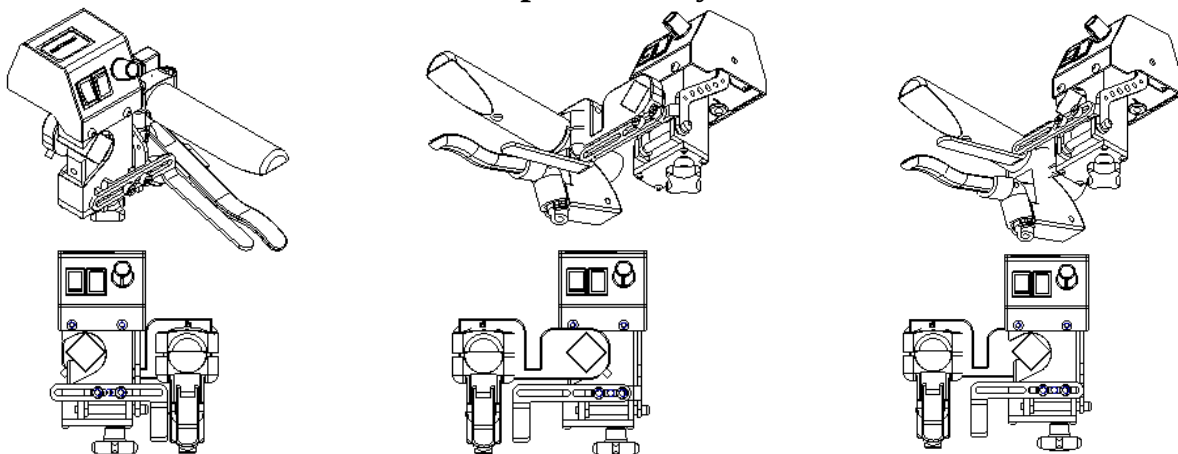

När det är monterat broms på körhandtaget användes sidoplacerad styrkontroll. Det finns olika monteringsalternativ, samt justerings möjligheter.

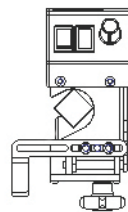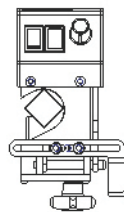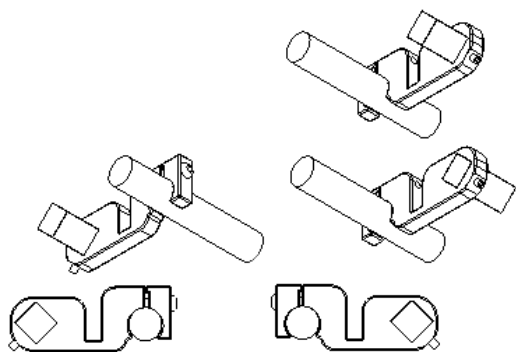

OBS! Använd Loctite på alla skruvar vid montering och justering.

Använd Loctite 2400 på alla skruvar

VARNING!

När man monterar styrkontrollen så skall man alltid kontrollera att styrkontrollens gashandtag eller dess övriga leder inte tar i eller ligger emot någonstans. Om reglage tar i eller ligger emot så kan detta leda till att gasen hänger sig och en olycka kan inträffa.

3. Montera nu Styrkontrollen på valfri plats.