


Monteringsanvisning E-Walk på Start M5 Comfort

MCG1184

1. Demontera hjulen på båda sidorna.
2. Demontera original skruvarna med placering Nr: 1 på bild nedan.

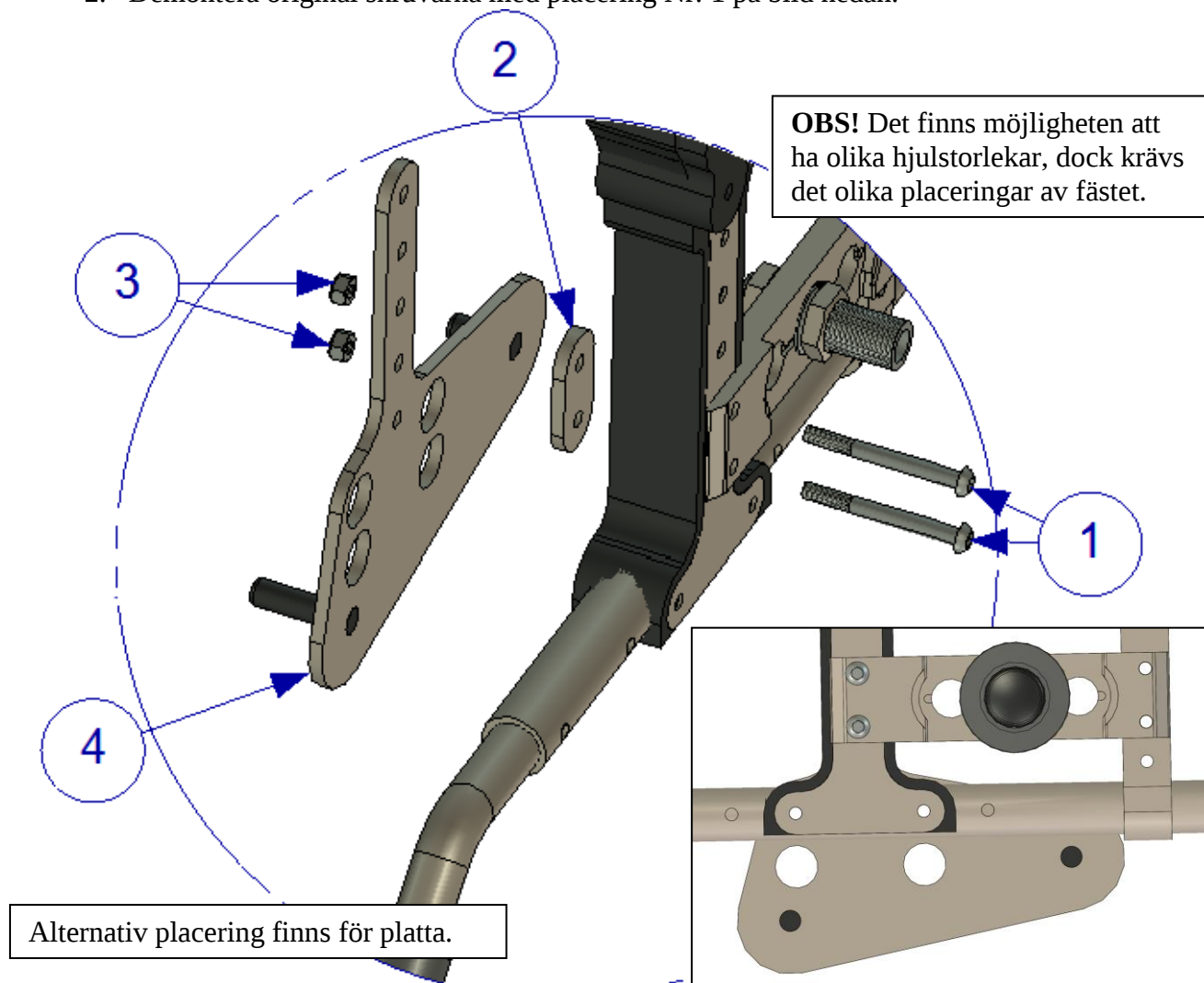


3. Montera nu fästet (Se bilder ovan) som visar montering av fästet på vänster sida. För montering på en sida, så skall följande ingå.

Placering	Detalj Nummer	Antal	Beskrivning
1	XSM6X60	2	Skruv Rundad - M6 x 60
2	MCG1184-02	1	Distans platta
3	XSM6ML	2	Låsmutter - M6
4	MCG1184R	1	Höger Fäste


OBS! (L = Vänster fäste, R = Höger fäste)

4. Montera nu fästet på andra sidan.

Inställningar för rullstolen

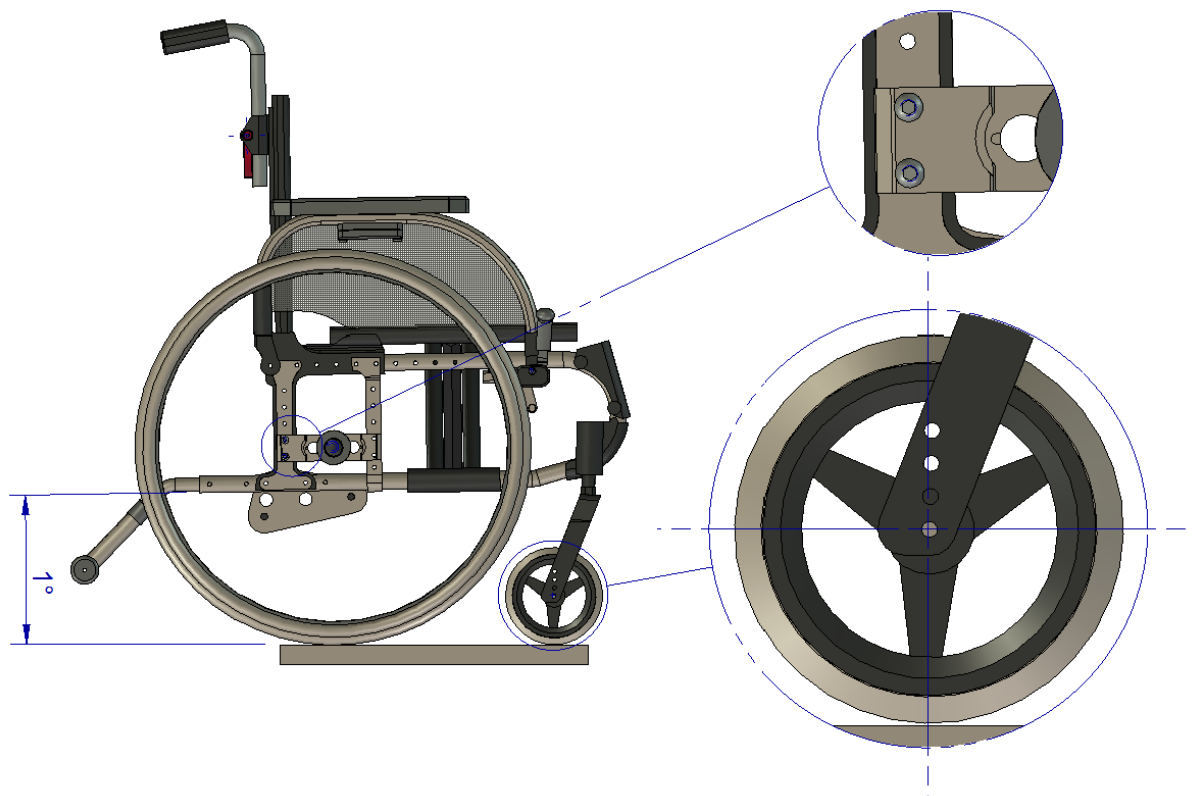


5. Exempel på hjul placering, samt vinkel på rullstol för montering med 24" hjul.

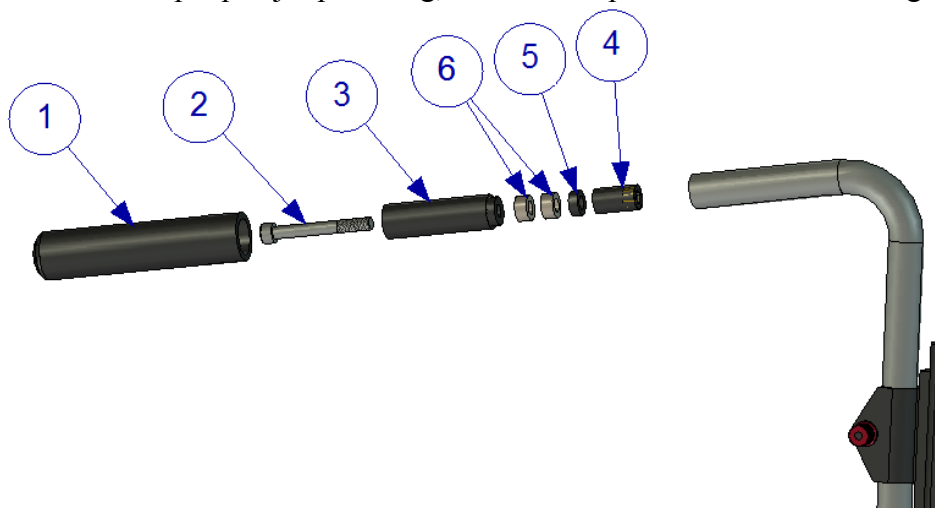

6. Montera förlängnings handtag på båda handtagen.








Placering	Detalj Nummer	Antal	Beskrivning
1	380105	1	Gummi handtag
2	XSM8X65	1	Skruv M8 x 65
3	380107	1	Handtags förlängare
4	922770	1	Rawl plugg
5	100 400 002	1	Distans
6	100 400 003	2	Distans

Center placerad styrkontroll






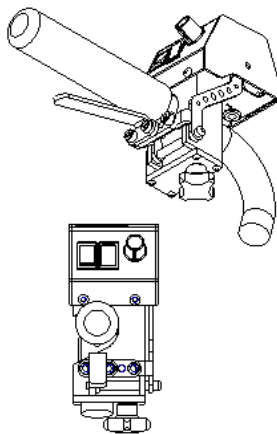


När det ej är monterat broms på körhandtaget, bör denna placering användas.

Sidoplacerad styrkontroll

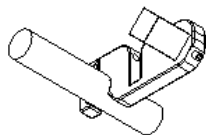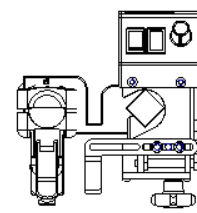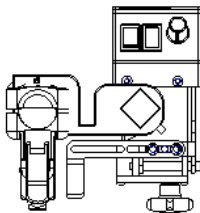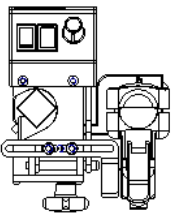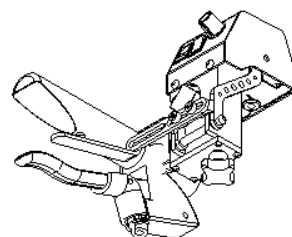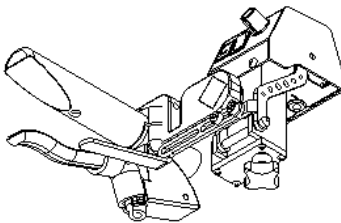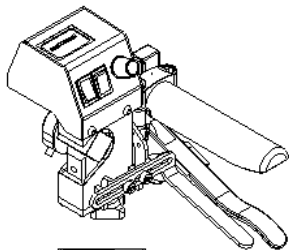

När det är monterat broms på körhandtaget användes sidoplacerad styrkontroll. Det finns olika monteringsalternativ, samt justerings möjligheter.

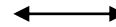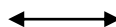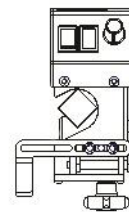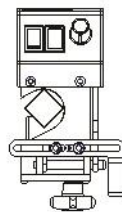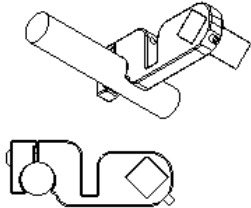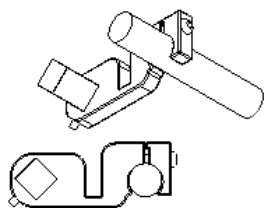

OBS! Använd Loctite på alla skruvar vid montering och justering.

Använd Loctite 2400 på alla skruvar

VARNING!

När man monterar styrkontrollen så skall man alltid kontrollera att styrkontrollens gashandtag eller dess övriga leder inte tar i eller ligger emot någonstans. Om reglage tar i eller ligger emot så kan detta leda till att gasen hänger sig och en olycka kan inträffa.

7. Montera nu Styrkontrollen på valfri plats.