

Yomper +
Monteringsanvisning Fastramstolar
Panthera YOM3001
v1.0 - 18/03/2022



Detta Yomper-monteringsfäste kan monteras på en fastramsrullstol om:

- Axelbalkensdiametern är 15 till 40 mm
- Stångens diameter under sätet är 12 till 60 mm
- Avståndet mellan axelbalken och stangen under sätet är 130 till 270 mm.



1. Skruva loss skruvarna och muttrarna A för att ta bort del B i "Momentåtervinning"




2. Sätt de två klämmorna på axelbalken med hjälp av klämskruvarna (fig. 2).




På Panthera rullstolar är bakaxeln gjord med kolfiber.

För att inte skada kolfiberaxeln måste plastklämmor (YOM3107) i rött nedan läggas till

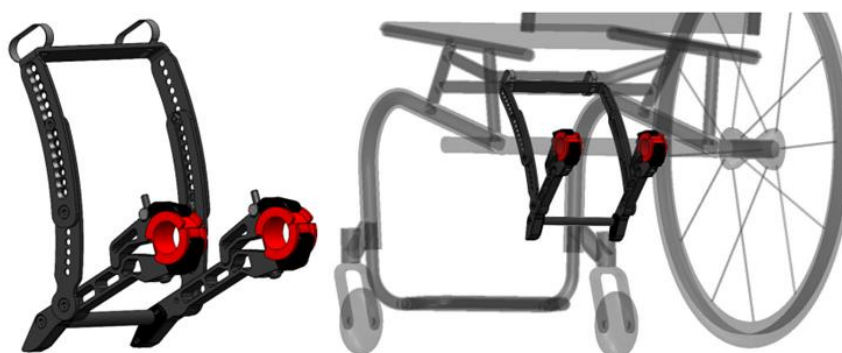


3. Se till att placera monteringsfästet symmetriskt under rullstolen.

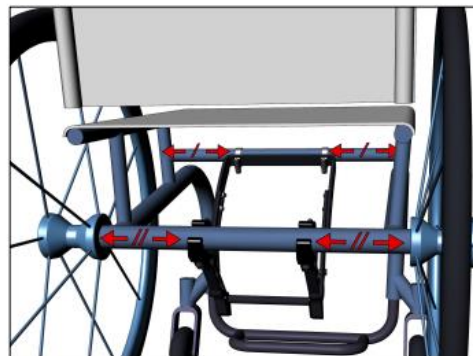


4. Använd Yomper mätverktyget (190mm) för att underlätta höjjusteringen. Placera verktyget på adapteraxeln




5. Ställ höjden på Yomper-adapteraxeln till 190 mm till 210 mm från marken och dra åt klämmorna för att bibehålla denna inställning.

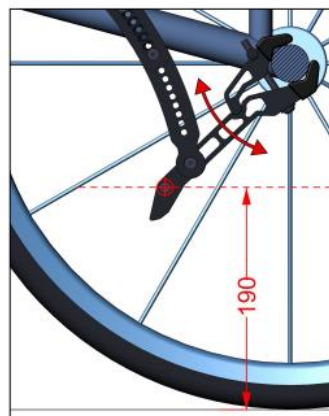

6. Placera del B (fig. 1) i "Momentåtervinning" på sätesstången med hjälp av klämmorna.

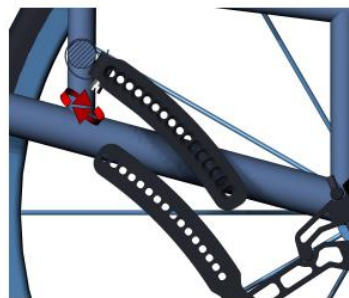


7. Dra åt de fyra skruvarna A (fig. 1) i ändarna på de två delarna av "Momentåtervinning".

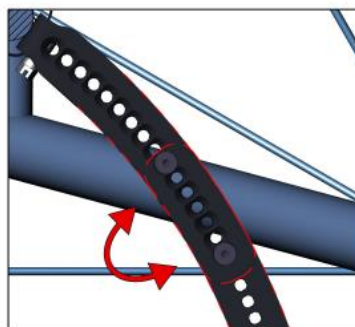

8. Kontrollera före slutlig åtdragning:

- fixeringssystemets symmetri,
- axelns höjd (190 mm) och korrigera vid behov.



Dra åt slut skruvarna: N ° 1, sedan N ° 2, sedan N ° 3 och slutligen N ° 4

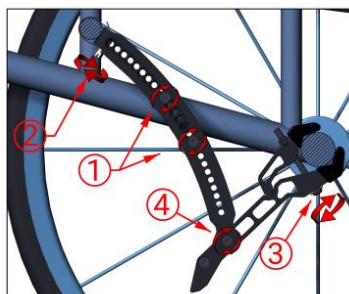


På rullstolar där avståndet mellan stängerna (bakaxel och framrör) är kortare, så att inte min-måttet på 190 mm (5.) inte kan uppnås vid fixering av monteringsfästet; ta bort nedre delen av standarddelarna, och använd distans brickorna (YOM3108), i rött nedan) :



Innan användning

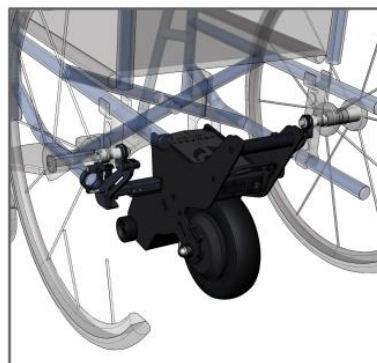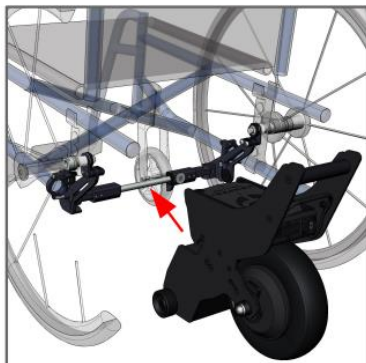

Kontrollera med Yomper påmonterad, att adaptern är ordentligt fastsatt och att stödet är styvt.

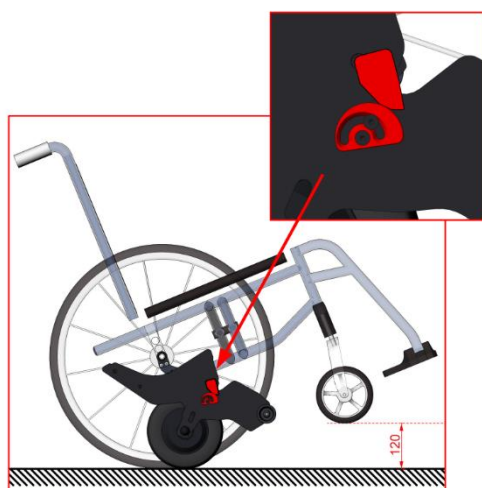

Innan du använder Yomper

Kontrollera justeringen av Yomper- stop pinnen.

Stoppet förhindrar att Yomper tippas rullstolen bakåt.

Yomperns stoppinne och monteringsfästet måste komma i kontakt med varandra när stolens framhjul är upplyfta 120 mm.